



СТОМАРТ
DENTAL SOLUTIONS





Пособие по применению ультразвуковых насадок



Содержание






Удаление зубного камня

Насадка Страница

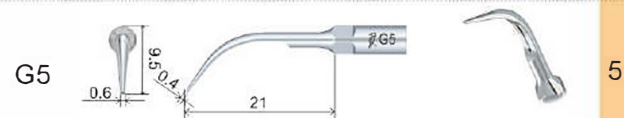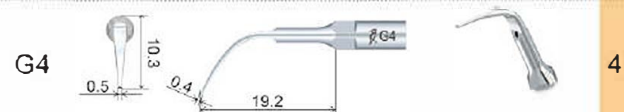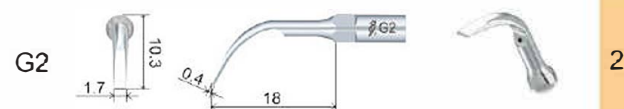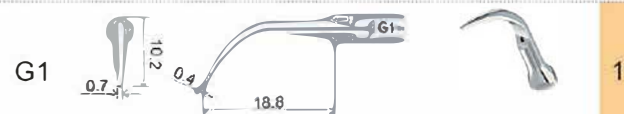

Единица измерения: mm

Насадка Страница

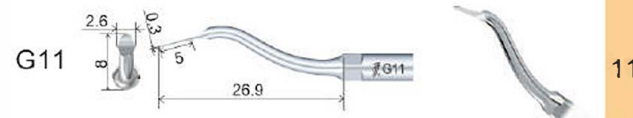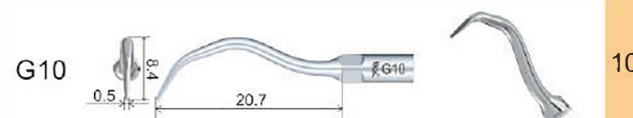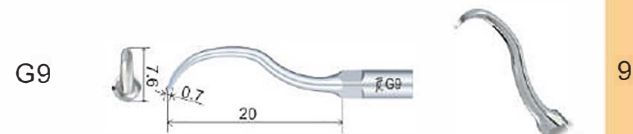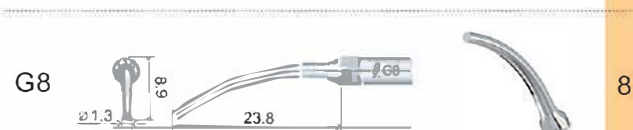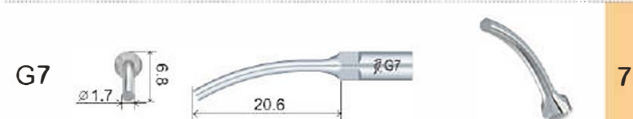

Периодонтит

Насадка

Страница

P 1		12
P2L		13
P2LD		14
P2R		15
P2RD		16
P 3		17

Единица измерения: mm

Насадка



Страница

P 3D		18
P4		19
P6		20
P10		21

Эндодонтия

Насадка



Страница

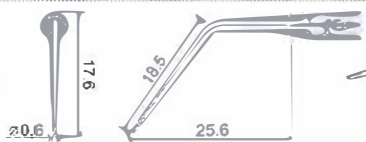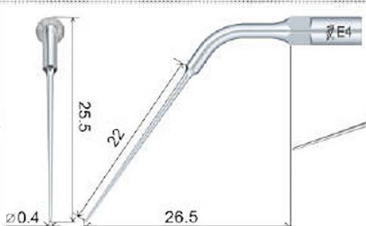E 1			22
E 2			23
E 3			24
E 3D			25
E 4			26

Единица измерения: mm

Насадка





Страница

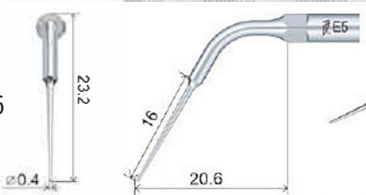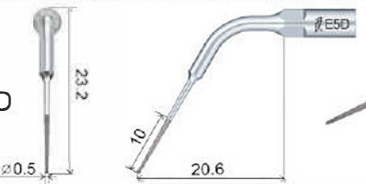E 4D			27
E 5			28
E 5D			29
P 4D			30

Эндодонтия

Насадка



Страница

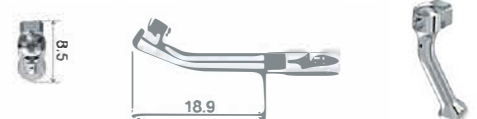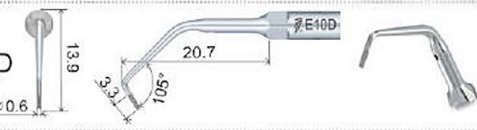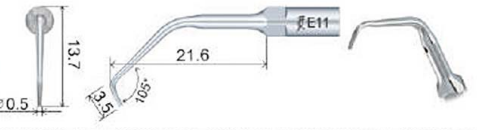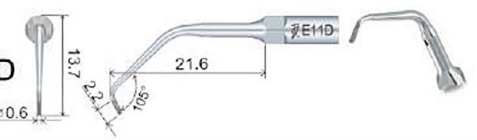E8		31
E9		32
E10		33
E10D		34
E11		35
E11D		36

Единица измерения: мм

Насадка




Страница

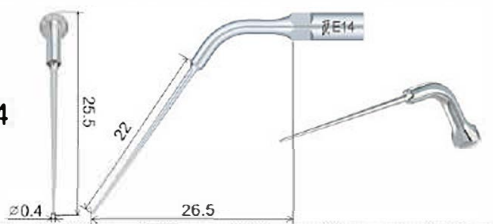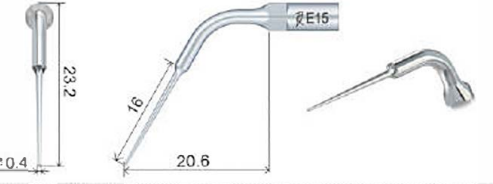E14		37
E14D		38
E15		39
E15D		40

Препарирование кариозной полости

Насадка

Страница


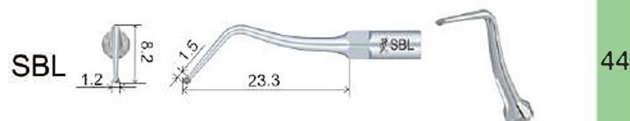
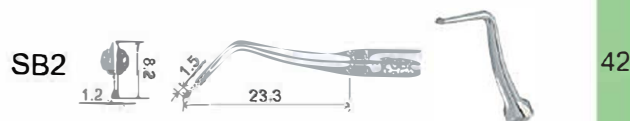
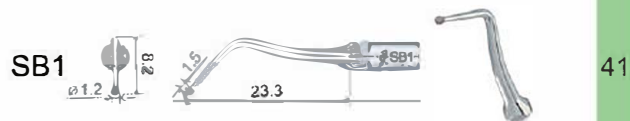


Удаление зубного камня

Единица измерения: mm

Насадка


Страница

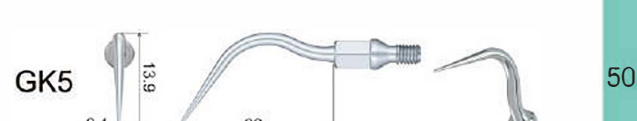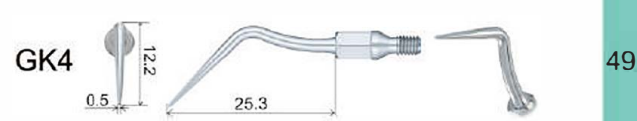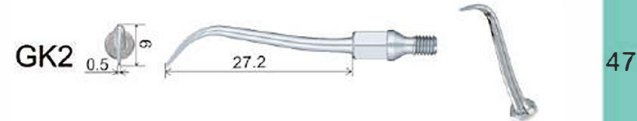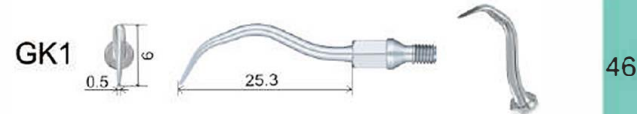

Удаление зубного камня

Насадка


Страница

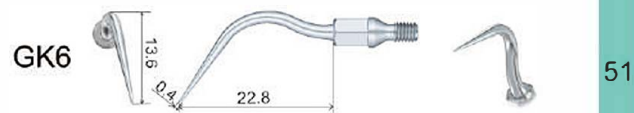

51



52

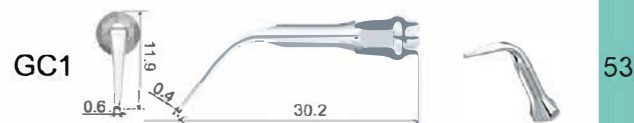


53



54

Периодонтит

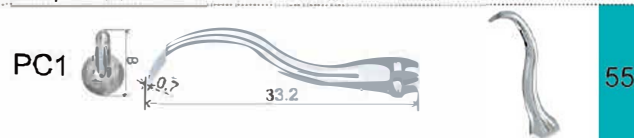


55


Единица измерения: мм

Насадка

Страница

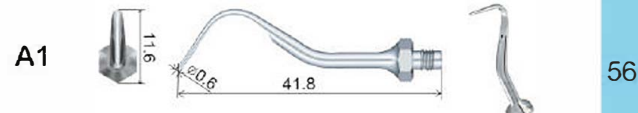


56

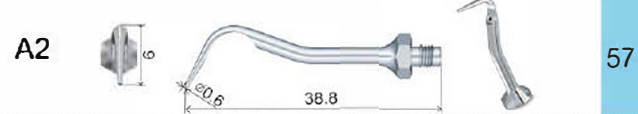

57


Костная хирургия

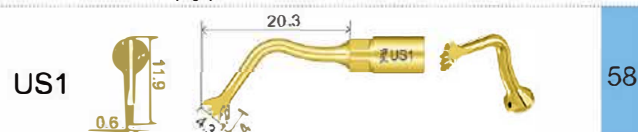

58



59

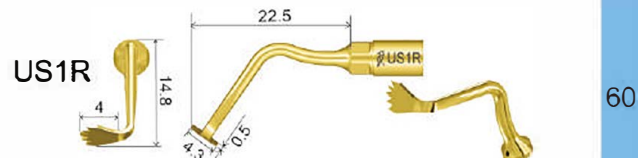


60


Костная хирургия

Насадка


Страница

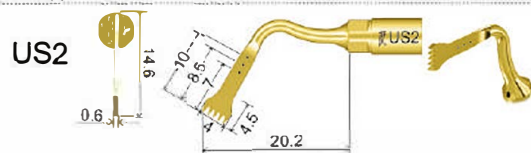


61

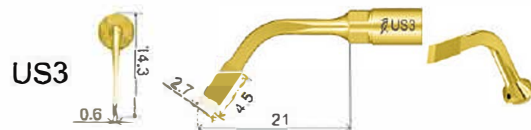


62

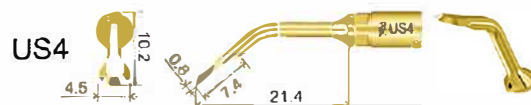

63

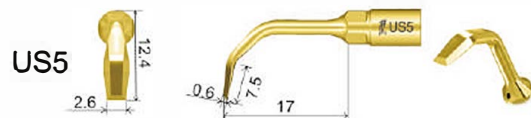

64

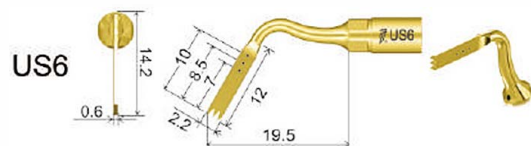


65

Синус-лифтинг

Насадка

Единица измерения: mm


Страница

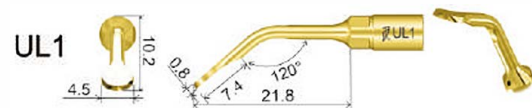


66




67

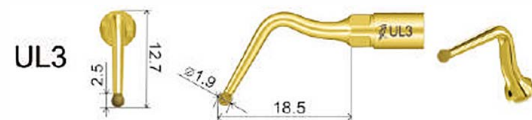

68

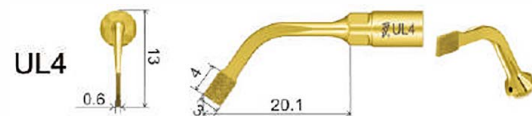

69

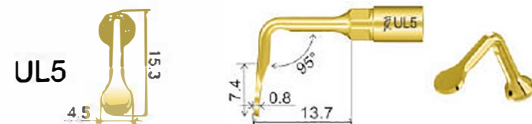


70

Эндодонтия

Насадка

Страница

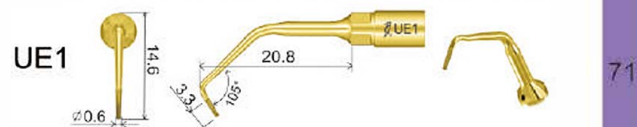


71



72



73

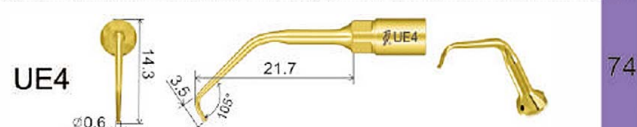

74

Эксельцимоз




75

Имплантация

Насадка

Единица измерения: мм


Страница

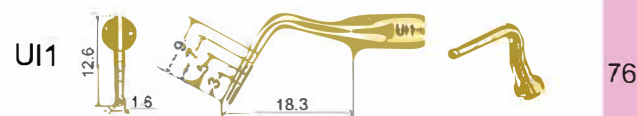


76



77

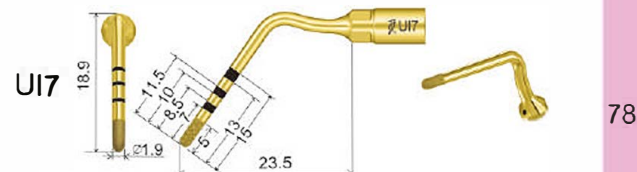

78

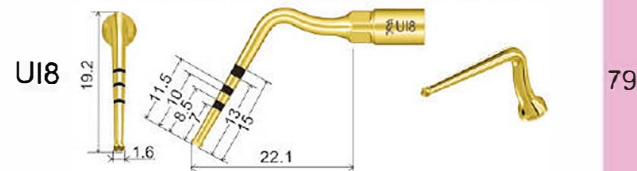

79



80


Периодонтальная хирургия

Насадка

Страница



81

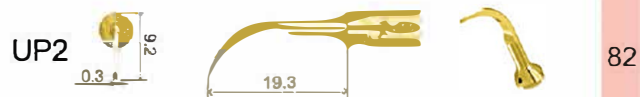


82



83



84

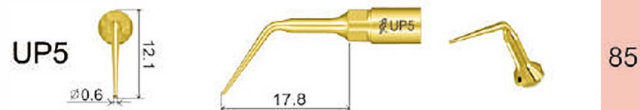


85

Единица измерения: mm

Насадка

Страница

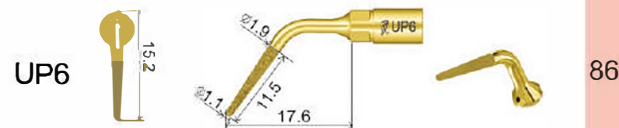




86





87

G1 (GD1/GS1)

Удаление наддесневых зубных отложений во всех квадрантах.

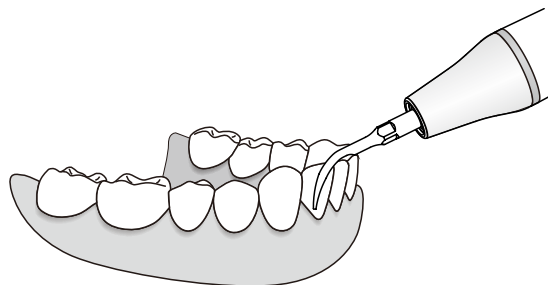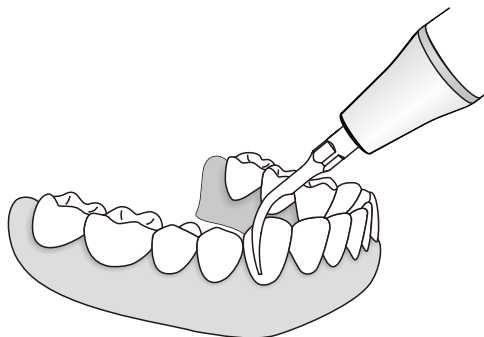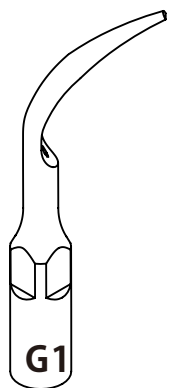




РЕЖИМ: G
МОЩНОСТЬ

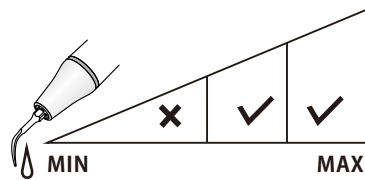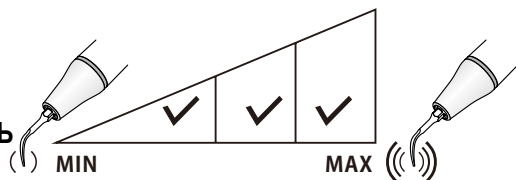



ИРРИГАЦИЯ

G2(GD2/GS2)

Удаление твердых зубных отложений.
Обрабатывайте поверхность зуба плоским концом.

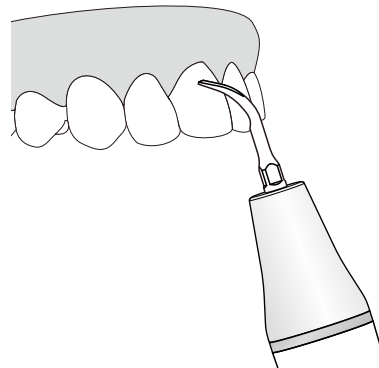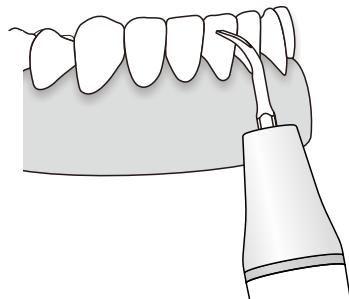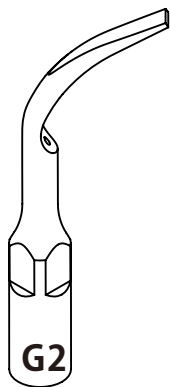




РЕЖИМ: G
МОЩНОСТЬ

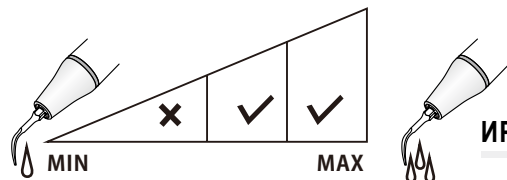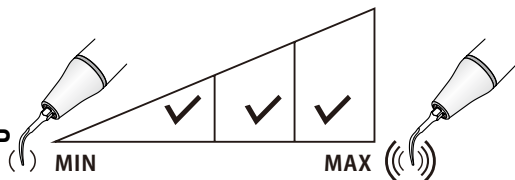



ИРРИГАЦИЯ

G3(GD3/GS3)

Удаление наддесневого налета во всех квадрантах, включая межзубные промежутки и десневые бороздки.

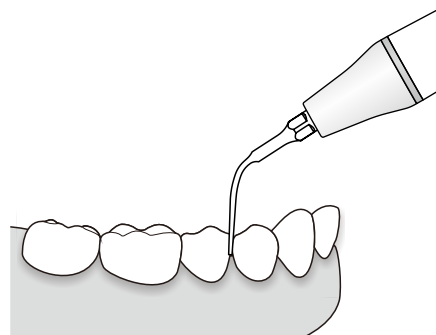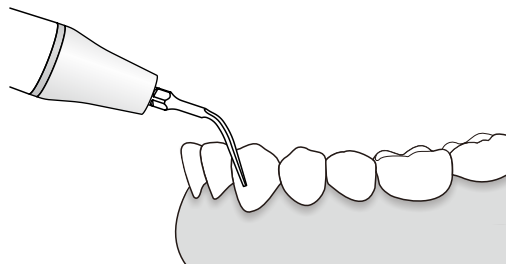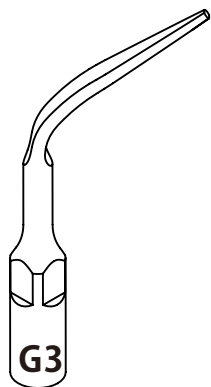




РЕЖИМ: G
МОЩНОСТЬ

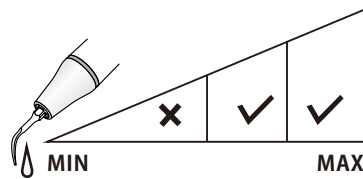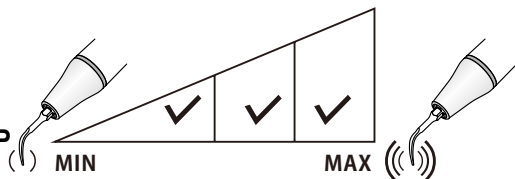

ИРРИГАЦИЯ



G4(GD4/GS4)

Рекомендуется для обработки межзубных промежутков и для удаления наддесневого налета или камня.

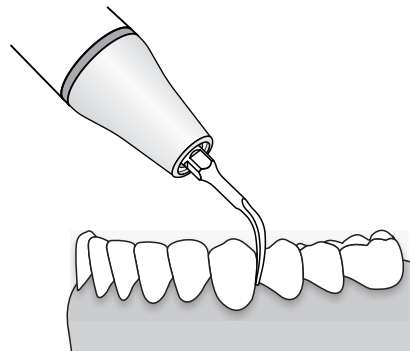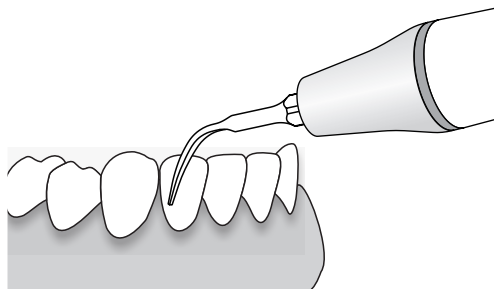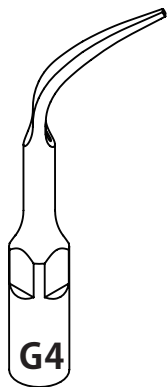

РЕЖИМ: G




МОЩНОСТЬ

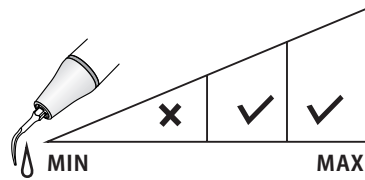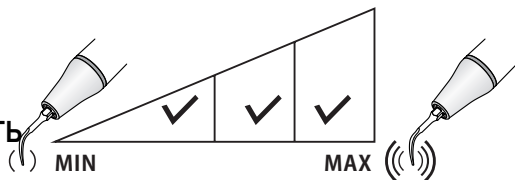



ИРРИГАЦИЯ

G5(GD5/GS5)

Рекомендуется для пигментированного налета и зубного камня.

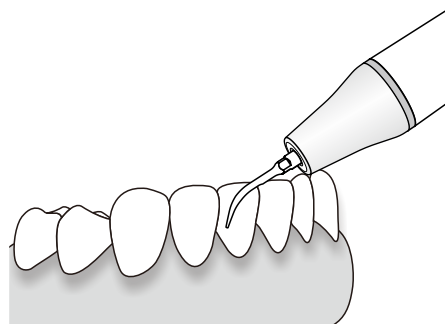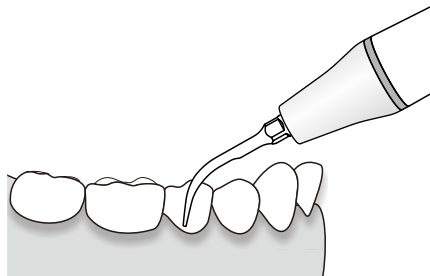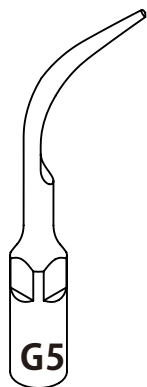

РЕЖИМ: G
МОЩНОСТЬ


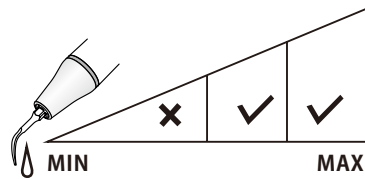
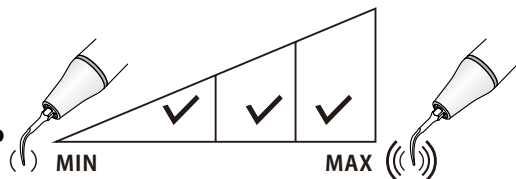


ИРРИГАЦИЯ





G6(GD6/GS6)

Рекомендуется для удаления большого количества зубных отложений.
Обрабатывайте поверхность зуба плоским концом.

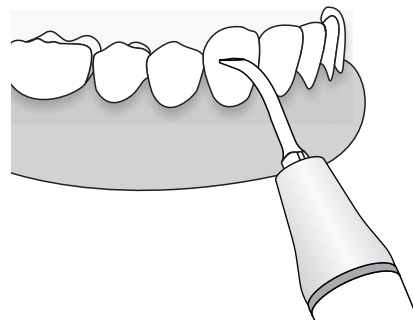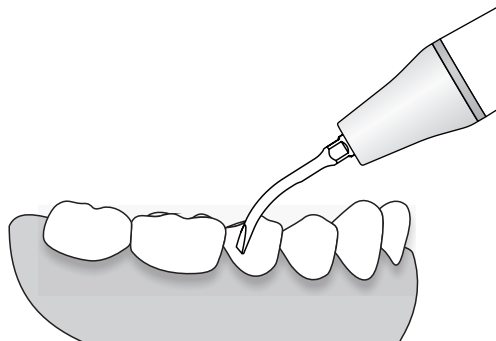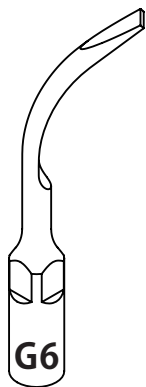

РЕЖИМ: G
МОЩНОСТЬ

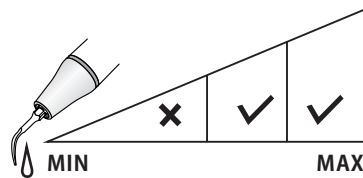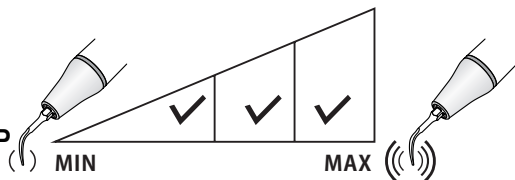



ИРРИГАЦИЯ





G7(GD7/GS7)

Удаление коронок.

Приложите инструмент к поверхности коронки и включите подачу питания. Усиьте давление до тех пор, пока не исчезнет звук вибраций и удерживайте в течение нескольких секунд.

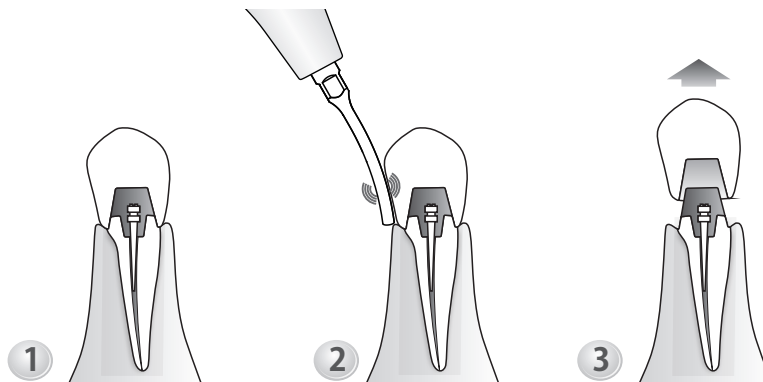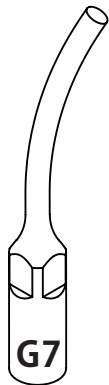

РЕЖИМ: G
МОЩНОСТЬ

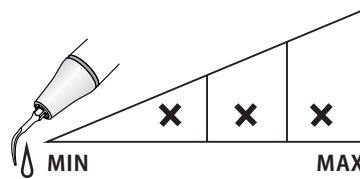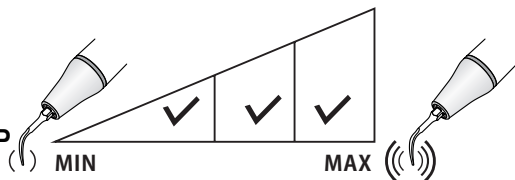


ИРРИГАЦИЯ



G8(GD8/GS8)

Удаление штифтов.

Ультразвуковая высокая эффективность для удаления сложных деталей зубного протеза.

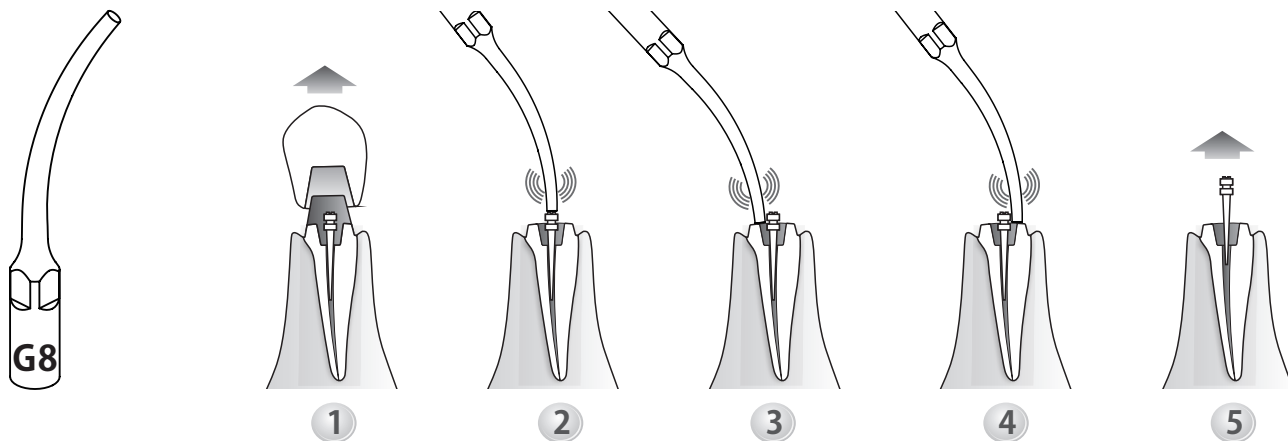

РЕЖИМ: G
МОЩНОСТЬ

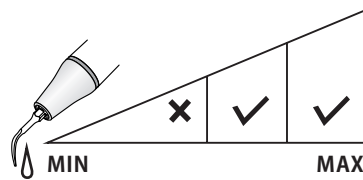
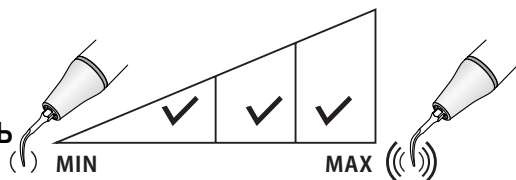


ИРРИГАЦИЯ





G9(GD9)

Удаление наддесневого камня на всех поверхностях зуба.

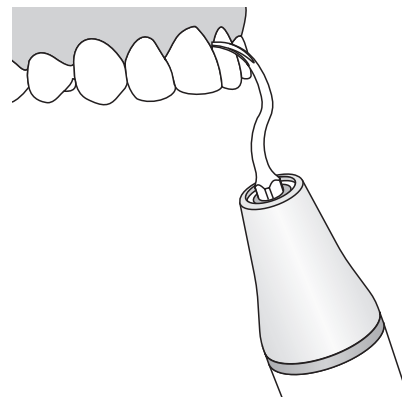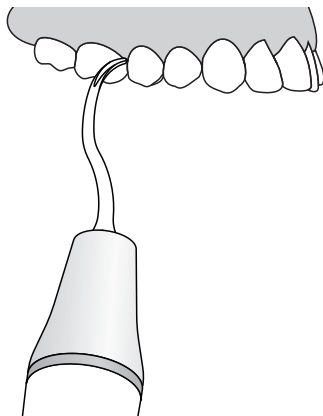

РЕЖИМ: G
МОЩНОСТЬ

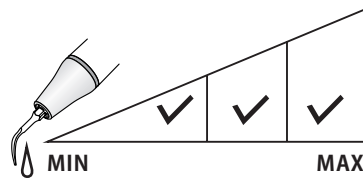
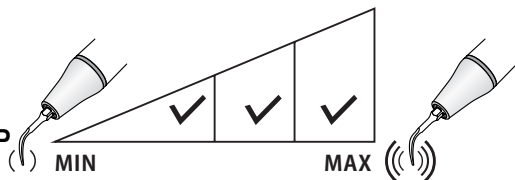


ИРРИГАЦИЯ





G10(GD10)

Удаление наддесневого налета во всех квадрантах, включая межзубные промежутки и десневые бороздки.

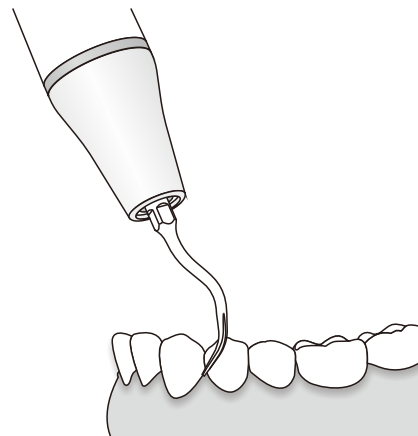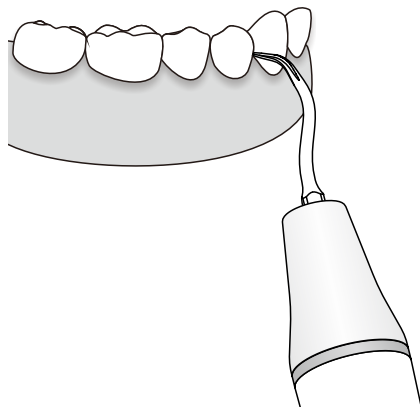

РЕЖИМ: G
МОЩНОСТЬ

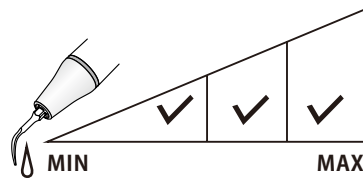
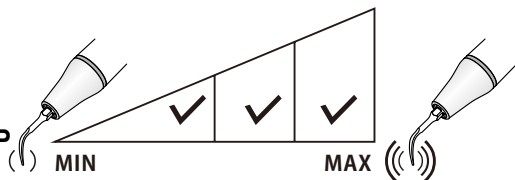


ИРРИГАЦИЯ





G11(GD11/GK11)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для полировки обрабатываемой поверхности зубов в межзубных промежутках без повреждения соседних зубов во время ортодонтического лечения

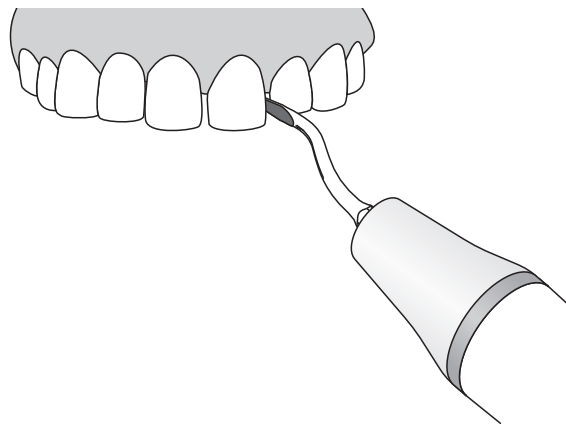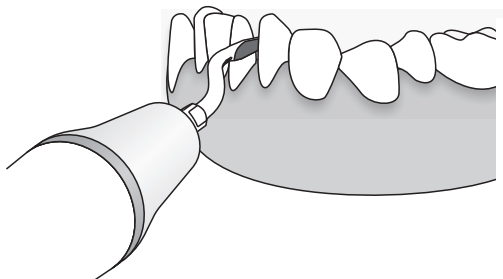

РЕЖИМ: G
МОЩНОСТЬ


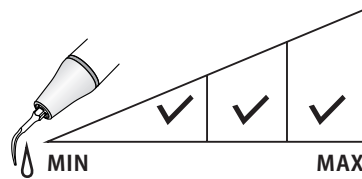
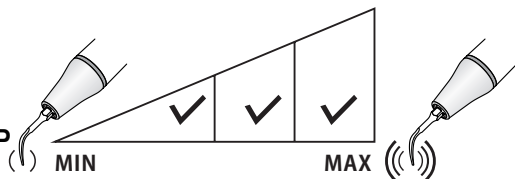


ИРРИГАЦИЯ





P1(PD1/PS1)

Узкий и острый, рекомендуется для очистки и ирригации зубо-десневой бороздки или пародонтальных каналов.

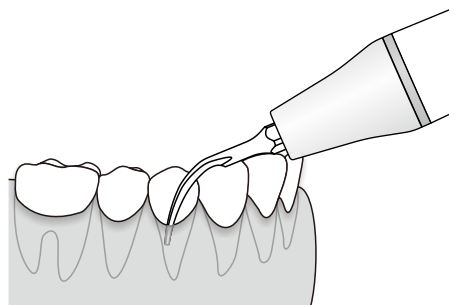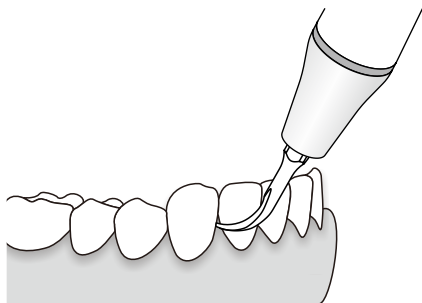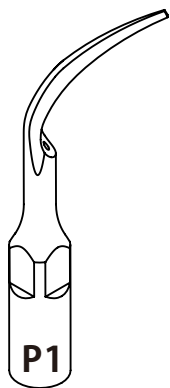




РЕЖИМ: Р
МОЩНОСТЬ

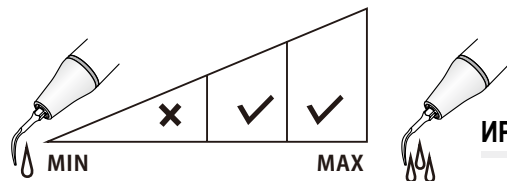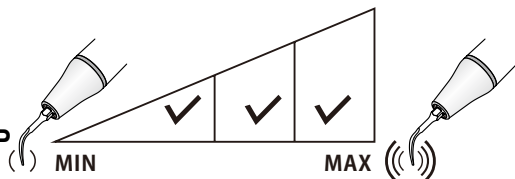



ИРРИГАЦИЯ

P2L(PD2L)

Инструмент, изогнутый под углом в левую сторону, используется для очистки области фуркационных дефектов от зубных отложений.

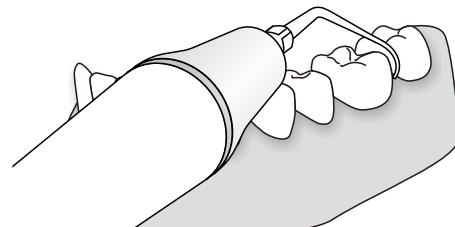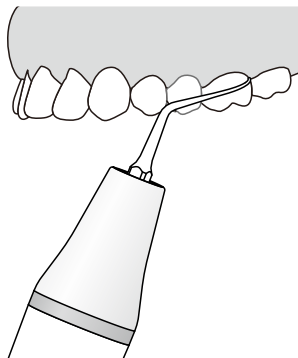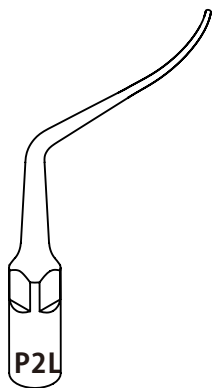




РЕЖИМ: Р
МОЩНОСТЬ

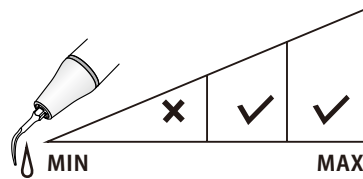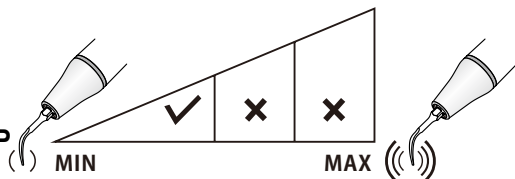



ИРРИГАЦИЯ

P2LD(PD2LD)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм), изогнутый под углом в левую сторону, для удаления зубных отложений в области шейки зуба и коронарной трети корня зуба.

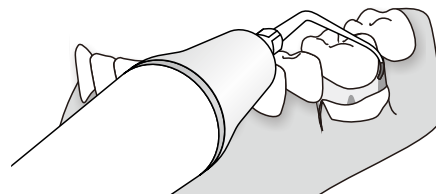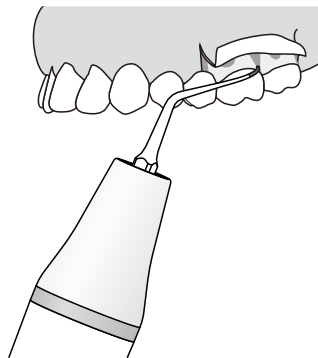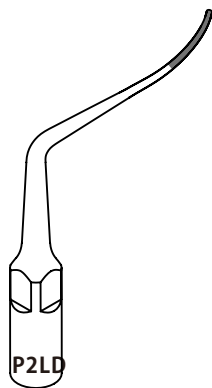

РЕЖИМ: Р
МОЩНОСТЬ


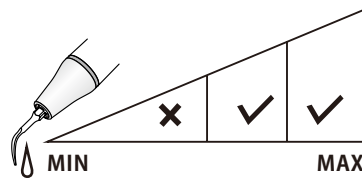
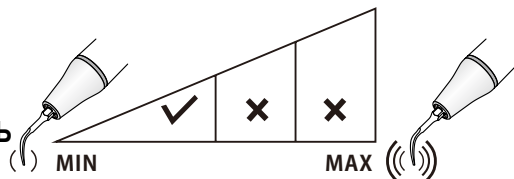


ИРРИГАЦИЯ





P2R(PD2R)

Инструмент, изогнутый под углом в правую сторону, используется для для очистки области фуркационных дефектов от зубных отложений.

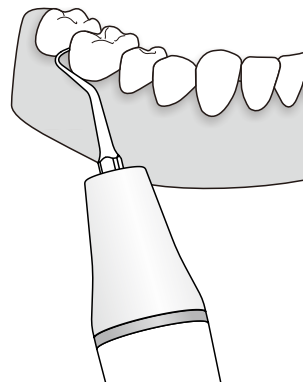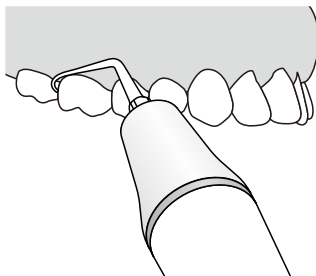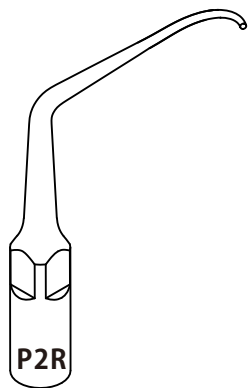

РЕЖИМ: P
МОЩНОСТЬ


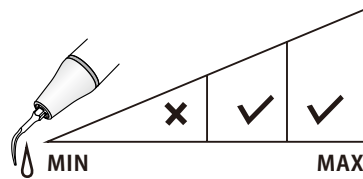
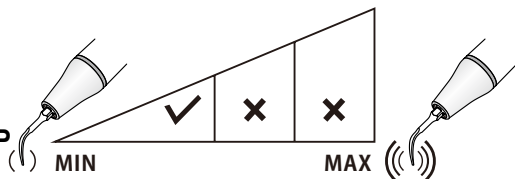


ИРРИГАЦИЯ





P2RD(PD2RD)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм), изогнутый под углом правую сторону, для удаления зубных отложений в области шейки зуба и коронарной трети корня зуба.

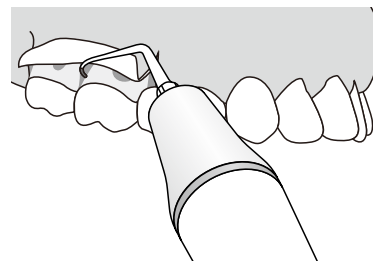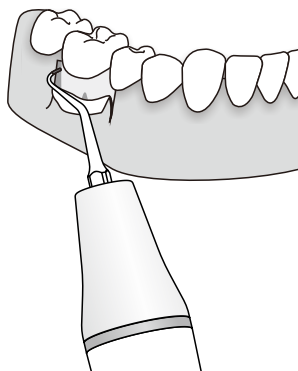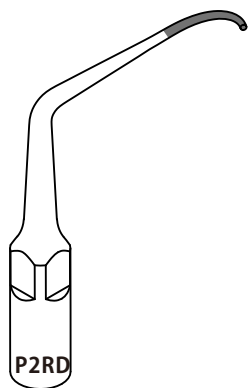

РЕЖИМ: P
МОЩНОСТЬ


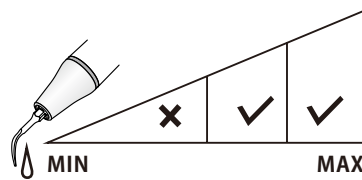
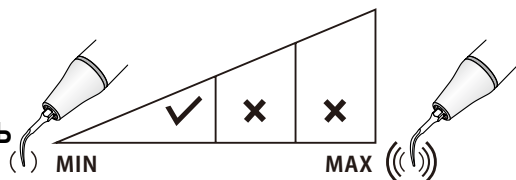


ИРРИГАЦИЯ





P3(PD3/PS3)

Рекомендуется для очистки и промывания глубоких зубодесневых карманов.

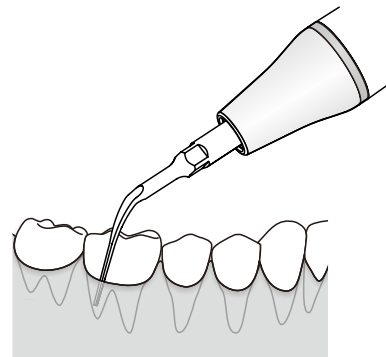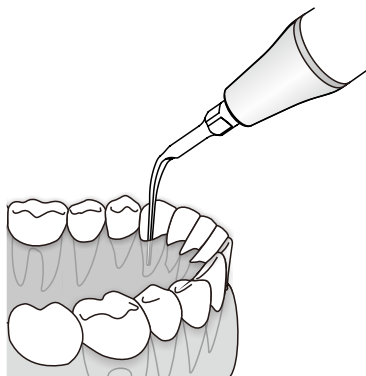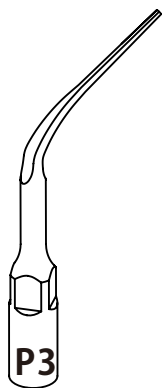




РЕЖИМ: P
МОЩНОСТЬ

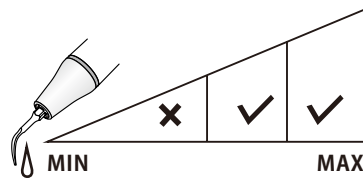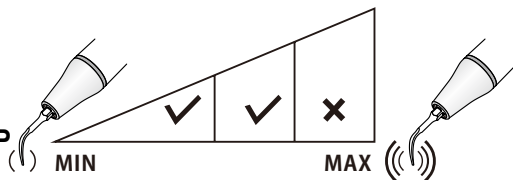



ИРРИГАЦИЯ

P3D(PD3D/PS3D)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для прикорневой очистки зубов после периодонтальной лоскутной хирургии. Он также используется для формирования краев коронки и для расширения фуркации зубов

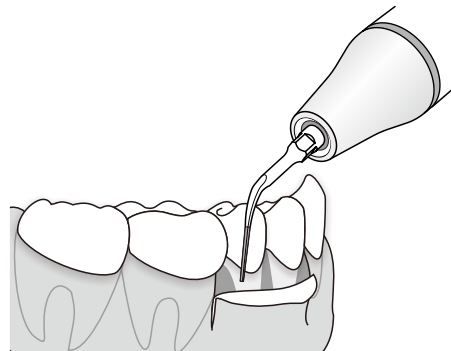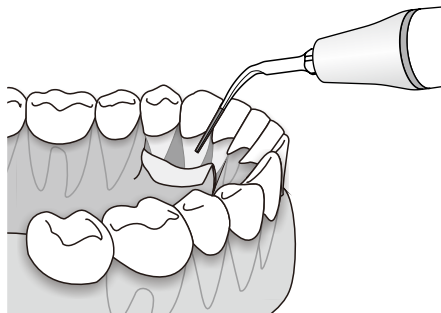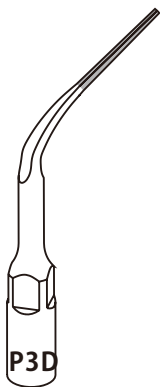

РЕЖИМ: Р
МОЩНОСТЬ


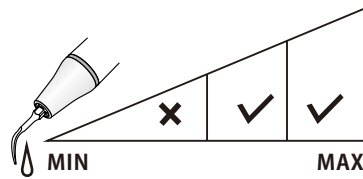
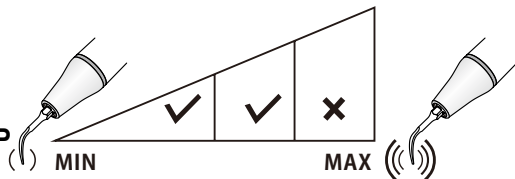


ИРРИГАЦИЯ





P4(PD4/PS4)

Рекомендуется для очистки и промывания неглубоких зубодесневых карманов.

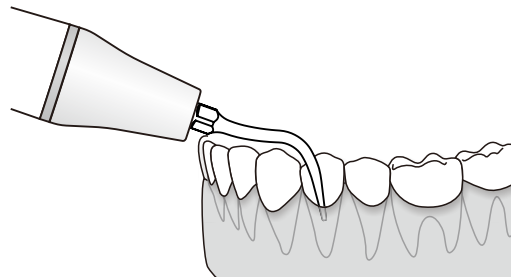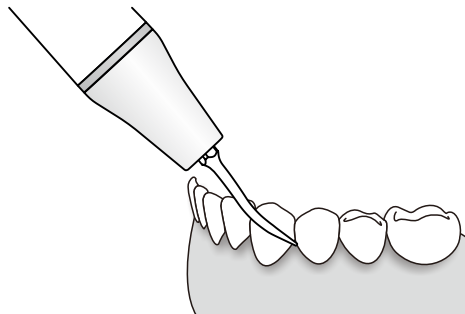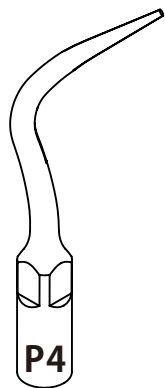


РЕЖИМ: Р
МОЩНОСТЬ

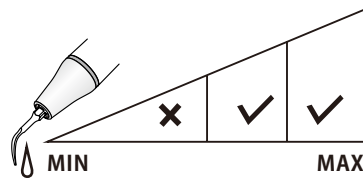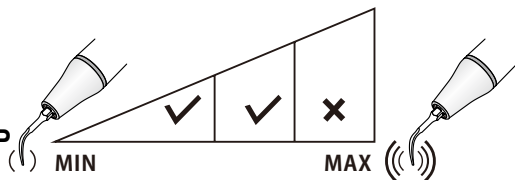



ИРРИГАЦИЯ

P6 (PD6/PS6)

Инструмент с острой рабочей частью, применяется для удаления поддесневого налета или камня.

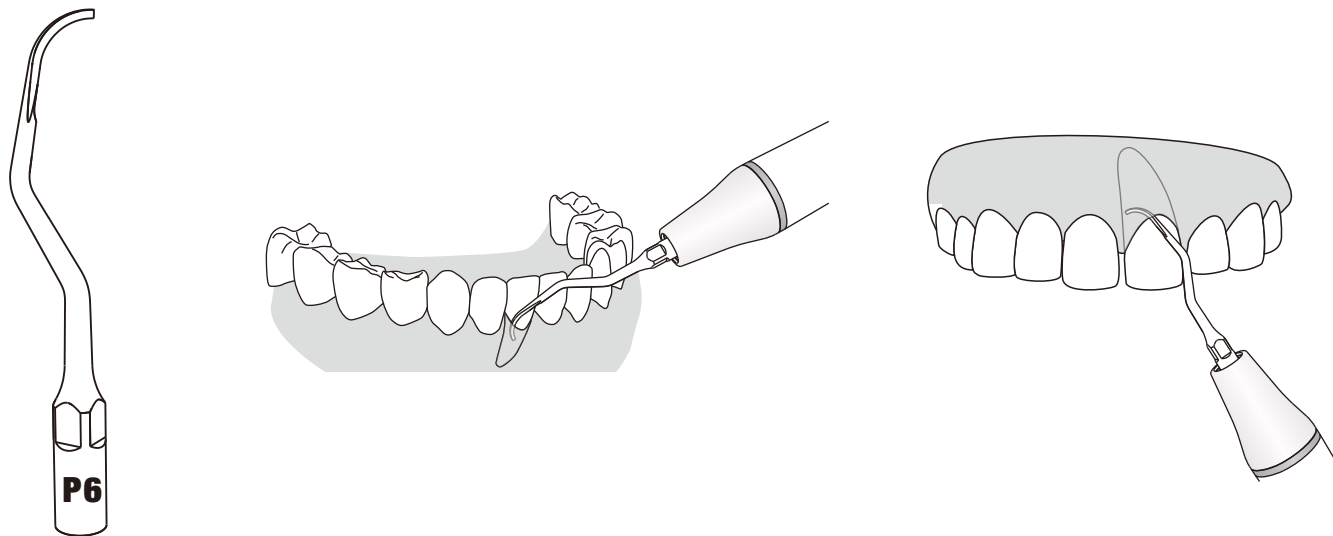

РЕЖИМ: Р
МОЩНОСТЬ


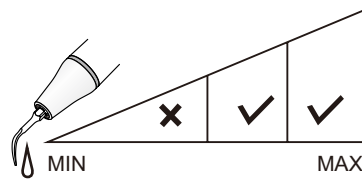
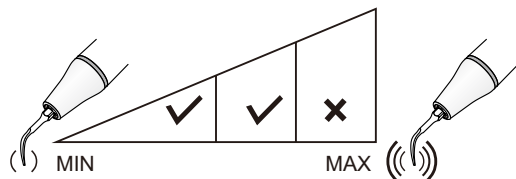


ИРРИГАЦИЯ





P10 (PD10/PS10)

Применяется для обработки среднего и глубокого десневого кармана.

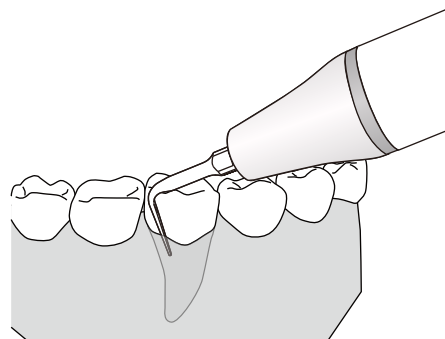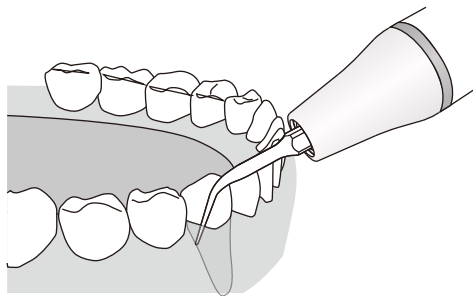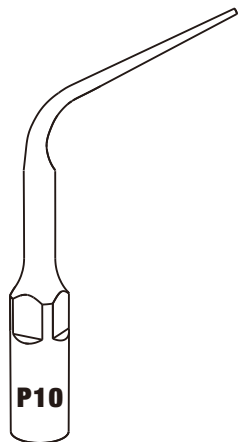


РЕЖИМ: Р
МОЩНОСТЬ

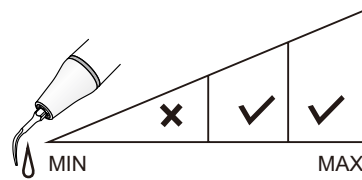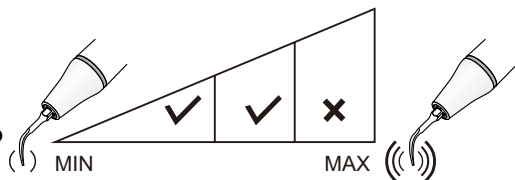

ИРРИГАЦИЯ

E1(ED1/ES1)

Держатель под углом 120° , используется для файла диаметром 0,7 мм или 0,8 мм. Рекомендуется для очистки и промывания зубного канала, обычно используется для зубов переднего ряда.

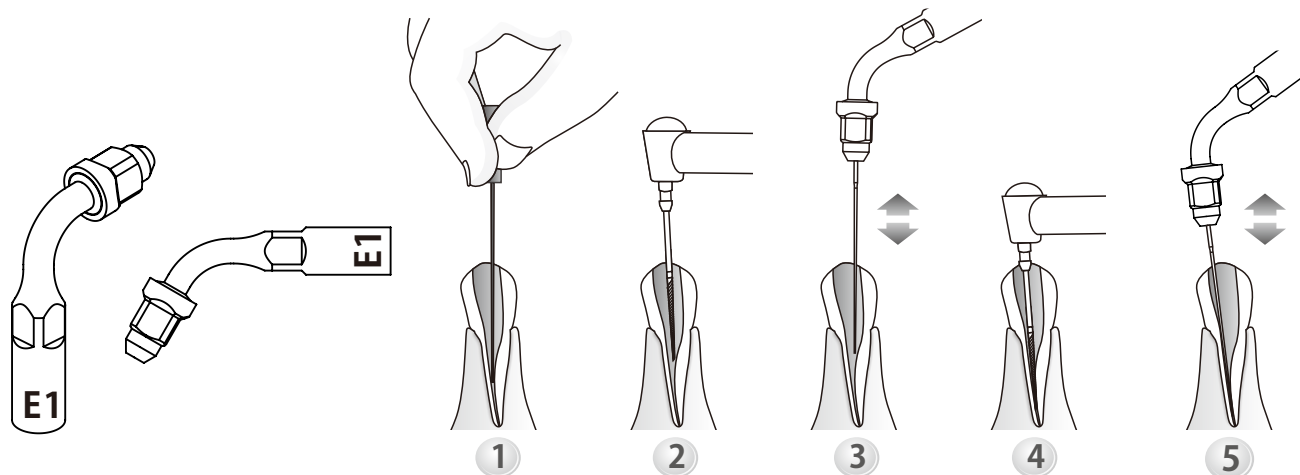

Используйте только плоский динамометрический ключ для закрепления держателей файлов на стоматологической насадке, а также для аккуратного закрепления файлов или инструментов в держателе. Не перетягивайте. Не затягивайте гайку держателя, если файл или инструмент в держателе не установлен, так как это может привести к его поломке. Используйте только надлежащее оборудование, используйте держатель с файлом диаметром 0,7 мм и 0,8 мм, вы не сможете установить файл 0,8 мм после установки на держателе файле 0,7 мм.

РЕЖИМ: E

МОЩНОСТЬ




ИРРИГАЦИЯ

E2(ED2/ES2)

Держатель под углом 95°, используется для файла диаметром 0,7 мм или 0,8 мм.

Рекомендуется для очистки и промывания зубного канал, обычно используется для моляров.

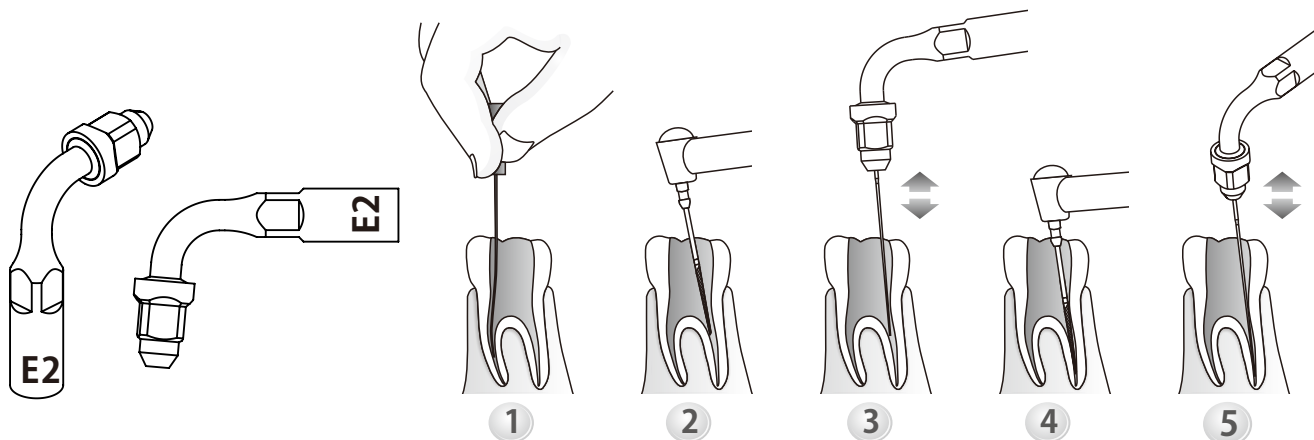

Используйте только плоский динамометрический ключ для закрепления держателей файлов на стоматологической насадке, а также для аккуратного закрепления файлов или инструментов в держателе. Не перетягивайте. Не затягивайте гайку держателя, если файл или инструмент в держателе не установлен, так как это может привести к его поломке. Используйте только надлежащее оборудование: используйте держатель с файлом диаметром 0,7 мм и 0,8 мм, вы не сможете установить файл 0,8 мм после установки на держателе файле 0,7 мм.

РЕЖИМ: E

МОЩНОСТЬ



ИРРИГАЦИЯ




E3(ED3/ES3)

Рекомендуется для растапливания гуттаперчи.



Погрузите инструмент в эвгенол перед установкой в канал.

Слегка нажмите инструментом на гуттаперчевый штифт и активируйте инструмент, чтобы разогретая гуттаперча лучше obtурировала канал.

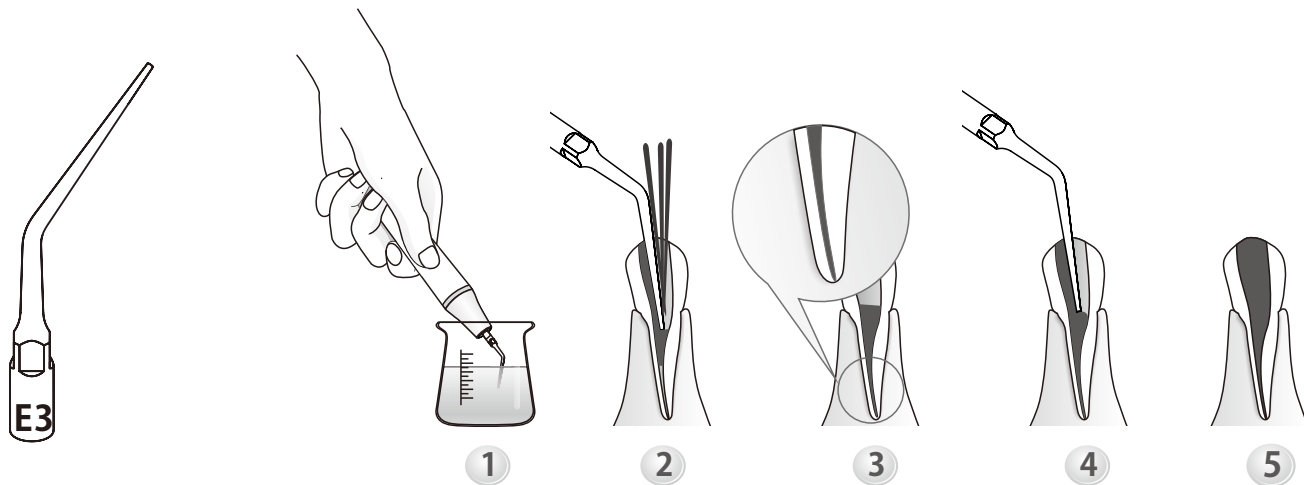

РЕЖИМ: E

МОЩНОСТЬ

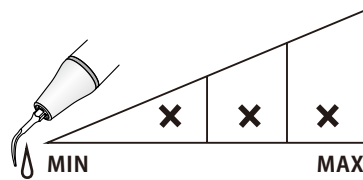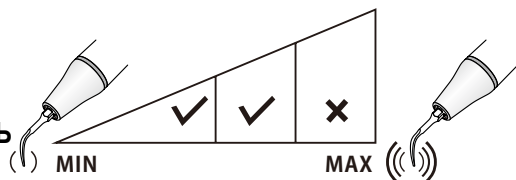


ИРРИГАЦИЯ



E3D(ED3D/ES3D)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для расширения зубного канала и формирования доступа к файлам, сломанных внутри канала.

Не трогайте сломанный файл при расширении зубного канала, иначе он может уйти в канал еще глубже.

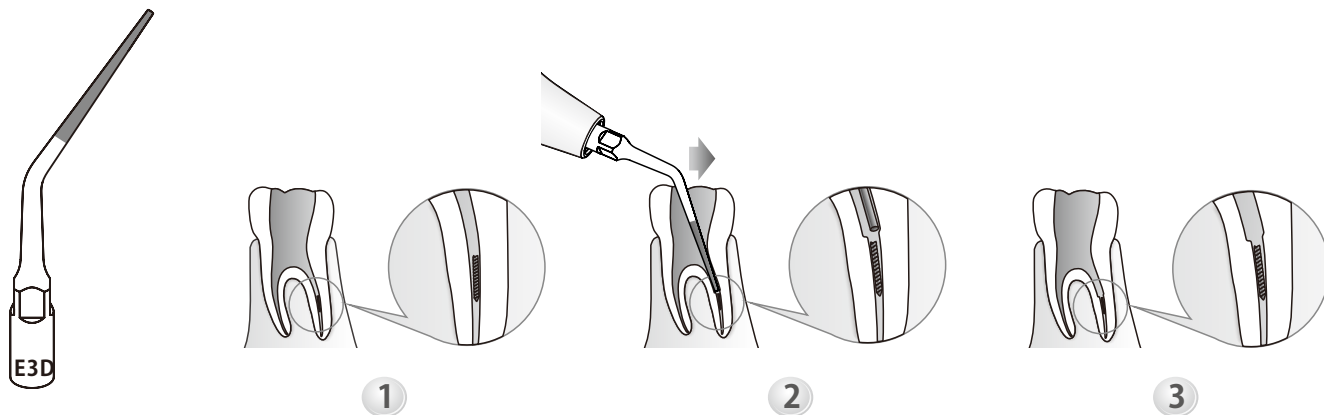

РЕЖИМ: E
МОЩНОСТЬ

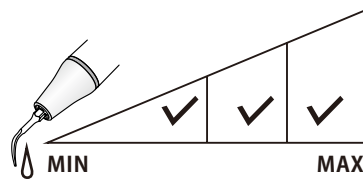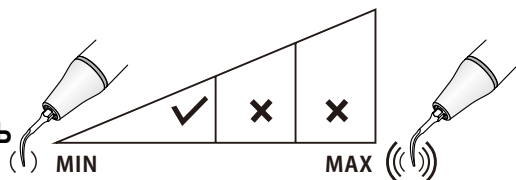


ИРРИГАЦИЯ





E4(ED4/ES4)

Используется для удаления препятствий при пломбировании корневого канала при его повторной обработке.

Длина части насадки малого диаметра составляет 22 мм.

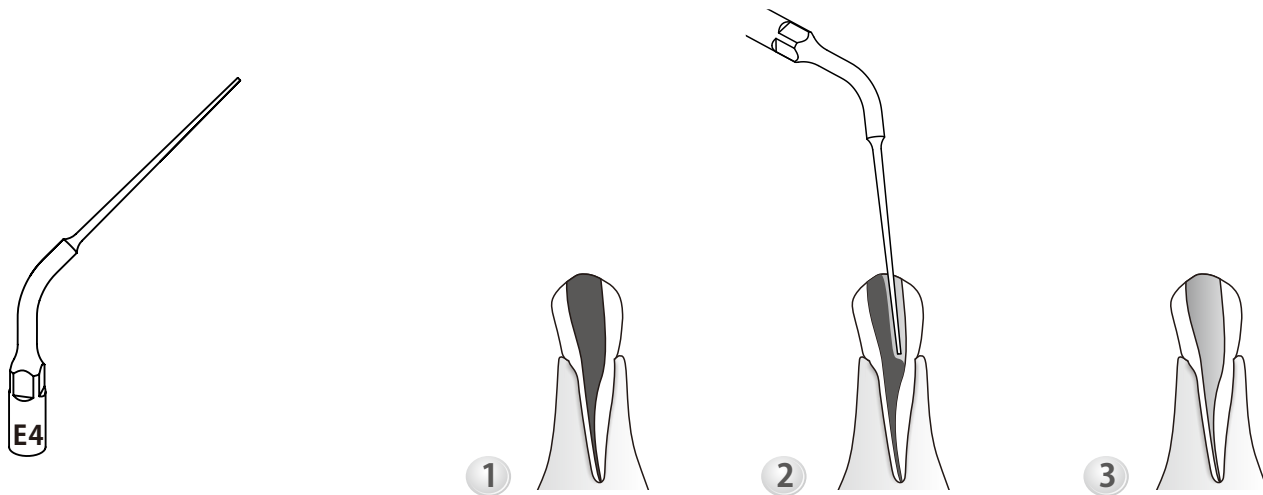


РЕЖИМ: E
МОЩНОСТЬ

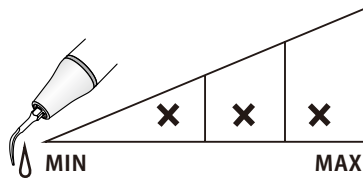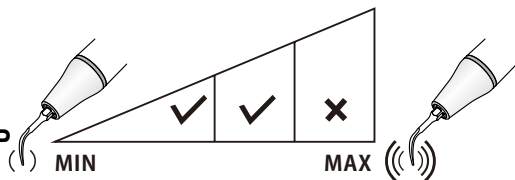



ИРРИГАЦИЯ

E4D(ED4D/ES4D)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для удаления кальцифицированных фрагментов и плохо установленного пломбировочного материала в зубном канале при повторной обработке канала. Длина алмазного покрытия составляет 15 мм.

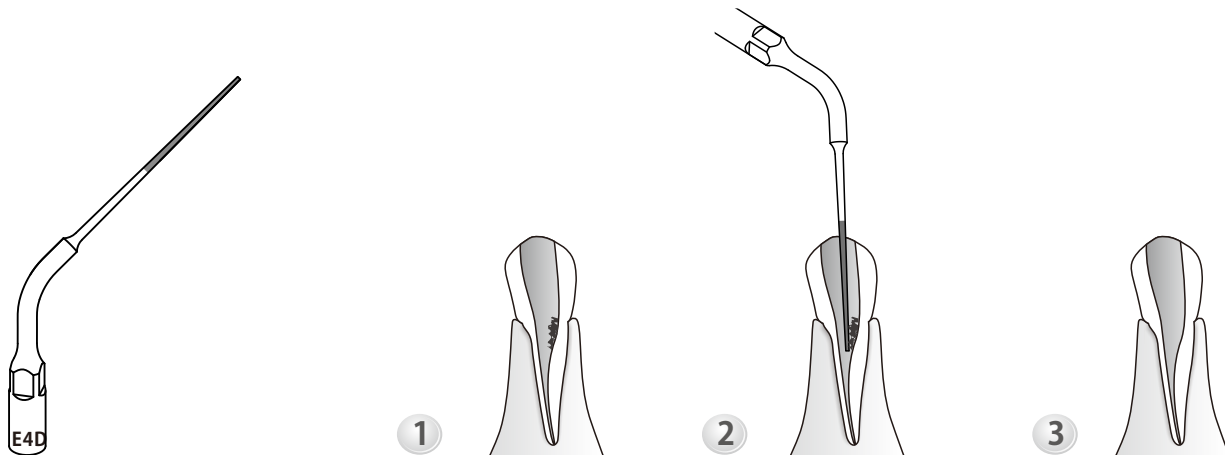



РЕЖИМ: E
МОЩНОСТЬ

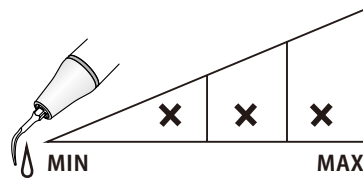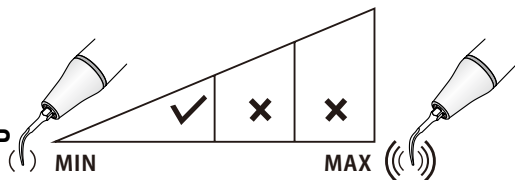


ИРРИГАЦИЯ

E5(ED5/ES5)


Используется для удаления препятствий при пломбировании корневого канала при его повторной обработке. Длина части насадки малого диаметра составляет 16 мм.

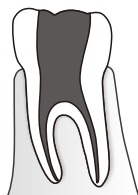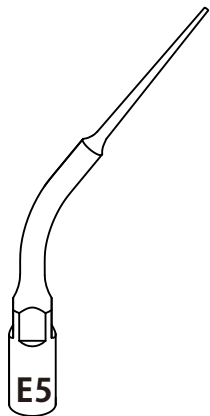

1


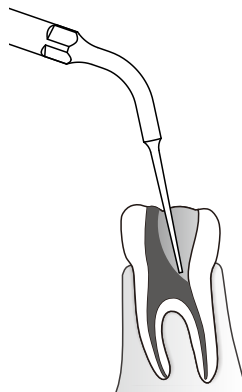


2

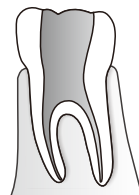

3



РЕЖИМ: E
МОЩНОСТЬ

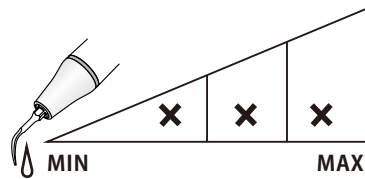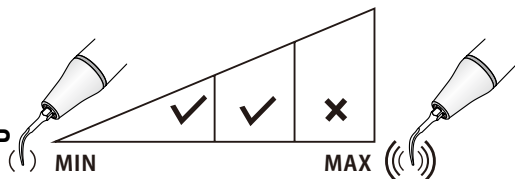


ИРРИГАЦИЯ

E5D(ED5D/ES5D)


Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для удаления кальцифицированных фрагментов и плохо установленного пломбировочного материала в зубном канале при повторной обработке канала. Длина алмазного покрытия составляет 10 мм.

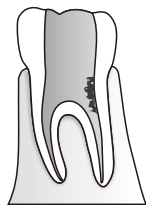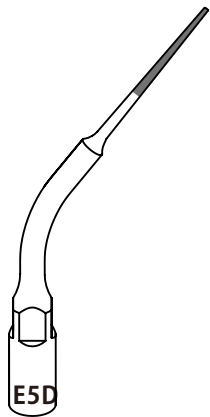

1


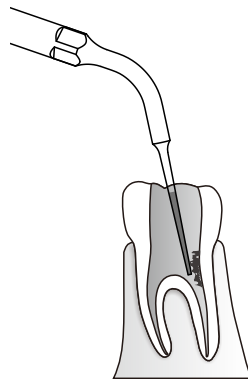


2

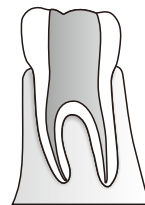

3

РЕЖИМ: E
МОЩНОСТЬ



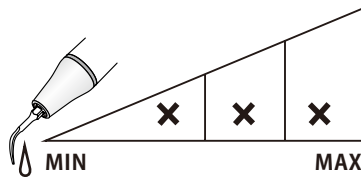
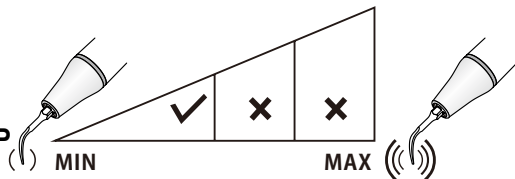


ИРРИГАЦИЯ





P4D(PD4D/PS4D)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для ориентации зубного канала. Он также может использоваться для удаления кальцифицированных фрагментов, расположенных в 1/3 части зубного канала. Не нажимайте на инструмент слишком сильно во время обработки, чтобы не допустить повреждения корневого канала.

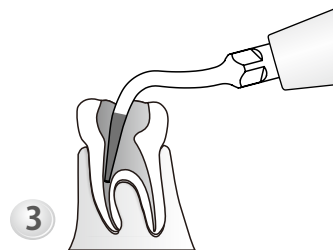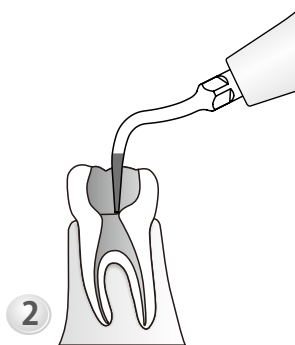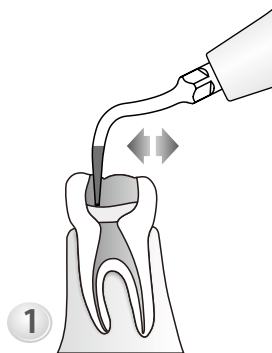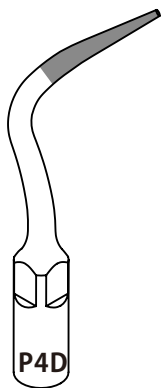

РЕЖИМ: E
МОЩНОСТЬ

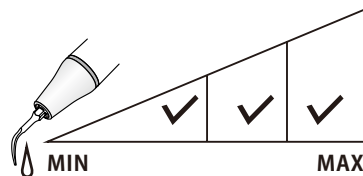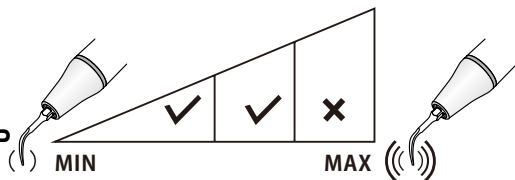


ИРРИГАЦИЯ

E8(ED8/ES8/EK8)



Рекомендуется для удерживания различных типов стоматологических боров для проведения различных процедур на зубах.

Обычно используется для фронтальной группы зубов.

Также могут использоваться особые боры для зубных имплантатов.

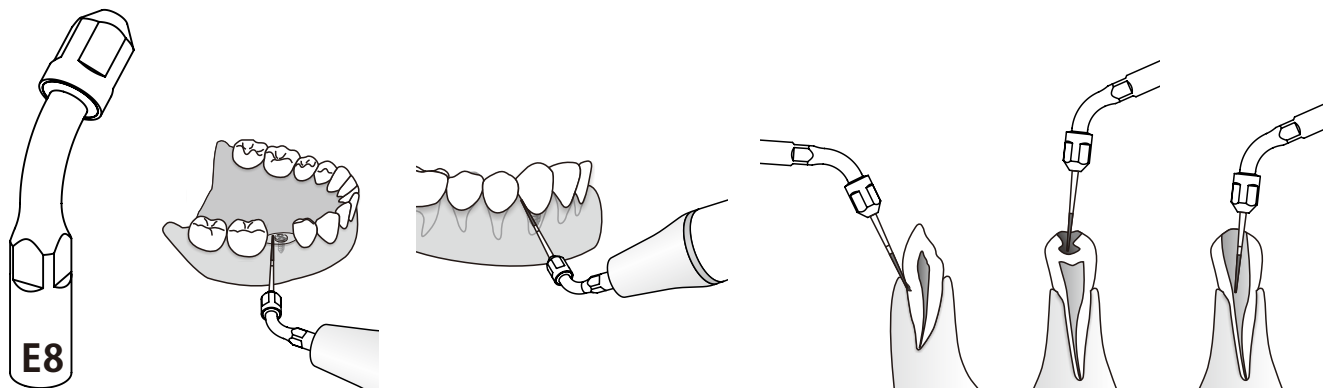


РЕЖИМ: E
МОЩНОСТЬ

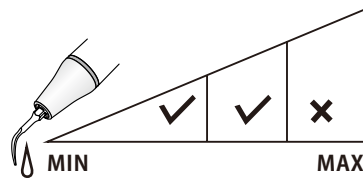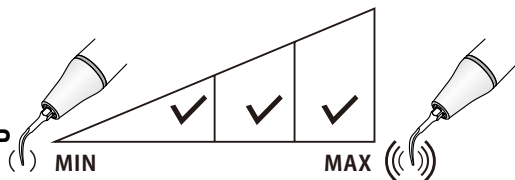



ИРРИГАЦИЯ

E9(ED9)

Рекомендуется для удерживания различных типов стоматологических боров для проведения различных процедур на зубах. Обычно используется для моляров. Также могут использоваться особые боры для зубных имплантатов.

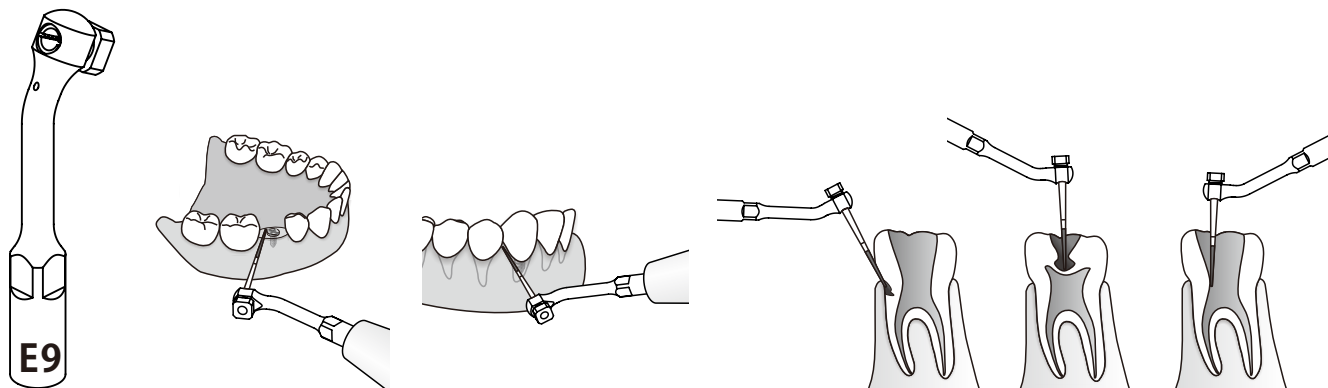

РЕЖИМ: E
МОЩНОСТЬ

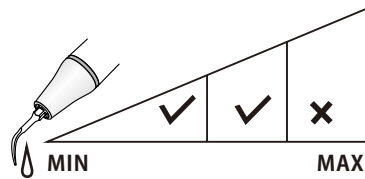
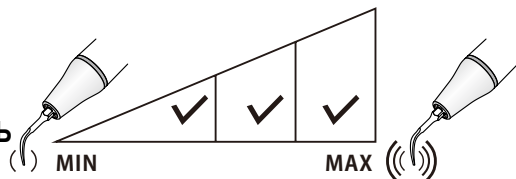


ИРРИГАЦИЯ




E10(ED10/ES10)


Используется при ретроградной подготовке зубных каналов.
Длина части насадки малого диаметра составляет 4,5 мм.

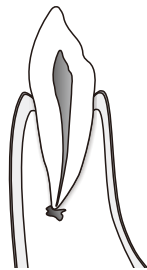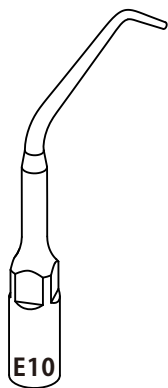

1


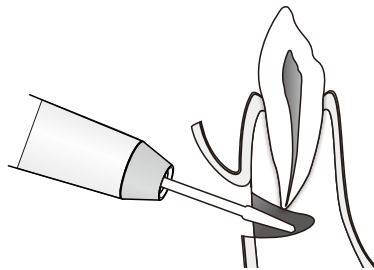


2

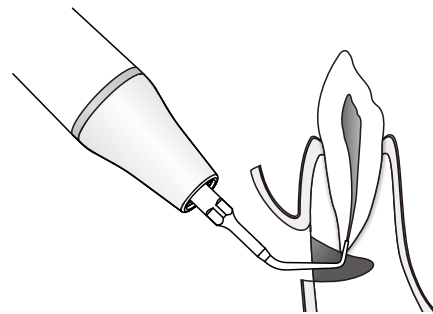

3



РЕЖИМ: E
МОЩНОСТЬ

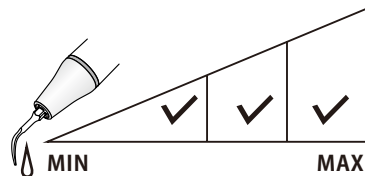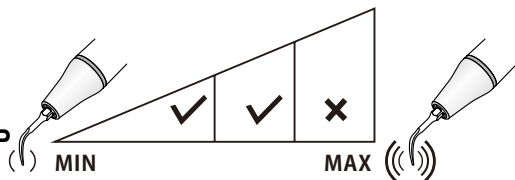


ИРРИГАЦИЯ

E10D(ED10D/ES10D)


Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для высокоэффективного выравнивания поверхности корней в ретроградной подготовке зубных каналов.
Длина алмазного покрытия составляет 3,3 мм.

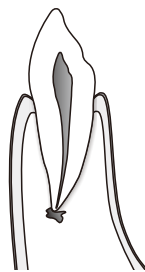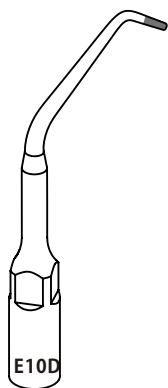

1


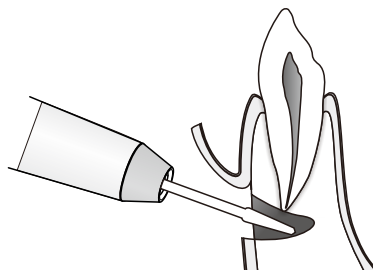


2

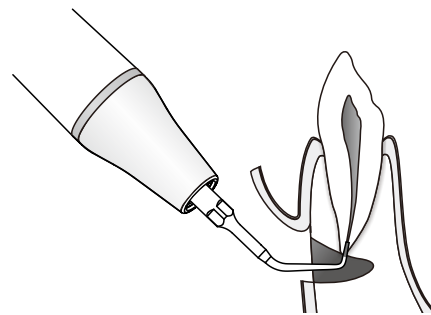

3

РЕЖИМ: E
МОЩНОСТЬ

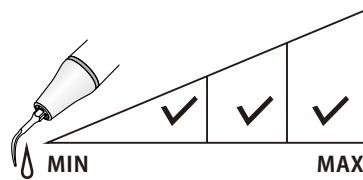
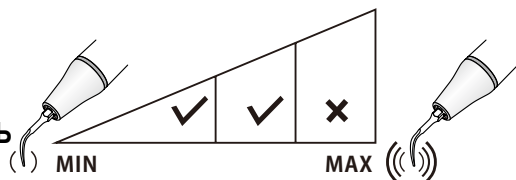


ИРРИГАЦИЯ




E11 (ED11/ES11)


Используется при ретроградной подготовке зубных каналов.
Длина части насадки малого диаметра составляет 3,5 мм.

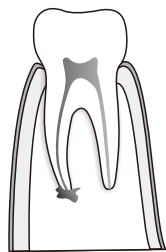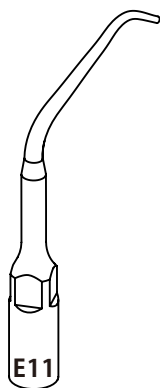

1


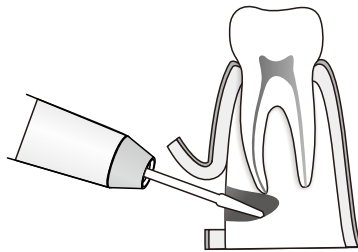


2

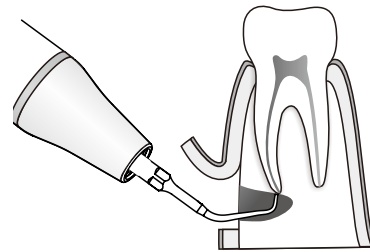

3

РЕЖИМ: E
МОЩНОСТЬ

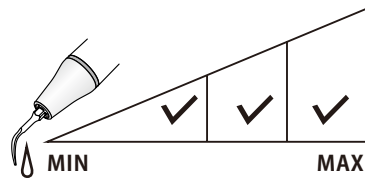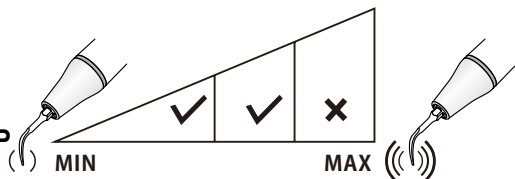



ИРРИГАЦИЯ




E11D(ED11D/ES11D)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для выравнивания поверхности корней в ретроградной подготовке зубных каналов.


Длина алмазного покрытия составляет 2,2 мм.

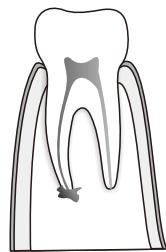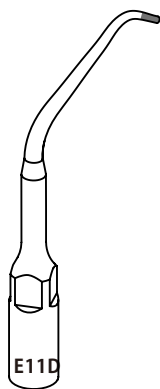

1


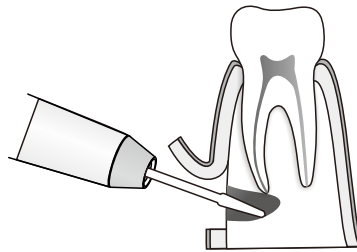


2

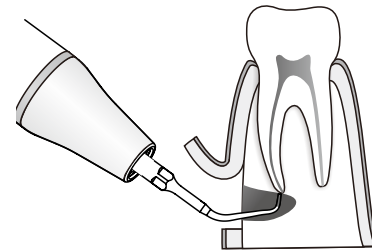

3

РЕЖИМ: E
МОЩНОСТЬ

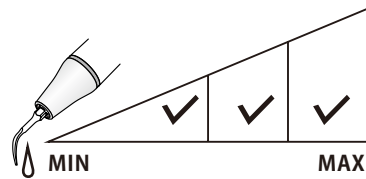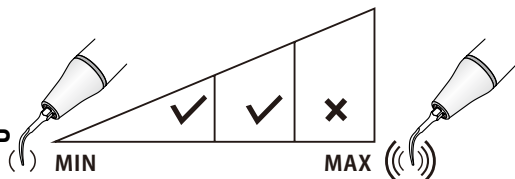

ИРРИГАЦИЯ




E14(ED14/ES15)



Инструмент для удаления сломанных файлов внутри зубного канала. Длина части насадки малого диаметра составляет 22 мм.

Если возможно, расположите голову пациента так, чтобы зубной канал находился на горизонтальной поверхности с наклоном вниз. Вращайте наконечник инструмента по направлению часовой стрелки вокруг сломанной части до тех пор, пока она не будет извлечена из зубного канала.

Чтобы не допустить углубления сломанного файла в зубном канале, не используйте давления на инструмент в осевом направлении.

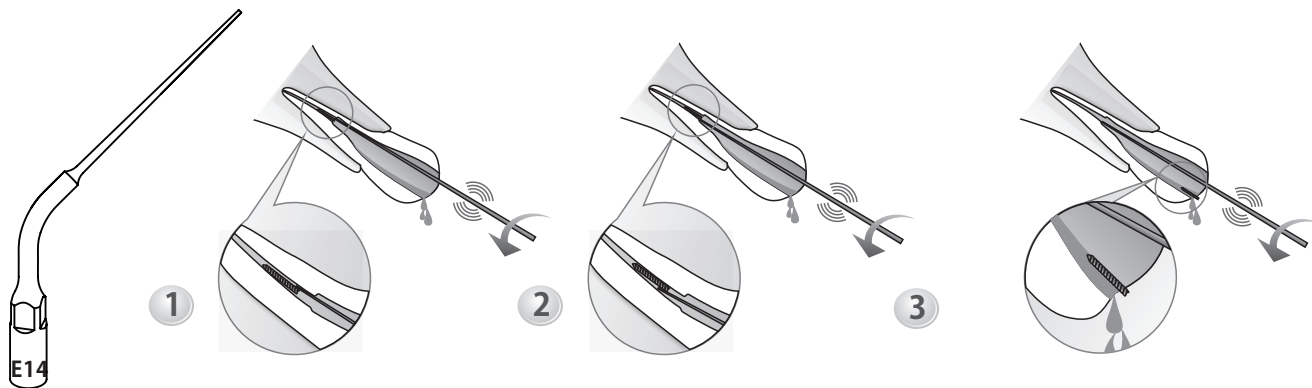

РЕЖИМ: E
МОЩНОСТЬ

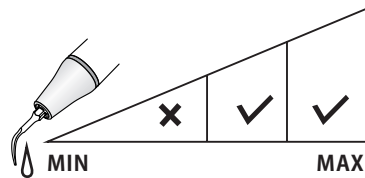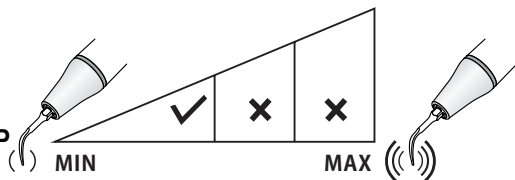


ИРРИГАЦИЯ



E14D(ED14D/E S14D)


Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для удаления кальцифицированных фрагментов в канале зуба. Применяется для чистки и расширения зубного канала. Длина алмазного покрытия составляет 15 мм.

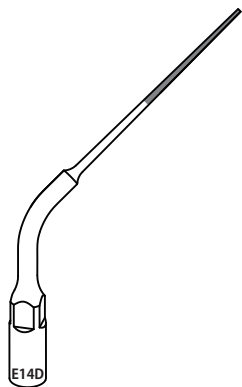

1





2

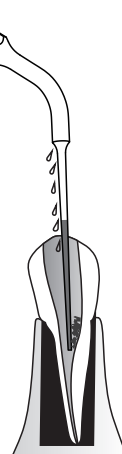

3



РЕЖИМ: E
МОЩНОСТЬ

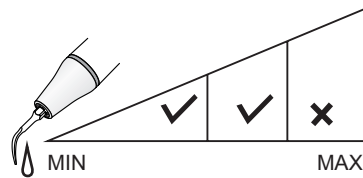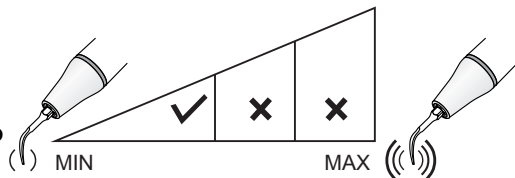


ИРРИГАЦИЯ

E15(ED15/ES15)

Инструмент для удаления сломанных файлов внутри зубного канала. Длина части насадки малого диаметра составляет 16 мм.



Если возможно, расположите голову пациента так, чтобы зубной канал находился на горизонтальной поверхности с наклоном вниз. Вращайте наконечник инструмента по направлению часовой стрелки вокруг сломанной части до тех пор, пока она не будет извлечена из зубного канала.

Чтобы не допустить углубления сломанного файла в зубном канале, не используйте давления на инструмент в осевом направлении.

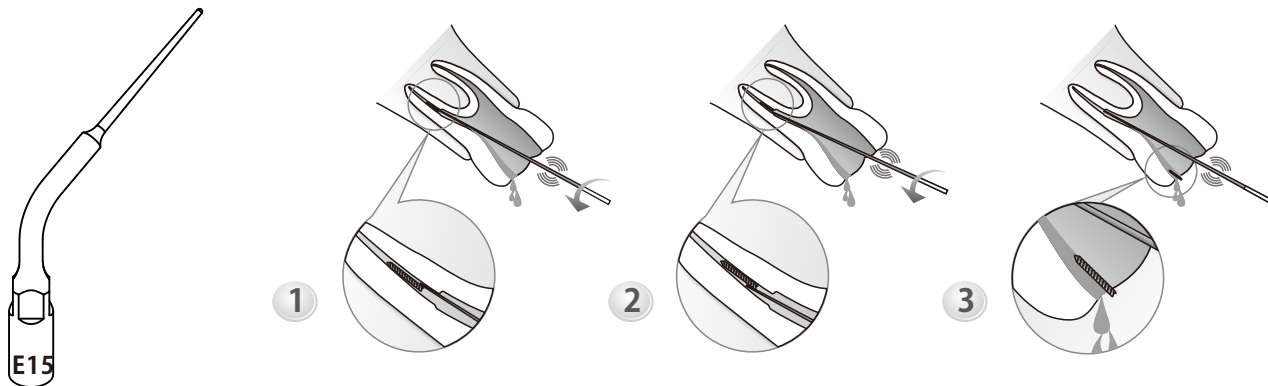

РЕЖИМ: E

МОЩНОСТЬ

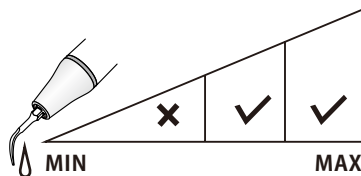
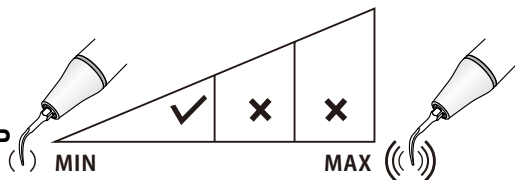


ИРРИГАЦИЯ


E15D(ED15D/E S15D)

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для удаления кальцифицированных фрагментов в канале зуба. Применяется для чистки и расширения зубного канала.


Длина алмазного покрытия составляет 10 мм.

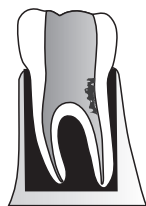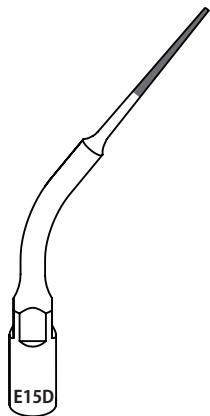

1


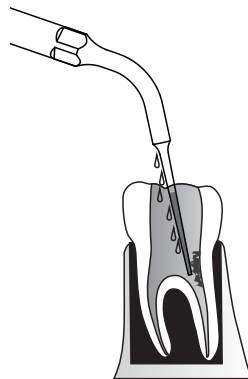


2

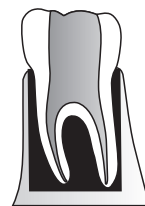

3

РЕЖИМ: E
МОЩНОСТЬ

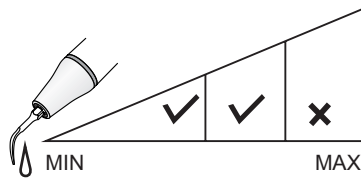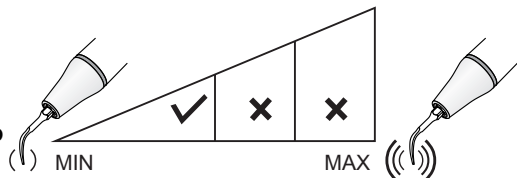


ИРРИГАЦИЯ





SB1 (SBD1)

Инструмент с алмазным покрытием (85 мкм) для удаления кариеса на окклюзионной поверхности зубов и на шейке зуба.

Расположите инструмента на кариозной полости и медленно двигайте им, легко надавливая

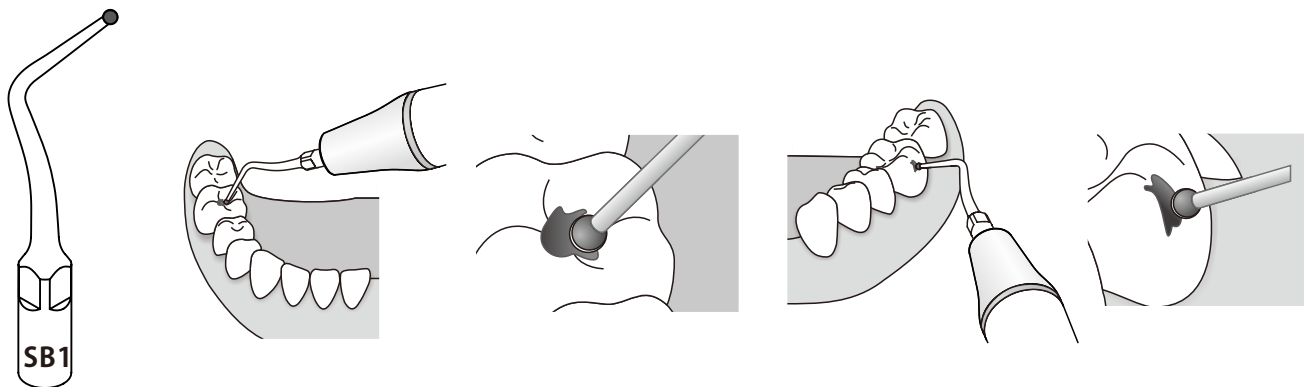




РЕЖИМ: Р
МОЩНОСТЬ

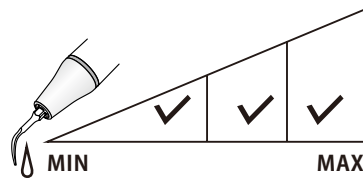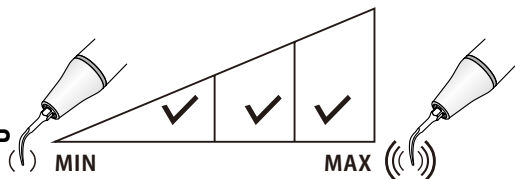



ИРРИГАЦИЯ

SB2 (SBD2)

Инструмент с алмазным покрытием (85 мкм) для удаления кариеса на мезиальной поверхности смежных зубов.

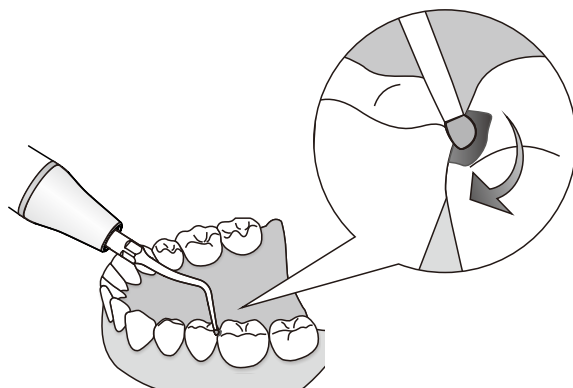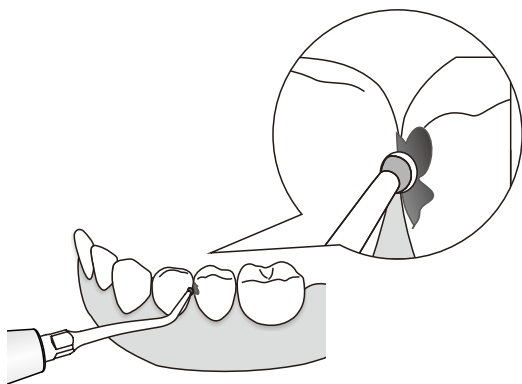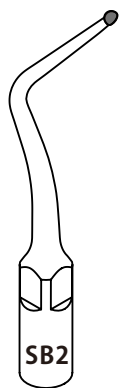

РЕЖИМ: Р
МОЩНОСТЬ


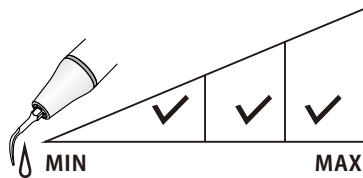
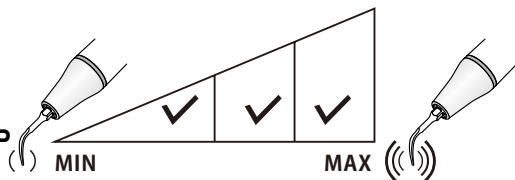


ИРРИГАЦИЯ





SB3 (SBD3)

Инструмент с алмазным покрытием (85 мкм) для удаления кариеса на дистальной поверхности зубов.

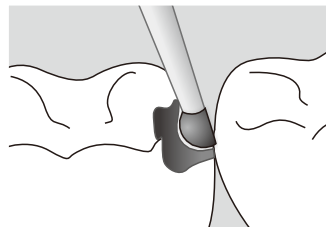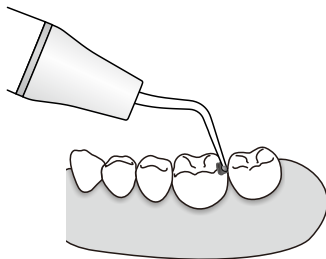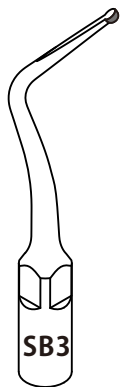

РЕЖИМ: Р
МОЩНОСТЬ


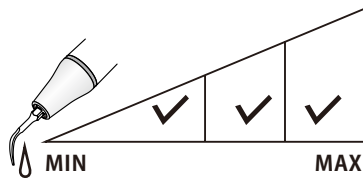
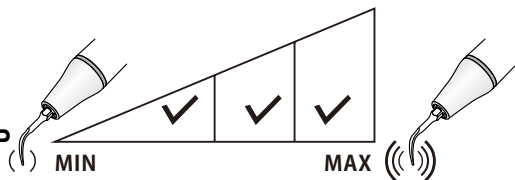


ИРРИГАЦИЯ





SBL(SBDL)

Инструмент с алмазным покрытием (85 мкм) для удаления зубного кариеса, он не повреждает смежные зубы в связи с наклоном рабочей части под углом 45° справа налево.

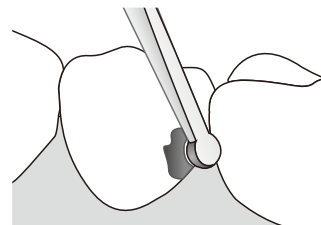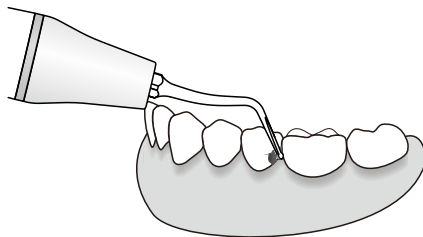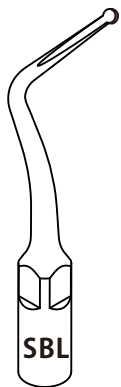




РЕЖИМ: Р
МОЩНОСТЬ

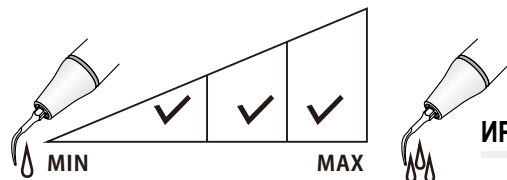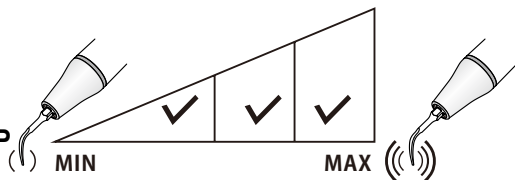



ИРРИГАЦИЯ

SBR(SBDR)

Инструмент с алмазным покрытием (85 мкм) для удаления зубного кариеса, он не повреждает смежные зубы в связи с наклоном рабочей части под углом 45° слева направо.

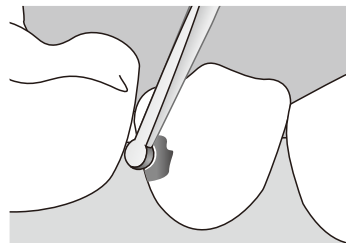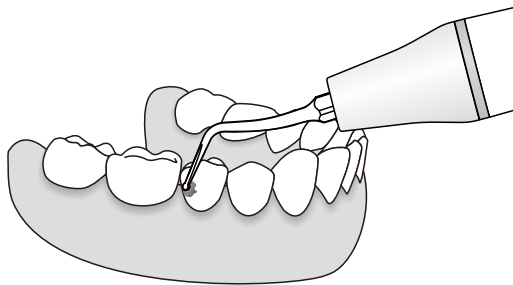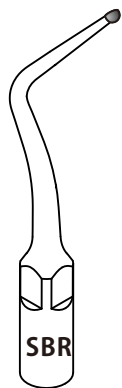

РЕЖИМ: Р
МОЩНОСТЬ


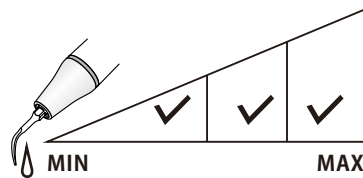
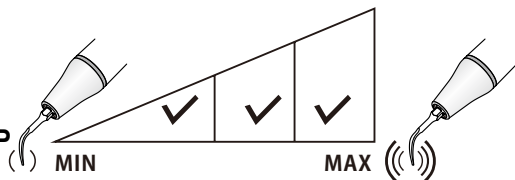


ИРРИГАЦИЯ





GK1

Удаление наддесневых зубных отложений во всех квадрантах.

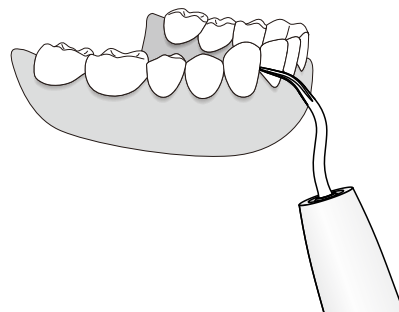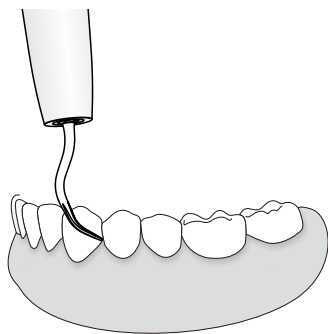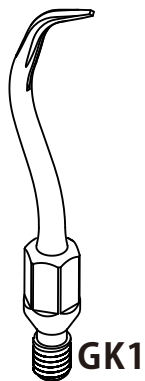

МОЩНОСТЬ

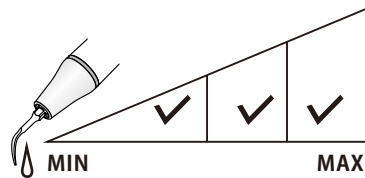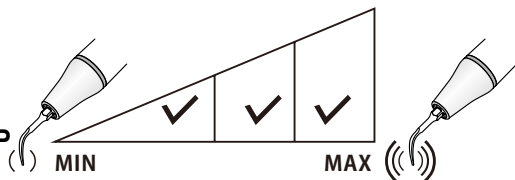



ИРРИГАЦИЯ

GK2



Удаление наддесневых зубных отложений.



GK2

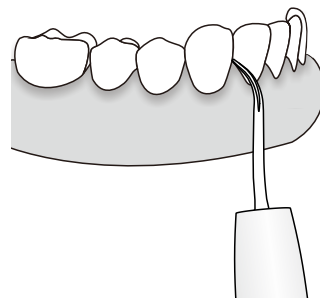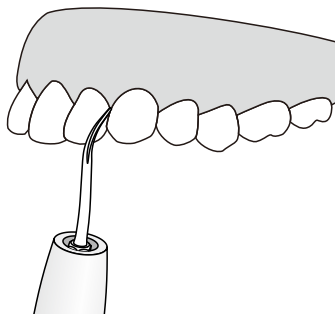






МОЩНОСТЬ

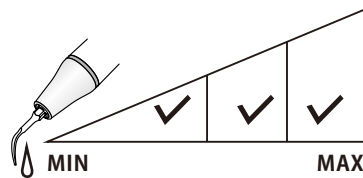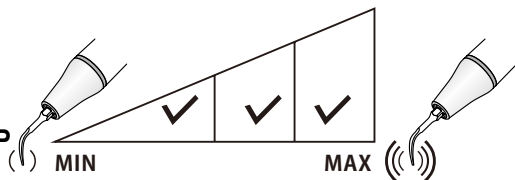

ИРРИГАЦИЯ




GK3

Удаление наддесневого зубного камня, межзубного камня и камня у шейки зубов.

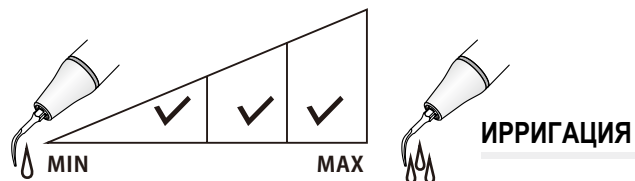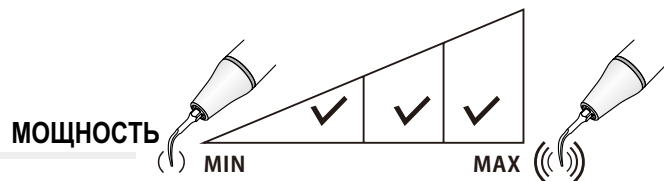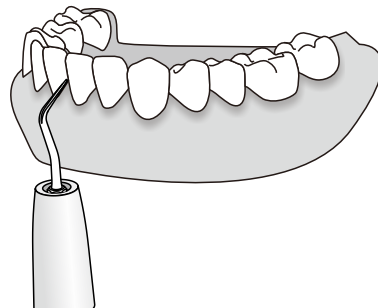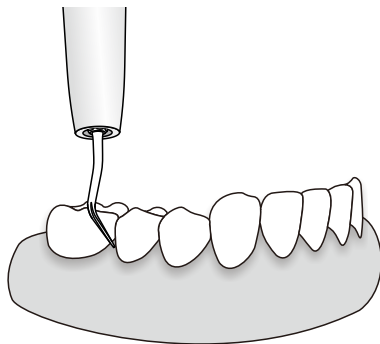
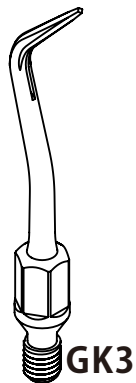


GK4

Удаление наддесневого зубного камня, включая межзубные промежутки и область десневых борозд.

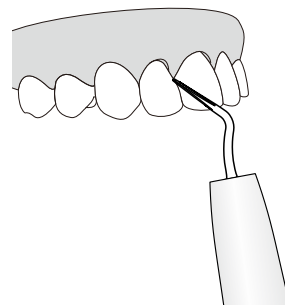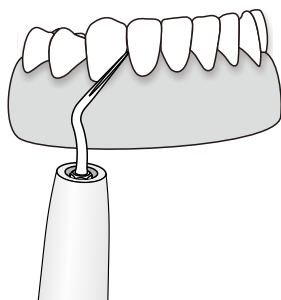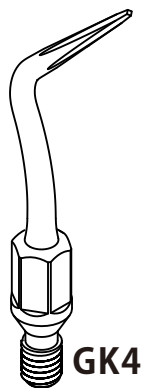




МОЩНОСТЬ

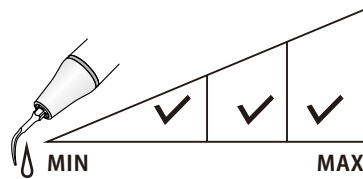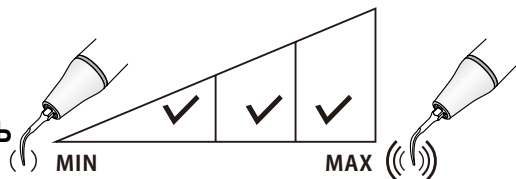



ИРРИГАЦИЯ

GK5

Удаление поддесневого зубного камня.

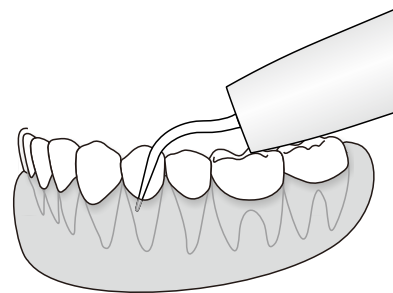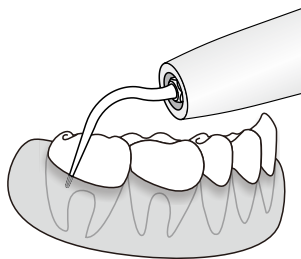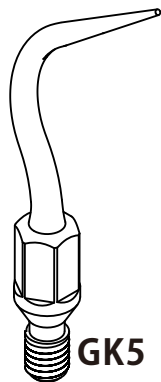


МОЩНОСТЬ

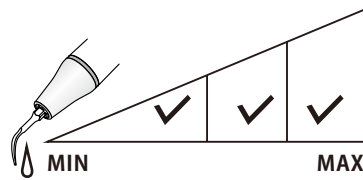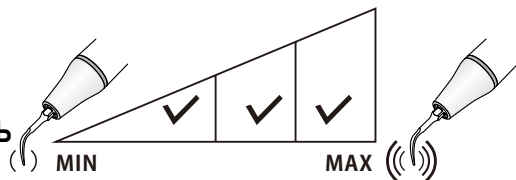



ИРРИГАЦИЯ

GK6



Инструмент, изогнутый под углом в левую сторону, для удаления поддесневого зубного камня.

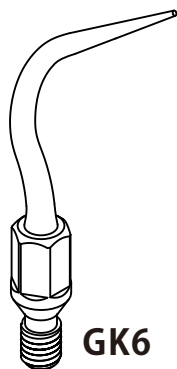

GK6

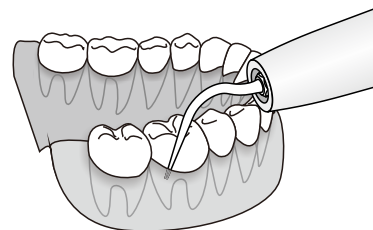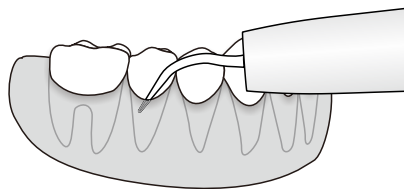




МОЩНОСТЬ

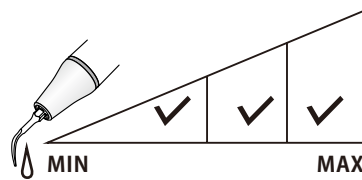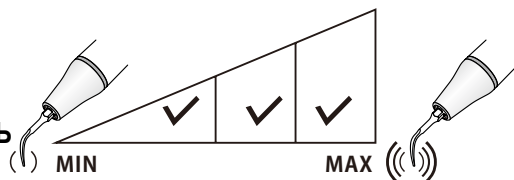



ИРРИГАЦИЯ

GK7

Инструмент, изогнутый под углом в правую сторону, для удаления поддесневого зубного камня.

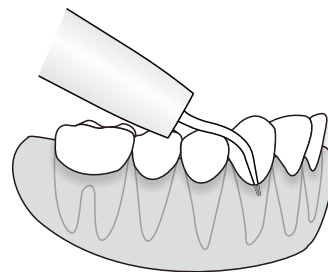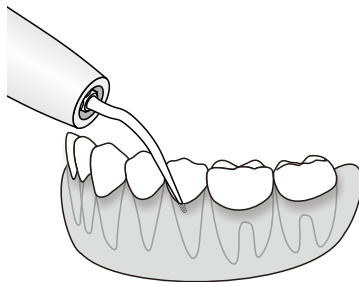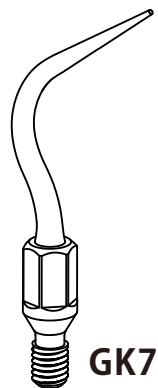




МОЩНОСТЬ

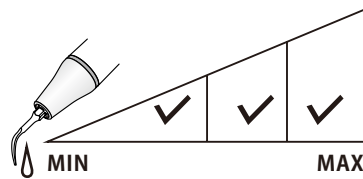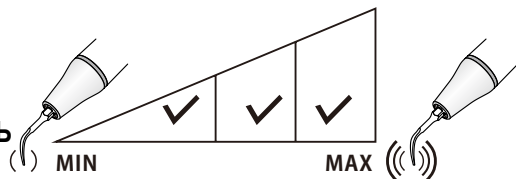



ИРРИГАЦИЯ

GC1

Удаление наддесневых зубных отложений во всех квадрантах.

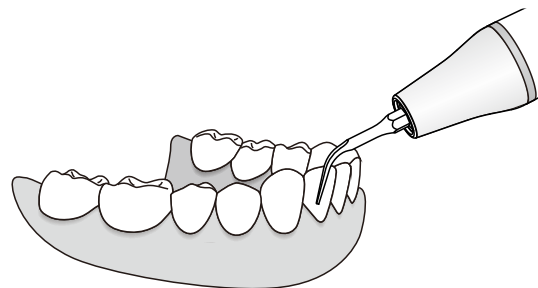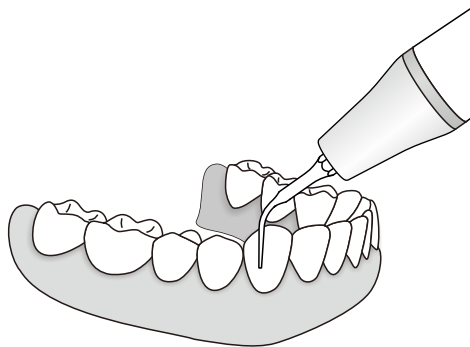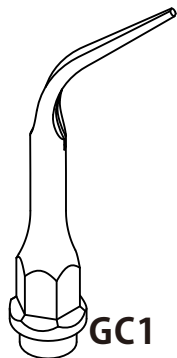



РЕЖИМ: G
МОЩНОСТЬ

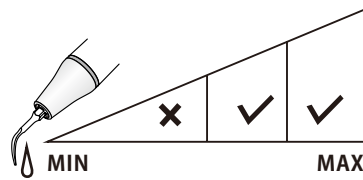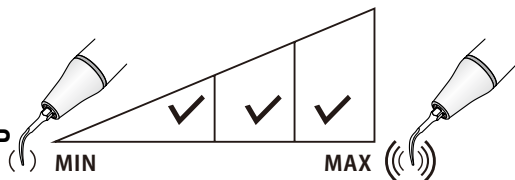



ИРРИГАЦИЯ

GC2

Удаление наддесневого камня, межзубного камня и камня у шейки зубов.

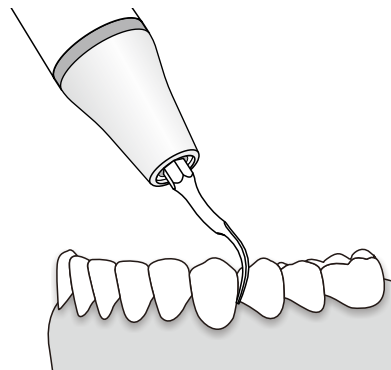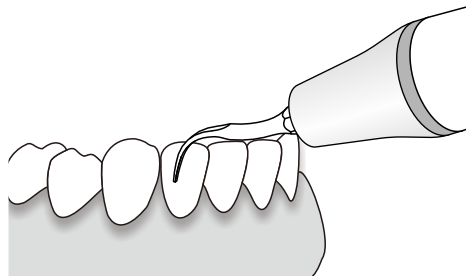




РЕЖИМ: G
МОЩНОСТЬ

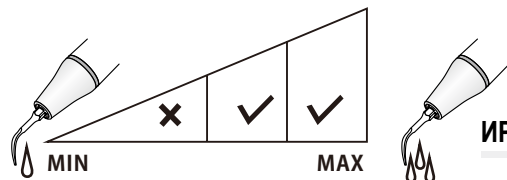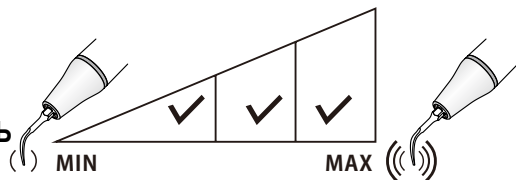



ИРРИГАЦИЯ

PC1

Удаление поддесневых зубных отложений, включая межзубные промежутки и область десневых борозд.

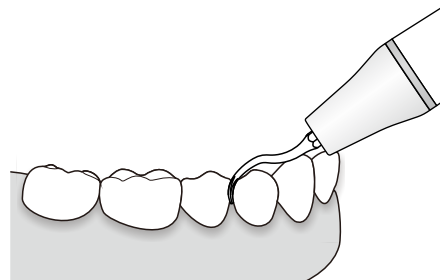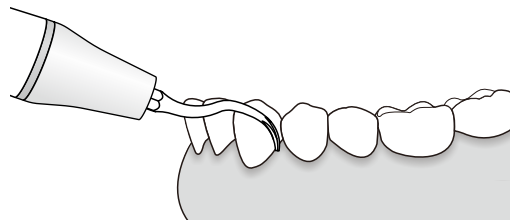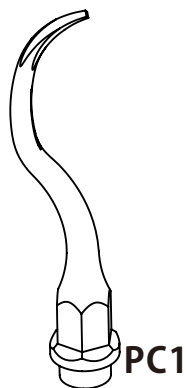






РЕЖИМ: P
МОЩНОСТЬ

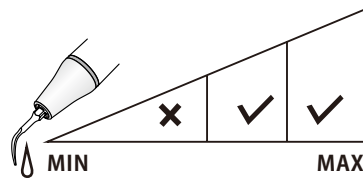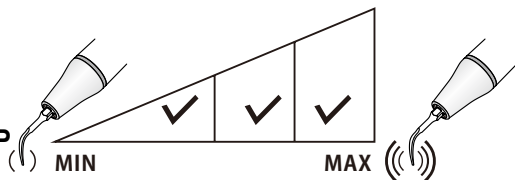

ИРРИГАЦИЯ


A1

Удаление наддесневых зубных отложений, включая межзубные промежутки и область десневых борозд.

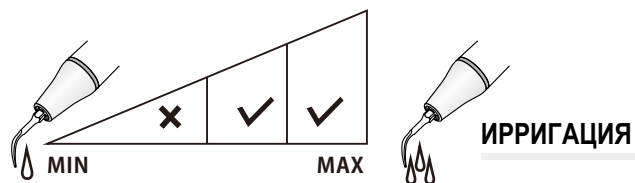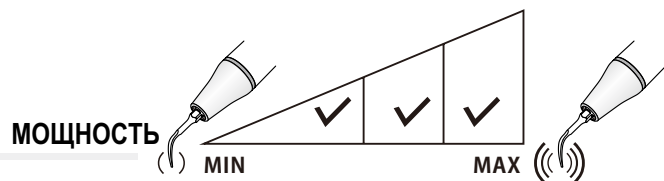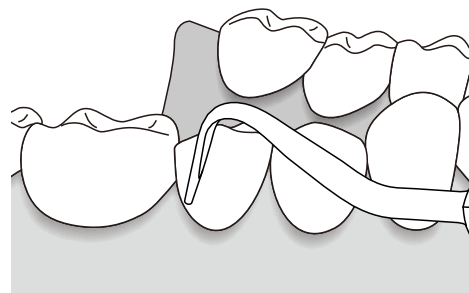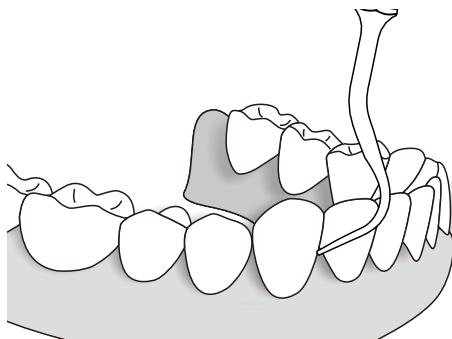
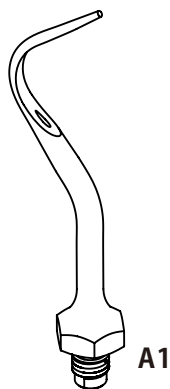


A2



Удаление наддесневого камня во всех квадрантах, включая шейки зубов и смежные части зубов.

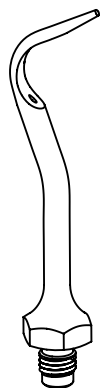

A2

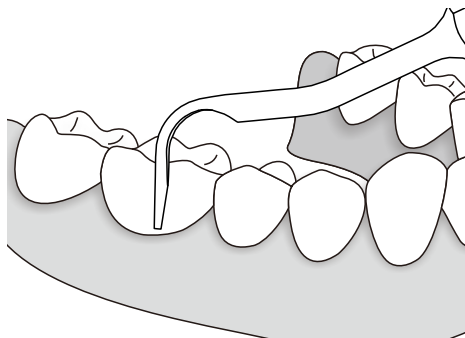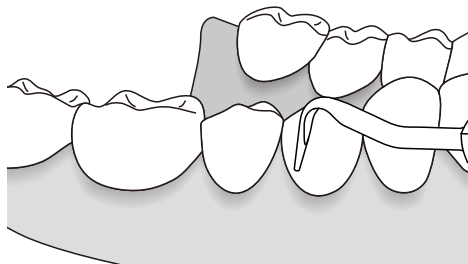

МОЩНОСТЬ



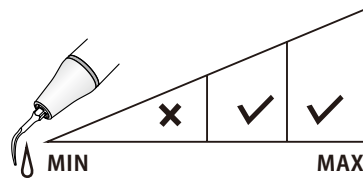
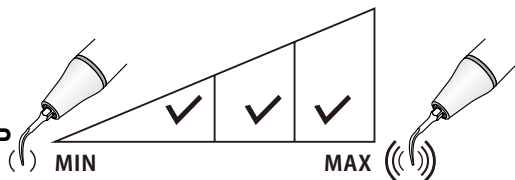


ИРРИГАЦИЯ




US1

Высокоэффективное разделение крупных участков зубов, инструмент может использоваться для удаления зуба.

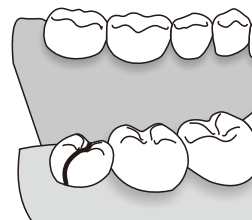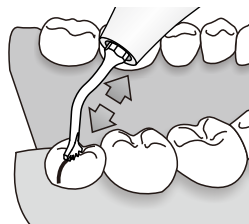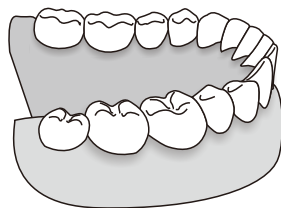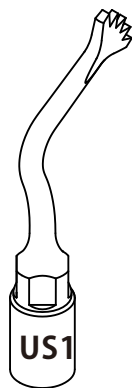

РЕЖИМ: BONE



МОЩНОСТЬ Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)

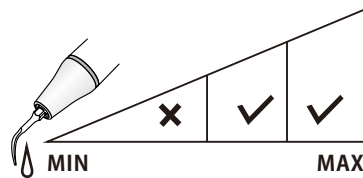


ИРРИГАЦИЯ

US1L


Левый угол 90°, техника горизонтальной остеотомии на нижней и верхней челюсти.

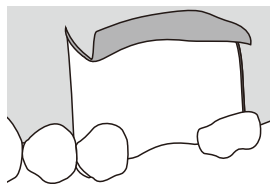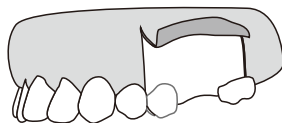

1

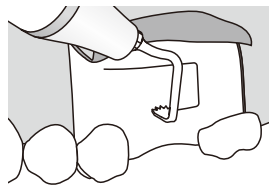


2

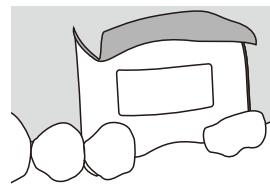

3

РЕЖИМ: BONE




МОЩНОСТЬ Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)

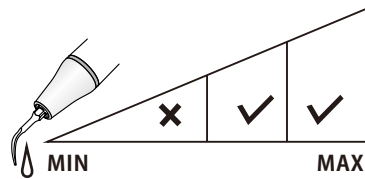


ИРРИГАЦИЯ

US1R


Правый угол 90°, техника горизонтальной остеотомии на нижней и верхней челюсти.

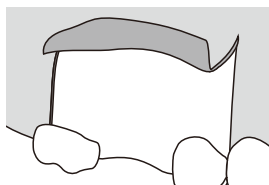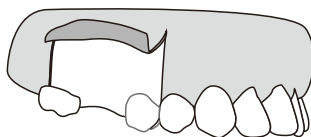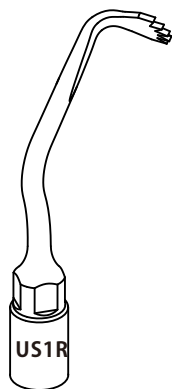

1

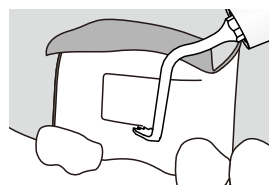


2

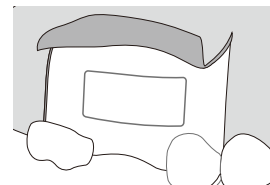

3

РЕЖИМ: BONE



МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)

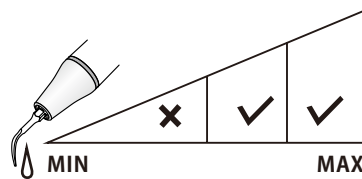


ИРРИГАЦИЯ

US2


Высокоэффективная остеотомия на нижней и верхней челюсти (увеличение гребня, техника кортикотомии, имплантация костного блока).

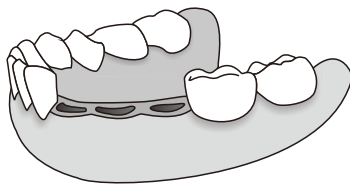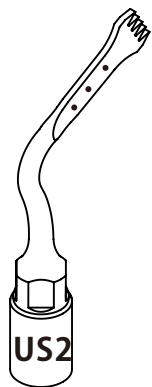

1

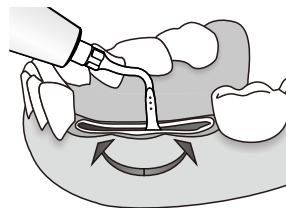


2

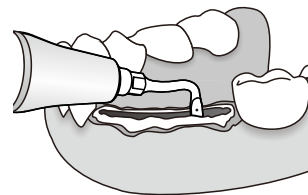

3

РЕЖИМ: BONE




МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)

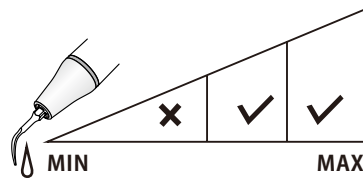


ИРРИГАЦИЯ

US3


Остеотомия: остеотом высокой точности на анатомически тонких структурах.

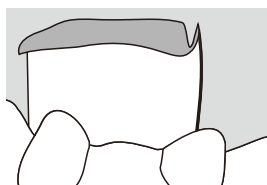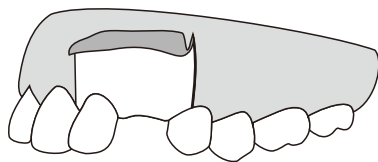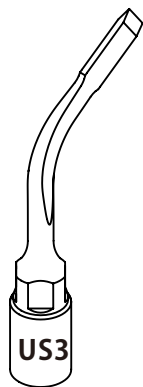

1

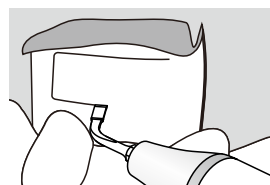


2

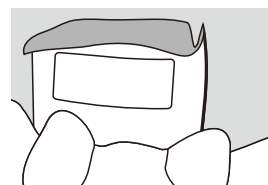

3

РЕЖИМ: BONE




МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)

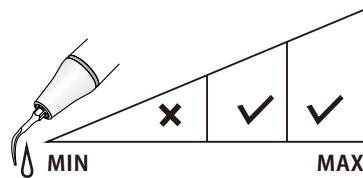


ИРРИГАЦИЯ

US4

Универсальная остеопластика: Периодонтальная остэктомия, сбор обломков кости, удаление воспалительной ткани (кисты и т.д.)

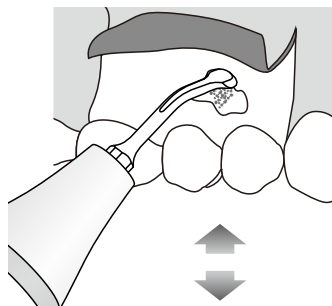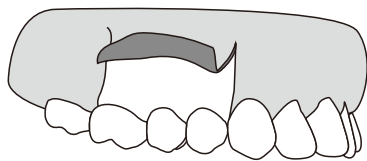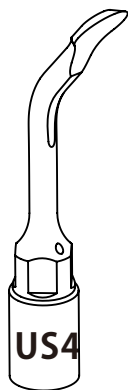


1

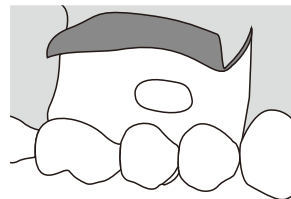

2

РЕЖИМ: BONE



МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)

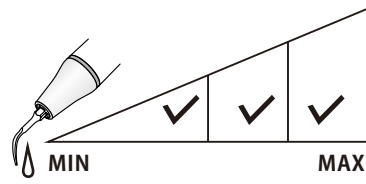


ИРРИГАЦИЯ

US5


Высокоэффективная остеопластика кости: ремоделирование кости и сбор обломков кости.

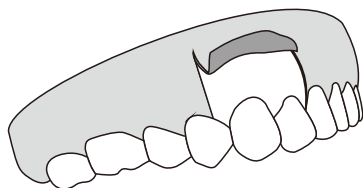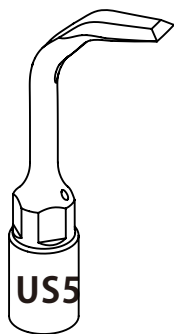

1

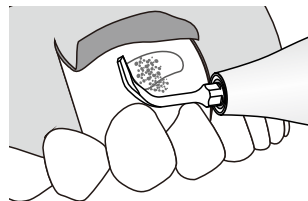


2

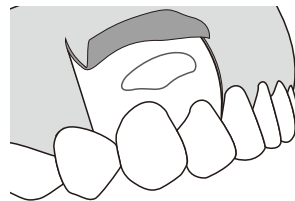

3

РЕЖИМ: BONE



МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)

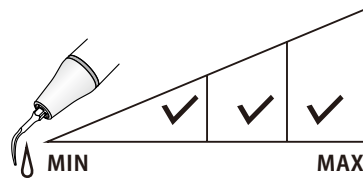


ИРРИГАЦИЯ

US6


Остеотомия: остеотом высокой точности на анатомически тонких структурах (увеличение гребня, техника кортикотомии, имплантация костного блока).

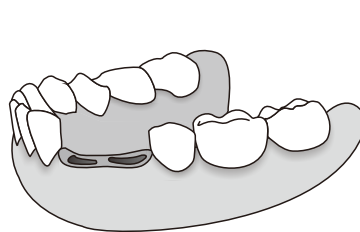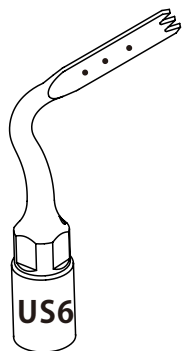

1

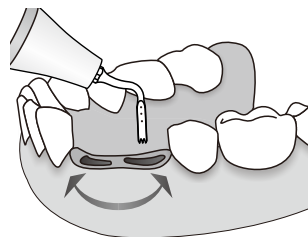


2

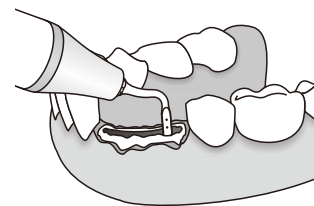

3


РЕЖИМ: BONE

МОЩНОСТЬ: Special

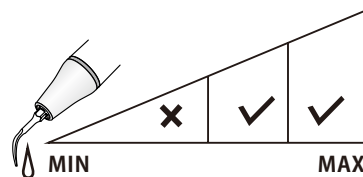


UL1

Наклон наконечника под углом 120° , отслаивание мембраны верхнечелюстной пазухи во внутренних зонах, нережущий стоматологический элеватор мембраны верхнечелюстной пазухи.

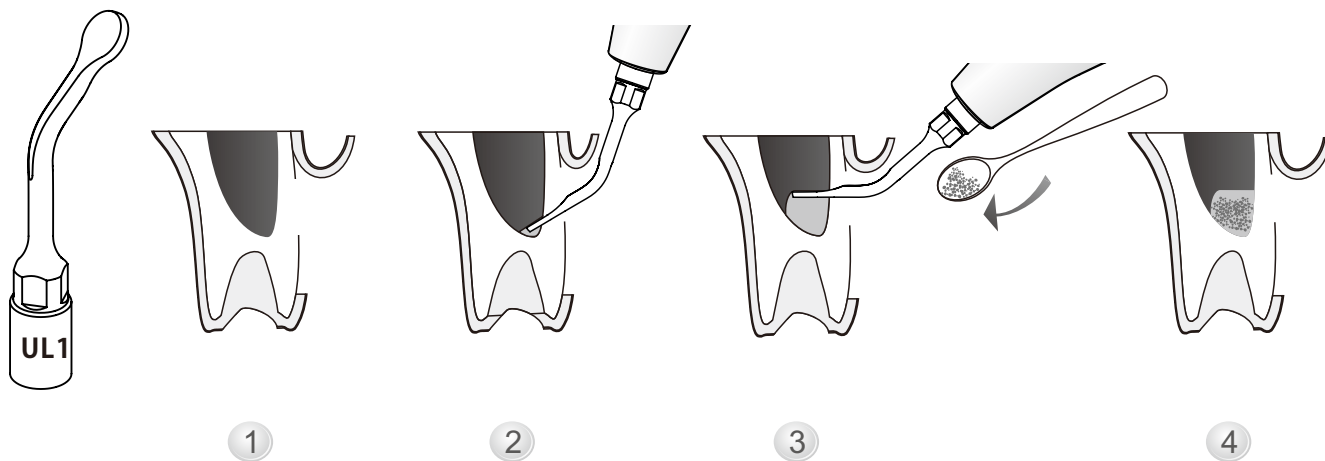

РЕЖИМ: ROOT




МОЩНОСТЬ: Endo(максимальная разрешенная мощность)

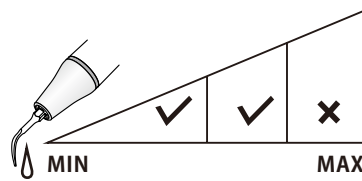

ИРРИГАЦИЯ


UL2

Отслаивание мембраны Шнайдера от стенок кости: отслаивание мембраны верхнечелюстной пазухи.

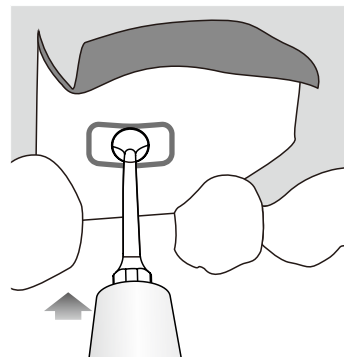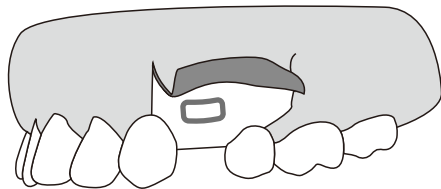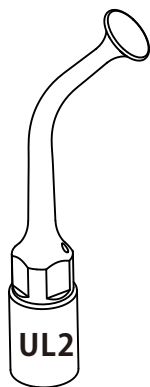

РЕЖИМ: ROOT




МОЩНОСТЬ: Endo(максимальная разрешенная мощность)

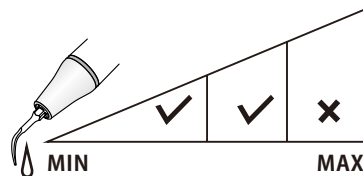


ИРРИГАЦИЯ

UL3

Инструмент с алмазным покрытием (100 мкм) для микрометрической остеотомии или остеопластики: нетравматичная техника, завершение остеотомии или остеопластики на тонкой кости и/или рядом с нежными анатомическими структурами.

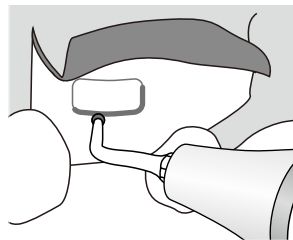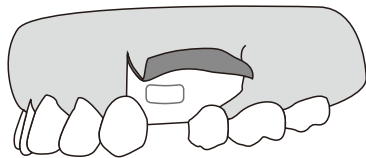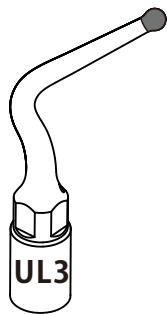


1

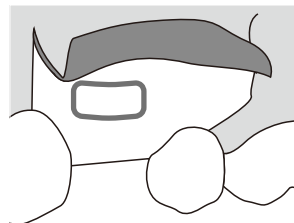

2

РЕЖИМ: BONE




МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)

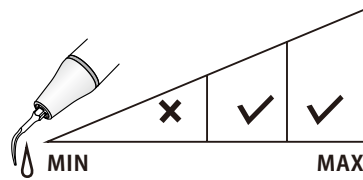


ИРРИГАЦИЯ

UL4

Инструмент с алмазным покрытием (100 мкм) для микрометрической остеотомии: для завершения остеотомии вблизи мягкой ткани (мембрана пазухи, сосуд, нижнеальвеолярный нерв).

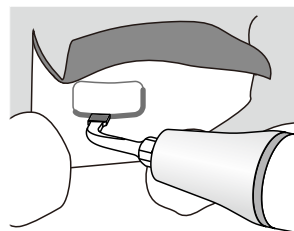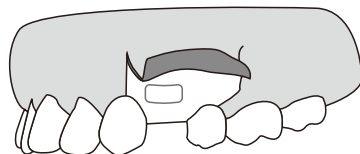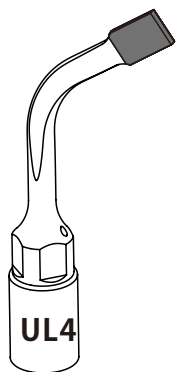


1

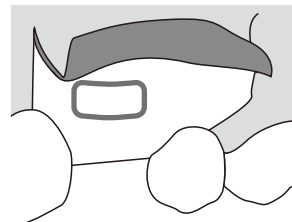

2

РЕЖИМ: BONE


МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)

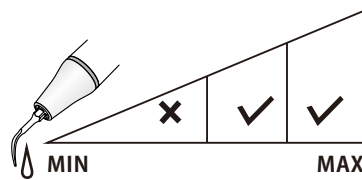

ИРРИГАЦИЯ


UL5

Наклон наконечника под углом 95° , отслаивание мембраны верхнечелюстной пазухи во внутренних зонах, нережущий стоматологический элеватор мембраны верхнечелюстной пазухи.

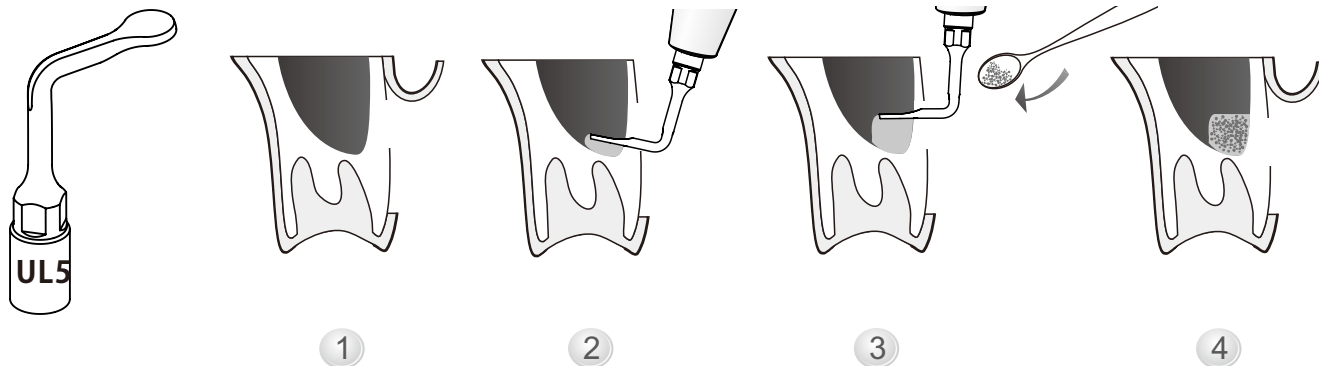

РЕЖИМ: ROOT



МОЩНОСТЬ: Endo(максимальная разрешенная мощность)

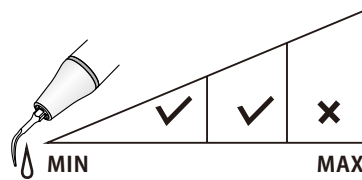


ИРРИГАЦИЯ

UE1


Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для санации вершины корня: инструмент с алмазным покрытием для эффективного выравнивания поверхности корней. Длина части с алмазным покрытием составляет 3,3 мм.

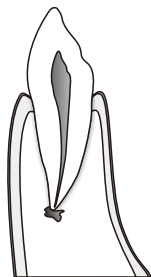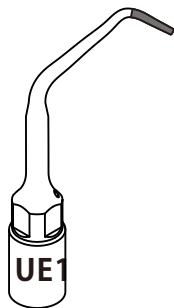

1

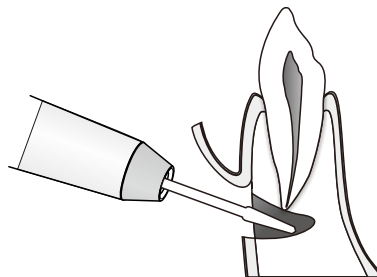


2

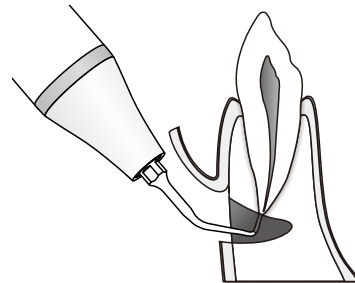

3

РЕЖИМ: ROOT



МОЩНОСТЬ: Endo(максимальная разрешенная мощность)

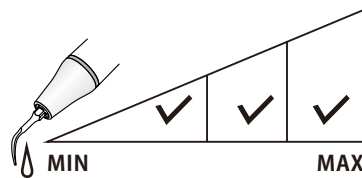


ИРРИГАЦИЯ

UE2


Используется для мягкой очистки канала. Длина части насадки малого диаметра составляет 4,5 мм.

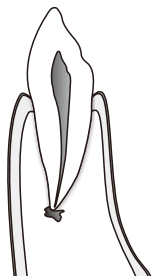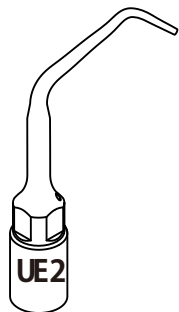

1

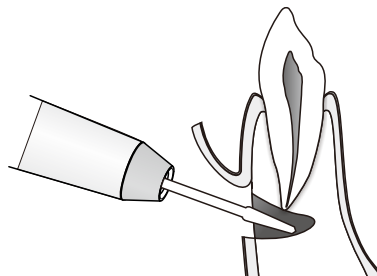


2

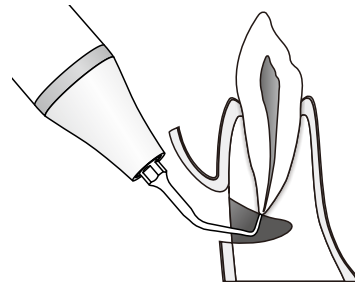

3

РЕЖИМ: ROOT



МОЩНОСТЬ: Endo(максимальная разрешенная мощность)

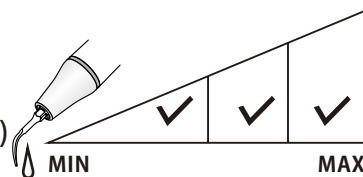


ИРРИГАЦИЯ

UE3


Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для санации вершины корня: инструмент с алмазным покрытием для эффективного выравнивания поверхности корней. Длина части насадки с алмазным покрытием составляет 2,2 мм.

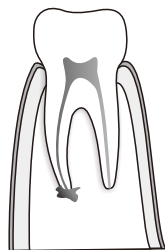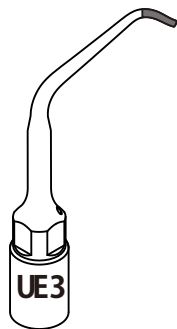

1

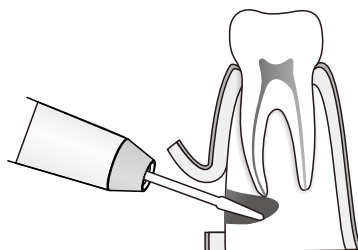


2

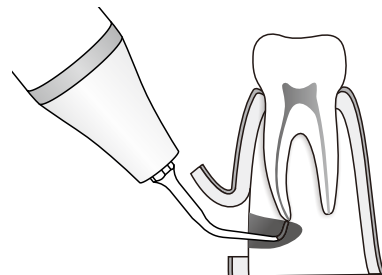

3

РЕЖИМ: ROOT



МОЩНОСТЬ: Endo(максимальная разрешенная мощность)

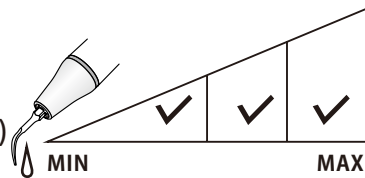


ИРРИГАЦИЯ

UE4


Используется для мягкой очистки канала. Длина части насадки малого диаметра составляет 3,5 мм.

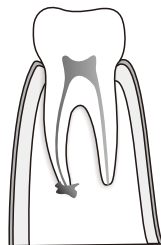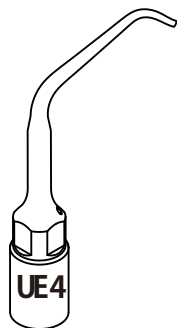

1

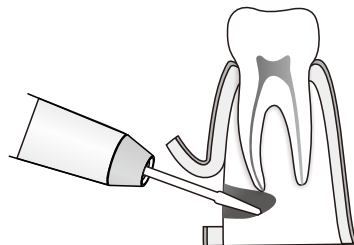


2

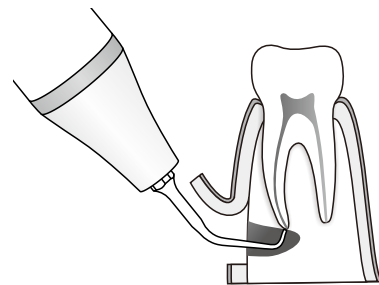

3




РЕЖИМ: ROOT

МОЩНОСТЬ: Endo(максимальная разрешенная мощность)

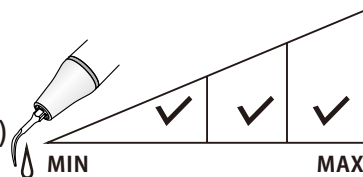


UC1

Используется для обрезания анкилозированной кости и удаления фрагментов корня.

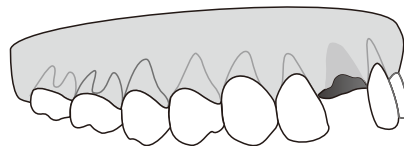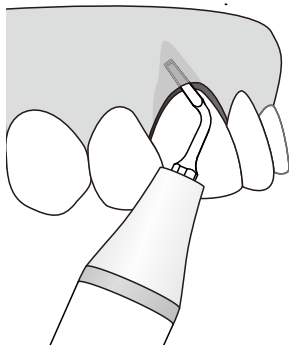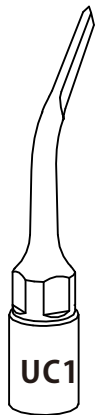

РЕЖИМ: BONE




МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)

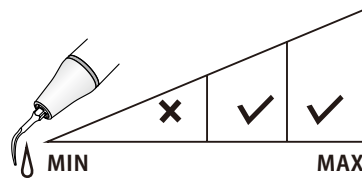


ИРРИГАЦИЯ

UI1


Вставка для подготовки установки имплантата Ø1.6 мм. Рабочая длина составляет 9 мм.

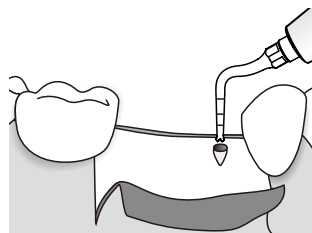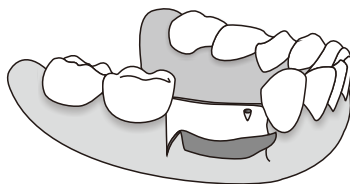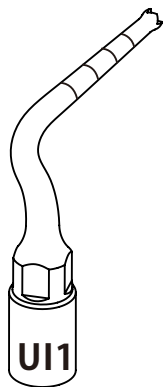

1

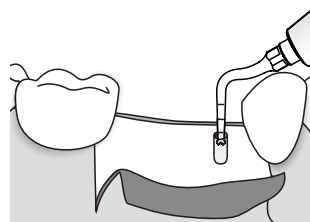


2

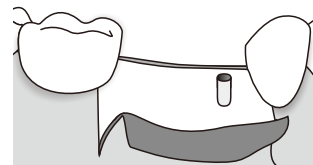

3

РЕЖИМ: BONE




МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)

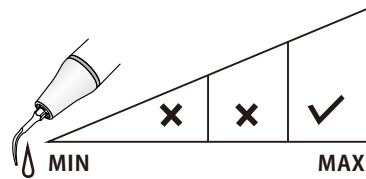


ИРРИГАЦИЯ

UI2


Вставка для подготовки установки имплантата Ø2 мм. Отверстие в центре верхней части инструмента для разбрызгивания воды снижает температуру.

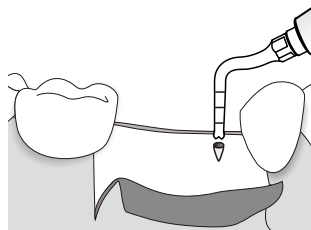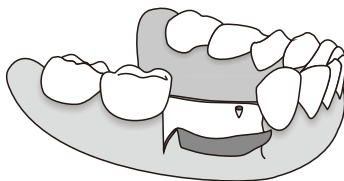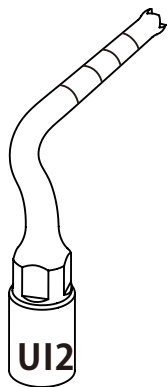

1

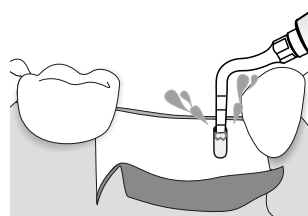


2

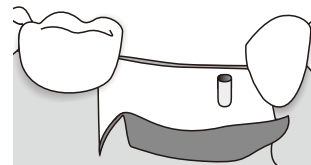

3

РЕЖИМ: BONE






МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)

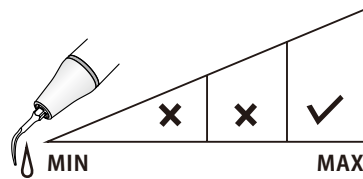

ИРРИГАЦИЯ


UI7

Инструмент с алмазным покрытием (85 мкм) для завершения обработки места для установки имплантата рядом с альвеолярным нервом.

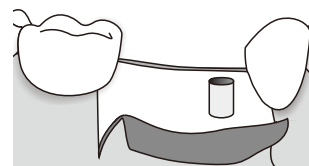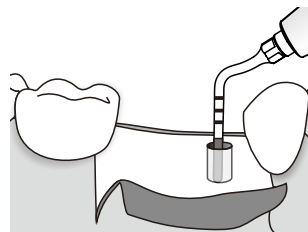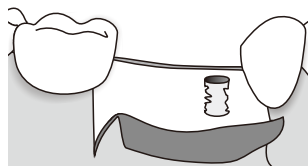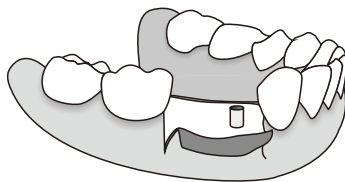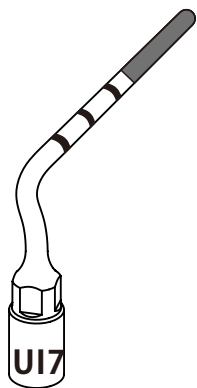

РЕЖИМ: BONE




МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)

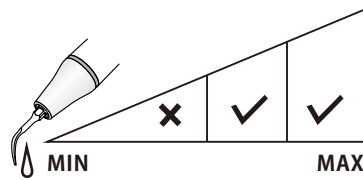


ИРРИГАЦИЯ

UI8


Вставка для подготовки установки имплантата Ø1.6 мм. Рабочая длина составляет 15 мм.

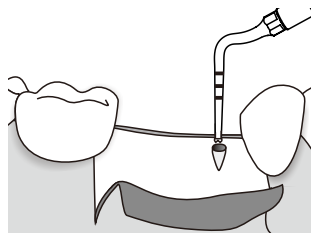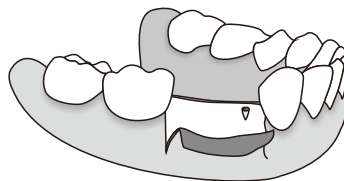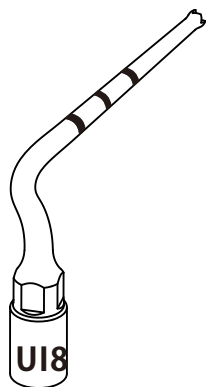

1

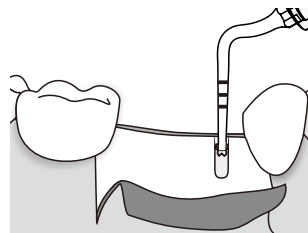


2

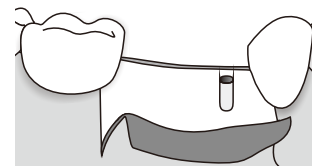

3

РЕЖИМ: BONE




МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)

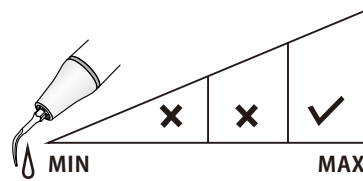


ИРРИГАЦИЯ

UI9


Вставка для подготовки установки имплантата Ø2,8 мм. Отверстие в центре верхней части инструмента для разбрызгивания воды снижает температуру кости.

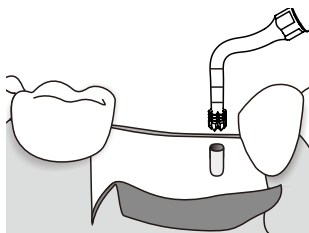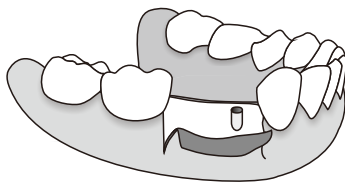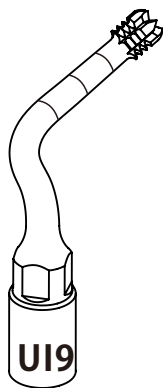

1

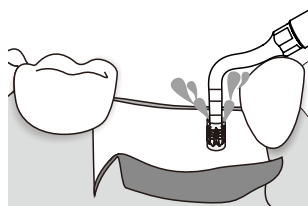


2

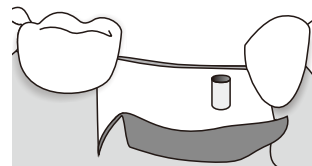

3

РЕЖИМ: BONE



МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)

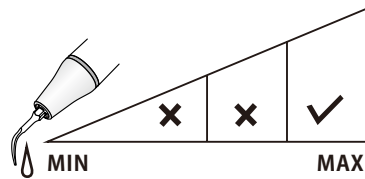


ИРРИГАЦИЯ

UP1


Рекомендуется для периодонтального щадящего удаления налета и камня кюретажем.

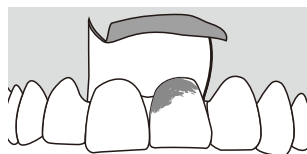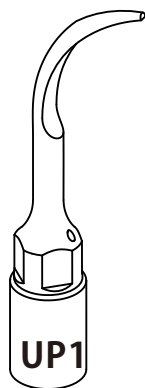

1

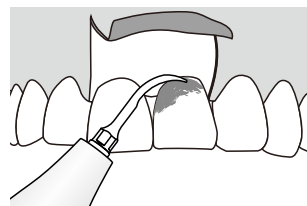


2

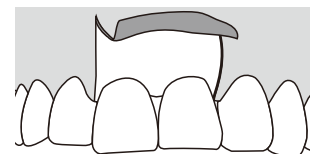

3

РЕЖИМ: ROOT




МОЩНОСТЬ: PERIO

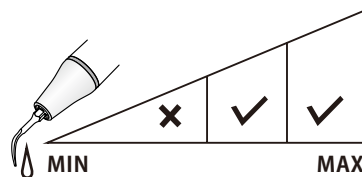


ИРРИГАЦИЯ

UP2


Удаление воспалительной ткани и извлечение апекса обломков зубов.

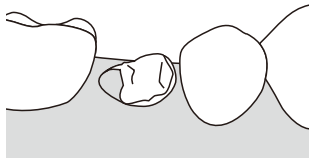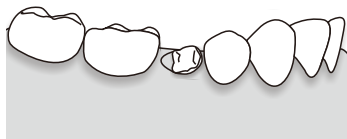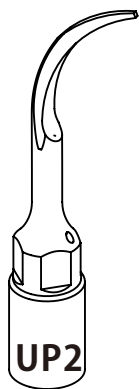

1

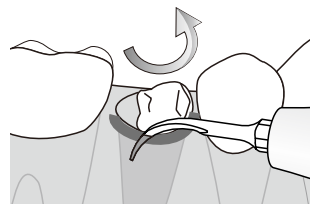


2

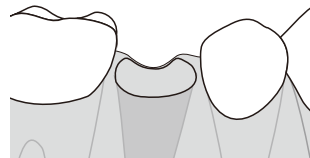

3

РЕЖИМ: ROOT




МОЩНОСТЬ: PERIO

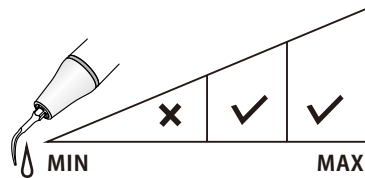


ИРРИГАЦИЯ

UP3

Рекомендуется для щадящего удаления пигментированного зубного налета и камня кюретажем под углом.

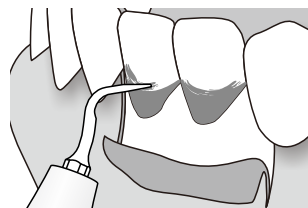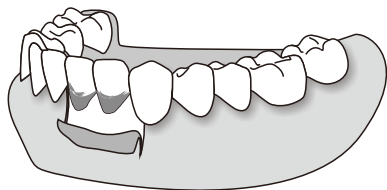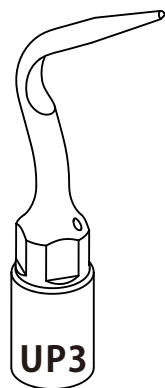


1

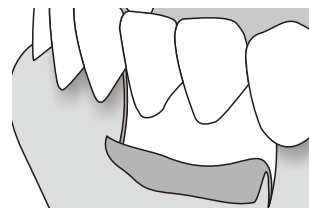

2

РЕЖИМ: ROOT




МОЩНОСТЬ: PERIO

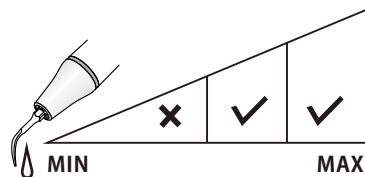


ИРРИГАЦИЯ

UP4

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для санации корня зуба и выравнивания поверхности зубного корня.

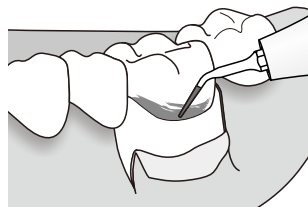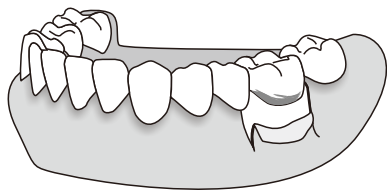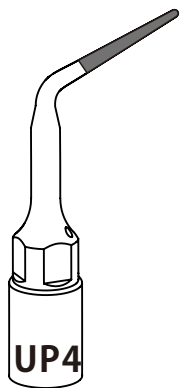


1

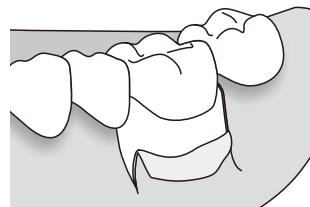

2

РЕЖИМ: ROOT




МОЩНОСТЬ: PERIO

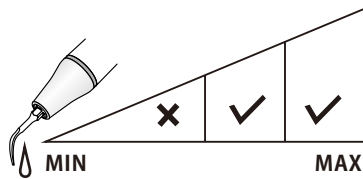


ИРРИГАЦИЯ

UP5

Рекомендуется для микровыравнивания поверхности зубного корня.

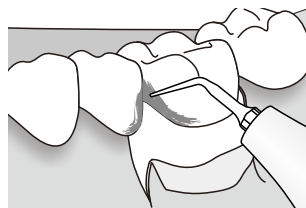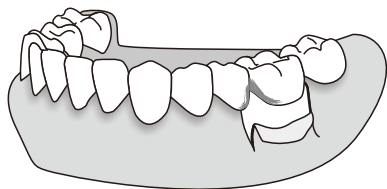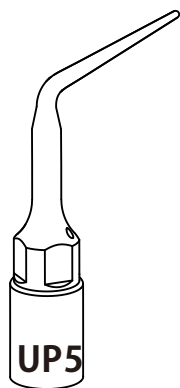


1

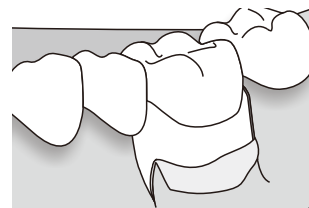

2

РЕЖИМ: ROOT




МОЩНОСТЬ: PERIO

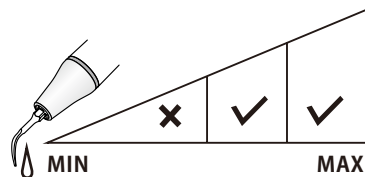


ИРРИГАЦИЯ

UP6

Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для микро-остеопластики: остеопластика межзубных промежутков и выравнивания поверхностей зубных корней.

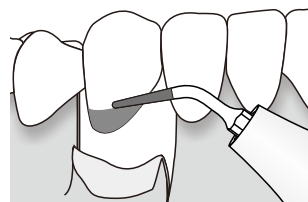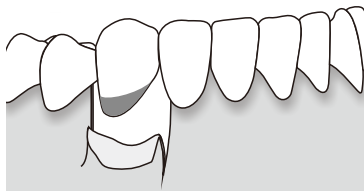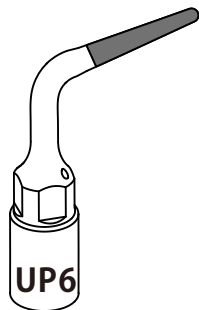


1

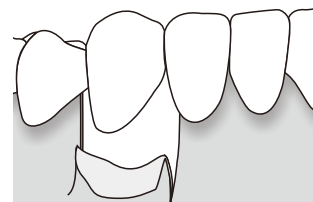

2

РЕЖИМ: ROOT



МОЩНОСТЬ: Quality1, Quality2, Quality3
(Кортикальный/губчатый)

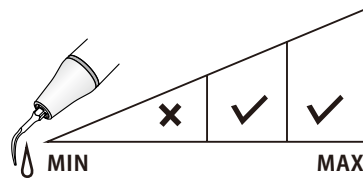


ИРРИГАЦИЯ

UP7


Инструмент с алмазным покрытием (40 мкм) для ориентации зубного канала и удаления кальцифицированных фрагментов, расположенных в 1/3 части зубного канала. Он также может использоваться для микро остеопластики.

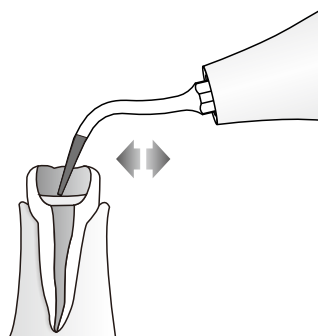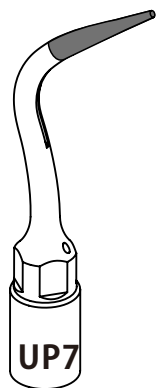

1

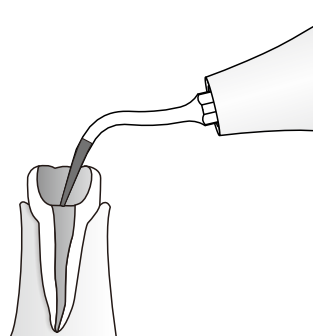


2

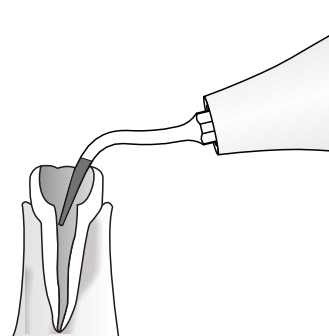

3

РЕЖИМ: ROOT

МОЩНОСТЬ: Endo(максимальная разрешенная мощность)

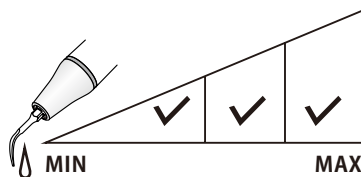

ИРРИГАЦИЯ

Рекомендуемая мощность скалеров Woodpecker

WOODPECKER		UDS-E (LED) UDS-L (LED) UDS-A (LED) UDS-P (LED)	UDS-J2 (LED)	UDS-J UDS-B UDS-K (LED)	UDS-N3 (LED)	UDS-N1 UDS-N2 (LED) UDS-N4	
Модель	Мощность						
Удаление зубного камня							
G1	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	Совместимость с WOODPECKER & EMS Ultrasonic Scalers	
G2	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
G3	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
G4	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
G5	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
G6	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
G7	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
G8	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
G9	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
G10	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
G11	1-10 (G)	1-10	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
Периодонтитя							
P1	1-10 (P)	1-7	1-6	LOW-MID	LOW-MID	Совместимость с WOODPECKER & EMS Ultrasonic Scalers	
P2L	1-3 (P)	1-2	1-2	LOW	LOW		
P2LD	1-2 (P)	1	1	LOW	LOW		
P2R	1-3 (P)	1-2	1-2	LOW	LOW		
P2RD	1-2 (P)	1	1	LOW	LOW		
P3	1-6 (P)	1-4	1-3	LOW-MID	LOW-MID		
P3D	1-6 (P)	1-4	1-3	LOW-MID	LOW-MID		
P4	1-6 (P)	1-4	1-3	LOW-MID	LOW-MID		

Рекомендуемая мощность скалеров Woodpecker

WOODPECKER		UDS-E (LED) UDS-L (LED) UDS-A (LED) UDS-P (LED)	UDS-J2 (LED)	UDS-J UDS-B UDS-K (LED)	UDS-N3 (LED)	UDS-N1 UDS-N2 (LED) UDS-N4	
Насадка	Мощность						
Эндодонтия							
E1	1-3 (E)	—	—	LOW	—	Совместимость с WOODPECKER & EMS Ultrasonic Scalers	
E2	1-3 (E)	—	—	LOW	—		
E3	1-6 (E)	—	—	LOW	—		
E3D	1-3 (E)	—	—	LOW	—		
E4	1-6 (E)	—	—	LOW	—		
E4D	1-3 (E)	—	—	LOW	—		
E5	1-6 (E)	—	—	LOW	—		
E5D	1-3 (E)	—	—	LOW	—		
P4D	1-6 (E)	—	—	LOW	—		
E8	1-10 (E)	—	—	LOW	—		
E9	1-10 (E)	—	—	LOW	—		
E10	1-6 (E)	—	—	LOW	—		
E10D	1-6 (E)	—	—	LOW	—		
E11	1-6 (E)	—	—	LOW	—		
E11D	1-6 (E)	—	—	LOW	—		
E14	1-3 (E)	—	—	LOW	—		
E15	1-3 (E)	—	—	LOW	—		

Рекомендуемая мощность скалеров Woodpecker

WOODPECKER Модель Мощность Насадка	UDS-E (LED) UDS-L (LED) UDS-A (LED) UDS-P (LED)	UDS-J2 (LED)	UDS-J UDS-B UDS-K (LED)	UDS-N3 (LED)	UDS-N1 UDS-N2 (LED) UDS-N4	
	Препарирование кариозной полости					
SB1	1-10 (P)	1-7	1-6	LOW-MID	LOW-MID	Совместимость с WOODPECKER & EMS Ultrasonic Scalers
SB2	1-10 (P)	1-7	1-6	LOW-MID	LOW-MID	
SB3	1-10 (P)	1-7	1-6	LOW-MID	LOW-MID	
SBL	1-10 (P)	1-7	1-6	LOW-MID	LOW-MID	
SBR	1-10 (P)	1-7	1-6	LOW-MID	LOW-MID	

Рекомендуемая мощность скалеров DTE

DTE Модель Мощность Насадка	D7 (LED) D5 (LED)	D2 LED	D3 (LED)	D1	V3 (LED)	V1 V2 (LED)	
	Препарирование кариозной полости						
SBD1	1-10 (P)	1-8	1-10 (P)	1-6	LOW-MID	LOW-MID	Совместимость с DTE & Satelec Ultrasonic Scalers
SBD2	1-10 (P)	1-8	1-10 (P)	1-6	LOW-MID	LOW-MID	
SBD3	1-10 (P)	1-8	1-10 (P)	1-6	LOW-MID	LOW-MID	
SBDL	1-10 (P)	1-8	1-10 (P)	1-6	LOW-MID	LOW-MID	
SBDR	1-10 (P)	1-8	1-10 (P)	1-6	LOW-MID	LOW-MID	

[Примечание] : "G" - режим "Удаление зубного камня"; "P" - режим "Периодонтит"; "E" - режим "Эндодонтит"; "—" - "не подходит для данной модели скалера".

Рекомендуемая мощность скалеров DTE

DTE Модель Насадка / Мощность		D7 (LED) D5 (LED)	D2 LED	D3 (LED)	D1	V3 (LED)	V1 V2 (LED)	
Удаление зубного камня								
GD1	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH	Совместимость с DTE & Satelec Ultrasonic Scalers	
GD2	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
GD3	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
GD4	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
GD5	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
GD6	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
GD7	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
GD8	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
GD9	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
GD10	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
GD11	1-10 (G)	1-11	1-10 (G)	1-9	LOW-HIGH	LOW-HIGH		
Периодонтия								
PD1	1-10 (P)	1-8	1-10 (P)	1-6	LOW-MID	LOW-MID	Совместимость с DTE & Satelec Ultrasonic Scalers	
PD2L	1-3 (P)	1-3	1-3 (P)	1-2	LOW	LOW		
PD2LD	1-2 (P)	1-2	1-2 (P)	1	LOW	LOW		
PD2R	1-3 (P)	1-3	1-3 (P)	1-2	LOW	LOW		
PD2RD	1-2 (P)	1-2	1-2 (P)	1	LOW	LOW		
PD3	1-6 (P)	1-5	1-6 (P)	1-3	LOW-MID	LOW-MID		
PD3D	1-6 (P)	1-5	1-6 (P)	1-3	LOW-MID	LOW-MID		
PD4	1-6 (P)	1-5	1-6 (P)	1-3	LOW-MID	LOW-MID		

Рекомендуемая мощность скалеров DTE

DTE Модель Насадка Мощность	D7 (LED) D5 (LED)	D2 LED	D3 (LED)	D1	V3 (LED)	V1 V2 (LED)	
Эндодонтия							
ED1	1-3 (E)	—	—	—	LOW	—	Совместимость с DTE & Satelec Ultrasonic Scalers
ED2	1-3 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED3	1-6 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED3D	1-3 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED4	1-6 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED4D	1-3 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED5	1-6 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED5D	1-3 (E)	—	—	—	LOW	—	
PD4D	1-6 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED8	1-10 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED9	1-10 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED10	1-6 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED10D	1-6 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED11	1-6 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED11D	1-6 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED14	1-3 (E)	—	—	—	LOW	—	
ED15	1-3 (E)	—	—	—	LOW	—	

ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСАДКИ

	Насадка	Совместимость с
Удаление зубного камня	GS1/GS2/GS3/GS4/GS5/GS6/GS7/GS8	Sirona Scalers
Периодонтит	PS1/PS3/PS3D/PS4	
Эндодонтия	ES1/ES2/ES3/ES3D/ES4/ES4D/ES5/ES5D/PS4D/ES8/ES10/ES10D/ES11/ES11D/ES14/ES15	
Удаление зубного камня	GK1/GK2/GK3/GK4/GK5/GK6/GK7/GK11	Kavo Scalers
Эндодонтия	EK8	
Удаление зубного камня	GC1/GC2	
Периодонтит	PC1	Amdent Scalers
Удаление зубного камня	A1/A2	
Костная хирургия	US1/US1L/US1R/US2/US3/US4/US5/US6	WOODPECKER & Mectron Ultrasurgery
Синус-лифтинг	UL1/UL2/UL3/UL4/UL5	
Эндодонтия	UE1/UE2/UE3/UE4	
Эксельцимоз	UC1	
Имплантация	UI1/UI2/UI7/UI8/UI9	
Периодонтальная хирургия	UP1/UP2/UP3/UP4/UP5/UP6/UP7	



 Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China

 29 Harley St., LONDON, W1G 9QR, UK

ZMN/WI-09-036 1. 1 RU

