

**DENT
GEOSOFT**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АППАРАТ ДЛЯ
ЭЛЕКТРООДОНТОДИАГНОСТИКИ
ПУЛЬПЫ ЗУБА

«ПУЛЬПЭСТ»

PulpEst



КОПИЯ ВЕРНА

Поздравляем Вас с удачным приобретением!

! При покупке аппарата обязательно проверяйте комплектность поставки, наличие и правильность заполнения гарантийного талона, свидетельства о приемке и отметок о продаже изделия.

! Прежде чем использовать изделие, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сохраните руководство для будущего использования.

! При возникновении вопросов в процессе эксплуатации изделия обращайтесь за консультацией к производителю.

Тел. горячей линии: +7(495)663-22-11 (добавочный 170),

E-mail: hotline @ geosoft.ru



Регистрационное удостоверение: № РЗН 2015/3393 от 07.12.2015 г.
Декларация о соответствии: ROCC RU.Д-RU.АД37.В.04326/18 от
14.12.2018 г.

Поздравляем Вас с удачным приобретением!

! При покупке аппарата обязательно проверяйте комплектность поставки, наличие и правильность заполнения гарантийного талона, свидетельства о приемке и отметок о продаже изделия.

! Прежде чем использовать изделие, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сохраните руководство для будущего использования.

! При возникновении вопросов в процессе эксплуатации изделия обращайтесь за консультацией к производителю.

Тел. горячей линии: +7(495)663-22-11 (добавочный 170),

E-mail: hotline @ geosoft.ru



Регистрационное удостоверение: № РЗН 2015/3393 от 07.12.2015 г.
Декларация о соответствии: ROCC RU.Д-RU.АД37.В.04326/18 от
14.12.2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	4
2. Комплект поставки.....	7
3. Дополнительные аксессуары.....	7
4. Внешний вид изделия.....	9
5. Технические характеристики... ..	11
6. Подготовка и порядок работы.....	12
7. Стерилизация и дезинфекция изделия	20
8. Техническое обслуживание.....	23
9. Возможные неполадки в работе изделия и способы их устранения.....	24
10. Условия хранения, транспортировки и эксплуатации	26
11. Сведения об утилизации.....	26
12. Гарантийные обязательства.....	27
Приложение	
Электромагнитное излучение и помехоустойчивость.....	29

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Краткое описание изделия:

«ПульпЭст» - компактный аппарат, предназначенный для определения клинического состояния пульпы зуба - электроодонтодиагностики (ЭОД).

Принцип действия аппарата — оценка порога чувствительности пациента к раздражению электрическим током.

При патологических процессах в зубах и околозубных тканях снижается возбудимость нервных рецепторов пульпы и, как следствие, изменяется чувствительность пациента к величине раздражающего электрического тока.

1.2. Область применения:

Аппарат предназначен для использования в стоматологии (эндодонтии) и может эксплуатироваться только в медицинских учреждениях врачами-специалистами, имеющими лицензию на стоматологическую практику.

Производитель не несет ответственность за использование аппарата не по назначению.

1.3. Противопоказания

Не допускается использовать изделие на пациентах с кардиостимуляторами.

1.4. Меры безопасности и предупреждения

! Используйте изделие только с оригинальными принадлежностями фирмы "Геософт Дент" (см. раздел 3. «Дополнительные аксессуары»).

! Не разбирайте и не вносите изменений в конструкцию изделия. **Нарушение целостности аппарата отменяет действие гарантии.** Замена источника питания изделия должна осуществляться исключительно специалистами авторизованных сервисных служб.

! Избегайте попадания любой жидкости во внутрь корпуса изделия.

! Не используйте изделие вблизи легко воспламеняемых веществ. Изделие не пригодно для использования в присутствии воспламеняемых анестетических смесей с воздухом, кислородом или оксидом азота.

! Используйте только стерильные и продезинфицированные компоненты изделия. Стерилизацию и дезинфекцию изделия необходимо проводить непосредственно перед первым использованием изделия, а также после каждого пациента во избежание перекрестного заражения (подробнее см. раздел 7 «Стерилизация и дезинфекция изделия»).

! Данный аппарат требуют применения специальных мер для обеспечения электромагнитной совместимости и должен быть установлен и введен в эксплуатацию в соответствии с информацией, относящейся к ЭМС, приведенной в Приложении настоящего руководства. В частности, не следует использовать аппарат вблизи ламп дневного света, радиопередающих устройств и пультов дистанционного управления.

! Возможно нарушение работы аппарата при его использовании в зоне сильных электромагнитных помех (ЭМП). Не используйте изделие рядом с оборудованием, излучающим электромагнитные волны. Помехи могут иметь место вблизи оборудования, маркированного символом



! Не используйте изделие совместно с другим оборудованием или в составе другого оборудования.

! Не используйте принадлежности, преобразователи и кабели, отличные от указанных ниже. Это может привести к увеличению помехозащиты или снижению помехоустойчивости изделия. Производитель гарантирует электромагнитную совместимость следующих элементов: кабель с максимальной длиной 105 см; сетевое зарядное устройство (модель DN500) с максимальной длиной кабеля 1,8м

! Изделие нормально работает при температуре 10-35°C, относительной влажности воздуха не более 80%, атмосферном давлении (101±3) кПа. Любое нарушение указанных ограничений может привести к сбоям в работе изделия.

1.5. Побочные эффекты: Не выявлены

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Блок управления..... 1 шт
- Щуп «ЭОД» стандартный (Ø 1,2 мм)..... 1 шт
- Загубник «Oral Hook»..... 1 шт
- Кабель 1 шт
- Подставка зарядного устройства..... 1 шт
- Сетевое зарядное устройство..... 1 шт
- Руководство по эксплуатации..... 1 шт
- Упаковка..... 1 шт

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1. Щуп «ЭОД» стандартный (Ø 1,2 мм)

ГЕ99.147.000


Используется в качестве активного электрода при проведении процедуры эод.



2. Щуп «ЭОД» острый (Ø 0,3 мм)

ГЕ99.148.000

Используется в качестве активного электрода при проведении процедуры эод.

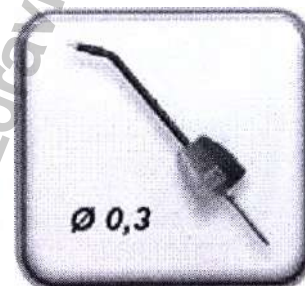

3. Щуп «ЭОД» тупой (Ø 2,5 мм)

ГЕ99.149.000

Используется в качестве активного электрода при проведении процедуры эод.



4. Набор щупов «ЭОД»


ГЕ99.150.000

Состав набора:

Щуп «ЭОД» стандартный - 1 шт

Щуп «ЭОД» острый - 1 шт

Щуп «ЭОД» тупой - 1 шт

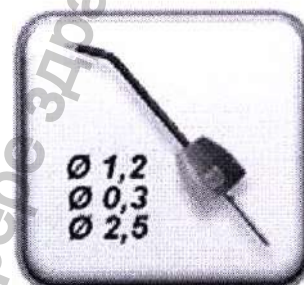

5. Кабель «Signal Line» (single)

ГЕ99.162.000

Кабель для проведения процедуры эод.

Длина - 100 ± 3 см.

Разъем – micro pin (2 мм)



6. Загубник «Oral Hook» (3шт/1 шт)

ГЕ99.062.000 / ГЕ99.123.000

Используется в качестве пассивного электрода при проведении процедуры эод.

Закрепляется на губе пациента.



7. Сетевое зарядное устройство

ГЕ99.049.000

Входное напряжение: $(220 \pm 10\%)$ В~50/60Гц.

Выходное напряжение: 4,5В; 500мА.

Разъем- штекер 3,5мм



! Аксессуары поставляются отдельно за дополнительную плату

4. ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид аппарата «ПульпЭст» представлен на рис. 1.

Рис.1. Аппарат «ПульпЭст»



где: **А. Блок управления:**

1. Гнездо активного электрода (щупа);
2. Информационный ЖК-дисплей (см. рис.2);
3. Кнопка «POWER/SET»: вкл./откл. питания, регулировка уровня громкости звукового сигнала, сброс результата измерений
4. Кнопка «START/STOP»: набор/прекращение набора «диагностического» тока;
5. Кнопка «+»: увеличение скорости нарастания тока;
6. Кнопка «-»: уменьшение скорости нарастания тока;
7. Контакты для зарядки аккумулятора;
8. Разъем microJack (гнездо) для подсоединения кабеля
9. Кнопка «Reset»;

Б. Подставка зарядного устройства:

10. Гнездо зарядки;
11. Индикатор заряда аккумулятора;
12. Гнездо сетевого зарядного устройства;


В. Щуп «ЭОД» - активный электрод

Г. Загубник - пассивный электрод

Д. Кабель для подсоединения загубника

Е. Сетевое зарядное устройство

Рис. 2. Описание символов дисплея

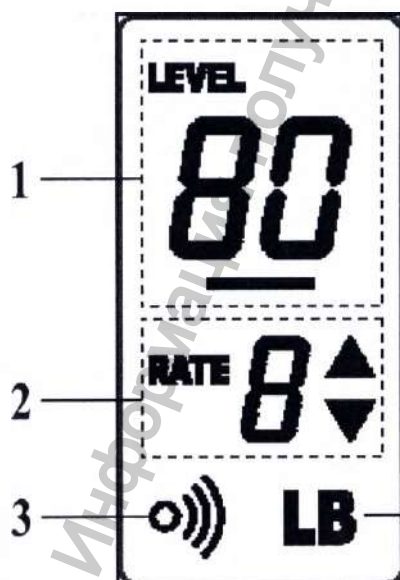

- 1 - значение «диагностического» тока (от 0 до 80 мкА);
- 2 - заданная скорость нарастания «диагностического» тока (9 уровней и авторежим («А»));
- 3 - индикатор включения звукового сигнала «Звук»;
- 4 - индикатор разряда аккумулятора «LB».

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические и эксплуатационные характеристики изделия соответствуют требованиям Российских стандартов ГОСТ Р50444, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, а также ТУ 9442-003-56755207-2013.

5.1. Блок управления

- Источник питания - Li-Po аккумулятор (3,7В; 700мА/ч);
- Электробезопасность - тип ВF;
- Монохромный ЖК-дисплей - 16*32 мм;
- Диапазон «диагностич.» токов - от 0 до 80мкА (шаг 1 мкА);
- Мин. скорость нарастания тока (уровень 1) - $1,0 \pm 0,2$ мкА/сек;
- Макс. скорость нарастания тока (уровень 9) - $3,8 \pm 0,2$ мкА/сек;
- Макс. напряжение на рабочей части - $160В \pm 10\%$ (в кратковременном импульсе);
- Эффективное макс. напряжение на рабочей части - $6,5В \pm 10\%$;
- Время работы аппарата в режиме «ожидания» до автоматического отключения питания – $30 \pm 0,5$ мин;
- Время работы аппарата с новым полностью заряженным аккумулятором без его подзарядки – не < 20 ч;
- Продолжительность полной зарядки аккумулятора – $1,5 \pm 0,5$ ч;;
- Рабочий ресурс аккумулятора - не < 300 циклов перезарядки;
- Габаритные размеры - $(165*32*23) \pm 3$ мм, Вес – 68 ± 5 г;

5.2. Подставка зарядного устройства

- Электробезопасность - класс II, тип В;
- Габаритные размеры - $(98*98*60) \pm 3$ мм; Вес - 175 ± 5 г;

5.3. Сетевое зарядное устройство

- Входное напряжение - $(220 \pm 10\%)$ В, $\sim 50/60$ Гц;
- Выходное напряжение - 4,5 В; 500мА.

Срок службы изделия - 5 лет.

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

После транспортировки изделия при температуре ниже $+5^{\circ}\text{C}$, перед включением дайте ему прогреться при комнатной температуре в течение одного часа.

6.1. Зарядка аккумулятора

Источником питания аппарата «ПульпЭст» служит заряжаемый литий-полимерный аккумулятор (Li-Po). Перед первой эксплуатацией изделия необходимо полностью зарядить аккумулятор.

Зарядка аккумулятора проводится следующим образом:

- Подключите сетевое зарядное устройство (Е) к подставке (В), вставив штекер зарядного устройства в гнездо (12-рис.1), расположенное на корпусе подставки;
- Подключите сетевое зарядное устройство в стандартную розетку сетевого питания 220 В. При этом на подставке должен загореться желто-зеленый индикатор.

Внимание! Не допускается использовать сетевое зарядное устройство других типов. Используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки изделия.

- Вставьте блок управления аппарата (А) в гнездо зарядки (10-рис.1) на подставке зарядного устройства (В).

Красный цвет индикатора (11-рис.1) на подставке указывает на то, что зарядка началась. При полной зарядке аккумулятора, индикатор снова меняет цвет на желто-зеленый.

Примечание: Стандартное время зарядки аккумулятора составляет около 1,5 часов, однако оно зависит от текущего уровня заряда аккумулятора, степени его износа, температуры. Время работы и зарядки старого аккумулятора всегда короче, чем у нового. При значительном сокращении продолжительности работы и времени заряда аккумулятора следует обратиться в службу сервиса для замены старого аккумулятора на новый.

6.2 Индикация разряда аккумулятора

При разряде аккумулятора ниже минимально допустимого уровня ($<20\%$), на дисплее аппарата индицируется предупредительный индикатор «LB» (4- рис.2).

При появлении данного индикатора необходимо произвести зарядку аккумулятора в соответствии с п.6.1.

В противном случае, когда заряд аккумулятора упадет до критического уровня ($<10\%$), произойдет самопроизвольное выключение аппарата.

При попытке повторного включения аппарата на дисплее будет отображаться индикатор «LB»

Внимание! Своевременно производите зарядку источника питания аппарата при его разряде. Не допускайте полного разряда аккумулятора.

6.3. Функция энергосбережения


Для увеличения времени между зарядками аккумулятора и максимального продления срока его службы, в аппарате предусмотрена функция энергосбережения - автоматическое

отключение питания по истечении 30-ти минут после последней активации органов управления аппарата.

6.4. Присоединение/отсоединение активного электрода

Присоединение активного электрода (рис.3):

- Выберите удобный для работы угол крепления щупа «ЭОД» (В) (одно из шести фиксированных положений), и вставьте щуп в соответствующее гнездо на блоке управления аппарата (А) до упора, соединив между собой грани шестиугольников на фиксирующем колпачке щупа и на блоке управления.

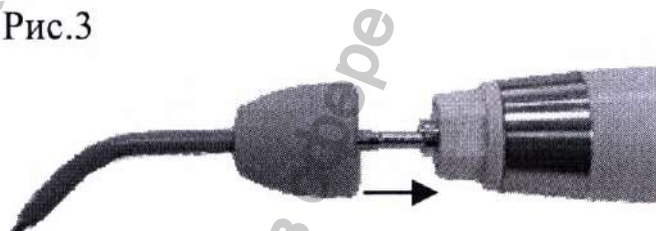


Отсоединение активного электрода:

- Чтобы отсоединить щуп «ЭОД», достаточно с небольшим усилием потянуть его на себя, удерживая щуп за колпачок.


Внимание! Обязательно стерилизуйте щуп «ЭОД» перед его применением после каждого пациента (см. раздел 7 «Стерилизация и дезинфекция изделия»)

6.5. Присоединение/отсоединение кабеля и пассивного электрода (рис.4)

- Подсоедините разъем кабеля (Д) к его ответной части, расположенной на торце блока управления аппарата (к разъему 8 -рис.1)

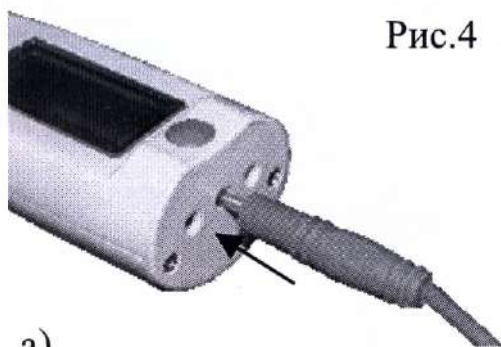

а)

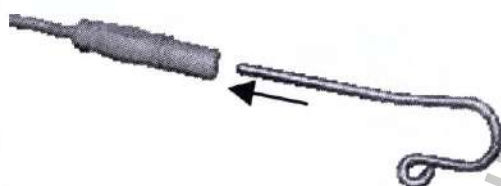

б)

Рис.4 - Вставьте загубник (Г) в гнездо кабеля до упора.

Внимание! Обязательно стерилизуйте загубник перед его применением после каждого пациента (см. раздел 7 «Стерилизация и дезинфекция изделия»)

Примечание: Для отсоединения кабеля от блока управления, возьмитесь за изоляционную часть разъема кабеля и с небольшим усилием потяните разъем на себя.

Внимание! Во избежание обрыва кабеля, ни в коем случае не отсоединяйте кабель, держась за его провод. Избегайте перекручивания провода.

6.6. Включение питания (рис.5)

Включение питания аппарата осуществляется с помощью кратковременного нажатия на кнопку «POWER/SET»



Рис.5

6.7. Регулировка скорости нарастания «диагностического» тока (рис.6)

В данном аппарате предусмотрены девять уровней скорости нарастания «диагностического» тока и один авторежим («А»), в

котором скорость нарастания тока автоматически увеличивается с третьего до девятого уровня по мере увеличения его значения.

С целью сокращения времени диагностирования и получения наиболее достоверного результата, установите скорость нарастания тока на дисплее, ориентируясь на данные, представленные в таблице 1

Таблица 1

Предположительный диагноз	Рекомендуемый уровень скорости нарастания «диагностического» тока
Интактный зуб или Кариес	1-3 или А
Пульпит	4-6 или А
Некроз пульпы или Периодонтит	7-9 или А

- Для увеличения/уменьшения скорости нарастания тока используйте кнопки «+» или «-» соответственно.

Кратковременно нажимайте на одну из указанных кнопок для перехода к следующему/предыдущему уровню скорости или удерживайте кнопку нажатой для быстрого поиска нужного значения на дисплее (индикация «RATE»).



Рис.6


6.8. Регулировка уровня громкости звуковых сигналов

В данном аппарате предусмотрены 4 уровня громкости звукового сигнала: громкий, средний, тихий сигналы и звук отключен.

По умолчанию в заводских настройках аппарата установлен «средний» уровень громкости звукового сигнала.

Для изменения текущей настройки:

- Отключите питание аппарата, после чего нажмите и удерживайте кнопку «POWER/SET» (рис.5) до тех пор, пока не услышите нужный звуковой сигнал. Изменение звуковой индикации будет происходить по циклической схеме.

При отключении звукового сигнала, индикатор  на дисплее должен погаснуть, при повторной активации - снова загореться.

Сохранение настроек: При отключении питания все пользовательские настройки аппарата сохраняются автоматически.

6.9. Процедура диагностики (рис.7)

- Разместите пассивный электрод - загубник (Г) на губе пациента, а кончиком активного электрода - щупа «ЭОД» (В) коснитесь чувствительной точки исследуемого зуба.

После размещения электродов приступайте к диагностике, обязательно предупредив пациента, что при первой болевой реакции он должен подать знак.

- Кратковременно нажмите (или нажмите и удерживайте) кнопку «START/STOP».

Аппарат начнет плавно увеличивать напряжение и индицировать на дисплее текущее значение «диагностического»



Рис.7

тока, проходящего через зуб (индикация «LEVEL»). Измерения будут сопровождаться прерывистым звуковым сигналом.

- При достижении болевой реакции у пациента (как только пациент подаст сигнал), уберите активный электрод с исследуемого зуба и повторно нажмите (или отпустите) кнопку «START/STOP».

При этом на дисплее аппарата будет зафиксировано измеренное значение «диагностического» тока.

Интерпретация результатов измерений представлена в таблице 2

Таблица 2.

Значение диагностического тока, мкА	Диагноз	Увеличение значений ЭОМ по отношению к физиологической норме
2-8	Интактный зуб	-
9-14	Кариес	в 2-3 раза
15-24	Глубокий кариес	в 3-4 раза
25-44	Пульпит	в 4-6
45-80 / реакции нет	Периодонтит	более чем в 6 раз

Сброс результата измерений происходит автоматически спустя ~ 6-7 сек.

- Для принудительного сброса результата измерений кратковременно нажмите на кнопку «POWER/SET» (рис.5).

Внимание! Диагноз, представленный в таблице 2, основывается на среднестатистических данных и может служить лишь ориентиром для врача-стоматолога. Для установки окончательного диагноза используйте результаты ЭОД в комплексе с данными анамнеза, осмотра и обследования пациента с помощью дополнительных методов диагностики.

6.10. Отключение питания аппарата

Отключение питания аппарата осуществляется автоматически (см. п. 6.3. «Функция энергосбережения»)

- Для принудительного отключения питания, нажмите и удерживайте кнопку «POWER/SET» (рис.5) в течение ~ 1 сек.

7. СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Стерилизации должны подвергаться все компоненты изделия, имеющие непосредственный контакт с ротовой жидкостью, слизистой оболочкой и тканями зуба пациента. Остальные части и поверхности аппарата должны дезинфицироваться с последующим использованием без стерилизации.

При этом руководствуются требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», требованиями отраслевого стандарта ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения», «Методическими указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (от 30.12.98 г. № МУ-287-113), «Методическими указаниями по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (от 8 июня 1982 г. № 28-6/13), отраслевых методических указаний ОМУ 42-21-35-91 «Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах» (утвержденных приказом № 287 МЗ СССР 10.09.1991).

7.1. Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация электродов

Все используемые электроды (щуп «ЭОД» (В) и загубник «Oral Hook» (Г)) непосредственно перед первым использованием, а также после каждого клинического применения подвергают дезинфекции, предстерилизационной очистке, а затем стерилизуют.

Дезинфекцию электродов проводят сразу после клинического применения методом полного погружения в какой-либо дезинфицирующий раствор, например, в 3% раствор хлорамина на 60 мин, 4% раствор «Лизетол АФ» на 30 мин или другого дезинфицирующего средства в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции по применению конкретного дезинфицирующего средства.

Предстерилизационную очистку электродов проводят ручным или механизированным способом.

Предстерилизационную очистку ручным способом проводят путем мытья электродов в 0,5% растворе моющего средства с 0,5% раствором перекиси водорода, температура раствора – 50 °С, время обработки – 15 мин. Для этой цели можно использовать и другие препараты, например, «Биолот» (концентрация – 0,5%, температура раствора – 40 °С, время обработки – 15 мин), «ДеконексДенталь ВВ» (применяется без разведения, температура – не менее 18 °С, время обработки – 30 мин), «Виркон» (концентрация – 2%, температура – не менее 18 °С, время обработки – 10 мин) и т.д.

Предстерилизационную очистку механизированным способом проводят с использованием ультразвуковых ванн, например, «Ультразвук» или «Ультразвук-М» производства компании «Геософт Дент», согласно соответствующим нормативным документам.

Использование этих аппаратов в сочетании с применением моюще-дезинфицирующих средств типа «Лизетол АФ» и др. позволяет совместить дезинфекцию и предстерилизационную очистку в один этап.

Стерилизацию электродов проводят паровым методом в автоклаве (насыщенный водяной пар под избыточным давлением). Давление пара в стерилизационной камере - 0,20 МПа температура $132 \pm 2^\circ\text{C}$, время выдержки 20-22 мин (или давление - 0,21 МПа, температура - $134 \pm 1^\circ\text{C}$, время выдержки - 5-6 мин.) Допускается использовать другие методы стерилизации, разрешенные нормативными документами.

Внимание! При вышеуказанных условиях, стерилизуемые электроды могут выдержать не более 250 стерилизационных циклов.

Стерилизацию и последующее хранение электродов рекомендуется проводить в упакованном виде, используя стерилизационные упаковочные одноразовые материалы, например, полимерные или бумажные крафт-пакеты, разрешенные применительно к конкретному методу стерилизации в установленном порядке (п. 8.3.20 СанПиН 2.1.3.2630-10).

7.2. Дезинфекция составных частей аппарата

Части аппарата, непосредственно не контактирующие с ротовой жидкостью и тканями зуба и слизистой оболочкой рта пациента в процессе проведения процедур, подлежат **дезинфекции с последующим использованием без стерилизации.**

Дезинфекцию частей аппарата следует проводить химическим методом путем протирания их поверхности смоченной в этиловом спирте и тщательно отжатой салфеткой.

Перед обработкой следует отключить аппарат от сети и

выключить питание с помощью кнопки «*POWER/SET*» .

При обработке следует соблюдать осторожность, чтобы предотвратить попадание дезинфицирующего раствора внутрь корпуса блока управления аппарата.

Внимание! Категорически запрещается проводить дезинфекцию аппарата методом погружения его составных частей в какие-либо растворы или их термическую обработку (в автоклавах, сухожаровых шкафах, гласперленовых стерилизаторах и т.п.).

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Своевременно производите зарядку аккумулятора при его разряде (см.п.п. 6.1 и 6.2). Не допускайте полного разряда аккумулятора.
- Своевременно производите замену аккумулятора при выработке его рабочего ресурса.

Примечание: Для оптимальной работы аккумулятора следует осуществлять его замену примерно раз в 2 года.

Внимание! Замена аккумулятора должна осуществляться исключительно специалистами авторизованных сервисных служб. Не следует самостоятельно вскрывать аппарат для замены аккумулятора. Это может быть не безопасно. Кроме того, самостоятельное вскрытие корпуса аппарата аннулирует действие гарантии.

9.ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

Неисправность	Причина	Действие
Аппарат не включается. На дисплее отображается индикатор «LB»	<ul style="list-style-type: none"> Разряжен аккумулятор 	<ul style="list-style-type: none"> Зарядите аккумулятор (см.п.6.1)
Аппарат отключается самопроизвольно	<ul style="list-style-type: none"> Срабатывает функция энергосбережения Разряжен аккумулятор Программа зависла. Сработал «сторожевой таймер» WDT 	<ul style="list-style-type: none"> См. п.6.3 Зарядите аккумулятор (см.п.6.1) Включите питание изделия (см.п.6.6) и продолжайте работать.
Аккумулятор заряжается слишком быстро, но при этом продолжительность эксплуатации аппарата до момента повторного разряда аккумулятора резко сократилась	<ul style="list-style-type: none"> Ресурс аккумулятора исчерпан. Аккумулятор не пригоден для эксплуатации 	<ul style="list-style-type: none"> Обращайтесь в службу сервиса для замены аккумулятора
Аккумулятор не заряжается	<ul style="list-style-type: none"> Плохой контакт между блоком управления и подставкой и/или подставкой и сетевым зарядн. устройством 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте соединения

Продолжение таблицы 3

Неисправность	Причина	Действие
Аккумулятор не заряжается	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствие напряжения в электросети Сетевое зарядное устройство не исправно 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте наличие напряжения в электросети Замените сетевое зарядное устройство или обращайтесь в службу сервиса
Не происходит нарастания «диагностического» тока	<ul style="list-style-type: none"> Разомкнута «диагностическая» цепь «зуб-щуп-блок управления-кабель-крючок-губа» 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте целостность «диагностической» цепи и устраните разрыв. При необходимости замените кабель
Проблемы со звуком	<ul style="list-style-type: none"> Не правильно настроен уровень громкости звукового сигнала 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте настройки аппарата (см. п.6.8)
Аппарат не реагирует на нажатие кнопок управления	<ul style="list-style-type: none"> Программа зависла. «Сторожевой таймер» WDT не сработал 	<ul style="list-style-type: none"> Перезагрузите программу: <ul style="list-style-type: none"> - С помощью любого тонкого предмета (например, иглы) нажмите на кнопку «Reset» (9-рис.1). При этом питание изделия должно автоматич. отключиться. - Включите питание изделия (см.п.6.6)

Если в данном разделе Вы не нашли нужной информации, получите консультацию производителя по горячей линии Тел.: +7(495)663-22-11 (добавочный 170), E-mail: [hotline @ geosoft.ru](mailto:hotline@geosoft.ru) или обращайтесь в службу сервиса.

10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Изделие следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, с относительной влажностью воздуха 80% (при $+25^{\circ}\text{C}$), в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя.
- Транспортировка изделия должна осуществляться любыми видами крытых транспортных средств при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ с относительной влажностью воздуха не более 100 % ($+25^{\circ}\text{C}$) в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя.
- Изделие следует эксплуатировать в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, с относительной влажностью воздуха не более 80% , при атмосферном давлении (101 ± 3) кПа

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



! Запрещается выбрасывать изделие в систему бытового мусора. Утилизацию изделия следует осуществлять в соответствии с правилами утилизации медицинского оборудования, установленными в стране, в которой эксплуатируется данное изделие.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу изделия в соответствии с требованиями технических условий ТУ 9442-003-56755207-2013 при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации и хранения.

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия **2 года** со дня продажи, но не более 2,5 лет со дня изготовления (за исключением п.3).

3. Гарантийный срок эксплуатации аккумулятора, входящего в комплект поставки изделия, 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации кабеля 1 месяц со дня продажи.

4. Изделия, имеющие механические повреждения или эксплуатировавшиеся с нарушением настоящего руководства, ремонту на условиях гарантии не подлежат.

5. Ремонт производится на предприятии-изготовителе или в специальных уполномоченных сервисных службах. Доставка изделия в сервисную организацию для гарантийного или послегарантийного обслуживания осуществляется за счет владельца изделия.

Прежде чем обращаться в сервисную организацию свяжитесь с консультантом производителя по горячей линии: Тел.: +7 (495) 663-22-11 (добавочный 170), E-mail: hotline @ geosoft.ru

6. Изделие принимается в гарантийный ремонт только при наличии руководства по эксплуатации со штампом предприятия-изготовителя и с отметкой о продаже изделия. Отсутствие, надлежащим образом заполненного руководства по эксплуатации, является основанием для отказа в гарантийном ремонте.

Для заметок

ПРИЛОЖЕНИЕ

Электромагнитное излучение и помехоустойчивость

Таблица 1

<p>Аппарат «ПульпЭст» предназначен для использования в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупатель или пользователь данного аппарата должен обеспечить его эксплуатацию в указанных условиях.</p>		
Эмиссионный тест	Соотв.	Электромагнитные условия – указания
Радиочастотные излучения (RF) по ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11)	Группа 1	Аппарат «ПульпЭст» использует энергию радиочастотного излучения (RF) только для выполнения своих внутренних функций. Поэтому его радиочастотное излучение очень низко и не оказывает существенного воздействия на расположенное поблизости электронное оборудование.
Радиочастотные излучения (RF) по ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11)	Класс Б	Аппарат «ПульпЭст» пригоден для применения в любых местах размещения, включая жилые дома и здания, непосредственно подключенные к распределительной электрической сети, питающей жилые дома
Гармоническая эмиссия по ГОСТ 30804.3.2 (МЭК 61000-3-2)	Не применяют	
Колебания напряжения и фликер по ГОСТ 30804.3.3 (МЭК 61000-3-3)	Не применяют	

Таблица 2

Аппарат «ПульпЭст» предназначен для использования в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупатель или пользователь данного аппарата должен обеспечить его эксплуатацию в указанных условиях.

Тест на помехоустойчивость	Уровень теста по МЭК 60601	Уровень соответствия	Электромагнитные условия – указания
Электростатические разряды (ЭСР) по ГОСТ 30804.4.2 (МЭК 61000-4-2)	±2 кВ контакт ±4 кВ контакт ±6 кВ контакт ±2 кВ воздух ±4 кВ воздух ±8 кВ воздух	±2 кВ контакт ±4 кВ контакт ±6 кВ контакт ±2 кВ воздух ±4 кВ воздух ±8 кВ воздух	Полы помещения должны быть деревянные, бетонные или керамические. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должна составлять не < 30%.
Наносекундные импульсные помехи по ГОСТ 30804.4.4 (МЭК 61000-4-4)	±2 кВ для линий электропитания ±1 кВ для линий ввода-вывода	±2 кВ для линий электропитания ±1 кВ для линий ввода-вывода	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки
Микросекундные импульсные помехи по ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5)	±0,5; ±1,0; ±2,0 кВ помехи по схеме «провод-земля» ±0,5; ±1,0 кВ помехи по схеме «провод-провод»	±0,5; ±1,0; ±2,0 кВ помехи по схеме «провод-земля» ±0,5; ±1,0 кВ помехи по схеме «провод-провод»	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки

Продолжение Таблицы 2

Тест на помехоустойчивость	Уровень теста по МЭК 60601	Уровень соответствия	Электромагнитные условия – указания
Динамич. изменения напряжения электропитания по ГОСТ 30804.4.11 (МЭК 61000-4-11)	$<5\% U_n$ (провал напряжения $>95\% U_n$) в течение 0,5 периода $40\% U_n$ (провал напряжения 60 $\% U_n$) в течение 5 периодов $70\% U_n$ (провал напряжения 30 $\% U_n$) в течение 25 периодов $<5\% U_n$ (прерывание напряжения $>95\% U_n$) в течение 1 периода $120\% U_n$ (выброс напряжения 20 $\% U_n$) в течение 25 периодов	$<5\% U_n$ (провал напряжения $>95\% U_n$) в течение 0,5 периода $40\% U_n$ (провал напряжения 60 $\% U_n$) в течение 5 периодов $70\% U_n$ (провал напряжения 30 $\% U_n$) в течение 25 периодов $<5\% U_n$ (прерывание напряжения $>95\% U_n$) в течение 1 периода $120\% U_n$ (выброс напряжения 20 $\% U_n$) в течение 25 периодов	<p>Качество электрич. энергии в электрич. сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки. Если пользователю аппарата «ПульпЭст» требуется непрерывная работа в условиях возможных прерываниях сетевого напряжения, рекомендуется обеспечить питание аппарата от батареи или источника бесперебойного питания</p>
Магнитное поле промышл. частоты по ГОСТ Р 50648 (МЭК 1000-4-8)	3 А/м	3 А/м	Частота магнитного поля должна быть на уровне, характерном для типичного расположения в типичной коммерческой или больничной среде

Таблица 3

Аппарат «ПульпЭст» предназначен для использования в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупатель или пользователь данного аппарата должен обеспечить его эксплуатацию в указанных условиях.

Тест на помехоустойчивость	Уровень теста по МЭК 60601	Уровень соотв.	Электромагнитные условия – указания
Кондуктивн. помехи, наведенные радиочастотными ЭМ полями по ГОСТ Р 51317.4.6 (МЭК 61000-4-6)	3В в полосе от 0,15 до 80 МГц	3В в полосе от 0,15 до 80 МГц	Расстояние между используемыми мобильными радиотелефонными системами связи и любым элементом «ПульпЭст», включая кабели, должно быть не меньше рекомендуемого пространственного разнosa, который рассчитывается в соответствии с приведенным ниже выражением применительно к частоте передатчика: $d = 1,2 \sqrt{P}$ (от 150 кГц до 80 МГц) $d = 1,2 \sqrt{P}$ (от 80 до 800 МГц) $d = 2,3 \sqrt{P}$ (от 800 МГц до 2,5 ГГц)
Радиочастотн. ЭМ поле по ГОСТ 30804.4.3 (МЭК 61000-4-3)	3В/м в полосе от 80 до 2500 МГц	3В/м в полосе от 80 до 2500 МГц	

Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков по результатам наблюдений за электромагнитной обстановкой должна быть ниже, чем уровень соответствия в каждой полосе частот. Помехи могут иметь место вблизи оборудования, маркированного знаком



Таблица 4

Рекомендуемые значения пространственного разнеса между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи и аппаратом «ПульпЭст»


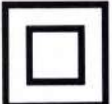










Аппарат «ПульпЭст» предназначен для использования в электромагнитной обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь данного аппарата может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечив минимальный пространственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и данным аппаратом, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи.

Номинальная максим. выходная мощность передатчика, Вт	Пространственный разнос (в метрах) в зависимости от частоты передатчика		
	$d = 1,2 \sqrt{P}$ в полосе от 150 кГц до 80 МГц	$d = 1,2 \sqrt{P}$ в полосе от 80 МГц до 800 МГц	$d = 2,3 \sqrt{P}$ в полосе от 800 МГц до 2,5 ГГц
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

где: d - рекомендуемая дистанция удаления (в метрах), P - макс. выходная мощность передатчика согласно данным производителя (в Вт)

Примечание: 1. На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля. 2. Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение ЭМ волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ

Символ	Описание
	Предупреждение: обращайтесь к сопроводительной документации!
	Тип защиты от поражения электрическим током: изделие класса II
	Степень защиты от поражения электрическим током: Рабочая часть типа BF
	Постоянный ток
	Использовать аппарат только с соответствующим зарядным устройством
	Не выбрасывать изделие в систему бытового мусора
	Серийный номер изделия
	Дата изготовления изделия
	Номер версии изделия
	Знак соответствия стандартам качества и безопасности Европейского Союза (CE-mark)
	Знак соответствия РСТ обязательной сертификации продукции
	Знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция прошла все процедуры оценки, установленные в технических регламентах Таможенного союза.

ЗАО «Геософт Дент»
(Россия)



ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

129090, г. Москва,
2-ой Троицкий пер., д.6а, стр.5

ТЕЛ./ФАКС: +7(495) 663-22-11,

E-mail: mail@geosoft.ru

Web: www.geosoft.ru

Горячая линия:

ТЕЛ.: +7(495) 663-22-11 (доб.170),

E-mail: [hotline @ geosoft.ru](mailto:hotline@geosoft.ru)

версия от 27.08.20

[hotline @ geosoft.ru](mailto:hotline@geosoft.ru)

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 36 л.

Генеральный директор В.А. Гофштейн



GEOSOFT
DENT



АППАРАТ ДЛЯ ЭЛЕКТРООДОНТОДИАГНОСТИКИ ПУЛЬПЫ ЗУБА

ESTUS PULP



Поздравляем Вас с удачным приобретением!

! При покупке аппарата обязательно проверяйте комплектность поставки, наличие и правильность заполнения гарантийного талона, свидетельства о приемке и отметок о продаже изделия.

! Прежде чем использовать изделие, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сохраните руководство для будущего использования.

! При возникновении вопросов в процессе эксплуатации изделия обращайтесь за консультацией к производителю.

Тел. горячей линии: +7(495)663-22-11 (добавочный 170),

E-mail: hotline@geosoft.ru, servis@geosoft.ru



Регистрационное удостоверение: № РЗН 2015/3393

Декларация о соответствии: ROCC RU Д-RU.АД37.В.04326/18

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	4
2. Комплект поставки.....	7
3. Дополнительные аксессуары.....	8
4. Технические характеристики... ..	10
5. Внешний вид изделия.....	12
6. Подготовка и порядок работы	15
7. Основные правила проведения электроодонтодиагностики.	25
8. Стерилизация и дезинфекция изделия	28
9. Техническое обслуживание.....	31
10. Возможные неполадки в работе изделия и способы их устранения.....	32
11. Условия хранения, транспортировки и эксплуатации	34
12. Сведения об утилизации.....	34
Приложение.....	35

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Назначение изделия: Аппарат «Estus Pulp» предназначен для определения клинического состояния пульпы зуба - электроодонтодиагностики (ЭОД).

1.2. Показания к применению: Аппарат предназначен для использования в стоматологии (эндодонтии). *Производитель не несет ответственность за любые нежелательные опасные ситуации, возникшие при использовании аппарата не по назначению.*

1.3. Область применения: Аппарат может эксплуатироваться **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** в медицинских учреждениях.

1.4. Потенциальные потребители: **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** врачи-специалисты, имеющие лицензию на стоматологическую практику.

1.5. Противопоказания: Не допускается использовать изделие при лечении пациентов с кардиостимуляторами.

1.6. Побочные эффекты: Не выявлены

1.7. Вид контакта с пациентом: Кратковременный инвазивный контакт через ротовую полость.

1.8. Принцип действия: Оценка порога чувствительности пациента к раздражению электрическим током. При патологических процессах в зубах и околозубных тканях снижается возбудимость нервных рецепторов пульпы и, как следствие, изменяется чувствительность пациента к величине раздражающего диагностического электрического тока. В

зависимости от величины диагностического тока, приводящей к чувствительности пациента на электрическое воздействие, диагностируется состояние пульпы исследуемого зуба, что позволяет определить «причинный» зуб, поставить предварительный диагноз и определить план лечения.

1.9. Функциональные возможности:

- Режим автоматического изменения скорости нарастания диагностического тока во всем диапазоне значений
- Индикация результата диагностики на светодиодной линейке наконечника;
- Звуковая индикация в процессе работы и функция регулировки уровня громкости звукового сигнала;
- Индикация разряда источника питания;
- Функция энергосбережения;

- Возможность расширения функционала изделия в части настроек и индикации значений его рабочих параметров при работе изделия в составе аппаратов серии «Estus» совместно с основным блоком управления «Estus Multi»*.

* не входит в комплект поставки и приобретается отдельно за дополнительную плату.

1.10. Меры безопасности и предупреждения

!Используйте изделие только с оригинальными принадлежностями фирмы "Геософт Дент" (см. раздел 3).

! Не разбирайте и не вносите изменений в конструкцию изделия.

Разборка аппарата, нарушение его целостности отменяет действие гарантии.

! Избегайте попадания любой жидкости во внутрь корпуса


изделия.

! Не используйте изделие вблизи легко воспламеняемых веществ. Изделие не пригодно для использования в присутствии воспламеняемых анестетических смесей с воздухом, кислородом или оксидом азота.

! Используйте только стерильные и продезинфицированные компоненты изделия. Стерилизацию и дезинфекцию компонентов изделия необходимо проводить непосредственно перед первым его использованием, а также, во избежание перекрестного заражения, после каждого пациента (*подробнее см. раздел 8*).

! При работе в полости рта пациента используйте коффердам.

! Данный аппарат требует применения специальных мер для обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) и должен быть установлен и введен в эксплуатацию в соответствии с информацией, относящейся к ЭМС, приведенной в Приложении настоящего руководства. В частности, не следует использовать аппарат вблизи ламп дневного света, радиопередающих устройств и пультов дистанционного управления.

! Возможно нарушение работы аппарата при его использовании в зоне сильных электромагнитных помех (ЭМП). Не используйте изделие рядом с оборудованием, излучающим электромагнитные волны. Помехи могут иметь место вблизи оборудования, маркированного символом  .

! Не используйте изделие совместно с другим оборудованием или в составе другого оборудования, не предусмотренного производителем.

! Не используйте принадлежности, преобразователи и кабели, отличные от указанных ниже, это может привести к увеличению помехоэмиссии или снижению помехоустойчивости изделия. Производитель гарантирует электромагнитную совместимость следующих элементов: *рабочий кабель с максимальной длиной*

105 см; кабель зарядки с максимальной длиной 1,8м

! Изделие нормально работает при температуре 10-35°C, относительной влажности воздуха не более 80%, атмосферном давлении (101±3) кПа. Любое нарушение указанных ограничений может привести к сбоям в работе изделия.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Блок управления «Estus Pulp» - 1 шт
- Аккумуляторный блок - 1 шт
- Щуп «ЭОД» стандартный (Ø 1,2 мм) - 1 шт
- Кабель (*micro pin 2 mm, single*) - 1 шт
- Загубник «Oral Hook» - 1 шт
- Подставка «Estus One-B»* - 1 шт
- Зарядная станция «Estus Energy-S»*- 1 шт
- Кабель зарядки USB-A - USB-B* - 1 шт
- Блок питания (USB-разъем) 1А* - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт
- Гарантийный талон - 1 шт
- Упаковка - 1 шт

* Данные компоненты поставляются при необходимости

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Щуп «ЭОД» стандартный (Ø 1,2 мм)

ГЕ99.147.000

Используется в качестве активного электрода при проведении процедуры эод.



Щуп «ЭОД» острый (Ø 0,3 мм)

ГЕ99.148.000

Используется в качестве активного электрода при проведении процедуры эод.



Щуп «ЭОД» тупой (Ø 2,5 мм)

ГЕ99.149.000

Используется в качестве активного электрода при проведении процедуры эод.



Набор щупов «ЭОД»

ГЕ99.150.000

Состав набора:

Щуп «ЭОД» стандартный - 1 шт

Щуп «ЭОД» острый - 1 шт

Щуп «ЭОД» тупой - 1 шт



Кабель «Signal Line» (single)

ГЕ99.162.000

Кабель для проведения процедуры эод.

Длина - 100 ± 3 см.

Разъем — micro pin (2 мм)

Загубник «Oral Hook» (3шт/1 шт)**ГЕ99.062.000 / ГЕ99.123.000**

Используется в качестве пассивного электрода при проведении процедуры эод.
Закрепляется на губе пациента.

**Аккумуляторный блок ГЕ99.205.000**

Дополнительный аккумуляторный блок для наконечника «Estus Pulp»
(2x3.7В, 800мА/ч)

**Блок управления «Estus Multi»****ГЕ28.000.000**

Внешний апекслокатор и блок управления для расширенной настройки и индикации рабочих параметров наконечника «Estus Pulp»

**Блок питания (USB-разъем) 1А**


Модель: Robiton USB1000/White

Входное напряжение - (100-240) В, ~50/60Гц


Выходное напряжение - 5 В; 1А.

**Зарядная станция «Estus Energy-S»**

ГЕ42.000.000 Однопортовая зарядная станция для зарядки аккумуляторного блока наконечника «Estus Pulp»

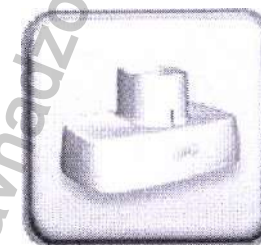**Зарядная станция «Estus Energy-D»**

ГЕ39.000.000 Двухпортовая зарядная станция для одновременной зарядки двух аккумуляторных блоков наконечника «Estus Pulp»

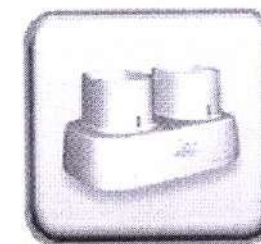

Подставка «Estus One-B» GE99.208.000

Однопозиционная подставка для наконечника
«Estus Pulp»



Подставка «Estus Two-B» GE99.209.000

Двухпозиционная подставка для всех
наконечников серии «Estus»



! Аксессуары поставляются отдельно за дополнительную плату

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические и эксплуатационные характеристики изделия соответствуют требованиям Российских стандартов: ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, а также ТУ 9442-003-56755207-2013.

4.1. Наконечник «Estus Pulp»:

- Источник питания - Li-Po аккумуляторный блок (2x3,7В; 800мА/ч)
- Защита от поражения электрическим током - Изделие с внутренним источником питания. Рабочая часть типа BF;
- Встроенный радиомодуль nRF24L01 или NF-03: диапазон частот - 2,4-2,525 ГГц, макс. выходная мощность - +7 дБм (0,00501Вт) , радиус действия -до 5±2 м на прямой видимости;
- Диапазон «диагностического» тока -от 0 до 80мкА (шаг 1 мкА)
- Макс. напряжение на рабочей части - 160В ± 10% (в кратковременном импульсе)

- Эффективное макс. напряжение на рабочей части - $6,5\text{В} \pm 10\%$;
- Продолжительность работы с новым полностью заряженным аккумуляторным блоком без его подзарядки – не менее 20 ч.
- Время работы в режиме «ожидания» до автоматического отключения питания - $10 \pm 0,5$ мин
- Время полной зарядки аккумуляторного блока - 70 ± 10 мин
- Рабочий ресурс аккумуляторного блока - не менее 300 циклов перезарядки
- Рабочая зона кольцевой кнопки с лицевой стороны наконечника - 180°
- Усилие срабатывания кольцевой кнопки - не более 1Н
- Параметры звуковой индикации: частота звука – от 1 до 6 кГц, уровень звука – не более 70 дБ
- Степень защиты от пыли и влаги - IP41;
- Габаритные размеры - $(202*33*43) \pm 3$ мм
- Вес - 85 ± 10 г
- Срок службы изделия - 5 лет.

4.2. Зарядная станция «Estus Energy-S» (ПУ № РЗН 2017/5824) :

- Питание - 5В, 1А;
- Защита от поражения электрическим током - изделие класса II;
- Степень защиты от пыли и влаги - IP41;
- Габаритные размеры - $(87*56*49) \pm 3$ мм
- Вес - 130 ± 10 г
- Срок службы изделия - 5 лет.

4.3. Блок питания (USB-разъем) 1А

- Входное напряжение - $(100-240)$ В, $\sim 50/60$ Гц
- Выходное напряжение - 5 В; 1А.

4.4. Подставка «Estus One-B» (ПУ № РЗН 2017/5824) :

- Габаритные размеры - $(100*60*40) \pm 3$ мм
- Вес - 132 ± 10 г

5. ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1, где:

А. Наконечник «Estus Pulp»:

1. Блок управления наконечника;
2. Щуп «ЭОД»;
3. Съёмный аккумуляторный блок;
4. Кольцевая кнопка управления (см. табл.1);
5. Индикатор «STATUS» (см. табл.2);
6. Светодиодная линейка из 5-ти индикаторов для отображения результата диагностики;
7. Индикатор разряда съёмного аккумуляторного блока;
8. Разъём для подсоединения рабочего кабеля;

Б. Подставка «Estus One-B» для наконечника;

В. Зарядная станция «Estus Energy-S»:

9. Гнездо зарядки аккумуляторного блока;
10. Индикатор заряда;
11. Разъём USB-B для подключения кабеля зарядки;


Г. Кабель зарядки USB-A - USB-B

Д. Блок питания (USB-разъём)

Е. Рабочий кабель

Ж. Загубник

Рисунок 1. «Estus Pulp»

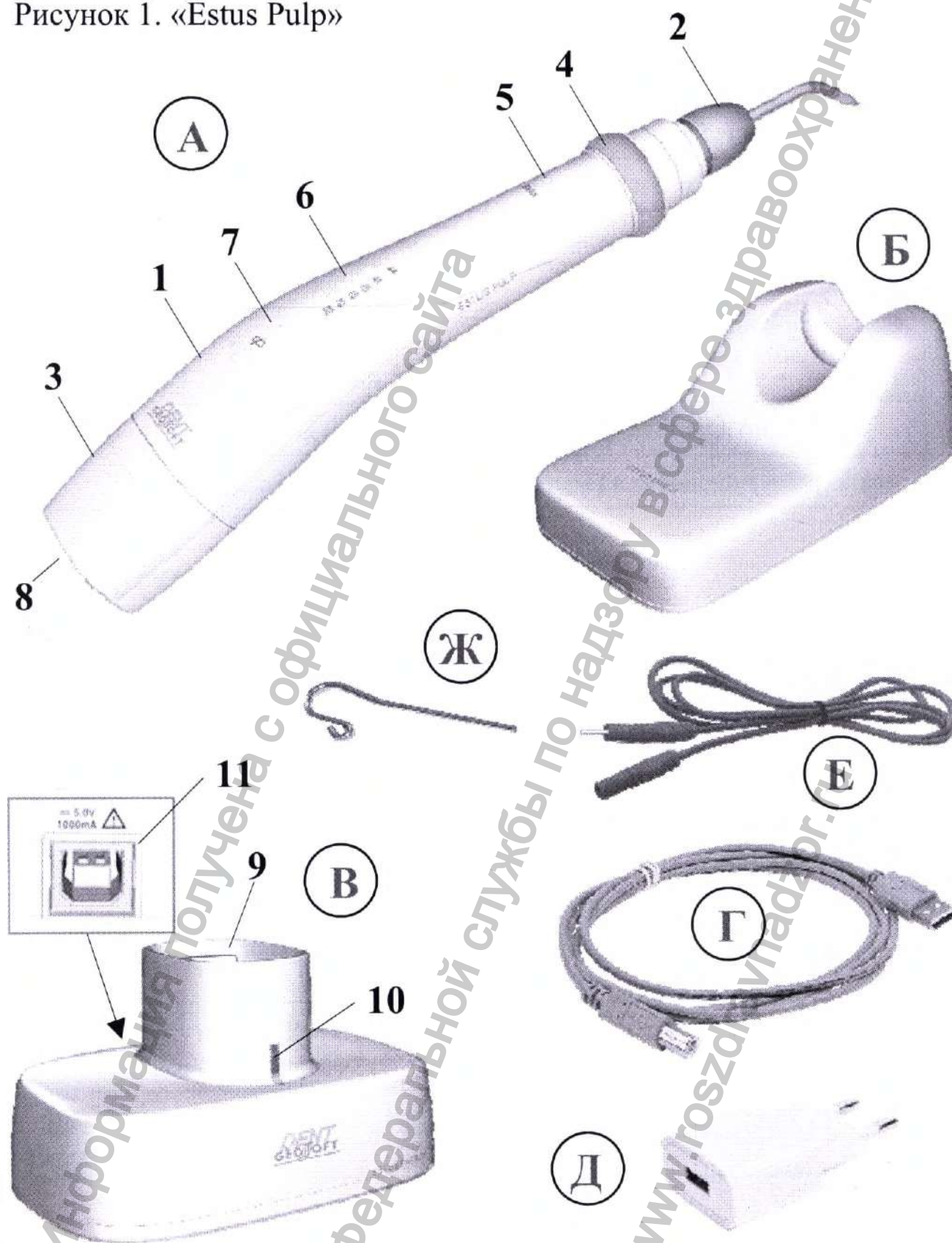

hotline @ geosoft.ru

Таблица 1. Варианты использования кольцевой кнопки управления






	Питание	Нажатие на кнопку	Результат
	ВЫКЛ.	1 раз	Включение питания
		удерживание до 10 сек.	Регулировка громкости звука
		удерживание > 20 сек.	Активация режима создания пары
	ВКЛ.	1 раз	Старт/Стоп нарастания тока или сброс результата измерений
		1 раз с удерживанием до выкл.	
		3 раза	Выключение питания
		3 раза с удерживанием	Возврат к заводским настройкам

Таблица 2. Варианты состояния индикатора «STATUS»


Цвет индикатора STATUS		Состояние
 STATUS	БЕЛЫЙ	Питание включено
 STATUS	БЕЛЫЙ мигающий	Активация режима создания пары
 STATUS	МЯТНЫЙ	Результат диагностики 2 – 9 мкА
 STATUS	СИРЕНЕВЫЙ	Результат диагностики 10 – 24 мкА
 STATUS	ОРАНЖЕВЫЙ	Результат диагностики 25 – 44 мкА
 STATUS	КРАСНЫЙ	Результат диагностики 45 – 80 мкА

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ


После транспортировки изделия при t менее $+5^{\circ}\text{C}$, перед эксплуатацией, выдержите его при комнатной температуре 1 час

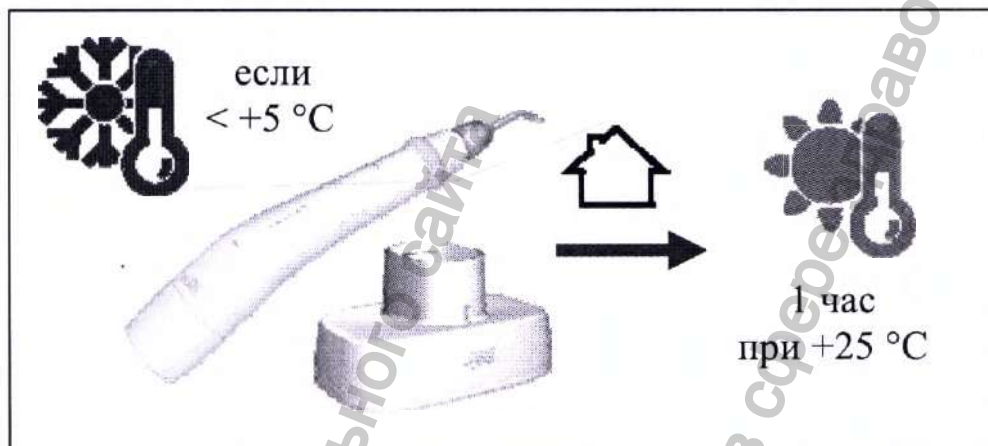

Шаг 1. Зарядка аккумуляторного блока

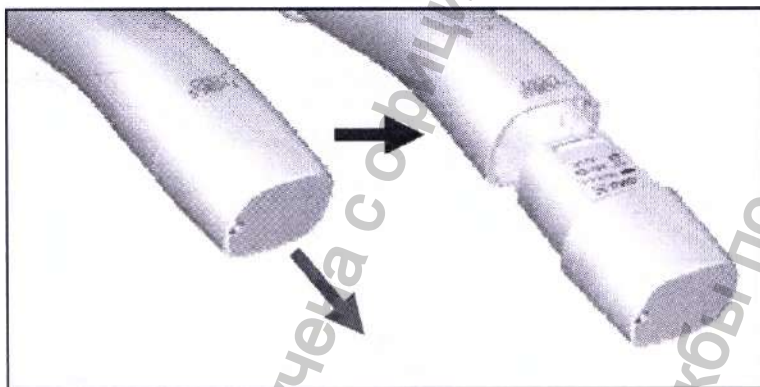

А) Отсоедините аккумуляторный блок от наконечника (при упаковке изделия аккумуляторный блок упакован отдельно от наконечника)

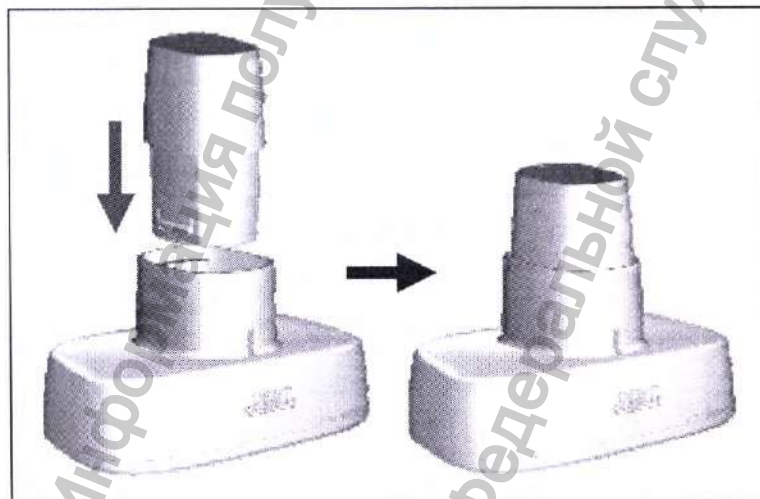

Б) Установите аккумуляторный блок в гнездо зарядной станции «Estus Energy-S»

В) Подключите кабель USB-A - USB-B к зарядной станции и к блоку питания, а затем вставьте блок питания в сетевую розетку




Г) Дождитесь, когда аккумуляторный блок полностью зарядится




Д) Извлеките заряженный аккумуляторный блок из гнезда зарядной станции и установите его в наконечник.

! При отсутствии аккумуляторного блока в гнезде зарядной станции, электрическое напряжение автоматически отключается от клемм зарядной станции, обеспечивая полную электробезопасность изделия. Несмотря на это, не допускайте попадания любых жидкостей в гнездо зарядной станции, а в случае попадания жидкости во избежание появления коррозии клемм, тщательно протрите гнездо зарядной станции салфеткой, предварительно отключив кабель зарядки из сетевой розетки.

 Стандартное время зарядки аккумуляторного блока составляет примерно 1 час, однако оно зависит от текущего уровня заряда аккумуляторов, степени их износа, внешней температуры. Время работы и зарядки старых аккумуляторов всегда короче, чем у новых. При значительном сокращении продолжительности работы и/или времени заряда аккумуляторного блока следует приобрести новый аккумуляторный блок (см. раздел 3).


Индикация разряда аккумулятора:

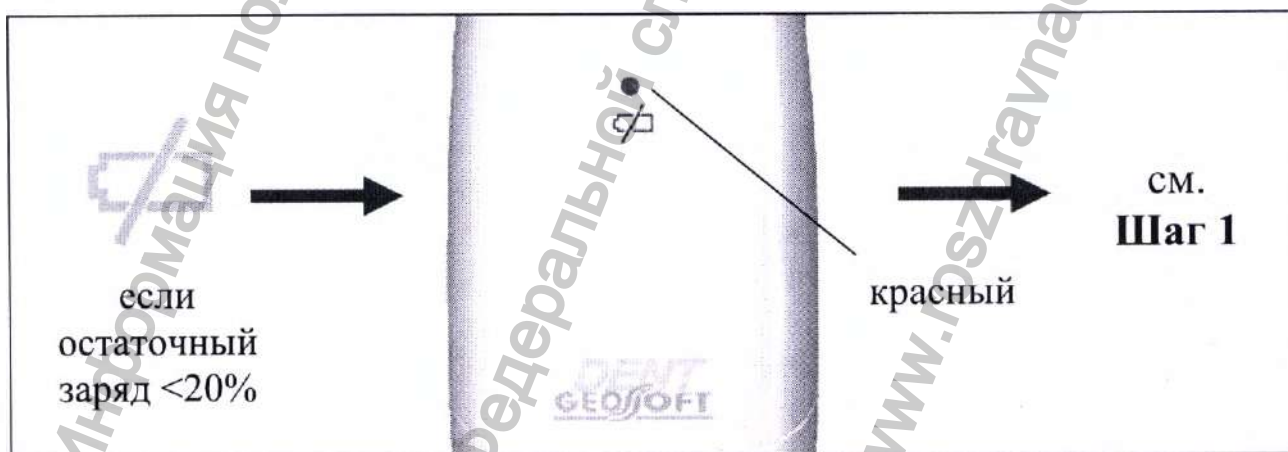

! Своевременно производите зарядку аккумуляторного блока наконечника при его разряде. Не допускайте полного разряда аккумуляторного блока.

Шаг 2. Установка щупа «ЭОД»

! Обязательно стерилизуйте щуп «ЭОД» перед его применением после каждого пациента (см. раздел 8 «Стерилизация и дезинфекция изделия»)

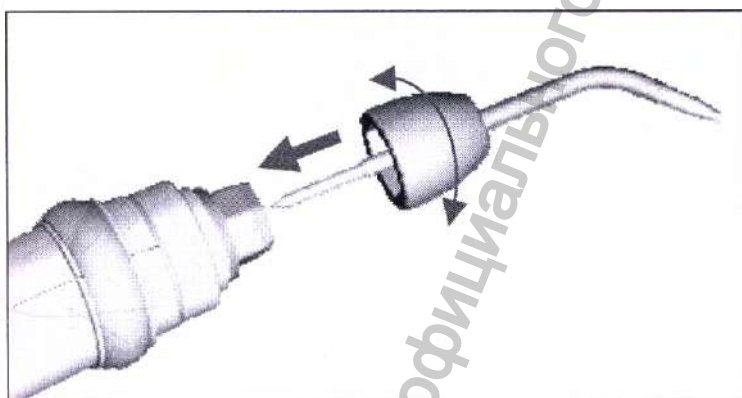

Выберите удобный для работы угол крепления щупа «ЭОД» (одно из шести фиксированных положений) и установите щуп в разъем наконечника.

Шаг 3. Подключение рабочего кабеля и загубника

Подключите к наконечнику рабочий кабель с загубником.


! Обязательно стерилизуйте загубник перед его применением после каждого пациента (см. раздел 8 «Стерилизация и дезинфекция изделия»).



Шаг 4. Включение питания

Для включения питания нажмите на кнопку.


Индикатор STATUS
загорится БЕЛЫМ
цветом.

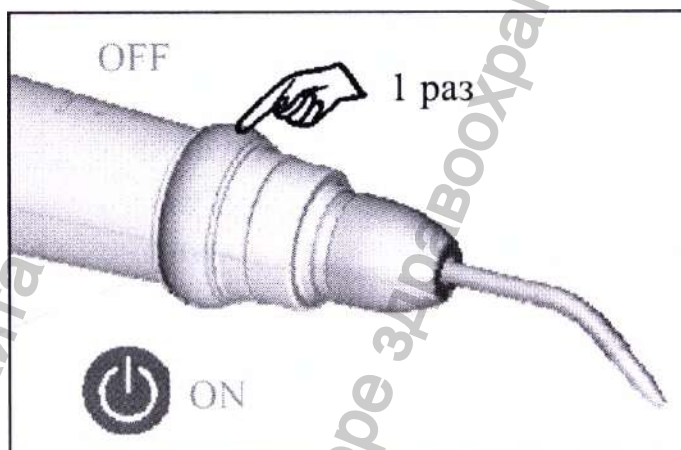

Шаг 5. Выключение питания

Нажмите на кнопку 3 раза для выключения питания или аппарат выключится автоматически через 10 мин.


При этом все индикаторы на наконечнике гаснут.

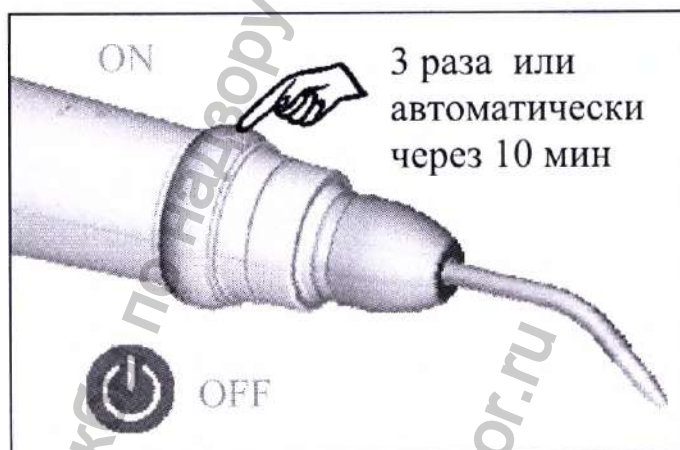

Шаг 6. Регулировка звука

Звуковой излучатель изделия имеет 4 уровня громкости звука: «тихий», «нормальный», «громкий», «выкл».

Для выбора нужного уровня громкости удерживайте кнопку при включении питания.

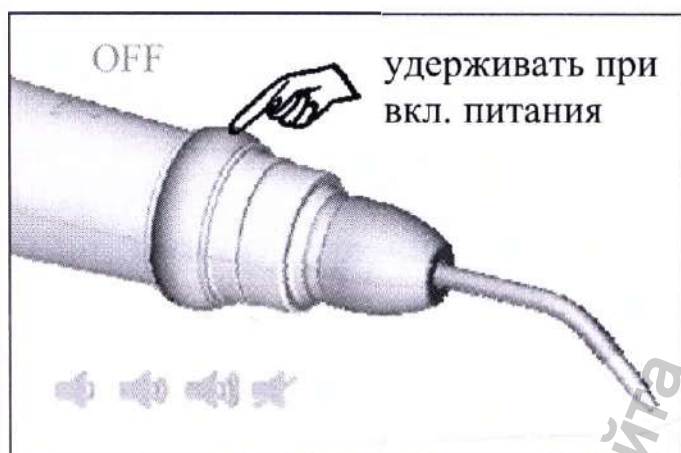


В течение ~10 сек. происходит циклическая смена громкости звука.

Для выбора нужного уровня громкости отпустите кнопку.

Шаг 7. Процедура диагностики

! Прежде чем приступить к процедуре диагностики, внимательно ознакомьтесь с основными правилами проведения электроодонтодиагностики, приведенными в разделе 7 настоящего руководства.

Разместите загубник на губе пациента, а кончиком щупа «ЭОД» коснитесь чувствительной точки исследуемого зуба.

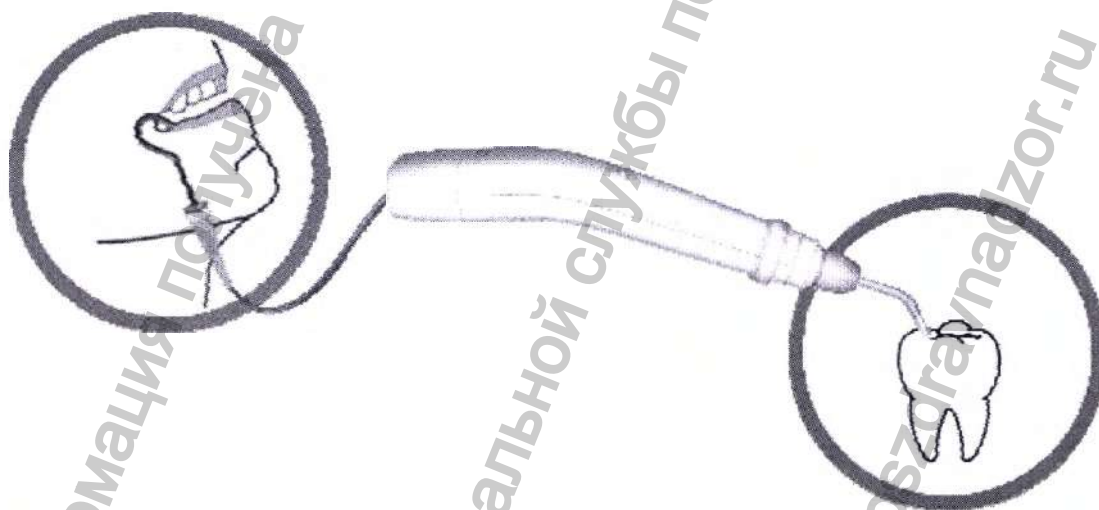

Приступайте к диагностике, обязательно предупредив пациента, что при первой болевой реакции он должен подать знак.


Нажмите кратковременно на кнопку

ИЛИ

нажмите и удерживайте кнопку для старта процедуры.



Аппарат начнет плавно увеличивать величину «диагностического» тока и индцировать ее на светодиодной линейке наконечника.

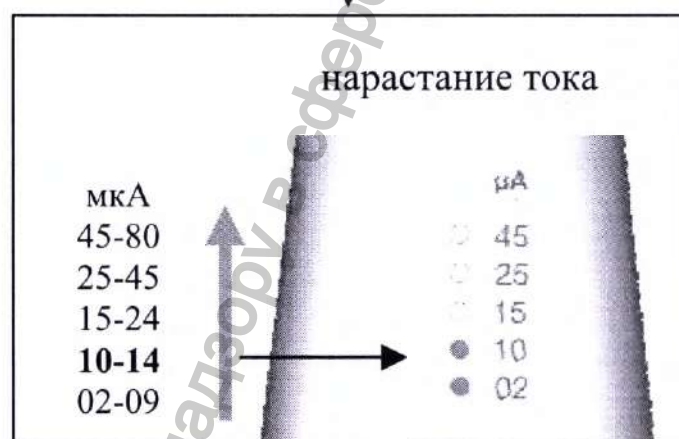

Измерения будут сопровождаться прерывистым звуковым сигналом.

При достижении болевой реакции у пациента (как только пациент подаст сигнал),

нажмите кратковременно на кнопку

ИЛИ отпустите кнопку при ее удерживании.



Затем уберите шуп «ЭОД» с исследуемого зуба.

При этом на светодиодной линейке наконечника будет зафиксирован результат диагностики, на основании которого можно сделать вывод о предположительном диагнозе.

Таблица 3 - Интерпретация результатов измерений

Цвет индикатора STATUS	Значение «диагност.» тока	Предположительный диагноз
 СТАТУС МЯТНЫЙ	2 – 9 мкА	Интактный зуб
 СТАТУС СИРЕНЕВЫЙ	10 – 24 мкА	Обратимый пульпит
 СТАТУС ОРАНЖЕВЫЙ	25 – 44 мкА	Необратимый пульпит
 СТАТУС КРАСНЫЙ	45 – 80 мкА	Возможен некроз пульпы

! Диагноз, представленный в таблице 3, основывается на среднестатистических данных и может служить лишь ориентиром для врача-стоматолога. Для установки окончательного диагноза используйте результаты ЭОД в комплексе с данными анамнеза, осмотра и обследования пациента с помощью дополнительных методов диагностики.



Сброс результата измерений происходит автоматически спустя ~ 10 сек.

Для принудительного сброса результата измерений нажмите на кнопку.

Шаг 8. Возврат к заводским настройкам

Настройки наконечника могут быть изменены при его совместной работе с блоком управления «Estus Multi».

В случае необходимости возврата к заводским настройкам наконечника:

Нажмите на кнопку 3 раза и удерживайте ее около 3 секунд до появления звукового сигнала. При этом питание наконечника отключится, и настройки вернутся к исходным.



Шаг 9. Активация режима создания пары

Для совместной работы наконечника с блоком управления «Estus Multi» необходимо предварительно создать с этим устройством пару по радиоканалу.

Для активации режима создания пары на наконечнике:

Нажмите и удерживайте кнопку при включении питания.



После завершения 3-х циклов звуковых сигналов с разной интенсивностью звука и однократного звукового сигнала (подождите примерно 20 сек), индикатор «STATUS» начнет постоянно мигать **БЕЛЫМ** цветом



Дальнейшие действия по созданию пары с блоком управления «Estus Multi» описаны в Руководстве по эксплуатации для аппарата «Estus Multi» (*п. 12.2. Настройка «Создание/Удаление пары»*)

7. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРООДОНТОДИАГНОСТИКИ

1. Предварительная подготовка исследуемого зуба:

- Для получения более точного диагноза до начала измерений следует очистить исследуемые зубы от зубных камней и налета (по крайней мере на участках, подлежащих исследованию). При этом не следует применять интенсивные воздействия, которые могут вызвать снижение возбудимости рецепторов пульпы зуба (ультразвук, аква-, пневмо-, кинетическая обработка и т.п.). Поэтому считается целесообразным проводить ЭОД в следующее посещение после полноценной профессиональной чистки зубов, если это позволяет клиническая ситуация. При таком подходе перед проведением измерений бывает достаточно лишь очистить поверхность коронки зуба от мягкого налета ватными тампонами, пропитанными растворами антисептиков, например 3% раствором перекиси водорода, а затем подсушить.

- Для предотвращения утечки электрического тока через слюну по поверхности зуба в десну, исследуемые зубы предварительно следует высушить и изолировать от слюны ватными валиками. Поверхность зуба высушивают ватными шариками по направлению от режущего края к шейке зуба (но не наоборот). Следует помнить, что при дыхании зубы быстро увлажняются (особенно моляры), поэтому после исследования с одной – двух точек, подлежащие исследованию другие участки зуба, должны быть высушены повторно.



Для высушивания зуба не следует применять химические вещества (спирт, эфир), а также струю воздуха, т.к. это может вызвать дополнительное раздражение пульпы зуба и привести к изменению порога возбудимости.

2. Выбор чувствительной точки:

При проведении ЭОД активный электрод (щуп «ЭОД») должен располагаться на самой чувствительной точке исследуемого зуба, где реакция пациента наступает при минимальной силе тока.

В качестве такой чувствительной точки зуба следует выбирать точку находящуюся в зоне:

- середины режущего края у резцов;
- верхушки рвущего бугра у клыков;
- верхушки щечного бугра у премоляров;
- верхушки щечно-медиального бугра у моляров

В кариозных зубах наряду с обычными чувствительными точками (если они только сохранены) электровозбудимость можно проверять, касаясь дна кариозной полости, предварительно убрав размягченный дентин и просушив полость. Исследования следует проводить в 3-5 точках. Ориентиром возбудимости служит минимальное значение тока, полученное в какой-либо точке.



Недопустимо в качестве чувствительной точки выбирать зону на поверхности пломбы, независимо от того, из какого материала она сделана — из цемента, пластмассы, эпоксидной смолы или амальгамы. В указанных случаях достичь высокой точности диагностирования невозможно, т.к. цемент, пластмасса, эпоксидная смола не проводят электрический ток, а в случае с амальгамой — из-за наличия больших «токов утечки». Во всех перечисленных случаях необходимо удалить пломбу и провести диагностирование, касаясь дна кариозной полости.

3. Дополнительные правила:

- Пациента следует обязательно предупредить, что не нужно дожидаться выраженной болевой реакции! При первом же появлении какого-либо ощущения в зубе – чувства легкого покалывания или жжения, несильного толчка, слабого «удара током» и т.п. – пациент должен дать знать об этом врачу: произвести звук «а», поднять руку и т.п.
- Для проведения ЭОД пациента располагают в стоматологическом кресле в положении сидя или лежа. Голова пациента должна опираться на подголовник. Во время проведения исследования в кабинете не должно быть интенсивных, рассеивающих внимание раздражителей: громкой музыки, звука работающего стоматологического оборудования (турбинный наконечник, ультразвуковой скейлер, стоматологический аспиратор – «пылесос»), посторонних разговоров и т.д.
- Для исключения утечки тока врач должен работать в резиновых, латексных или нитриловых перчатках;
- Вместо зеркала при манипуляциях в полости рта следует пользоваться пластмассовым шпателем, пластиковыми ретракторами или удерживать губу пациента пальцами (в перчатках);
- Каждый раз перед началом исследования необходимо смачивать кончик активного электрода (щупа) электропроводящим гелем (например, зубной пастой или ROCS Medical Minerals);
- В процессе исследования необходимо внимательно следить за тем, чтобы активный электрод не соскальзывал с чувствительной точки зуба;
- Не допускать контакта активного электрода со слизистой оболочкой губы, щеки, десны;
- Не исследовать подряд более 3-4 зубов.

8. СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Предстерилизационной очистке и стерилизации должны подвергаться все компоненты изделия, имеющие непосредственный контакт с ротовой жидкостью, слизистой оболочкой и тканями зуба пациента. Остальные части и поверхности изделия должны дезинфицироваться с последующим использованием без стерилизации.

1. Предстерилизационная очистка и стерилизация

Стерилизуемые компоненты: щуп «ЭОД» и загубник



Стерилизация компонентов должна осуществляться непосредственно перед первым использованием изделия, а также после каждого пациента во избежание перекрестного заражения. Инструкция по повторной обработке компонентов изложена в таблице 4

! Категорически запрещается проводить любую термическую обработку (в автоклаве, сухожаровых шкафах, гласперленовых стерилизаторах и т.п.) любых других компонентов изделия, не перечисленных в данном пункте.

Инструкция № 1

Изготовитель: ЗАО «ГЕОСОФТ ДЕНТ» (Россия)

Изделие: Загубник «Oral Hook», Щуп «ЭОД»

Таблица 4

ВНИМАНИЕ	
Ограничения при проведении повторной обработки	Минимальное гарантированное число циклов обработки - 150. На практике количество циклов обработки существенно выше, но зависит от регулярности и качества проведения обработки персоналом клиники
ИНСТРУКЦИИ	
Место использования	Стоматологический кабинет и стерилизационная комната
Защита и транспортирование	Нет специальных требований.
Подготовка к деkontаминации	Нет специальных требований
Очистка/дезинфекция автоматическая	Не применяется в данном случае
Очистка/дезинфекция ручная	Очистите поверхность изделия. Промойте ее дистиллированной водой и протрите чистой салфеткой.
Осмотр, техническое обслуживание и испытания	Не применяется в данном случае
Упаковка	Рекомендуется упаковывать изделие в крафт-пакет для стерилизации
Стерилизация	Паровой стерилизатор (автоклав). Давление – 0,2МПа, Рабочая температура - 132±2 °С (270±3 °F). Время стерилизации-20±2 мин
Сушка	Не требуется

Продолжение Таблицы 4

Хранение	Хранить в запечатанном крафт-пакете не более количества суток, указанного производителем крафт-пакета (от 21 до 60)
-----------------	---

Инструкция №1 была валидирована изготовителем медицинского изделия как приемлемая для подготовки медицинского изделия для повторного использования. Организация, проводящая обработку, несет ответственность за проведение повторной обработки и использование оборудования, материалов и привлечение персонала, обеспечивающего необходимый результат. Процесс должен быть валидирован и проверен. Любые отклонения от процедуры, установленные в инструкции, должны быть оценены с точки зрения эффективности и вероятности возможных неблагоприятных последствий.

2. Дезинфекция.

Части изделия, непосредственно не контактирующие с ротовой жидкостью, тканями зуба и слизистой оболочкой рта пациента в процессе проведения эндодонтического лечения, подлежат дезинфекции с последующим использованием без стерилизации.

Перед дезинфекцией использованного изделия, предварительно проведите очистку загрязненных поверхностей.

Дезинфекцию следует проводить химическим методом путем протираания поверхности изделия тщательно отжатой салфеткой, смоченной в 70% растворе этилового спирта.



Во избежание попадания дезинфицирующего раствора во внутрь корпуса изделия, категорически запрещается проводить дезинфекцию методом погружения наконечника и/или зарядной станции в какие-либо растворы.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Своевременно производите зарядку аккумуляторного блока при его разряде (см. раздел 6– Шаг 1). Не допускайте полного разряда аккумуляторного блока.
- Своевременно производите замену аккумуляторного блока при выработке его рабочего ресурса.



Запрещается выбрасывать использованный аккумуляторный блок в систему бытового мусора. Утилизацию аккумуляторного блока следует осуществлять в соответствии с правилами утилизации, установленными в стране, в которой эксплуатируется данное изделие.



-Для оптимальной работы аккумуляторного блока следует осуществлять его замену примерно раз в 2 года.

- Не рекомендуется заблаговременно приобретать дополнительный аккумуляторный блок, т.к. при его длительном хранении, ухудшаются технические характеристики аккумуляторов.

- Дополнительный аккумуляторный блок не входит в комплект поставки изделия и приобретается отдельно за дополнительную плату (см. раздел 3 «Дополнительные аксессуары»).

10.ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 5.

Проблема	Причина	Решение
Наконечник не включается.	<ul style="list-style-type: none"> Разряжен аккумуляторный блок 	<ul style="list-style-type: none"> Зарядите аккумуляторный блок (см.р. 6- Шаг 1)
Наконечник отключается самопроизвольно	<ul style="list-style-type: none"> Срабатывает функция энергосбережения Разряжен аккумуляторный блок 	<ul style="list-style-type: none"> См. р.6 - Шаг 5 Зарядите аккумуляторный блок
Аккумуляторный блок заряжается слишком быстро и/или продолжительность эксплуатации наконечника до момента повторного разряда аккумуляторного блока резко сократилась	<ul style="list-style-type: none"> Ресурс аккумуляторного блока исчерпан. Аккумуляторный блок не пригоден для эксплуатации 	<ul style="list-style-type: none"> Замените аккумуляторный блок на новый
Аккумуляторный блок не заряжается	<ul style="list-style-type: none"> Плохой контакт между аккумуляторным блоком, зарядной станцией, кабелем, блоком питания Зарядная станция не исправна Кабель зарядки поврежден Блок питания не исправен 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте соединения Замените зарядную станцию или обращайтесь в службу сервиса Замените кабель зарядки Замените блок питания

Проблема	Причина	Решение
Проблемы со звуком	<ul style="list-style-type: none"> Не правильно настроен уровень громкости звука 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте настройки (см.раздел 6– Шаг 6)
Не происходит нарастания «диагностического» тока	<ul style="list-style-type: none"> Разомкнута диагностическая цепь «зуб-щуп-блок управления-кабель-крючок-губа» Поврежден рабочий кабель Поврежден разъем кабеля на аккумуляторном блоке наконечника 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте целостность диагностической цепи и устраните разрыв Замените рабочий кабель Замените аккумуляторный блок наконечника

Если в данном разделе Вы не нашли нужной информации, получите консультацию производителя по горячей линии Тел.:+7(495)663-22-11 (добавочный 170), E-mail: [hotline @ geosoft.ru](mailto:hotline@geosoft.ru), [servis @ geosoft.ru](mailto:servis@geosoft.ru) или обращайтесь в службу сервиса.

11. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Изделие следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, с относительной влажностью воздуха 80% (при $+25^{\circ}\text{C}$), в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя.
- Транспортировка изделия должна осуществляться любыми видами крытых транспортных средств при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ с относительной влажностью воздуха не более 100 % ($+25^{\circ}\text{C}$) в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя.
- Изделие следует эксплуатировать в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, с относительной влажностью воздуха не более 80% , при атмосферном давлении (101 ± 3) кПа

12. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



! Запрещается выбрасывать изделие в систему бытового мусора. Утилизацию изделия следует осуществлять в соответствии с правилами утилизации медицинского оборудования, установленными в стране, в которой эксплуатируется данное изделие.

Аппарат «Estus Pulp» относится к категории опасности медицинских отходов класса А (неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений).

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Электромагнитное излучение и помехоустойчивость

Таблица 1

<p>Аппарат «Estus Pulp» предназначен для использования в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупатель или пользователь данного аппарата должен обеспечить его эксплуатацию в указанных условиях.</p>		
Эмиссионный тест	Соотв.	Электромагнитные условия – указания
Радиочастотные излучения (RF) по ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11)	Группа 1	Аппарат «Estus Pulp» использует энергию радиочастотного излучения (RF) только для выполнения своих внутренних функций. Поэтому его радиочастотное излучение очень низко и не оказывает существенного воздействия на расположенное поблизости электронное оборудование.
Радиочастотные излучения (RF) по ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11)	Класс Б	Аппарат «Estus Pulp» пригоден для применения в любых местах размещения, включая жилые дома и здания, непосредственно подключенные к распределительной электрической сети, питающей жилые дома
Гармоническая эмиссия по ГОСТ 30804.3.2 (МЭК 61000-3-2)	Не применяют	
Колебания напряжения и фликер по ГОСТ 30804.3.3 (МЭК 61000-3-3)	Не применяют	

Таблица 2

Аппарат «Estus Pulp» предназначен для использования в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупатель или пользователь данного аппарата должен обеспечить его эксплуатацию в указанных условиях.

Тест на помехоустойчивость	Уровень теста по МЭК 60601	Уровень соответствия	Электромагнитные условия – указания
Электростатические разряды (ЭСР) по ГОСТ 30804.4.2 (МЭК 61000-4-2)	±6 кВ контакт ±8 кВ воздух	±6 кВ контакт ±8 кВ воздух	Пол в помещении из дерева, бетона или керамической плитки. При полах, покрытых синтетическим материалом, относительная влажность воздуха - не менее 30%
Наносекундные импульсные помехи по ГОСТ 30804.4.4 (МЭК 61000-4-4)	±2 кВ для линий электропитания ±1 кВ для линий ввода-вывода	±2 кВ для линий электропитания ±1 кВ для линий ввода-вывода	Качество электрической энергии в сети в соответствии с типичными условиями коммерческой или больничной обстановки
Микросекундные импульсные помехи по ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5)	±1.0 кВ помехи по схеме «провод-провод»	±1.0 кВ помехи по схеме «провод-провод»	Качество электрической энергии в электрической сети следует обеспечить в соответствии с типичными условиями коммерческой или больничной обстановки

Продолжение Таблицы 2

Тест на помехоустойчивость	Уровень теста по МЭК 60601	Уровень соответствия	Электромагнитные условия – указания
Динамич. изменения напряжения электропитания по ГОСТ 30804.4.11 (МЭК 61000-4-11)	<p><5% U_n (провал напряжения >95 % U_n) в течение 0,5 периода</p> <p>40% U_n (провал напряжения 60 % U_n) в течение 5 периодов)</p> <p>70% U_n (провал напряжения 30 % U_n) в течение 25 периодов</p> <p><5 % U_n (прерывание напряжения >95 % U_n) в течение 250 периодов</p>	<p><5% U_n (провал напряжения >95 % U_n) в течение 0,5 периода</p> <p>40% U_n (провал напряжения 60 % U_n) в течение 5 периодов)</p> <p>70% U_n (провал напряжения 30 % U_n) в течение 25 периодов</p> <p><5 % U_n (прерывание напряжения >95 % U_n) в течение 250 периодов</p>	<p>Качество электрич. энергии в электрич. сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки. Если пользователю аппарата «Estus Pulp» требуется непрерывная работа в условиях возможных прерываниях сетевого напряжения, рекомендуется обеспечить питание аппарата от батареи или источника бесперебойного питания</p>
Магнитное поле промышл. частоты по ГОСТ Р 50648 (МЭК 1000-4-8)	3 А/м	3 А/м	Уровни магнитного поля промышленной частоты следует обеспечить в соответствии с типичными условиями коммерч. или больничной обстановки

Таблица 3

Аппарат «Estus Pulp» предназначен для использования в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупатель или пользователь данного аппарата должен обеспечить его эксплуатацию в указанных условиях.


Тест на помехоустойчивость	Уровень теста по МЭК 60601	Уровень соотв.	Электромагнитные условия – указания
Кондуктивн. помехи, наведенные радиочастотными ЭМ полями по ГОСТ Р 51317.4.6 (МЭК 61000-4-6)	3В в полосе от 0,15 до 80 МГц	3В в полосе от 0,15 до 80 МГц	Расстояние между используемыми мобильными радиотелефонными системами связи и любым элементом «Estus Pulp» , включая кабели, должно быть не меньше рекомендуемого пространственного разнеса, который рассчитывается в соответствии с приведенным ниже выражением применительно к частоте передатчика: $d = 1,2 \sqrt{P}$ (от 150 кГц до 80 МГц) $d = 1,2 \sqrt{P}$ (от 80 до 800 МГц) $d = 2,3 \sqrt{P}$ (от 800 МГц до 2,5 ГГц)
Радиочастотн. ЭМ поле по ГОСТ 30804.4.3 (МЭК 61000-4-3)	3В/м в полосе от 80 до 2500 МГц	3В/м в полосе от 80 до 2500 МГц	
Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков по результатам наблюдений за электромагнитной обстановкой должна быть ниже, чем уровень соответствия в каждой полосе частот. Помехи могут иметь место вблизи оборудования, маркированного знаком 			

Таблица 4

Рекомендуемые значения пространственного разнosa между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи и аппаратом «Estus Pulp»

Аппарат «Estus Pulp» предназначен для использования в электромагнитной обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь данного аппарата может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечив минимальный пространственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и данным аппаратом, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи.

Номинальная максим. выходная мощность передатчика, Вт	Пространственный разнос (в метрах) в зависимости от частоты передатчика		
	$d = 1,2 \sqrt{P}$ в полосе от 150 кГц до 80 МГц	$d = 1,2 \sqrt{P}$ в полосе от 80 МГц до 800 МГц	$d = 2,3 \sqrt{P}$ в полосе от 800 МГц до 2,5 ГГц
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

где: d - рекомендуемая дистанция удаления (в метрах), P - макс. выходная мощность передатчика согласно данным производителя (в Вт)

Примечание: 1. На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля. 2. Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение ЭМ волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.

2. Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения

<i>Материалы в составе изделия</i>	<i>Описание (при наличии)</i>
лекарственные средства для медицинского применения	отсутствуют
материалы животного и (или) человеческого происхождения	отсутствуют

3. Перечень применяемых производителем (изготовителем) медицинского изделия национальных стандартов

ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 31508-2012, РТД 25.106-88, ОСТ 42-21-2-85, МУ-287-113-98, ГОСТ 177-88, ГОСТ 25644-96, ГОСТ 14254-96, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ 12969-67, ГОСТ 14192 -96, ГОСТ 9142 -90, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, ГОСТ 30804.4.2-2013, ГОСТ 30804.4.4-2013, ГОСТ Р 51317.4.5-99, ГОСТ Р 51317.4.6-99, ГОСТ 30804.4.11-2013, ГОСТ 30804.4.3-2013, ГОСТ Р 50648-94, ГОСТ Р 51318.11- 2006, ГОСТ 23941-2002, ГОСТ Р ИСО 3746-2013, ГОСТ Р МЭК 62304-2013, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014, ГОСТ ISO 14971-2011, ГОСТ Р ИСО 17664-2012, ГОСТ Р ИСО 17665-1-2016, ГОСТ Р МЭК 62353-2013

Для заметок

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdraznadzor.ru

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ

Символ	Описание
	Предупреждение: обращайтесь к сопроводительной документации!
	Тип защиты от поражения электрическим током: изделие класса II
	Степень защиты от поражения электрическим током: Рабочая часть типа BF
	Постоянный ток
	Обратитесь к руководству по эксплуатации
	Не выбрасывать изделие в систему бытового мусора
	Серийный номер изделия
	Дата изготовления изделия
REV.	Номер версии изделия
IP41	Степень защиты от пыли и влаги
	Знак неионизирующей радиации - изделие содержит радиочастотный передатчик
	Знак соответствия РСТ обязательной сертификации продукции
	Знак соответствия стандартам качества и безопасности Европейского Союза (CE-mark)

ЗАО «Геософт Дент»
(Россия)

GEOSOFT

АДРЕС:

129090, г. Москва,
2-ой Троицкий пер., д.6а, стр.5

ТЕЛ./ФАКС: +7(495) 663-22-11,

E-mail: mail@geosoft.ru

Web: www.geosoft.ru

Горячая линия:

ТЕЛ.: +7(495) 663-22-11 (доб.170),

E-mail: [hotline @ geosoft.ru](mailto:hotline@geosoft.ru), [servis @ geosoft.ru](mailto:servis@geosoft.ru)

версия 03.08.20

[hotline @ geosoft.ru](mailto:hotline@geosoft.ru)

ESTUS

СЕРИЯ АППАРАТОВ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЦИИ ВСЕХ
ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Генеральный директор В.А. Гофштейн

л.



GEOSOFT

Подписано: ЗАО
"ГЕОСОФТ ДЕНТ"
Дата: 2020.11.10
16:22:58 +03'00'

ЗАО «Геософт Дент»
129090, Москва, 2-ой Троицкий пер., д.6а, стр.5
Тел./Факс - +7(495) 663-22-11
E-mail: mail@geosoft.ru, www.geosoft.ru

