

8

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Easy Sand
Напряжение	~220 В 50 Гц
Модуль 1	125-250 микрон
Модуль 2	50-125 микрон

9

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ (поставка возможна по специальному заказу)

- аспиратор (в комплекте с микрофильтром и пакетиками фильтров);
- упаковка пакетов для аспиратора;
- запасная часть;
- дополнительный модуль.

Инструкция по эксплуатации пескоструйного аппарата



МОДЕЛЬ
EASY SAND
(2 модуля)

СОДЕРЖАНИЕ

Производитель прибора	3
1. Введение	4
2. Цели и задачи руководства по эксплуатации	4
3. Условия эксплуатации	5
4. Содержимое упаковки	6
5. Описание прибора	6
6. Установка прибора	7
7. Эксплуатация прибора	7
8. Технические характеристики	8
9. Дополнительные составляющие	8



6. УСТАНОВКА ПРИБОРА

Поместите прибор на легко доступной и устойчивой поверхности. Педаль расположите на полу. Подключите кабель питания к розетке с соответствующим напряжением.

6

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед эксплуатацией прибора необходимо наполнить модули соответствующим абразивным материалом. Прибор оснащен двумя идентичными модулями (1,2), которые рассчитаны на использование песка 25-90 микрон. Прибор оснащен специальной трубкой, которая позволяет использовать абразив размером 120-250 микрон.

7

4

4. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- пескоструйный аппарат
- прозрачная защитная крышка
- пневматическая педаль
- руководство по эксплуатации



Внимание! Аппарат предназначен только для профессионального использования в стоматологической лаборатории. Прибор должен эксплуатироваться квалифицированным оператором. Прибор следует обязательно подключать к аспиратору, чтобы предотвратить дисперсию песка.



Нельзя эксплуатировать прибор при открытой крышке. Это опасно для пользователя и может повредить инструмент.

Необходимо соблюдать все меры безопасности, учитывая, что прибор рассчитан на напряжение сети 220 В.

5

5. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор Easy Sand – новый пескоструйный аппарат с двумя модулями. Это результат исследований в области современного стоматологического оборудования и ведущих электромеханических и электронных достижений.

Рабочее место отлично освещается, отличная видимость. Внутри прибора расположен селектор модулей и соответствующие форсунки (сопло) из видиа-сплава.

Прибор приводится в действие при помощи пневматической педали.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРИБОРА

Silfradent

Via G. Di Vittirio, 35-37

47018 S. Sofia (Forlì) Italia

tel. +39 543 970684

fax +39 543 970770



Внимание! Обратите внимание на этикетку, расположенную на задней панели прибора. Гарантия на прибор действительна только при наличии этой этикетки. При порче этой этикетки сразу же запрашивайте дилера о получении копии.

1

1. ВВЕДЕНИЕ

Мы благодарим Вас за предпочтение, оказанное продукции Silfradent.

Данный пескоструйный аппарат соответствует Европейской Директиве 89/32/СЕЕ и последующим модификациям.

Аппарат был разработан высококвалифицированными и опытными специалистами.

Прибор соответствует высоким стандартам качества, что характерно для всех приборов компании Silfradent.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора и следуйте всем рекомендациям.

2

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В данной инструкции описывается правильная установка и эксплуатация прибора.

Те инструкции, которые не были включены в данное руководство, относятся к действиям, которые необходимо выполнять только специалистам.

Инструкцию необходимо хранить в течение всего срока эксплуатации прибора.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3

Прибор не требует каких-либо особых условий эксплуатации.

Наружные части прибора устойчивы к воздействию коррозии.

Если Вы не планируете использовать прибор в ближайшее время, необходимо хранить его в сухом и закрытом месте.

Прибор необходимо накрывать соответствующей тканью, чтобы защитить от пыли и влажности.



Внимание! Аппарат должен применяться в соответствии с инструкциями данного руководства.

При нарушении правил эксплуатации или технического обслуживания аппарата фирма-производитель не несет ответственность за повреждения и поломки прибора.

Получая прибор, убедитесь в сохранности его упаковки.

Вскройте упаковку и убедитесь, что:

- оборудование комплектно
- нет видимых повреждений оборудования.

В случае обнаружения повреждений или некомплектности аппарата следует немедленно сообщить об этом компании, осуществляющей доставку, и дистрибьютору стоматологического оборудования.

Распакуйте все составляющие прибора.



Внимание! В данное руководство могут быть внесены изменения без предварительного уведомления покупателей.