

CODYSON 7910B



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ

Аппарат для предстерилизационной очистки

Модель CD 7910 (B)

Руководство пользователя.



Особенности:

- корпус из нержавеющей стали
- вместимость контейнера: 600 мл
- ультразвуковая частотность 42 000 Герц
- эффект повышается на 15 %
- Цифровой контроль, двухцветный дисплей LED, 5 режимов настройки таймера.
- Возможность мыть диски CD/DVD

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации
- Сохраните данную инструкцию

Инструкции по безопасности

Спасибо за то, что выбрали данный ультразвуковой очиститель. Ультразвуковой очиститель, несомненно, является уникальным изобретением. Миллионы крошечных пузырьков появляются, когда ультразвук проходит через жидкость. Далее, эти крошечные пузырьки попадают под сильнейшее давление, что приводит к поразительным результатам.

Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации

У/з очистители просты в использовании. Но, чтобы добиться максимального эффекта от вашей покупки, мы рекомендуем вас прочесть данное руководство. Также, оно содержит важную информацию по безопасности.

Содержание

1. Меры предосторожности	4-5
2. Приминение	6
3. Инструкция по безопасности	7
4. Использование дополнительных устройств	8
5. Выбор режимов	9
6. Эксплуатация	13
7. Использование дополнительных устройств	12
8. Содержание и хранение	13
9. Спецификация	14

Важные меры предосторожности



Предупреждение: сократить риск пожара, электрошока, возгорания или причинения вреда



- разбор оборудования должен проводиться только авторизованным техником




- повторенный процесс очищения поможет улучшить эффект



- выключите устройство из розетки до заполнения его водой, не превышайте максимальную отметку



- повторенный процесс очищения поможет улучшить эффект

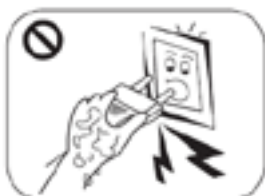

- не трогайте устройство влажными руками



- не используйте устройство когда вы спите



- используйте устройство только в соответствии с инструкцией



- не вливайте в емкость абразивные или коррозионные химикаты



Данное устройство не предназначено для использования лицами с физическими, психическими и физиологическими расстройствами, а также лицами без опыта и знаний по использованию данного устройства (если не проводилось ознакомление с инструкцией по эксплуатации лицами, ответственными за их безопасность).

Наливайте воду, только тогда, когда аппарат отключен от розетки. Наливайте воду, согласно требованиям производителя. Не переливайте воду, выше указанной отметки.

В данном устройстве предусмотрена вилка с фиксированным положением введения в розетку. Если вилка, по каким-то причинам, не подходит к розетке, переверните вилку. Если же, в этом случае, вилка продолжает не подходить - обратитесь к электрику.


Важные меры предосторожности



Опасность: сократить риск электрошока.



- после использования ,
выключите прибор из
розетки

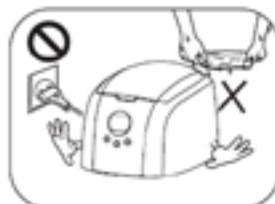

- храните устройство в
сухом и теплом месте



- храните прибор в
безопасном месте



- не прикасайтесь к
устройству, упавшему
в воду



- избегайте попадания воды на прибор



После использования , всегда выключайте прибор из розетки.
Не опускайте устройство в воду.
Устройство может выключиться из-за перебоев сети или э/м интерференции.
В таком случае, его нужно сразу же перезапустить и затем, следовать
инструкциям , необходимым для нормальной работы.


Принципы ультразвуковой очистки



Миллионы крошечных
воздушных пузырьков
формируются внутри
жидкости при помощи
высокочастотной вибрации.



Воздушные пузырьки
разрываются внутри
жидкости и вытесняют
грязь, что помогает до-
биться эффекта очищения.

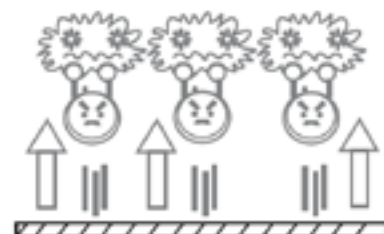

Грязь разбивается на
гранулы и эти гранулы
растворяются в воде.

Приминение

Ювелирные украшения	Очки и часы	Принадлежности
		
Ожерелья, кольца, сережки, браслеты и т.д	Очки, солнцезащитные очки, цепочки для часов, водонепроницаемые часы	Электробритвы, лезвия, зубные принадлежности, расчески, зубные щетки и т.д
Канцелярия	Металлические предметы	Металлические столовые приборы
		
CD/DVD диски	детали часов, старинные монеты, значки, клапаны и т.д	Вилки, ножи, ложки и т.д

Инструкции по безопасности

Мягкие ювелирные изделия жемчуг, изумруды, слоновая кость, кораллы, агаты, панцирь черепах и т.д	Данные предметы нежесткие, поэтому царапины могут появиться во время очистки
Приваренные, склеенные металлические предметы	у/з очистка может спровоцировать рассоединение частей
Часы: кроме водонепроницаемых	Вода может проникнуть в часовые механизмы и повредить их, в случае сомнений, используйте подставку под часы
Другое: древесина, стекло, керамика, фильтры, любые предметы с уже существующими трещинами	Если в предметах были трещины, ультразвук может спровоцировать их рассоединение

Инструкции по безопасности



Положите предмет в воду.


Вода не должна превышать отметку MAX



Закройте крышку и включите устройство в розетку



Нажмите кнопку ON для начала очищения.
Должна загореться красная лампочка. Во время работы устройства, вы можете услышать звуковой сигнал. Это означает, что устройство работает.

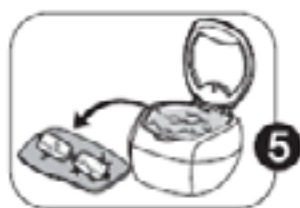


Устройство остановится автоматически через три минуты. Если нужно повторить цикл очистки, нажмите кнопку Вкл опять. если требуется выключить нажмите выкл.



Когда очистка завершена, выключите устройство из розетки, откройте крышку и извлеките предмет. Потом слейте воду и вытрите устройство насухо.

Особенности устройства и дополнительные устройства:

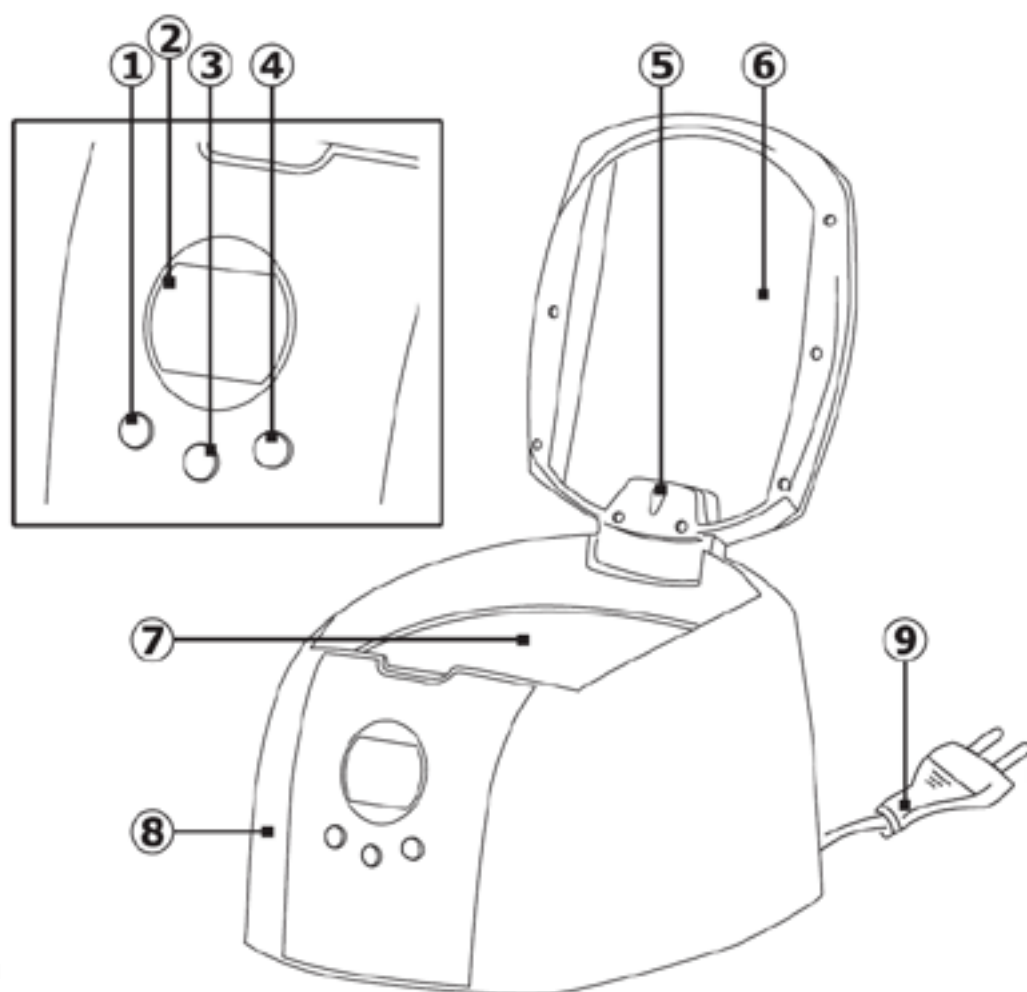

- 1. Кнопка вкл.
- 2. Дисплей времени
- 3. Кнопка установки настроек
- 4. Кнопка выкл
- 5. Подсветка
- 6. Окно просмотра
- 7. Контейнер из нержавеющей стали
- 8. Корпус
- 9. Вилка и кабель

Аксессуары



Держатель дисков




Подставка под часы



Корзина

Выбор одного из 5 цифровых режимов

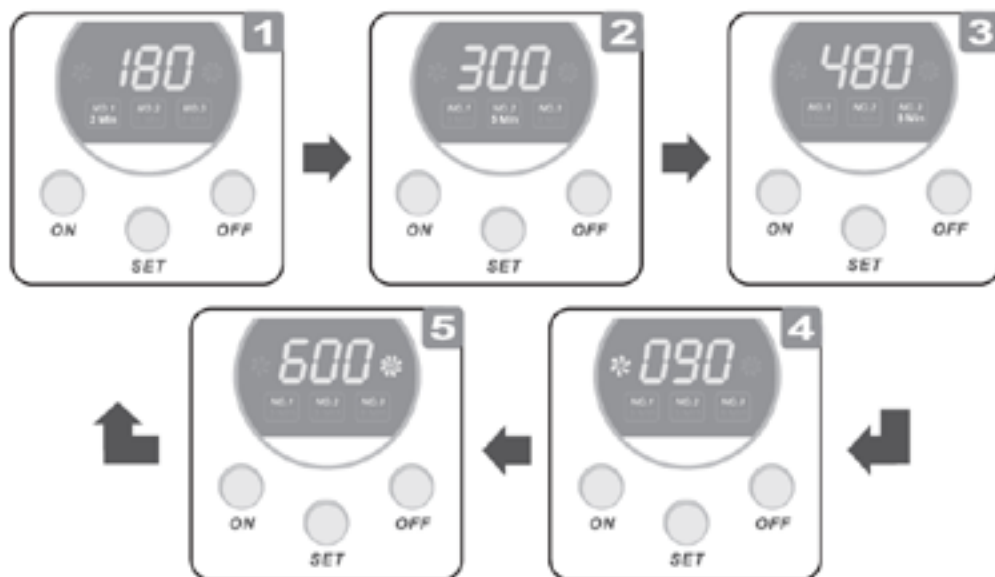

180

Автоматически отобразится 180 при первом запуске, наиболее используемый режим, при условии что:

- а) устройство подключено к розетке
- б) нажата кнопка SET, в первый раз.

300

Нажимая кнопку SET отображается новое время, каждый раз при нажатии этой кнопки, время меняется, обычно используется для очищения в первый раз, если грязь еще осталась, значит, нужно больше времени для мойки.

400

Обычно используется для мойки нескольких предметов одновременно.

090

Если после мойки в режиме 180 с, грязь еще остается и вода мутная, используйте эту функцию. Замените воду на чистую и нажмите 90 с, для очищения поверхности предмета

600


Рекомендовано для усиления эффекта очищения.

Примечание: если время очищения слишком долгое, это может привести к потере мелких частей во время процесса очищения.

Эксплуатация



Откройте крышку и налейте воду.

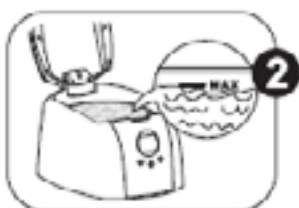

Положите предмет в воду. Вода не должна превышать отметку MAX.

Работа без воды может повредить оборудование.



Закройте крышку и включите устройство в розетку.



Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать рабочий режим. Автоматически на дисплее отобразится цифра 180. Это наиболее используемый режим. Каждый раз, нажимая кнопку SET, вы выбираете один из доступных режимов: 180 с - 300 с - 480 с - 90 с - 600 с.



Нажмите кнопку ON для начала очищения. Загорится синяя лампочка индикатор.

Во время процесса будет небольшая вибрация.



Когда устройство завершит работу, оно остановится автоматически, на таймере отобразятся цифры 000. Если требуется повторное очищение, повторите весь цикл. Если вы хотите остановить цикл, нажмите на кнопку вкл/выкл.

Эксплуатация




Чтобы остановить процесс, нажмите кнопку Выкл.




Важно! Можно повторить процесс очищения, но для того, чтобы избежать перегрева аппарата, необходимо делать паузу, хотя бы, в пять минут.

- если вы хотите повторить процесс очищения, нажмите кнопку SET
- используйте кнопку SET, для выбора одного режима времени.
- нажмите кнопку Вкл и начните процесс.

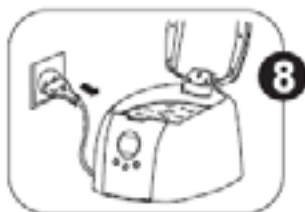

Когда очищение завершено, выключите его из розетки, откройте крышку, извлеките предмет и слейте воду.

Важно! После использования всегда протирайте остатки воды микрофибровой тряпкой.

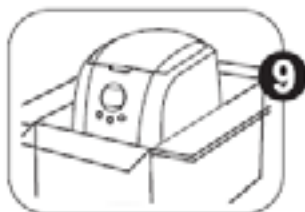

Храните устройство в прохладном и сухом месте.

Использование дополнительных устройств

Корзина абсорбирует 1/3 ультразвуковых волн и, тем самым, сокращает эффект очищения, поэтому, возможно, придется провести несколько процедур очищения.



Пластиковая корзина.

При очищении маленьких предметов, положите их в корзину, затем поставьте корзину в контейнер, таким образом трение между предметом и контейнером будет сокращено.

Обратите внимание, что корзина используется только для очищения маленьких предметов. При использовании корзины в других случаях, сокращается эффект очищения, т.к корзина поглощает 30 % ультразвуковой энергии. В этом случае, при использовании корзины, ознакомьтесь с главой "Усиленное очищение" данного руководства.



Подставка под часы.

Пропускная способность ультразвука очень велика, поэтому, не кладите часы (водонепроницаемость которых меньше 30 метров) в контейнер напрямую, т.к вода может повредить механизм часов. Рекомендуется положить часы на подставку, а затем уже опустить ее в воду. Подобно, пластиковой корзине, подставка под часы абсорбирует ультразвуковую энергию. Во время использования подставки, включите программу "Усиленного очищения".

Важно: часовой механизм может повредиться, при опускании его в жидкость.



Подставка под диски

Очищение дисков

Если использовать кусочки ткани для очищения дисков - это может поцарапать их. поэтому использование ультразвуковой технологии более эффективно (в течение 2 минут), т.о диски могут быть защищены от царапин.

Установите диск (СД, ДВД, ВСД) на подставку для дисков, как это показано на картинке (два диска могут быть очищены одновременно). Затем поставьте подставку в контейнер, заполненный обычной водой.

Предосторожности.

1. Не используйте теплую или горячую воду, т.к она легко может смыть печатную метку.
2. Диск можно мыть, если он грязный, но, не мойте диск более двух раз последовательно, оптимальной время мойки для первого раза - 90 секунд.
3. Ультразвук может убрать грязь с поверхности диск. Учтите, что поцарапанный диск работать не будет.

Методы очищения

3 метода очищения для этого устройства (в различных ситуациях)

Общее очищение

Критическая отметка

Используйте обычную воду для очищения (вода должна покрыть предмет, но не превысить критическую отметку)

Усиленное очищение

Используйте специальное моющее средство для особо сильных загрязнений.

Добавьте около 5 мл детергента в воду, это усилит очищение.

Частичное очищение

Большие предметы очищайте по частям, как показано на рисунке.

Содержание и хранение



1. После использования, выдерните шнур и слейте воду из контейнера.

Вода не должна оставаться в контейнере, необходимо удалять воду после каждого использования.



2. После каждого использования необходимо делать 5 минутный интервал, чтобы продлить жизнь оборудования.

Внутри аппарата расположено защитное устройство, защищающее аппарат от перегрева. Когда устройство работает долгое время, без остановок, защитное устройство выключит его, чтобы уберечь от поломки. После 10 минутного перерыва, устройство снова начнет работать.



3. Протрите устройство сухой чистой тряпкой, не используйте химикатов.



4. Устройство необходимо хранить в прохладном сухом месте.

Использование дополнительных устройств

Название модели	Ультразвуковой очиститель
№	CD - 7910 B
Настройки времени	180 с - 300 с - 480 с -90 с -600с
Напряжение и частотность	AC 220 -240 50 Герц, 30 В AC 100 -120 в, 60 Герц, 38 В AC 100 50/60 Герц, 50 Вт
у/з частотность	42 000 Герц
Материал изготовления	Нержавеющая сталь SUS304
Габариты	228 x 172 x 143 мм
Вместимость контейнера	750 мл (макс: 600 мл)
Длина кабеля	1.6 м
Вес нетто	1 кг
Вес брутто	1.4 кг



Эта отметка означает, что данное устройство не должно уничтожаться с другими отходами. После окончания срока эксплуатации, обратитесь к продавцу или производителю, чтобы они смогли уничтожить их экологичным способом.

