


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ
МОДЕЛЬ MS.2.00 без вытяжки**

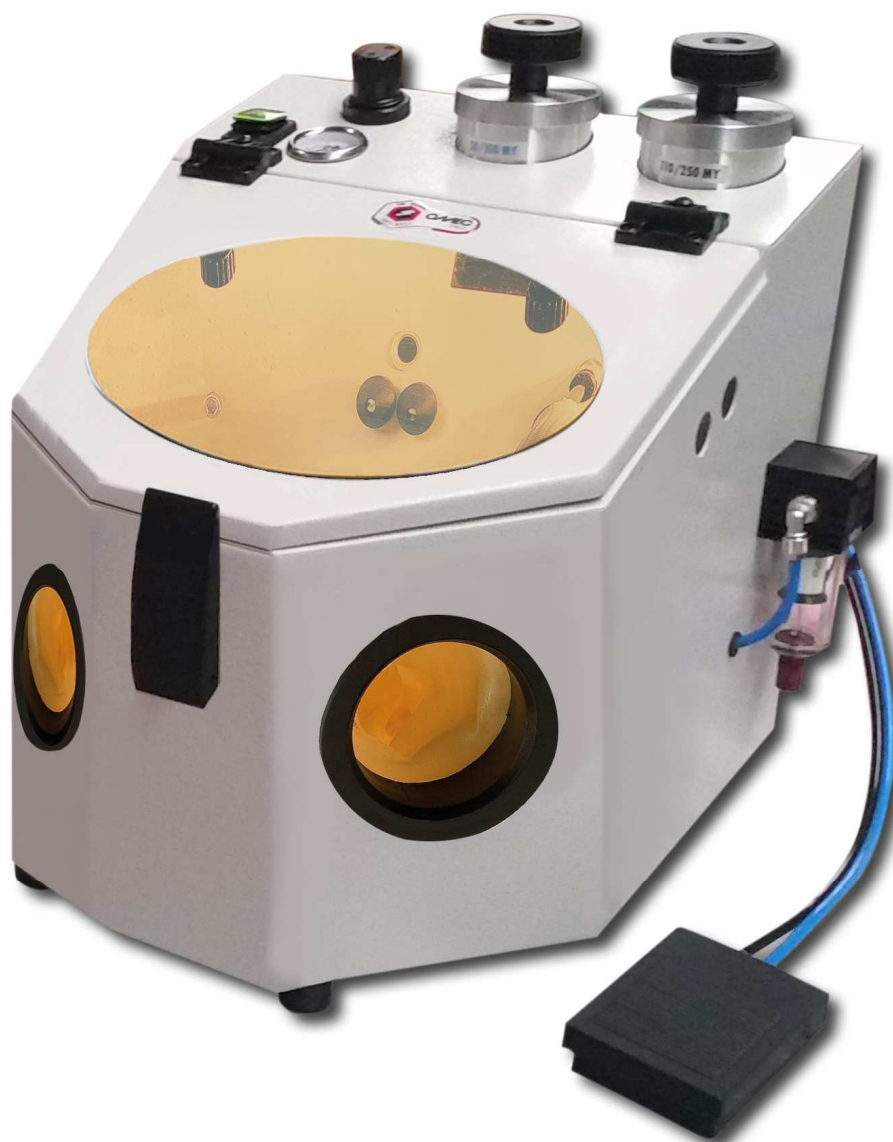

В данной инструкции описаны основные требования по безопасности и уходу за оборудованием.

РИСУНОК №1

1. Присоедините шланг подачи воздуха к соединению 3.
2. Включите кабель электропитания в сеть (4) – 230 В, 50 Гц,
3. Нажмите на кнопку (А) для начала работы и для зажигания лампочки (С). Лампочка (С) также освещает минимальный уровень цилиндра, обозначенный красной полосой (D).
4. Прочтите этикетку (Е) каждого цилиндра (F) для того, чтобы выбрать микрогранулы окиси или микро-шарики, которые будут использоваться. Мы рекомендуем тщательно следовать нашим инструкциям.
5. Отвинтите крышку (G) и по трубке заполните окисью или микро-шариками цилиндр (F) выше красного уровня. Плотно закройте крышку. У крышки имеется уплотнение.
6. Отрегулируйте рабочее давления при помощи регулятора давления (H). На ручке регулятора (I) сделана градуировка давления в атмосферах или барах. Давление в каждом цилиндре контролируется автоматически. Вытянув вверх и повернув красную ручку (L), можно регулировать давление: если ручку поворачивать по часовой стрелке, давление увеличивается; против часовой стрелки – давление уменьшается. Нажмите на красную ручку (L) для того, чтобы зафиксировать выбранное давление.

Рекомендуемое рабочее давление от 2 до 4 атмосфер или бар.

7. По окончании выше указанных предварительных операций, можно начать работу. Окись или микро-шарики вылетают из пистолета при нажатии на нем кнопки (M).
8. СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО разбирать на части цилиндры.

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ



А – Блокировка или недостаточный ход малого клапана пистолета:

Отвинтите втулку (1). Прочистите малый клапан при помощи небольшой щетки, аккуратно почистите стержень, смажьте его небольшим количеством масла, и заверните малый клапан пистолета (2). Не забудьте установить пружину (3) на место.



Б – Блокировка выброса окиси: освободите кнопку пистолета (4), отвинтите соединитель держателя наконечника (5), проверьте, не засорился ли наконечник, и в этом случае, почистите его и установите обратно.

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ



1 – На левой верхней стороне аппарата находится пневматический клапан безопасности (X). Когда передняя панель аппарата (W) открыта, подача воздуха прекращается, при закрытой передней панели – воздух циркулирует.

2 – У пылеотсасывателя (B) имеется термическая защита двигателя.

УСТАНОВКА И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



1 – Для гигиены рук, меняйте перчатки (R), когда они порвутся или сомнутся. Для того чтобы их заменить, вытащите рукав держателя перчаток (S) и кольца (T), затем вытяните перчатку (R) и рукав.




2 – Для сохранения хорошей видимости через стекло (U), меняйте защитную стеклянную пленку (V). Отвинтите 4 винта (Q), которые находятся внутри крышки (Z).



3 – Для того, чтобы пыль оставалась в аппарате, меняйте уплотнение (ZI), когда обнаруживается его износ.



5 – Для обеспечения плотного закрывания панели, заменяйте магнит на дверце (A1) при его размагничивании. Замените его, отвинтив винт (B1).

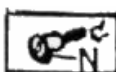

6 – Для обеспечения эффективной работы аппарата, меняйте наконечник (N), когда отверстие становится слишком большим.



7 – ВАЖНО: Для того, чтобы хорошо почистить аппарат и для того, чтобы он хорошо работал, освобождайте его от окиси, когда ее уровень достигает пластины с отверстиями (C1). Для того чтобы это сделать, используйте внутреннюю заглушку (D1).

8 – Рекомендуется использовать только лишь окись и микро шарики, производства фирмы OMEC

ВАЖНО: все запчасти производятся фирмой OMEC.


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА


S – заглушка

I – выключатель

L – лампочка

A – пылеотсасыватель

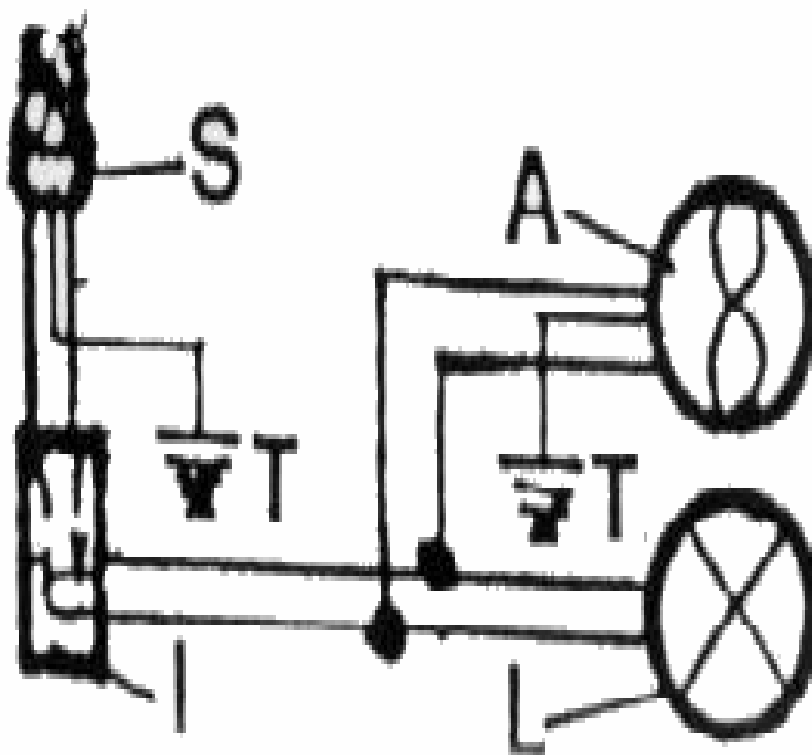

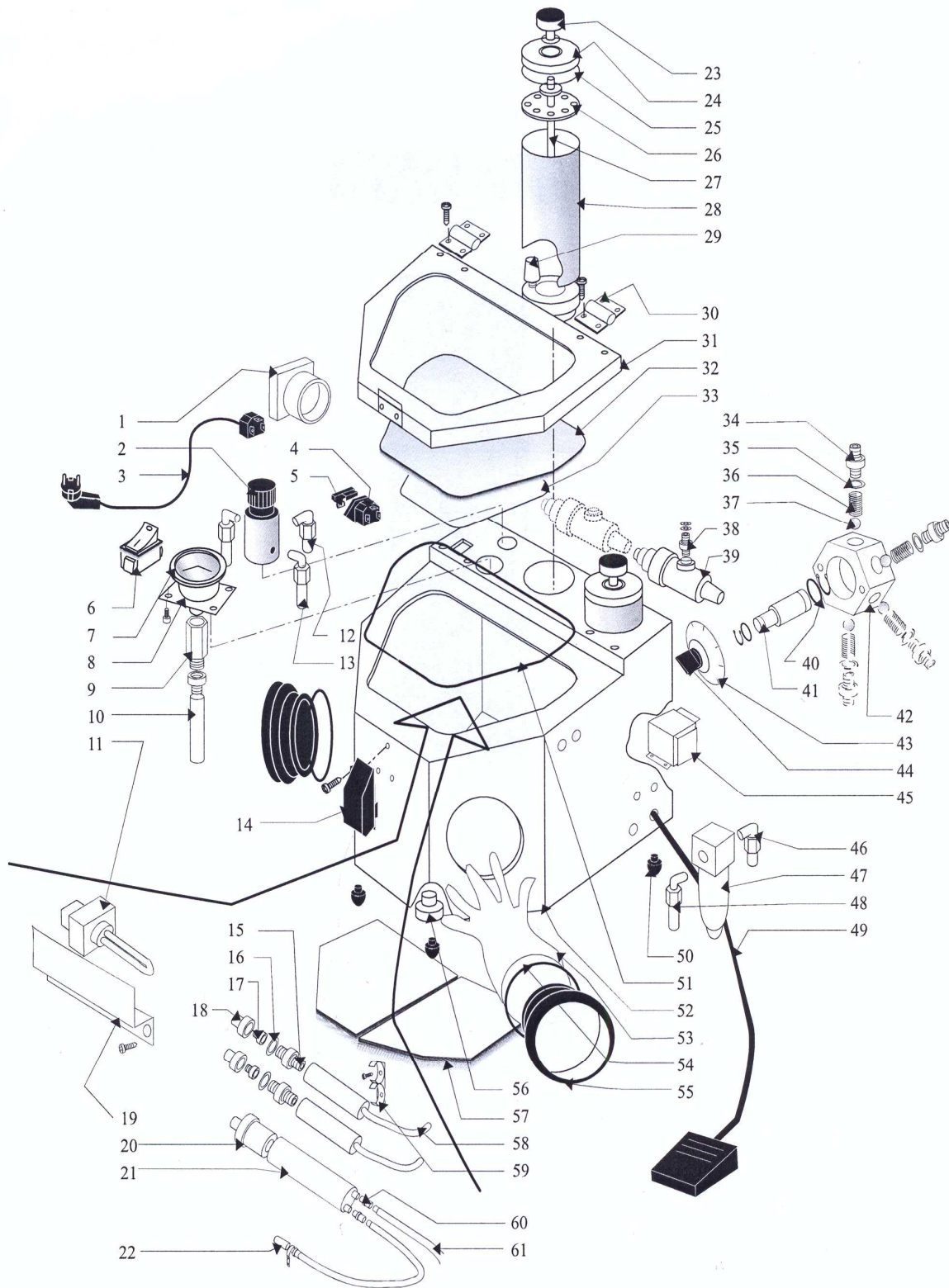

ПАСПОРТ

На изделие: устройство для очистки и полировки зубных протезов MS.2.00

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «O.M.E.C. S.N.C. di Carnevale Renato & C.», Via dell' Artigianato 3/5/7, 20053,
Muggio (Milano), Italy, Италия

Заводской номер: _____

Год выпуска: _____

Средний срок службы: _____

Технические параметры

Модель: MS.2.00

Назначение:

устройство для очистки и полировки зубных протезов MS.2.00

Электрическое питание:	MS.2.00
Номинальное напряжение, В/Гц:	220/50
Количество модулей	2
Габариты Д x Ш x В, мм:	430 x 410 x 380
Вес, кг:	13

Срок и условия гарантии

Гарантий 1 год. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся и расходные части: прокладки, лампы, источники питания и т.п.

Дата составления паспорта: _____

Подпись ответственного лица

М.П.