

Наименование Аппарат для предстерилизационной очистки  
Модель CD 5800

#### Характеристики

1. Крышка
2. Окно ракурса
3. Корпус из нержавеющей стали
4. Индикатор
5. Кнопка включения
6. Кнопка выключения
7. Пластиковая корзина
8. Пластиковая подставка под часы
9. Вилка и кабель
10. Кожух

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Автовключение через три минуты
2. Корпус из нержавеющей стали
3. Вместимость корпуса - 600 мл.
4. Частотность 42 000 Герц
5. Бесшумный, устойчивый, прочный.

Настройки таймера 3 минуты

Питание AC100 - 120 В ~ 60Гц, 35 Вт

AC220 - 240 В~ 50Гц, 50 Вт

Частота ультразвука 42000 Гц (42 к Гц)

Размер (длина\*ширина\*высота) 200x150x138 мм

Объем контейнера 600 мл

Вес 0,93 кг

Высокочастотная вибрация вырабатывает длина ультразвуковой волны 42 000 Герц.

Заполните аппарат водой, нажмите на кнопку Вкл, вы увидите, как грязь растворяется в воде.

## Меры предосторожности

- разбор оборудования должен проводиться только авторизованным техником
- выключите устройство из розетки до заполнения его водой, не превышайте максимальную отметку
- не трогайте устройство влажными руками
- используйте устройство только в соответствии с инструкцией
- не вливайте в емкость абразивные или коррозионные химикаты
- не опускайте устройство в воду
- повторенный процесс очищения поможет улучшить эффект
- не используйте устройство когда вы спите
- никогда не используйте устройство, если повреждены провода

## Инструкции по безопасности:

- 1) после использования ,выключите прибор из розетки
- 2) храните прибор в безопасном месте
- 3) избегайте попадания воды на прибор
- 4) не прикасайтесь к устройству, упавшему в воду
- 5) храните устройство в сухом и теплом месте
- 6) устройство не должно работать без присмотра
- 7) не опускайте устройство в воду или иную жидкость

Обратите внимание, что мелкие составляющие могут быть утеряны.

Не опускайте в аппарат мобильный телефон или часы, не являющиеся водонепроницаемыми.

Процесс распада грязи под действием технологии ультразвука

- под действием ультразвука образуются крошечные пузырьки
- пузырьки поднимаются на поверхность
- захватывая грязь и абсорбируя ее

Применение:

1) ювелирные украшения

ожерелья, кольца, сережки, браслеты и т.д

2) очки и часы

очки, солнечные очки, водонепроницаемые часы

3) принадлежности

головки электробритвы, лезвия, зубные принадлежности, расчески и т.д

4) канцелярия

ручки, резинки и т.д

5) металлические предметы

детали часов, старинные монеты, значки, клапаны и т.д

6) металлические столовые приборы

вилки, ножи, ложки и т.д

Инструкция по безопасности:

1) Откройте крышку и налейте воду

Работа без воды может повредить оборудование

2) Положите предмет в воду. Вода не должна превышать отметку MAX

3) закройте крышку и включите устройство в розетку

- 4) Нажмите кнопку ON для начала очищения. Должна загореться красная лампочка. Во время работы устройства, вы можете услышать звуковой сигнал. Это означает, что устройство работает.
- 5) Устройство остановится автоматически через три минуты. Если нужно повторить цикл очистки, нажмите кнопку Вкл опять. если требуется выключить - нажмите выкл.
- 6) Когда очистка завершена, выключите устройство из розетки, откройте крышку и извлеките предмет. Потом слейте воду и вытрите устройство насухо.

#### 4 способа очищения

##### 1) Общее очищение

Используйте только чистую воду для очищения, вода должна покрыть предмет, но не превышать ограничивающую отметку.

##### 2) Усиленное очищение

При очень сильном загрязнении, добавьте в воду 5-10 мл детергента, это позволит улучшить результат.

##### 3) Очищение по частям

Для очистки очень крупных предметов, расположите их, как показано на картинке

##### 4) Дополнительная очистка

Если предмет нуждается в дополнительном очищении или стерилизации, используйте функцию дополнительного очищения, затем замените воду на чистую и добавьте 5-10 мл детергента. Затем, запустите цикл очищения еще раз на 3 минуты.

## Руководство пользователя.

1) Откройте устройство и слейте воду.

Не оставляйте воду в контейнере надолго.

2) Промокните контейнер и насухо вытрите его полотенцем

Не мойте устройство водой, из-за угрозы электрошока.

3) Держите устройство в сухом прохладном месте.

## Использование дополнительных устройств

### Пластиковая корзина.

При очищении маленьких предметов, положите их в корзину, затем поставьте корзину в контейнер, таким образом трение между предметом и контейнером будет сокращено.

Обратите внимание, что корзина используется только для очищения маленьких предметов. При использовании корзины в других случаях, сокращается эффект очищения.

### Подставка под часы.

Не кладите часы (водонепроницаемость которых меньше 30 метров) в контейнер напрямую, т.к вода может повредить механизм часов. Рекомендуется положить часы на подставку, а затем уже опустить ее в воду. Подобно, пластиковой корзине, подставка под часы абсорбирует ультразвуковую энергию. Во время использования подставки, включите программу Улучшенного очищения.