



Регистрация
Установка в артикулятор

Руководство по эксплуатации





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИЕМНАЯ КАРЕТКА ARTEX®

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Непосредственная альтернатива передвижному столику или прямому переносу лицевой дуги. Суставной механизм с прикусной вилкой прикрепляется к каретке, удерживающей регистрат относительно оси при закреплении в нижней части артикулятора Artex®.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ /ОБРАЩЕНИЕ

Снимите штифт и держатель переднего ведения. Вставьте резцовый столик в верхнюю часть. Вставьте приемную каретку в нижнюю часть до упора и закрепите. Верхняя часть резцового столика лежит на приемной каретке. Вставьте опору прикусной вилки в нижнюю часть (с помощью магнита или винтовой резьбы). Вставьте трехмерный суставной механизм в гнездо на приемной каретке и зафиксируйте в нужном положении с помощью болта **(Рис. 1-3)**

Установите артикулятор в перевернутое положение. Переместите поперечную планку опоры прикусной вилки, чтобы она касалась прикусной вилки, и затяните винт с накатанной головкой. Планку можно дожать с помощью винтовой резьбы и/или телескопического фитинга. **(Рис. 4)**

Установите артикулятор в рабочее положение. Вставьте верхнечелюстную модель в оттиски прикусной вилки. Вставьте базисную пластинку в верхнюю часть. Проверьте расстояние между моделью и верхней частью и отрегулируйте его при необходимости, например, путем шлифовки модели или нанесения гипса в два этапа. **(Рис. 5+6)**

Размешайте необходимое для данного расстояния количество гипса до кремообразной консистенции. Увлажните основание модели. Нанесите гипс на базисную пластинку и увлажните поверхность модели. Закройте верхнюю часть. Ослабьте давление на гипс, простучав верхнюю часть. **(Рис. 7+8)**

Отдельные детали:

Заказ №:

218631

Приемная каретка Artex



Made in the European Union



Производитель
Дистрибьютор

Amann Girrbach AG
Герршафтсвизен 1
6842 Коблах, Австрия
Тел. +43 5523 62333-0
Факс +43 5523 55990

Дистрибьютор

Amann Girrbach GmbH
Дюрпенвег 40
75177 Пфорцхайм, Германия
Тел. +49 7231 957-100
Факс +49 7231 957-159

austria@amanngirrbach.com
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com



AMANNGIRRBACH