

Ультразвуковая камера (мойка).

CD-7810A

CD-7910A



CD-7810B

CD-7820A



ПАСПОРТ.
Руководство пользователя.

Внимание! Опасность поражения электротоком.

1. Меры предосторожности для снижения риска поражения электротоком.
 - 1.1. Всегда отключайте устройство от сети после использования
 - 1.2. Не включайте прибор мокрыми руками.
 - 1.3. Не храните устройство в месте, где возможно падение или повреждение ванны и корпуса.
 - 1.4. Не размещайте устройство в воде или под каплями воды (другой жидкости).
 - 1.5. Не пользуйтесь прибором, который упал в воду. Сразу отключите его.
 - 1.6. Прибор может отключиться или перейти в состояние не отключения (зависнуть) при быстром, кратковременном отключении или скачке напряжения электросети. Работоспособность прибора должна восстановиться после отключения от сети и последующего включения вилки питания. При дальнейшей работе руководствуйтесь этой инструкцией.
2. Внимание! Чтобы снизить риск возгорания, поражения электротоком, пожара и травм персонала:
 - 2.1. Никогда не оставляйте прибор в работе без присмотра
 - 2.2. Особое внимание за прибором, когда он используется рядом с детьми и инвалидами.
 - 2.3. Используйте прибор только по назначению, изложенному в этой инструкции. Не используйте дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем.
 - 2.4. Не включайте прибор, если у него поврежден провод или вилка. Если прибор не работает, как нужно, если его уронили или повредили, если его уронили в воду- обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта прибора.
 - 2.5. Держите прибор вне горячих поверхностей.
 - 2.6. Не пользуйтесь прибором, когда Вы рассеянны (спите или дремлете)
 - 2.7. Не включайте прибор со снятым корпусом.
 - 2.8. Не допускайте к пользованию прибором людей с умственными или физическими отклонениями или недостатком опыта и знаний, или им не была дана подробная инструкция человеком, ответственным за их безопасность.

3. Технические характеристики

Модель	CD-7810A	CD-7810B	CD-7910A	CD-7820A
Электропитание	220-240В 50/60 Гц			
Потребляемая мощность	50 Вт			
Частота ультразвука	42 кГц	42 кГц	46 кГц	42 кГц
Установка таймера	5 циклов: 180, 280, 380, 480, 90сек	3 мин.(180сек)	5 циклов: 180, 300, 480, 90, 600 сек	5 циклов: 180, 280, 380, 480, 90сек
Емкость ванны	0,75 л	0,75 л	0,7 л (макс.0,6)	0,75 л
Размеры	210*158*155 мм	210*158*125 мм	228*172*143 мм	207*174*140 мм
Вес	1,00 кг	1,00 кг	1,00 кг	1,1 кг

4. Назначение. Прибор предназначен для ультразвуковой мойки (чистки) изделий:
 - 4.1. Ювелирные украшения (ожерелье, кольца, браслеты, серьги и т.п.)
 - 4.2. Очки, солнцезащитные очки, часовые браслеты, часы в водозащитном корпусе (от 30метров)
 - 4.3. Канцелярские принадлежности (перья, принтерные головки и т.п.)
 - 4.4. Металлические частички (монеты, детали часов, значки, эмблемы, насадки, клапана, сеточки электробритв и т.п.)
 - 4.5. Столовые приборы
 - 4.6. CD, DVD диски

5. Предупреждение!



- 5.1. Не чистите прибор органическими и неорганическими растворителями, абразивными составами.
- 5.2. Не наливайте слишком много воды. Не допускайте перелива воды через край.
- 5.3. Перед чисткой наполните ванну водой до необходимого уровня, в противном случае прибор может быть поврежден.
- 5.4. Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр.
- 5.5. Запрещено мыть устройство в сборе водой, это снизит риск короткого замыкания.
- 5.6. Повторный цикл очистки повышает чистящий эффект. Для большего эффекта выдержите интервал между чистками более 5 мин.
- 5.7. Внимательно изучите инструкцию перед использованием прибора.
- 5.8. Не погружайте в воду часы в обычном (не водостойком) корпусе.
- 5.9. **ВНИМАНИЕ: После 3 циклов работы сделайте перерыв в работе на 10 мин.- это продлит срок службы прибора.**
- 5.10. **ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩЕНО сливать жидкость из ванны со стороны панели управления. Попадание жидкости на кнопки панели может привести к возникновению неисправности прибора по вине пользователя. Сливать жидкость из ванны мойки необходимо через одну из боковых сторон.**

6. Комплектация



- 6.1. Ультразвуковая мойка, 1 шт.
 - 6.2. Пластиковая корзина
 - 6.3. Подставка для часов
 - 6.4. Подставка для CD (только модель CD-7810A,CD-7820A)
7. Устройство прибора и органы управления.

CD-7810A, CD-7810B

CD-7820A

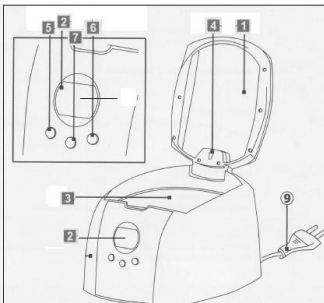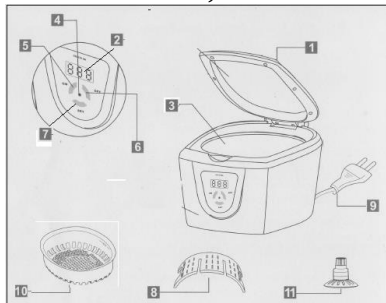

CD-7820A

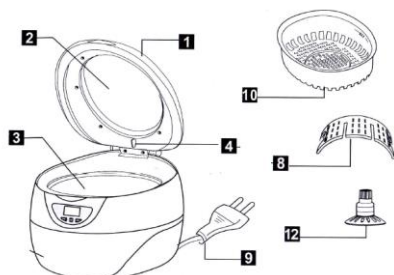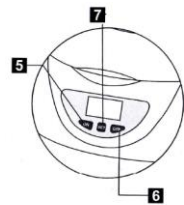

- «1»- крышка
«2»- цифровой дисплей
«3»- ванна из нержавеющей стали

- «4»- индикатор работы
«5»- кнопка включения ON
«6»- кнопка выключения OFF

«7»- кнопка выбора времени таймера SET
«8»- подставка для часов
«9»- вилка электропитания

«10»- корзина
«11»- подставка для CD

8. Работа

8.1. Откройте крышку ванны и наполните ее водой. Вода должна покрывать предметы, но не превышать отметку максимального уровня воды в ванне. Запуск работы без воды может привести к неисправности.


8.2. Положите предметы корзину. Уровень воды в ванне не должен превышать максимум и не быть ниже минимума. Закройте крышку, подсоедините устройство к сети. Индикатор времени работы при включении установится на 180 (секунд).

8.3. Кнопкой SET установите длительность цикла очистки. Порядок перебора циклов: 180, 280, 380, 480, 90сек и снова 180.

8.4. Нажмите кнопку ON для запуска очистки. Во время очистки слышен звук (писк)- это признак работы ультразвукового очистителя и не является неисправностью.

8.5. По истечении заданного времени чистка автоматически остановится, на индикаторе времени будут «000», индикатор красного цвета погаснет. Чистку можно прекратить вручную кнопкой OFF. При необходимости повторите процесс.

8.6. Когда чистка закончена, отключите от электросети. Откройте крышку и выньте предметы из ванны. Потом слейте воду. Промойте ванну водой

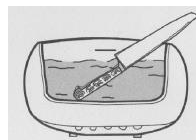

прибор
чистой

9. Методы очистки

9.1. Обычная чистка

Используйте воду из крана. Вода должна покрывать предметы, но не превышать отметку максимального уровня воды в ванне.

9.2. Усиленная (расширенная) чистка

Для профессионального использования (ювелиры) используйте специальные чистящие жидкости. Добавьте несколько капель моющего средства в воду для усиления очистки

9.3. Чистка предметов частями.

Для больших предметов чистка производится частями, как показано на рисунке.

9.4 Стерилизация или экстенсивная (глубокая) очистка

Если предметы нуждаются в глубокой очистке или стерилизации, то сначала выполните усиленную чистку (п.9.2),а потом смените воду на чистую, добавьте моющее средство или средство для стерилизации и запустите еще один цикл работы (3 мин.).

10. Уход и обслуживание

- 10.1. Не оставляйте прибор с продуктами очистки. Ванна должна быть промыта.
- 10.2. Перед сливом воды отключите сеть электропитания.
- 10.3. Не оставляйте воду в ванне после чистки. Меняйте ее после каждого использования.
- 10.4. Вытрите ванну полотенцем.
- 10.5. Храните прибор в сухом месте

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 11.1. Изделие изготовлено в соответствии с ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
- 11.2. Изделие признано годным к эксплуатации.
- 11.3. В составе изделия не содержится драгметаллов.

- 11.4. В составе Изделия не содержится вредных веществ, материалов. Срок службы Изделия ограничен сроком годности к эксплуатации.
- 11.5. Срок годности к эксплуатации ограничен техническим состоянием Изделия. Критерием предельного состояния является техническая невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности Изделия.
- 11.6. Специальных мер по утилизации Изделия не требуется.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Общие положения.

12.1.1 Участниками настоящего гарантийного соглашения являются:

- 12.1.1.1 Компания CODYSON, Китай, Изготовитель Изделия, в дальнейшем- Изготовитель
- 12.1.1.2 ООО «Нейл-Ист», Россия- поставщик Изделия на территорию РФ, в дальнейшем- Поставщик
- 12.1.1.3 Коммерческая организация, осуществляющая закупку Изделия для продажи, в дальнейшем- Продавец
- 12.1.1.4 Собственник Изделия, в дальнейшем Потребитель

12.1.2 Гарантийные обязательства на Изделие, произведенное Изготовителем и ввезенное на территорию РФ Поставщиком, несет Изготовитель.

12.1.3 Выполнение гарантийных обязательств Изготовителя осуществляет Поставщик

12.1.4 Гарантийное обслуживание производится в уполномоченных Поставщиком сервисных центрах. При выполнении гарантийных обязательств Изготовитель руководствуется действующим законодательством Российской Федерации (статья 475 «Последствия передачи товара ненадлежащего качества», 503 «Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества» ГК РФ)

12.1.5 Изготовитель гарантирует, что изделие не имеет выявленных дефектов изготовления и соответствует всем потребительским свойствам и техническим параметрам, приведенных в настоящем руководстве на изделие (статья 469 «Качество товара» ГК РФ).

12.1.6 Гарантийный срок на изделия устанавливается Изготовителем.

12.1.7 Гарантийный срок эксплуатации изделия исчисляется с даты продажи товара Потребителю.

12.1.8 При условии соблюдения п.2.1.2 Гарантийного Талона, гарантийный срок эксплуатации изделия составляет: 6 месяцев (статья 471 ГК РФ).

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА

Ответственность Поставщика по гарантийным обязательствам определяется на основе гарантийного талона на Изделие.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

13.1 Общие положения

13.1.1 Поставщик принимает на себя гарантии Изготовителя и гарантирует, что изделие не имеет выявленных дефектов изготовления и соответствует всем потребительским свойствам и техническим параметрам, приведенных в паспорте на изделие (статья 474 ГК РФ «Проверка качества товара»).

13.1.2 Гарантийные обязательства Поставщика действуют в период гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется в месяцах и начинает действовать с даты продажи товара Потребителю. Дата продажи фиксируется Продавцом в гарантийном талоне и удостоверяется печатью. В случае отсутствия отметки Продавца- с момента реализации изделия Поставщиком.

13.1.3 Все претензии по качеству купленного изделия в период гарантийного срока предъявляются непосредственно Поставщику, который принимает на себя гарантийные обязательства Изготовителя. Гарантийный талон действителен при наличии печати Поставщика (статья 476 ГК РФ «Недостатки товара, за которые отвечает Продавец»).

13.1.4 Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных сервисных центрах Поставщика, адреса которых указаны в данном гарантийном талоне и паспорте на изделие.

13.1.5 Покупатель осуществляет доставку изделия по адресу приемки для гарантийного обслуживания самостоятельно и за свой счет.

13.1.6 Если изделие соответствует п. 2.2- «Условия гарантии», п. 2.4- «Условия принятия изделия на гарантийное обслуживание», и это подтверждено «Актом технического освидетельствования» сервисного центра Поставщика, возврат изделия после гарантийного обслуживания Потребителю (Продавцу) осуществляется за счет Поставщика.

13.1.7 Если изделие не соответствует каким-либо позициям п. 2.2- «Условия гарантии», п. 2.4- «Условия принятия изделия на гарантийное обслуживание», то в «Акте технического освидетельствования» сервисного центра Поставщика указывается, что изделие снимается с гарантийного обслуживания. «Акт технического освидетельствования» высылается на контактный адрес Потребителя (Продавца). Возврат изделия Потребителю (Продавцу) осуществляется за счет Потребителя (Продавца).

13.2 Условия гарантии

13.2.1 Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

13.2.1.1 Истек срок гарантийных обязательств.

13.2.1.2 Отсутствует гарантийный талон или заводские номера на Изделии не совпадают с номерами, указанными в гарантийном талоне

13.2.1.3 Если Изделие повреждено при транспортировке, хранении или нарушены правила эксплуатации или Изделие эксплуатировалось не по прямому назначению.

13.2.1.4 Изделие имеет механические, термические, электрические повреждения.

13.2.1.5 Изделие имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей.

13.2.1.6 Изделие имеет повреждения, вызванные использованием нестандартного или не прошедшего тестирования на совместимость оборудования.

13.2.1.7 Изделие имеет повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

13.2.1.8 Изделие имеет повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и другими внешними факторами (климатическими и иными).

13.2.1.9 Изделие имеет повреждения, вызванные использованием нестандартных запчастей, комплектующих, расходных материалов, чистящих материалов.

13.2.1.10 Изделие имеет повреждения, вызванные не соблюдением срока и периода технического и профилактического обслуживания, если оно необходимо для данного изделия.

13.2.1.11 Если имеются следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта.

13.2.1.12 Если повреждены гарантийные пломбы производителя или поставщика.

13.2.1.13 Если заводская маркировка или серийный номер повреждены, неразборчивы, имеют следы переклеивания или отсутствуют.

13.2.1.14 Изделие имеет дефекты, возникшие в результате нормального (эксплуатационного) износа.

13.2.1.15 Изделие самостоятельно модифицировано или переукомплектовано.

13.2.2 Гарантийные обязательства не распространяются:

13.2.2.1 На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

13.2.2.2 На совместимость данного изделия с изделиями третьих сторон, в части их совместимости и конфигурирования.

13.2.2.3 На упаковку продукции и расходные материалы.

13.3 Отказ от ответственности за сопутствующие убытки.

13.3.1 Продавец ни при каких условиях не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования проданного товара.

13.4 Условия принятия изделия на гарантийное обслуживание. Условия гарантийных обязательств и Бесплатного сервисного обслуживания:

13.4.1 На гарантийное обслуживание принимаются изделия, ввезенные на территорию Российской Федерации Поставщиком.

13.4.2 Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в данном гарантийном талоне.

13.4.3 Заводские номера, нанесенные на изделия, должны соответствовать указанным в данном гарантийном талоне.

13.4.4 Изделие должно эксплуатироваться по прямому назначению в соответствии с техническими характеристиками.

13.4.5 Изделие должно эксплуатироваться квалифицированным персоналом.

13.4.6 Изделие должно подвергаться своевременному и качественному техническому обслуживанию, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, приведенной в паспорте на изделие.

13.4.7 Изделие принимается на гарантийный ремонт в заводской упаковке и в полной комплектации при наличии заполненного Гарантийного талона и копии документов, подтверждающих дату покупки (накладная и чек ККМ или товарно-транспортная накладная по форме ТОРГ-12).

13.4.8 Для предъявления рекламации на изделие Покупатель обязан приложить к каждому изделию правильно и полно заполненный лист рекламации. Образец бланка листа рекламации для гарантийного обслуживания находится в приложении №1 настоящего гарантийного талона.

13.5 Сроки гарантийного обслуживания и возврат изделий

13.5.1 Комплектующие и изделия, удовлетворяющие условиям гарантии, подлежат возврату или замене в течение 30 календарных дней со дня приема на гарантийное обслуживание. Для оборудования, сданного в региональные сервисные центры срок обслуживания - 30 календарных дней без учета времени доставки до сервисного центра.

13.5.2 По окончании гарантийного обслуживания в порядке убывания приоритета:

13.5.2.1 выдается отремонтированное изделие. Применяемые в ремонте компоненты являются новыми, либо восстановленными, имеющие параметры новых.

13.5.2.2 если ремонт изделия не возможен, Поставщик производит замену изделия на новое

13.5.2.3 в случае отсутствия на складе Поставщика изделий на замену и у Поставщика нет возможности их поставить в течение 30 календарных дней со дня приема на гарантийное обслуживание, сервисным центром оформляется заключение о не возможности ремонта или замены изделия Потребителю (Продавцу) для предоставления Поставщику.

13.5.3 Компенсация стоимости изделия по заключению сервисного центра о не возможности ремонта, производится в порядке и сроки, устанавливаемые Изготовителем (см. п.1.1.4).

13.5.4 По согласованию с клиентом изделие, подготовленное к выдаче после гарантийного обслуживания, может быть передано из сервисного центра на склад Поставщика для отправки Потребителю (Продавцу) с очередным заказом.

13.5.5 Спорные вопросы, а также не штатные ситуации, связанные с выдачей товара, принимаются к рассмотрению руководителем сервисного центра в день получения товара представителем клиента.

13.5.6 Неявка Потребителя (Продавца) для получения подготовленных к выдаче после гарантийного обслуживания изделий не может трактоваться как несоблюдение Поставщиком обязательств по срокам гарантийного обслуживания. Если Потребитель (Продавец) не обращается для получения подготовленных к выдаче изделий, то по истечении 3 месяцев со дня приема изделий в гарантийное обслуживание товарная задолженность аннулируется.

13.5.7 Потребитель (Продавец) имеет возможность оспорить работоспособность отремонтированного изделия у сервисного центра. Претензии к работоспособности отремонтированного изделия принимаются к рассмотрению в течение 2 (двух) недель со дня получения изделия представителем Потребителя (Продавца). Для предъявления претензий необходимо заполнить бланк рекламации и сдать вместе с проблемным изделием в сервисный центр. По факту проверки претензии на указанный адрес высылается сообщение о результатах.

13.6 Остаточные сроки гарантии на отремонтированную (замененную) продукцию

13.6.1 На отремонтированные или заменяемые изделия дата окончания гарантии устанавливается равной дате окончания гарантии на первоначально сданное в обслуживание изделие, продленной на срок нахождения в ремонте (п.3, статья 471 ГК РФ «Исчисление гарантийного срока»).

13.6.2 Дата окончания гарантии на первоначально сданное изделие фиксируется при приеме в гарантийное обслуживание. Серийный номер и дата окончания гарантии выдаваемых из ремонта или заменяемых изделий указываются в гарантийном талоне.

Наименование изделия	Заводской номер	Срок гарантии (месяцев)
Модель:		6 (шесть) месяцев

Продавец _____

Дата отгрузки _____ ФИО, подпись комплектовщика _____
(с указанием номера документа)
М.П.

Продавец _____

Адрес торгующей организации
Дата продажи _____ ФИО, подпись продавца _____
М.П.

Покупатель: с условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

18. При обращении в сервисный центр, приложите заполненную рекламацию:

Приложение №1 Образец рекламации:

Контрагент _____ Почтовый адрес: _____ Конт. лицо _____ тел., эл.почта _____

Рекламация от « _____ » _____ 20 ____ г.

Изделие: _____ сер. №: _____ Дата отгрузки: « _____ » _____ 20 ____ г.

Продано (предприятие, город): _____ Дата продажи: _____

« _____ » _____ 20 ____ г. по документу № _____

Проявление неисправности и обстоятельства её

выявления: _____

От Контрагента: _____ « _____ » _____ 20 ____ г.

г. М.П.