

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Доктор Ким»

А.А.Градобоев

23 декабря 2025 г.



Инструкция по применению

на медицинское изделие

**«Инструмент ручной стоматологический в вариантах исполнения по ту
32.50.11-001-15237848 -2025»**

производства ООО «Доктор Ким», Россия

Оглавление

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	3
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	36
4. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.....	36
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	36
6. ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ.....	36
7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	36
8. ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	37
9. ОЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ.....	37
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	39
11. МАРКИРОВКА	79
12. УПАКОВКА	80
13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	80
14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	80
15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИИ	80
16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	81
17. СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	81

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Инструмент ручной стоматологический в вариантах исполнения предназначен для обследования, диагностики ротовой полости и кариозных полостей; определения твердости зуба и глубины десневого кармана; удаления камня и других отложений с поверхности зуба и межзубных пространств; чистки и скобления кости; транспортировки, внесения и уплотнения стоматологических материалов; отслаивания шейдерной мембраны; отделения мягких тканей от костной основы.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит медицинское изделие из приведенной ниже номенклатуры:

Арт.	Наименование, описание и комплектность изделия	Рис. №
DK11-SU10	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 178 мм – Инструкция по применению	1
DK11-SU14	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 178 мм – Инструкция по применению	1
DK11-SU18	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 18 мм, длина 178 мм – Инструкция по применению	1
DK11-SU20	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 178 мм – Инструкция по применению	1
DK11-SU22	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	1
DK11-SU24	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	1
DK11-DU10	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	2
DK11-DU14	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	2
DK11-DU18	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 18 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	2
DK11-DU20	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	2
DK11-DU22	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 182 мм – Инструкция по применению	2
DK11-DU24	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 182 мм – Инструкция по применению	2
DK11-SU10E	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой с эндодлинейкой серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 178 мм – Инструкция по применению	3
DK11-SU14E	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой с эндодлинейкой серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 178 мм – Инструкция по применению	3
DK11-SU18E	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой с эндодлинейкой серия Dr.Kim, диаметр 18 мм, длина 178 мм	3

	– Инструкция по применению	
DK16-SB22	- Зеркало стоматологическое одностороннее базовое с слюноотсосом без ручки серия Dr.Kim, диаметр 25 мм, длина 64 мм – Инструкция по применению	8
DK16-SB22H	- Зеркало стоматологическое одностороннее базовое с слюноотсосом с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 25 мм, длина 165 мм – Инструкция по применению	9
DK16-SB22D	- Зеркало стоматологическое одностороннее базовое с слюноотсосом неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 25 мм, длина 155 мм – Инструкция по применению	9
DK17-SUL22-1	- Зеркало стоматологическое ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 23 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	1
DK17-SUL22-2	- Зеркало стоматологическое ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 167 мм – Инструкция по применению	1
DK17-SRL22-1	- Зеркало стоматологическое родиевое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 23 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	1
DK17-SRL22-2	- Зеркало стоматологическое родиевое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 167 мм – Инструкция по применению	1
DK17-SBL22-1	- Зеркало стоматологическое базовое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 23 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	1
DK17-SBL22-2	- Зеркало стоматологическое базовое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 167 мм – Инструкция по применению	1
DK82-OS	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии размер S серия Dr.Kim, диаметр 67 мм, длина 100 мм – Инструкция по применению	22
DK82-OM	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии размер M серия Dr.Kim, диаметр 53 мм, длина 140 мм – Инструкция по применению	22
DK82-OM/1	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии размер M серия Dr.Kim, диаметр 53 мм, длина 140 мм – Инструкция по применению	22
DK82-OL	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии размер L серия Dr.Kim, диаметр 63 мм, длина 142 мм – Инструкция по применению	22
DK82-OL/1	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии размер L серия Dr.Kim, диаметр 63 мм, длина 142 мм – Инструкция по применению	22
DK82-OL/2	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии размер L серия Dr.Kim, диаметр 63 мм, длина 142 мм – Инструкция по применению	22
DK82-B	- Зеркало стоматологическое щечное для дентальной фотографии форма Висса серия Dr.Kim, диаметр 58 мм, длина 150 мм – Инструкция по применению	1
DK82-B/1	- Зеркало стоматологическое щечное для дентальной фотографии форма Висса серия Dr.Kim, диаметр 58 мм, длина 150 мм – Инструкция по применению	1
DK82-L	- Зеркало стоматологическое язычное для дентальной фотографии форма Lingua серия Dr.Kim, диаметр 50 мм, длина 145 мм – Инструкция по применению	1
DK82-L/1	- Зеркало стоматологическое язычное для дентальной фотографии форма Lingua серия Dr.Kim, диаметр 50 мм, длина 145 мм	1

	– Инструкция по применению	
DK82-L/2	- Зеркало стоматологическое язычное для дентальной фотографии форма Lingua серия Dr.Kim, диаметр 50 мм, длина 145 мм – Инструкция по применению	1
DK82-OSH	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер S серия Dr.Kim, диаметр 67 мм, длина 183 мм – Инструкция по применению	22
DK82-OMH	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер M серия Dr.Kim, диаметр 53 мм, длина 221 мм – Инструкция по применению	22
DK82-OLH	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер L серия Dr.Kim, диаметр 63 мм, длина 225 мм – Инструкция по применению	22
DK82-BH	- Зеркало стоматологическое щечное для дентальной фотографии с ручкой форма Висса серия Dr.Kim, диаметр 58 мм, длина 230 мм – Инструкция по применению	1
DK82-LH	- Зеркало стоматологическое язычное для дентальной фотографии с ручкой форма Lingua серия Dr.Kim, диаметр 50 мм, длина 225 мм – Инструкция по применению	1
DK82-OSHL	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер S серия Dr.Kim, диаметр 67 мм, длина 198 мм – Инструкция по применению	1
DK82-OMHL	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер M серия Dr.Kim, диаметр 53 мм, длина 235 мм – Инструкция по применению	1
DK82-OLHL	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер L серия Dr.Kim, диаметр 63 мм, длина 240 мм – Инструкция по применению	1
DK82-BHL	- Зеркало стоматологическое щечное для дентальной фотографии с ручкой форма Висса серия Dr.Kim, диаметр 58 мм, длина 245 мм – Инструкция по применению	1
DK82-LHL	- Зеркало стоматологическое язычное для дентальной фотографии с ручкой форма Lingua серия Dr.Kim, диаметр 50 мм, длина 240 мм – Инструкция по применению	1
RS-01	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Royna, диаметр 10 мм, длина 178 мм – Инструкция по применению	1
RS-11	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Royna, диаметр 14 мм, длина 178 мм – Инструкция по применению	1
RS-21	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Royna, диаметр 18 мм, длина 178 мм – Инструкция по применению	1
RS-31	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Royna, диаметр 20 мм, длина 178 мм – Инструкция по применению	1
RS-41	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Royna, диаметр 22 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	1
RS-51	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Royna, диаметр 24 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	1
RD-11	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Royna, диаметр 14 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	2
RD-21	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Royna, диаметр 18 мм, длина 180 мм	2

	– Инструкция по применению	
RX-W-F27-Н	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое с ручкой серия Royna, диаметр 2 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	1
RX-UT-F39-Н	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое с ручкой серия Royna, диаметр 3 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	1
RX-W-F39-Н	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое с ручкой серия Royna, диаметр 3 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	1
RV-SM-II	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с слюноотсосом без ручки серия Royna, диаметр 25 мм, длина 64 мм – Инструкция по применению	8
RV-SM-II-Н	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с слюноотсосом с ручкой серия Royna, диаметр 25 мм, длина 165 мм – Инструкция по применению	9
RV-SM-01G	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с слюноотсосом неразборное с ручкой серия Royna, диаметр 25 мм, длина 155 мм – Инструкция по применению	9
RS-L01	- Зеркало стоматологическое ультраяркое с ручкой серия Royna, диаметр 23 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	1
RV-01-OS	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии размер S серия Royna, диаметр 67 мм, длина 100 мм – Инструкция по применению	22
RV-01-OM	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии размер M серия Royna, диаметр 53 мм, длина 140 мм – Инструкция по применению	22
RV-01-OL	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии размер L серия Royna, диаметр 63 мм, длина 142 мм – Инструкция по применению	22
RV-01-B	- Зеркало стоматологическое щечное для дентальной фотографии форма Висса серия Royna, диаметр 58 мм, длина 150 мм – Инструкция по применению	1
RV-01-L	- Зеркало стоматологическое язычное для дентальной фотографии форма Lingua серия Royna, диаметр 50 мм, длина 145 мм – Инструкция по применению	1
RV-FFM-01-OS	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер S серия Royna, диаметр 67 мм, длина 183 мм – Инструкция по применению	22
RV-FFM-01-OM	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер M серия Royna, диаметр 53 мм, длина 221 мм – Инструкция по применению	22
RV-FFM-01-OL	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер L серия Royna, диаметр 63 мм, длина 225 мм – Инструкция по применению	22
RV-FFM-01-B	- Зеркало стоматологическое щечное для дентальной фотографии с ручкой форма Висса серия Royna, диаметр 58 мм, длина 230 мм – Инструкция по применению	1
RV-FFM-01-L	- Зеркало стоматологическое язычное для дентальной фотографии с ручкой форма Lingua серия Royna, диаметр 50 мм, длина 225 мм – Инструкция по применению	1
RV-FFM-02-OS	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер S серия Royna, диаметр 67 мм, длина 198 мм – Инструкция по применению	22
RV-FFM-02-OM	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер M серия Royna, диаметр 53 мм, длина 235 мм	22

	– Инструкция по применению	
RV-FFM-02-OL	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер L серия Royna, диаметр 63 мм, длина 240 мм – Инструкция по применению	22
RV-FFM-02-B	- Зеркало стоматологическое щечное для дентальной фотографии с ручкой форма Висса серия Royna, диаметр 58 мм, длина 245 мм – Инструкция по применению	23
RV-FFM-02-L	- Зеркало стоматологическое язычное для дентальной фотографии с ручкой форма Lingua серия Royna, диаметр 50 мм, длина 240 мм – Инструкция по применению	24
DK31-S	- Ретрактор стоматологический ротовой серия Dr.Kim, длина 100 мм, ширина 70 мм - Инструкция по применению	25
DK31-M	- Ретрактор стоматологический ротовой серия Dr.Kim, длина 121 мм, ширина 85 мм - Инструкция по применению	25
DK31-L	- Ретрактор стоматологический ротовой серия Dr.Kim, длина 135 мм, ширина 90 мм - Инструкция по применению	25
DK31M-M	- Ретрактор стоматологический ротовой с зеркалом серия Dr.Kim, длина 105 мм, ширина 50 мм - Инструкция по применению	26
DK32-1	- Ретрактор стоматологический ручной односторонний серия Dr.Kim, длина 170 мм, ширина 60 мм - Инструкция по применению	12
DK32-2	- Ретрактор стоматологический ручной односторонний серия Dr.Kim, длина 150 мм, ширина 50 мм - Инструкция по применению	12
DK32-6	- Ретрактор стоматологический ручной односторонний серия Dr.Kim, длина 130 мм, ширина 35 мм - Инструкция по применению	12
DK32-7	- Ретрактор стоматологический ручной односторонний серия Dr.Kim, длина 120 мм, ширина 45 мм - Инструкция по применению	12
DK32D-1	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Dr.Kim, длина 170 мм, ширина 60 мм - Инструкция по применению	14
DK32D-2	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Dr.Kim, длина 150 мм, ширина 50 мм - Инструкция по применению	14
DK32D-3	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Dr.Kim, длина 100 мм, ширина 55 мм - Инструкция по применению	14
DK32D-4	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Dr.Kim, длина 170 мм, ширина 70 мм - Инструкция по применению	14
DK32D-5	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Dr.Kim, длина 170 мм, ширина 55 мм - Инструкция по применению	14
DK32D-6	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Dr.Kim, длина 130 мм, ширина 35 мм - Инструкция по применению	14
DK32D-7	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Dr.Kim, длина 120 мм, ширина 45 мм - Инструкция по применению	14
DK32D-8	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Dr.Kim, длина 110 мм, ширина 35 мм	14

	- Инструкция по применению	
DK221-NH	- Зонд стоматологический общего обследования без ручки серия Dr.Kim, длина 40 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	18
DK221-NHM	- Зонд стоматологический мерный пародонтологический без ручки серия Dr.Kim, длина 40 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	18
DK221-NHM/1	- Зонд стоматологический мерный пародонтологический без ручки серия Dr.Kim, длина 40 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	18
DK232-1	- Пинцет стоматологический прямой серия Dr.Kim, длина 165 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	20
DK232-2	- Пинцет стоматологический изогнутый серия Dr.Kim, длина 165 мм, ширина 20 мм - Инструкция по применению	19
DK232-2/1	- Пинцет стоматологический изогнутый серия Dr.Kim, длина 165 мм, ширина 20 мм - Инструкция по применению	19
DK241	- Пакер стоматологический серия Dr.Kim, длина 165 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	21
DK242	- Пакер стоматологический с мерной прорезью серия Dr.Kim, длина 165 мм, ширина 20 мм - Инструкция по применению	21
RX-G-03H	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Rouva, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	15
RX-G-03H/1	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Rouva, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	15
RX-G-03H/2	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Rouva, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	15
RX-G-03H/3	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Rouva, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	15
RX-G-03H/4	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Rouva, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	15
RX-G-03H/5	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Rouva, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	15
RX-G-03H/6	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Rouva, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	15
RX-G-03H/7	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Rouva, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	15
RX-G-03H/8	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Rouva, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	15
R75-159	- Зонд стоматологический односторонний общего обследования серия Rouva, длина 160 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	18
R75-390	- Зонд стоматологический односторонний мерный пародонтологический, серия Rouva длина 160 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	18

R75-159-1	- Зонд стоматологический общего обследования без ручки серия Royna, длина 40 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	18
R75-390-1	- Зонд стоматологический мерный парондотологический без ручки серия Royna, длина 40 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	18
R75-129	- Пинцет стоматологический прямой серия Royna, длина 165 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	20
R75-130	- Пинцет стоматологический изогнутый серия Royna, длина 165 мм, ширина 20 мм - Инструкция по применению	19
R75-075	- Ретрактор стоматологический ротовой серия Royna, длина 100 мм, ширина 70 мм - Инструкция по применению	25
R75-088	- Ретрактор стоматологический ротовой серия Royna, длина 121 мм, ширина 85 мм - Инструкция по применению	25
R75-087	- Ретрактор стоматологический ротовой серия Royna, длина 135 мм, ширина 90 мм - Инструкция по применению	12
R75-089	- Ретрактор стоматологический ручной односторонний серия Royna, длина 170 мм, ширина 60 мм - Инструкция по применению	12
R75-091	- Ретрактор стоматологический ручной односторонний серия Royna, длина 150 мм, ширина 50 мм - Инструкция по применению	12
R75-078	- Ретрактор стоматологический ручной односторонний серия Royna, длина 120 мм, ширина 45 мм - Инструкция по применению	12
R75-080	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Royna, длина 170 мм, ширина 60 мм - Инструкция по применению	14
R75-081	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Royna, длина 150 мм, ширина 50 мм - Инструкция по применению	14
R75-207	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Royna, длина 170 мм, ширина 55 мм - Инструкция по применению	14
R75-208	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Royna, длина 130 мм, ширина 35 мм - Инструкция по применению	14
	Принадлежности:	
DK291-3	- Бокс для стерилизации стоматологического инструмента на 3 инструмента, длина 210 мм, ширина 70 мм - Инструкция по применению	-
DK291-5	- Бокс для стерилизации стоматологического инструмента на 5 инструментов, длина 210 мм, ширина 80 мм - Инструкция по применению	-
DK291-5M	- Бокс для стерилизации стоматологического инструмента на 5 инструментов, длина 210 мм, ширина 80 мм - Инструкция по применению	-
DK291-7	- Бокс для стерилизации стоматологического инструмента на 7 инструментов, длина 210 мм, ширина 110 мм - Инструкция по применению	-
DK291-8	- Бокс для стерилизации стоматологического инструмента на 8 инструментов, длина 210 мм, ширина 120 мм	-

	- Инструкция по применению	
DK291-10	- Бокс для стерилизации стоматологического инструмента на 10 инструментов, длина 210 мм, ширина 140 мм - Инструкция по применению	-
DK291-10/1	- Бокс для стерилизации стоматологического инструмента на 10 инструментов, длина 210 мм, ширина 140 мм - Инструкция по применению	-
DK292-S	- Кольцо маркировочное стоматологическое, диаметр 5,2 мм - Инструкция по применению	-
DK292-M	- Кольцо маркировочное стоматологическое, диаметр 7,0 мм - Инструкция по применению	-
DK292-L	- Кольцо маркировочное стоматологическое, диаметр 11,0 мм - Инструкция по применению	-
DK293-S	- Колпачок защитный стоматологический силиконовый для стоматологического зеркала 18 мм и 22 мм, диаметр 30 мм - Инструкция по применению	-
DK293-L	- Колпачок защитный стоматологический силиконовый для стоматологического зеркала 24 мм, диаметр 32 мм - Инструкция по применению	-
DK294	- Изделие для очистки стоматологических зеркал - Инструкция по применению	-
RV-CMS-1	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Roуva длина 195 мм, ширина 79 мм - Инструкция по применению	28
RV-CMS-2	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Roуva длина 195 мм, ширина 71 мм - Инструкция по применению	28
RV-CMS-3	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Roуva длина 225 мм, ширина 65 мм - Инструкция по применению	28
RV-CMS-4	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Roуva длина 227 мм, ширина 65 мм - Инструкция по применению	28
RV-CMS-7	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Roуva длина 108 мм, ширина 35 мм - Инструкция по применению	11
DK41-1	- Контрастор стоматологический серия Dr.Kim длина 195 мм, ширина 79 мм - Инструкция по применению	29
DK41-2	- Контрастор стоматологический серия Dr.Kim длина 195 мм, ширина 71 мм - Инструкция по применению	29
DK41-3	- Контрастор стоматологический серия Dr.Kim длина 225 мм, ширина 65 мм - Инструкция по применению	29
DK41-4	- Контрастор стоматологический серия Dr.Kim длина 227 мм, ширина 65 мм - Инструкция по применению	10
DK41-5	- Контрастор стоматологический серия Dr.Kim длина 150 мм, ширина 116 мм - Инструкция по применению	10
DK41-6	- Контрастор стоматологический серия Dr.Kim длина 122 мм, ширина 113 мм - Инструкция по применению	10
DK41-7	- Контрастор стоматологический серия Dr.Kim длина 108 мм, ширина 35 мм - Инструкция по применению	30
DK42-1	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Dr.Kim длина 195 мм, ширина 79 мм - Инструкция по применению	11
DK42-2	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Dr.Kim длина 195 мм, ширина 71 мм - Инструкция по применению	11

DK42-3	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Dr.Kim длина 225 мм, ширина 65 мм - Инструкция по применению	11
DK42-4	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Dr.Kim длина 227 мм, ширина 65 мм - Инструкция по применению	11
DK42-7	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Dr.Kim длина 108 мм, ширина 35 мм - Инструкция по применению	30

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия применения – стоматологические отделения лечебных и лечебно-профилактических учреждений.

Инструмент относится к изделиям многократного применения.

Инструмент поставляется в нестерильном виде.

В зависимости от потенциального риска применения Инструмент относится к классу 1 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012)

В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям инструмент относится виду УХЛ4.2 по ГОСТ 15150. Рабочие части Инструмента должны быть устойчивы к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма в процессе эксплуатации при температуре от 32 до 42 °С.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации инструмент относится к изделиям носимые, переносные и передвижные, не предназначенные для работы при переносках и передвижениях в пределах стационарного помещения.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации инструмент относится к изделиям, отказ которых, не вызывая непосредственной опасности для жизни пациента, может вызвать вредные последствия для его здоровья.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – 120740, 119820 (Зонд), 118360 (паркер), 118570 (пинцет), 260120 (ретрактор), 335570 (пакер).

Код по общероссийской классификации продукции ОКПД2 32.50.11.190

Изделие может быть использовано для взрослых и детей.

4. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Заболевания твердых тканей зубов, терапия кариеса жевательных зубов, обработка кариозных полостей, лечение пародонтальных заболеваний, устранение последствий зубных травм, а также лечение патологий корневых каналов.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте инструмент при видимых повреждениях или износе.

6. ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Отсутствуют.

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Любая модификация изделия строго запрещена; Ремонт осуществляется исключительно силами уполномоченного представителя производителя. Любое внешнее вмешательство в конструкцию изделия (в том числе модификация) строго запрещено;
- Никогда не применяйте неисправный инструмент.

- Никогда не применяйте нестерильный инструмент.
- Не используйте инструмент не по назначению.
- Никогда не используйте абразивные материалы, кисточки с жёстким ворсом для чистки изделия.
- Не оставляйте инструмент в химических стерилизующих растворах на период более долгий, чем это необходимо.
- Не используйте кипячение при дезинфекции зеркал.
- Во избежание повреждений в ультразвуковом очистителе и автоклаве используйте защитный колпачок и обрабатывайте зеркала отдельно от других инструментов.
- Перед автоклавированием поверхность зеркала должна быть вытерта насухо, иначе при последующей стерилизации в автоклаве из-за испарения остатков воды на поверхности будут откладываться соли и известковый налет.
- Не используйте режим «Программа быстрой стерилизации» для стерилизации зеркал.
- Не охлаждайте быстро после автоклавирования
- Не храните инструмент влажным.
- При хранении с другим инструментом размещайте стоматологические зеркала исключительно сверху.

8. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Все инструменты должны использоваться только квалифицированным персоналом. Неправильное использование изделий может привести к повреждению инструментов и/или нанесению вреда пациенту. Перед применением инструменты необходимо осмотреть на предмет физических повреждений. Никогда не применяйте поврежденный инструмент. Удостоверьтесь в том, что зеркало плотно фиксируется к ручке, при необходимости завинтите его плотнее.

Перед применением инструменты должны пройти обязательную очистку и дезинфекцию (см.раздел «очистка и дезинфекция»).

Простерилизованный инструмент извлеките из упаковки, после чего примените инструмент для диагностической или оперативной стоматологической процедуры. Зеркала стоматологические применяются для визуализации удаленных поверхностей зубов, контрастор стоматологический для отведения мягких тканей полости рта и последующей визуализации области интереса, ретрактор стоматологический для отведения и фиксации мягких тканей области рта для визуализации зоны интереса, зонд стоматологический для диагностики состояния твердых тканей зуба и пародонта, пинцет стоматологический —предназначен для захвата, удержания и переноса мелких предметов в полости рта, пакер стоматологический предназначен для введения, уплотнения и адаптации пломбировочного материала в полости зуба при лечении кариеса.

После проведения процедуры изделия необходимо передать в моечное отделение лечебно-профилактического учреждения.

9. ОЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Перед стерилизацией инструменты подлежат обязательной разборке (при наличии съёмных элементов) и предварительной очистке. После применения изделие необходимо промыть под проточной водой, удалив видимые загрязнения.

Дезинфекцию можно проводить путем погружения инструментов в 3% раствор перекиси водорода на 40 минут. По завершении обеззараживания стоматологические зонды следует промыть в проточной чистой воде в течение не менее 5 минут.

Предстерилизационная очистка допускается вручную с применением дистиллированной воды для зеркал и горячей воды для других инструментов и подходящего дезинфицирующего средства. Для этого используются щетки с мягким ворсом (применение металлических, жестких щеток и губок с абразивом не допускается). Также возможно использование ультразвуковой ванны. При использовании ультразвукового очистителя зеркальные элементы должны обрабатываться отдельно от других

инструментов и только с применением защитных колпачков, предотвращающих повреждение отражающей поверхности. После ополаскивания зеркала и зонды необходимо тщательно высушить, чтобы избежать образования солевых отложений, известкового налёта и коррозии.

В качестве метода стерилизации рекомендуется паровая стерилизация в автоклаве при температуре 134 °C (с допуском -0 °C / +3 °C) в течение не более 3,5 минут для зеркал и не менее 18 минут для других инструментов.

Каждое изделие должно быть упаковано индивидуально в стерилизационную упаковку с нанесённым индикатором процесса стерилизации. Простерилизованные изделия следует хранить в сухом, защищённом от загрязнений и прямого солнечного света месте.

Несоблюдение вышеуказанных требований может привести к ухудшению отражающих свойств изделия и сокращению срока его эксплуатации.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Технические характеристики изделия приведены в Таблице 2.

Арт.	Наименование, описание и комплектность изделия	Диаметр D, мм	Длина L, мм	Масса, не более, г
DK11-SU10	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 178 мм – Инструкция по применению	10 ±1	178 ±2	20
DK11-SU14	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 178 мм – Инструкция по применению	14 ±1	178 ±2	20
DK11-SU18	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 18 мм, длина 178 мм – Инструкция по применению	18 ±1	178 ±2	20
DK11-SU20	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 178 мм – Инструкция по применению	20 ±1	178 ±2	20
DK11-SU22	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	22 ±1	180 ±2	20
DK11-SU24	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	24 ±1	180 ±2	20
DK11-DU10	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	10 ±1	180 ±2	20
DK11-DU14	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	14 ±1	180 ±2	20
DK11-DU18	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 18 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	18 ±1	180 ±2	20
DK11-DU20	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	20 ±1	180 ±2	20
DK11-DU22	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 182 мм – Инструкция по применению	22 ±1	182 ±2	20
DK11-DU24	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 182 мм – Инструкция по применению	24 ±1	182 ±2	20
DK11-SU10E	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой с эндолинейкой серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 178 мм	10 ±1	178 ±2	20

	– Инструкция по применению			
DK11-DB14E	- Зеркало стоматологическое двухстороннее базовое неразборное с ручкой с эндолинейкой серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	14 ±1	180 ±2	20
DK11-DB18E	- Зеркало стоматологическое двухстороннее базовое неразборное с ручкой с эндолинейкой серия Dr.Kim, диаметр 18 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	18 ±1	180 ±2	20
DK11-DB20E	- Зеркало стоматологическое двухстороннее базовое неразборное с ручкой с эндолинейкой серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 180 мм - Инструкция по применению	20 ±1	180 ±2	20
DK11-DB22E	- Зеркало стоматологическое двухстороннее базовое неразборное с ручкой с эндолинейкой серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 182 мм – Инструкция по применению	22 ±1	182 ±2	20
DK11-DB24E	- Зеркало стоматологическое двухстороннее базовое неразборное с ручкой с эндолинейкой серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 182 мм – Инструкция по применению	24 ±1	182 ±2	20
DK12-SU10	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 33 мм – Инструкция по применению	10 ±1	33 ±2	10
DK12-SU14	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 55 мм – Инструкция по применению	14 ±1	55 ±2	10
DK12-SU18	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 18 мм, длина 55 мм – Инструкция по применению	18 ±1	55 ±2	10
DK12-SU20	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 55 мм – Инструкция по применению	20 ±1	55 ±2	10
DK12-SU22	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки, диаметр 22 мм, длина 58 мм – Инструкция по применению	22 ±1	58 ±2	10
DK12-SU24	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 59 мм – Инструкция по применению	24 ±1	59 ±2	10
DK12-DU10	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 33 мм – Инструкция по применению	10 ±1	33 ±2	10
DK12-DU14	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 54 мм – Инструкция по применению	14 ±1	54 ±2	10
DK12-DU18	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 18 мм, длина 54 мм – Инструкция по применению	18 ±1	54 ±2	10
DK12-DU20	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 54 мм – Инструкция по применению	20 ±1	54 ±2	10

DK12-DU22	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 57 мм – Инструкция по применению	22 ±1	57 ±2	10
DK12-DU24	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 58 мм – Инструкция по применению	24 ±1	58 ±2	10
DK12-DU10R	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором без ручки серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 38 мм – Инструкция по применению	10 ±1	38 ±2	10
DK12-DU14R	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором без ручки серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 59 мм – Инструкция по применению	14 ±1	59 ±2	10
DK12-DU18R	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором без ручки серия Dr.Kim, диаметр 18 мм, длина 59 мм – Инструкция по применению	18 ±1	59 ±2	10
DK12-DU20R	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором без ручки серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 59 мм – Инструкция по применению	20 ±1	59 ±2	10
DK12-DU22R	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором без ручки серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 62 мм – Инструкция по применению	22 ±1	62 ±2	10
DK12-DU20R	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором без ручки серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 59 мм – Инструкция по применению	20 ±1	59 ±2	10
DK12-DU24R	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором без ручки серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 63 мм – Инструкция по применению	24 ±1	63 ±2	10
DK13-SU10	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 33 мм – Инструкция по применению	10 ±1	33 ±2	10
DK13-SU14	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 55 мм – Инструкция по применению	14 ±1	55 ±2	10
DK13-SU18	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 18 мм, длина 55 мм – Инструкция по применению	18 ±1	55 ±2	10
DK13-SU20	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 55 мм – Инструкция по применению	20 ±1	55 ±2	10
DK13-SU22	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 58 мм – Инструкция по применению	22 ±1	58 ±2	10
DK13-SU24	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 59 мм – Инструкция по применению	24 ±1	59 ±2	10

DK13-DU10	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 33 мм – Инструкция по применению	10 ±1	33 ±2	10
DK13-DU14	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 55 мм – Инструкция по применению	14 ±1	55 ±2	10
DK13-DU18	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 18 мм, длина 55 мм – Инструкция по применению	18 ±1	55 ±2	10
DK13-DU20	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 55 мм – Инструкция по применению	20 ±1	55 ±2	10
DK13-DU22	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 58 мм – Инструкция по применению	22 ±1	58 ±2	10
DK13-DU24	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 59 мм – Инструкция по применению	24 ±1	59 ±2	10
DK14-SU10	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 37 мм – Инструкция по применению	10 ±1	37 ±2	10
DK14-SU14	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 49 мм – Инструкция по применению	14 ±1	49 ±2	10
DK14-SU18	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки, диаметр 18 мм, длина 49 мм – Инструкция по применению	18 ±1	49 ±2	10
DK14-SU20	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 49 мм – Инструкция по применению	20 ±1	49 ±2	10
DK14-SU22	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 49 мм – Инструкция по применению	22 ±1	49 ±2	10
DK14-SU22/1	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 49 мм – Инструкция по применению	22 ±1	49 ±2	10
DK14-SU24	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 52 мм – Инструкция по применению	24 ±1	52 ±2	10
DK14-SU24/1	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 52 мм – Инструкция по применению	24 ±1	52 ±2	10
DK14-DU10	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 37 мм – Инструкция по применению	10 ±1	37 ±2	10

DK12-DB20	- Зеркало стоматологическое двухстороннее базовое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 54 мм – Инструкция по применению	20 ±1	54 ±2	10
DK12-DB22	- Зеркало стоматологическое двухстороннее базовое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 57 мм – Инструкция по применению	22 ±1	57 ±2	10
DK12-DB24	- Зеркало стоматологическое двухстороннее базовое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 58 мм – Инструкция по применению	24 ±1	58 ±2	10
DK12-DB10B	- Зеркало стоматологическое двухстороннее базовое с ретрактором без ручки серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 38 мм – Инструкция по применению	10 ±1	38 ±2	10
DK12-DB14B	- Зеркало стоматологическое двухстороннее базовое с ретрактором без ручки серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 59 мм – Инструкция по применению	14 ±1	59 ±2	10
DK12-DB18B	- Зеркало стоматологическое двухстороннее базовое с ретрактором без ручки серия Dr.Kim, диаметр 18 мм, длина 59 мм – Инструкция по применению	18 ±1	59 ±2	10
DK12-DB20B	- Зеркало стоматологическое двухстороннее базовое с ретрактором без ручки серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 59 мм – Инструкция по применению	20 ±1	59 ±2	10
DK12-DB22B	- Зеркало стоматологическое двухстороннее базовое с ретрактором без ручки серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 62 мм – Инструкция по применению	22 ±1	62 ±2	10
DK12-DB24B	- Зеркало стоматологическое двухстороннее базовое с ретрактором без ручки серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 63 мм – Инструкция по применению	24 ±1	63 ±2	10
DK14-SB10	- Зеркало стоматологическое одностороннее базовое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 37 мм – Инструкция по применению	10 ±1	37 ±2	10
DK14-SB14	- Зеркало стоматологическое одностороннее базовое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 49 мм – Инструкция по применению	14 ±1	49 ±2	10
DK14-SB18	- Зеркало стоматологическое одностороннее базовое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 18 мм, длина 49 мм – Инструкция по применению	18 ±1	49 ±2	10
DK14-SB20	- Зеркало стоматологическое одностороннее базовое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 49 мм – Инструкция по применению	20 ±1	49 ±2	10
DK14-SB22	- Зеркало стоматологическое одностороннее базовое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 46 мм – Инструкция по применению	22 ±1	46 ±2	10
DK14-SB22/1	- Зеркало стоматологическое одностороннее базовое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 46 мм – Инструкция по применению	22 ±1	46 ±2	10
DK14-SB24	- Зеркало стоматологическое одностороннее базовое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 45 мм – Инструкция по применению	24 ±1	45 ±2	10
DK14-SB24/1	- Зеркало стоматологическое одностороннее базовое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 45 мм – Инструкция по применению	24 ±1	45 ±2	10
DK12-SU10H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 154 мм – Инструкция по применению	10 ±1	154 ±2	30

DK12-SU14H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 176 мм – Инструкция по применению	14 ±1	176 ±2	30
DK12-SU18H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 18 мм, длина 176 мм – Инструкция по применению	18 ±1	176 ±2	30
DK12-SU20H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 176 мм – Инструкция по применению	20 ±1	176 ±2	30
DK12-SU22H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 177 мм – Инструкция по применению	22 ±1	177 ±2	30
DK12-SU24H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 179 мм – Инструкция по применению	24 ±1	179 ±2	30
DK12-DU10H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 154 мм – Инструкция по применению	10 ±1	154 ±2	30
DK12-DU14H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 175 мм – Инструкция по применению	14 ±1	175 ±2	30
DK12-DU18H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 18 мм, длина 175 мм – Инструкция по применению	18 ±1	175 ±2	30
DK12-DU20H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 175 мм – Инструкция по применению	20 ±1	175 ±2	30
DK12-DU22H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 177 мм – Инструкция по применению	22 ±1	177 ±2	30
DK12-DU24H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 178 мм – Инструкция по применению	24 ±1	178 ±2	30
DK12-DU10RH	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	10 ±1	159 ±2	30
DK12-DU14RH	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	14 ±1	180 ±2	30
DK12-DU18RH	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 18 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	18 ±1	180 ±2	30
DK12-DU20RH	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	20 ±1	180 ±2	30

DK13-DU20H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 176 мм – Инструкция по применению	20 ±1	176 ±2	30
DK13-DU22H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 179 мм – Инструкция по применению	22 ±1	179 ±2	30
DK13-DU24H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	24 ±1	180 ±2	30
DK14-SU10H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 158 мм – Инструкция по применению	10 ±1	158 ±2	30
DK14-SU14H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	14 ±1	170 ±2	30
DK14-SU18H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 18 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	18 ±1	170 ±2	30
DK14-SU20H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	20 ±1	170 ±2	30
DK14-SU22H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	22 ±1	170 ±2	30
DK14-SU22H/1	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 22 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	22 ±1	170 ±2	30
DK14-SU24H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 173 мм – Инструкция по применению	24 ±1	173 ±2	30
DK14-SU24H/1	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 173 мм – Инструкция по применению	24 ±1	173 ±2	30
DK14-DU10H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 10 мм, длина 158 мм – Инструкция по применению	10 ±1	158 ±2	30
DK14-DU14H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 14 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	14 ±1	170 ±2	30
DK14-DU18H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 18 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	18 ±1	170 ±2	30
DK14-DU20H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 20 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	20 ±1	170 ±2	30

DK15-SU39T	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое без ручки серия Dr.Kim, диаметр 3 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	3 ±0,1	159 ±2	20
DK15-SU03H	- Зеркало стоматологическое микро ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 3 мм, длина 158 мм – Инструкция по применению	3 ±0,1	158 ±2	20
DK15-SU05H	- Зеркало стоматологическое микро ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 5 мм, длина 158 мм – Инструкция по применению	5 ±0,1	158 ±2	20
DK15-SU27H	- Зеркало стоматологическое микро ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 2 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	2 ±0,1	159 ±2	20
DK15-SU39H	- Зеркало стоматологическое микро ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 3 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	3 ±0,1	159 ±2	20
DK15-SU03TH	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 3 мм, длина 158 мм – Инструкция по применению	3 ±0,1	158 ±2	20
DK15-SU05TH	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 5 мм, длина 158 мм – Инструкция по применению	5 ±0,1	158 ±2	20
DK15-SU27TH	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 2 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	2 ±0,1	159 ±2	20
DK15-SU39TH	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 3 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	3 ±0,1	159 ±2	20
DK16-SU22	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с слюноотсосом без ручки серия Dr.Kim, диаметр 25 мм, длина 64 мм – Инструкция по применению	25 ±1	64 ±2	80
DK16-SU22H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с слюноотсосом с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 25 мм, длина 165 мм – Инструкция по применению	25 ±1	165 ±2	80
DK16-SU22D	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с слюноотсосом неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 25 мм, длина 155 мм – Инструкция по применению	25 ±1	155 ±2	80
DK16-SR22	- Зеркало стоматологическое одностороннее родиевое с слюноотсосом без ручки серия Dr.Kim, диаметр 25 мм, длина 64 мм – Инструкция по применению	25 ±1	64 ±2	80
DK16-SR22H	- Зеркало стоматологическое одностороннее родиевое с слюноотсосом с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 25 мм, длина 165 мм – Инструкция по применению	25 ±1	165 ±2	80
DK16-SR22D	- Зеркало стоматологическое одностороннее родиевое с слюноотсосом неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 25 мм, длина 155 мм – Инструкция по применению	25 ±1	155 ±2	80
DK16-SB22	- Зеркало стоматологическое одностороннее базовое с слюноотсосом без ручки серия Dr.Kim, диаметр 25 мм, длина 64 мм – Инструкция по применению	25 ±1	64 ±2	80

DK16-SB22H	- Зеркало стоматологическое одностороннее базовое с слюноотсосом с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 25 мм, длина 165 мм – Инструкция по применению	25 ±1	165 ±2	80
DK16-SB22D	- Зеркало стоматологическое одностороннее базовое с слюноотсосом неразборное с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 25 мм, длина 155 мм – Инструкция по применению	25 ±1	155 ±2	80
DK17-SUL22-1	- Зеркало стоматологическое ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 23 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	23 ±1	170 ±2	80
DK17-SUL22-2	- Зеркало стоматологическое ультраяркое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 167 мм – Инструкция по применению	24 ±1	167 ±2	80
DK17-SRL22-1	- Зеркало стоматологическое родиевое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 23 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	23 ±1	170 ±2	80
DK17-SRL22-2	- Зеркало стоматологическое родиевое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 167 мм – Инструкция по применению	24 ±1	167 ±2	80
DK17-SBL22-1	- Зеркало стоматологическое базовое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 23 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	23 ±1	170 ±2	80
DK17-SBL22-2	- Зеркало стоматологическое базовое с ручкой серия Dr.Kim, диаметр 24 мм, длина 167 мм – Инструкция по применению	24 ±1	167 ±2	80
DK82-OS	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии размер S серия Dr.Kim, диаметр 67 мм, длина 100 мм – Инструкция по применению	67 ±1	100 ±2	80
DK82-OM	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии размер M серия Dr.Kim, диаметр 53 мм, длина 140 мм – Инструкция по применению	53 ±1	140 ±2	80
DK82-OM/1	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии размер M серия Dr.Kim, диаметр 53 мм, длина 140 мм – Инструкция по применению	53 ±1	140 ±2	80
DK82-OL	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии размер L серия Dr.Kim, диаметр 63 мм, длина 142 мм – Инструкция по применению	63 ±1	142 ±2	80
DK82-OL/1	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии размер L серия Dr.Kim, диаметр 63 мм, длина 142 мм – Инструкция по применению	63 ±1	142 ±2	80
DK82-OL/2	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии размер L серия Dr.Kim, диаметр 63 мм, длина 142 мм – Инструкция по применению	63 ±1	142 ±2	80
DK82-B	- Зеркало стоматологическое щечное для дентальной фотографии форма Висса серия Dr.Kim, диаметр 58 мм, длина 150 мм – Инструкция по применению	58 ±1	150 ±2	80
DK82-B/1	- Зеркало стоматологическое щечное для дентальной фотографии форма Висса серия Dr.Kim, диаметр 58 мм, длина 150 мм – Инструкция по применению	58 ±1	150 ±2	80
DK82-L	- Зеркало стоматологическое язычное для дентальной фотографии форма Lingua серия Dr.Kim, диаметр 50 мм, длина 145 мм	50 ±1	145 ±2	80

	– Инструкция по применению			
DK82-L/1	- Зеркало стоматологическое язычное для дентальной фотографии форма Lingua серия Dr.Kim, диаметр 50 мм, длина 145 мм – Инструкция по применению	50 ±1	145 ±2	80
DK82-L/2	- Зеркало стоматологическое язычное для дентальной фотографии форма Lingua серия Dr.Kim, диаметр 50 мм, длина 145 мм – Инструкция по применению	50 ±1	145 ±2	80
DK82-OSH	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер S серия Dr.Kim, диаметр 67 мм, длина 183 мм – Инструкция по применению	67 ±1	183 ±2	200
DK82-OMH	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер M серия Dr.Kim, диаметр 53 мм, длина 221 мм – Инструкция по применению	53 ±1	221 ±2	200
DK82-OLH	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер L серия Dr.Kim, диаметр 63 мм, длина 225 мм – Инструкция по применению	63 ±1	225 ±2	200
DK82-BH	- Зеркало стоматологическое щечное для дентальной фотографии с ручкой форма Вусса серия Dr.Kim, диаметр 58 мм, длина 230 мм – Инструкция по применению	58 ±1	230 ±2	200
DK82-LH	- Зеркало стоматологическое язычное для дентальной фотографии с ручкой форма Lingua серия Dr.Kim, диаметр 50 мм, длина 225 мм – Инструкция по применению	50 ±1	225 ±2	200
DK82-OSHL	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер S серия Dr.Kim, диаметр 67 мм, длина 198 мм – Инструкция по применению	67 ±1	198 ±2	200
DK82-OMHL	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер M серия Dr.Kim, диаметр 53 мм, длина 235 мм – Инструкция по применению	53 ±1	235 ±2	200
DK82-OLHL	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер L серия Dr.Kim, диаметр 63 мм, длина 240 мм – Инструкция по применению	63 ±1	240 ±2	200
DK82-BHL	- Зеркало стоматологическое щечное для дентальной фотографии с ручкой форма Вусса серия Dr.Kim, диаметр 58 мм, длина 245 мм – Инструкция по применению	58 ±1	245 ±2	200
DK82-LHL	- Зеркало стоматологическое язычное для дентальной фотографии с ручкой форма Lingua серия Dr.Kim, диаметр 50 мм, длина 240 мм – Инструкция по применению	50 ±1	240 ±2	200
RS-01	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Royna, диаметр 10 мм, длина 178 мм – Инструкция по применению	10 ±1	178 ±2	30
RS-11	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Royna, диаметр 14 мм, длина 178 мм – Инструкция по применению	14 ±1	178 ±2	30
RS-21	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое неразборное с ручкой серия Royna, диаметр 18 мм, длина 178 мм	18 ±1	178 ±2	30

	– Инструкция по применению			
RD-12	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой с эндолинейкой серия Roova, диаметр 14 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	14 ±1	180 ±2	30
RD-22	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой с эндолинейкой серия Roova, диаметр 18 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	18 ±1	180 ±2	30
RD-32	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой с эндолинейкой серия Roova, диаметр 20 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	20 ±1	180 ±2	30
RD-42	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой с эндолинейкой серия Roova, диаметр 22 мм, длина 182 мм – Инструкция по применению	22 ±1	182 ±2	30
RD-52	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое неразборное с ручкой с эндолинейкой серия Roova, диаметр 24 мм, длина 182 мм – Инструкция по применению	24 ±1	182 ±2	30
RS-M-41-0S	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Roova, диаметр 10 мм, длина 33 мм – Инструкция по применению	10 ±1	33 ±2	30
RS-M-41-1S	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Roova, диаметр 14 мм, длина 55 мм – Инструкция по применению	14 ±1	55 ±2	30
RS-M-41-2S	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Roova, диаметр 18 мм, длина 55 мм – Инструкция по применению	18 ±1	55 ±2	30
RS-M-41-3S	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Roova, диаметр 20 мм, длина 55 мм – Инструкция по применению	20 ±1	55 ±2	30
RS-M-41-4S	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Roova, диаметр 22 мм, длина 58 мм – Инструкция по применению	22 ±1	58 ±2	30
RS-M-41-5S	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Roova, диаметр 24 мм, длина 59 мм – Инструкция по применению	24 ±1	59 ±2	30
RS-M-41-1D	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Roova, диаметр 14 мм, длина 54 мм – Инструкция по применению	14 ±1	54 ±2	30
RS-M-41-2D	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Roova, диаметр 18 мм, длина 54 мм – Инструкция по применению	18 ±1	54 ±2	30
RS-M-41-3D	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Roova, диаметр 20 мм, длина 54 мм – Инструкция по применению	20 ±1	54 ±2	30
RS-M-41-4D	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Roova, диаметр 22 мм, длина 57 мм	22 ±1	57 ±2	30

	– Инструкция по применению			
RS-M-41-5D	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Royna, диаметр 24 мм, длина 58 мм – Инструкция по применению	24 ±1	58 ±2	30
RS-M-41-1DJ	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором без ручки серия Royna, диаметр 14 мм, длина 59 мм – Инструкция по применению	14 ±1	59 ±2	30
RS-M-41-2DJ	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором без ручки серия Royna, диаметр 18 мм, длина 59 мм – Инструкция по применению	18 ±1	59 ±2	30
RS-M-41-3DJ	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором без ручки серия Royna, диаметр 20 мм, длина 59 мм – Инструкция по применению	20 ±1	59 ±2	30
RS-M-41-4DJ	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором без ручки серия Royna, диаметр 22 мм, длина 62 мм – Инструкция по применению	22 ±1	62 ±2	30
RS-M-41-5DJ	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором без ручки серия Royna, диаметр 24 мм, длина 63 мм – Инструкция по применению	24 ±1	63 ±2	30
RV-SH-001-21	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Royna, диаметр 18 мм, длина 55 мм – Инструкция по применению	18 ±1	55 ±2	30
RV-SH-001-31	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Royna, диаметр 20 мм, длина 55 мм – Инструкция по применению	20 ±1	55 ±2	30
RV-SH-001-41	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Royna, диаметр 22 мм, длина 58 мм – Инструкция по применению	22 ±1	58 ±2	30
RV-SH-001-51	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Royna, диаметр 24 мм, длина 59 мм – Инструкция по применению	24 ±1	59 ±2	30
RV-SH-002-21	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Royna, диаметр 18 мм, длина 55 мм – Инструкция по применению	18 ±1	55 ±2	30
RV-SH-002-31	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Royna, диаметр 20 мм, длина 55 мм – Инструкция по применению	20 ±1	55 ±2	30
RV-SH-002-41	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Royna, диаметр 22 мм, длина 58 мм – Инструкция по применению	22 ±1	58 ±2	30
RV-SH-002-51	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое без ручки серия Royna, диаметр 24 мм, длина 59 мм – Инструкция по применению	24 ±1	59 ±2	30
RV-JH-001-0	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое без ручки серия Royna, диаметр 10 мм, длина 37 мм	10 ±1	37 ±2	30

	– Инструкция по применению			
RX-UT-Y05	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое без ручки серия Royna, диаметр 5 мм, длина 158 мм – Инструкция по применению	5 ±0,1	158 ±2	30
RX-W-Y05	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое без ручки серия Royna, диаметр 5 мм, длина 158 мм – Инструкция по применению	5 ±0,1	158 ±2	30
RX-UT-F27	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое без ручки серия Royna, диаметр 2 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	2 ±0,1	159 ±2	30
RX-UT-F39	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое без ручки серия Royna, диаметр 3 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	3 ±0,1	159 ±2	30
RS-M-41-0S-H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой, диаметр 10 мм, длина 154 мм – Инструкция по применению	10 ±1	154 ±2	30
RS-M-41-2S-H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Royna, диаметр 18 мм, длина 176 мм – Инструкция по применению	18 ±1	176 ±2	30
RS-M-41-3S-H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Royna, диаметр 20 мм, длина 176 мм – Инструкция по применению	20 ±1	176 ±2	30
RS-M-41-4S-H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Royna, диаметр 22 мм, длина 177 мм – Инструкция по применению	22 ±1	177 ±2	30
RS-M-41-5S-H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Royna, диаметр 24 мм, длина 179 мм – Инструкция по применению	24 ±1	179 ±2	30
RS-M-41-2D-H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Royna, диаметр 18 мм, длина 175 мм – Инструкция по применению ²	18 ±1	175 ±2	30
RS-M-41-3D-H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Royna, диаметр 20 мм, длина 175 мм – Инструкция по применению	20 ±1	175 ±2	30
RS-M-41-4D-H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Royna, диаметр 22 мм, длина 177 мм – Инструкция по применению	22 ±1	177 ±2	30
RS-M-41-5D-H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Royna, диаметр 24 мм, длина 178 мм – Инструкция по применению	24 ±1	178 ±2	30
RS-M-41-2DJ-H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором с ручкой серия Royna, диаметр 18 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	18 ±1	180 ±2	30
RS-M-41-3DJ-H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором с ручкой серия Royna, диаметр 20 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	20 ±1	180 ±2	30

RS-M-41-4DJ-H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором с ручкой серия Roova, диаметр 22 мм, длина 181 мм – Инструкция по применению	22 ±1	181 ±2	30
RS-M-41-5DJ-H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ретрактором с ручкой серия Roova, диаметр 24 мм, длина 182 мм – Инструкция по применению	24 ±1	182 ±2	30
RV-SH-001-21-H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Roova, диаметр 18 мм, длина 176 мм – Инструкция по применению	18 ±1	176 ±2	30
RV-SH-001-31-H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Roova, диаметр 20 мм, длина 176 мм – Инструкция по применению	20 ±1	176 ±2	30
RV-SH-001-41-H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Roova, диаметр 22 мм, длина 179 мм – Инструкция по применению	22 ±1	179 ±2	30
RV-SH-001-51-H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Roova, диаметр 24 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	24 ±1	180 ±2	30
RV-SH-002-21-H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Roova, диаметр 18 мм, длина 176 мм – Инструкция по применению	18 ±1	176 ±2	30
RV-SH-002-31-H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Roova, диаметр 20 мм, длина 176 мм – Инструкция по применению	20 ±1	176 ±2	30
RV-SH-002-41-H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Roova, диаметр 22 мм, длина 179 мм – Инструкция по применению	22 ±1	179 ±2	30
RV-SH-002-51-H	- Зеркало стоматологическое двухстороннее ультраяркое с ручкой серия Roova, диаметр 24 мм, длина 180 мм – Инструкция по применению	24 ±1	180 ±2	30
RV-JH-001-0-H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Roova, диаметр 10 мм, длина 158 мм – Инструкция по применению	10 ±1	158 ±2	30
RV-JH-001-1-H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Roova, диаметр 14 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	14 ±1	170 ±2	30
RV-JH-001-2-H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Roova, диаметр 18 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	18 ±1	170 ±2	30
RV-JH-001-3-H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Roova, диаметр 20 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	20 ±1	170 ±2	30
RV-JH-001-4-H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с ручкой серия Roova, диаметр 22 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	22 ±1	170 ±2	30

RX-UT-F27	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое с ручкой серия Rouva, диаметр 2 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	2 ±0,1	159 ±2	30
RX-UT-F27-H	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое с ручкой серия Rouva, диаметр 2 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	2 ±0,1	159 ±2	30
RX-W-F27	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое с ручкой серия Rouva, диаметр 2 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	2 ±0,1	159 ±2	30
RX-W-F27-H	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое с ручкой серия Rouva, диаметр 2 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	2 ±0,1	159 ±2	30
RX-W-F39	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое с ручкой серия Rouva, диаметр 3 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	3 ±0,1	159 ±2	30
RX-UT-F39-H	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое с ручкой серия Rouva, диаметр 3 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	3 ±0,1	159 ±2	30
RX-W-F39	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое с ручкой серия Rouva, диаметр 3 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	3 ±0,1	159 ±2	30
RX-W-F39-H	- Зеркало стоматологическое ультратонкое микро ультраяркое с ручкой серия Rouva, диаметр 3 мм, длина 159 мм – Инструкция по применению	3 ±0,1	159 ±2	30
RV-SM-II	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с слюноотсосом без ручки серия Rouva, диаметр 25 мм, длина 64 мм – Инструкция по применению	25 ±1	64 ±2	30
RV-SM-II-H	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с слюноотсосом с ручкой серия Rouva, диаметр 25 мм, длина 165 мм – Инструкция по применению	25 ±1	165 ±2	30
RV-SM-01G	- Зеркало стоматологическое одностороннее ультраяркое с слюноотсосом неразборное с ручкой серия Rouva, диаметр 25 мм, длина 155 мм – Инструкция по применению	25 ±1	155 ±2	30
RS-L01	- Зеркало стоматологическое ультраяркое с ручкой серия Rouva, диаметр 23 мм, длина 170 мм – Инструкция по применению	23 ±1	170 ±2	30
RV-01-OS	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии размер S серия Rouva, диаметр 67 мм, длина 100 мм – Инструкция по применению	67 ±1	100 ±2	30
RV-01-OM	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии размер M серия Rouva, диаметр 53 мм, длина 140 мм – Инструкция по применению	53 ±1	140 ±2	30
RV-01-OL	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии размер L серия Rouva, диаметр 63 мм, длина 142 мм – Инструкция по применению	63 ±1	142 ±2	30

RV-01-B	- Зеркало стоматологическое щечное для дентальной фотографии форма Вусса серия Royna, диаметр 58 мм, длина 150 мм – Инструкция по применению	58 ±1	150 ±2	30
RV-01-L	- Зеркало стоматологическое язычное для дентальной фотографии форма Lingua серия Royna, диаметр 50 мм, длина 145 мм – Инструкция по применению	50 ±1	145 ±2	30
RV-FFM-01-OS	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер S серия Royna, диаметр 67 мм, длина 183 мм – Инструкция по применению	67 ±1	183 ±2	30
RV-FFM-01-OM	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер M серия Royna, диаметр 53 мм, длина 221 мм – Инструкция по применению	53 ±1	221 ±2	30
RV-FFM-01-OL	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер L серия Royna, диаметр 63 мм, длина 225 мм – Инструкция по применению	63 ±1	225 ±2	30
RV-FFM-01-B	- Зеркало стоматологическое щечное для дентальной фотографии с ручкой форма Вусса серия Royna, диаметр 58 мм, длина 230 мм – Инструкция по применению	58 ±1	230 ±2	30
RV-FFM-01-L	- Зеркало стоматологическое язычное для дентальной фотографии с ручкой форма Lingua серия Royna, диаметр 50 мм, длина 225 мм – Инструкция по применению	50 ±1	225 ±2	30
RV-FFM-02-OS	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер S серия Royna, диаметр 67 мм, длина 198 мм – Инструкция по применению	67 ±1	198 ±2	30
RV-FFM-02-OM	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер M серия Royna, диаметр 53 мм, длина 235 мм – Инструкция по применению	53 ±1	235 ±2	30
RV-FFM-02-OL	- Зеркало стоматологическое окклюзионное для дентальной фотографии с ручкой размер L серия Royna, диаметр 63 мм, длина 240 мм – Инструкция по применению	63 ±1	240 ±2	30
RV-FFM-02-B	- Зеркало стоматологическое щечное для дентальной фотографии с ручкой форма Вусса серия Royna, диаметр 58 мм, длина 245 мм – Инструкция по применению	58 ±1	245 ±2	30
RV-FFM-02-L	- Зеркало стоматологическое язычное для дентальной фотографии с ручкой форма Lingua серия Royna, диаметр 50 мм, длина 240 мм – Инструкция по применению	50 ±1	240 ±2	30

Основные размеры инструментов стоматологических

Арт.	Наименование, описание и комплектность изделия	Длина, мм	Ширина, мм	Масса, не более, г
DK41-1	- Контрастор стоматологический серия Dr.Kim длина 195 мм, ширина 79 мм - Инструкция по применению	195±5	79±5	30
DK41-2	- Контрастор стоматологический серия Dr.Kim длина 195 мм, ширина 71 мм - Инструкция по применению	195±5	71±5	30

DK41-3	- Контрастор стоматологический серия Dr.Kim длина 225 мм, ширина 65 мм - Инструкция по применению	225±5	65±5	30
DK41-4	- Контрастор стоматологический серия Dr.Kim длина 227 мм, ширина 65 мм - Инструкция по применению	227±5	65±5	30
DK41-5	- Контрастор стоматологический серия Dr.Kim длина 150 мм, ширина 116 мм - Инструкция по применению	150±5	116±5	30
DK41-6	- Контрастор стоматологический серия Dr.Kim длина 122 мм, ширина 113 мм - Инструкция по применению	122±5	113±5	30
DK41-7	- Контрастор стоматологический серия Dr.Kim длина 108 мм, ширина 35 мм - Инструкция по применению	108±5	35±5	30
DK42-1	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Dr.Kim длина 195 мм, ширина 79 мм - Инструкция по применению	195±5	79±5	30
DK42-2	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Dr.Kim длина 195 мм, ширина 71 мм - Инструкция по применению	195±5	71±5	30
DK42-3	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Dr.Kim длина 225 мм, ширина 65 мм - Инструкция по применению	225±5	65±5	30
DK42-4	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Dr.Kim длина 227 мм, ширина 65 мм - Инструкция по применению	227±5	65±5	30
DK42-7	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Dr.Kim длина 108 мм, ширина 35 мм - Инструкция по применению	108±5	35±5	30
DK31-S	- Ретрактор стоматологический ротовой серия Dr.Kim, длина 100 мм, ширина 70 мм - Инструкция по применению	100±5	70±5	50
DK31-M	- Ретрактор стоматологический ротовой серия Dr.Kim, длина 121 мм, ширина 85 мм - Инструкция по применению	121±5	85±5	50
DK31-L	- Ретрактор стоматологический ротовой серия Dr.Kim, длина 135 мм, ширина 90 мм - Инструкция по применению	135±5	90±5	50
DK31M-M	- Ретрактор стоматологический ротовой с зеркалом серия Dr.Kim, длина 105 мм, ширина 50 мм - Инструкция по применению	105±5	50±5	50
DK32-1	- Ретрактор стоматологический ручной односторонний серия Dr.Kim, длина 170 мм, ширина 60 мм - Инструкция по применению	170±5	60±5	50
DK32-2	- Ретрактор стоматологический ручной односторонний серия Dr.Kim, длина 150 мм, ширина 50 мм - Инструкция по применению	150±5	50±5	50
DK32-6	- Ретрактор стоматологический ручной односторонний серия Dr.Kim, длина 130 мм, ширина 35 мм - Инструкция по применению	130±5	35±5	50
DK32-7	- Ретрактор стоматологический ручной односторонний серия Dr.Kim, длина 120 мм, ширина 45 мм - Инструкция по применению	120±5	45±5	50
DK32D-1	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Dr.Kim, длина 170 мм, ширина 60 мм - Инструкция по применению	170±5	60±5	50
DK32D-2	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Dr.Kim, длина 150 мм, ширина 50 мм - Инструкция по применению	150±5	50±5	50

DK32D-3	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Dr.Kim, длина 100 мм, ширина 55 мм - Инструкция по применению	100±5	55±5	50
DK32D-4	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Dr.Kim, длина 170 мм, ширина 70 мм - Инструкция по применению	170±5	70±5	50
DK32D-5	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Dr.Kim, длина 170 мм, ширина 55 мм - Инструкция по применению	170±5	55±5	50
DK32D-6	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Dr.Kim, длина 130 мм, ширина 35 мм - Инструкция по применению	130±5	35±3	50
DK32D-7	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Dr.Kim, длина 120 мм, ширина 45 мм - Инструкция по применению	120±5	45±5	50
DK32D-8	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Dr.Kim, длина 110 мм, ширина 35 мм - Инструкция по применению	110±5	35±3	50
DK210-S	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Dr.Kim, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	125±5	10±1	30
DK210-S/1	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Dr.Kim, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	125±5	10±1	30
DK210-S/2	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Dr.Kim, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	125±5	10±1	30
DK210-S/3	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Dr.Kim, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	125±5	10±1	30
DK210-S/4	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Dr.Kim, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	125±5	10±1	30
DK210-D	- Ручка для зеркала стоматологического двухсторонняя серия Dr.Kim, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	125±5	10±1	30
DK210-E	- Ручка для зеркала стоматологического с эндолинейкой серия Dr.Kim, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	125±5	10±1	30
DK210-E/1	- Ручка для зеркала стоматологического с эндолинейкой серия Dr.Kim, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	125±5	10±1	30
DK210-E/2	- Ручка для зеркала стоматологического с эндолинейкой серия Dr.Kim, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	125±5	10±1	30
DK221-S	- Зонд стоматологический односторонний общего обследования серия Dr.Kim, длина 160 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	160±5	15±1	30
DK221-S/1	- Зонд стоматологический односторонний общего обследования серия Dr.Kim, длина 160 мм, ширина 15 мм	160±5	15±1	30

	- Инструкция по применению			
DK221-S/2	- Зонд стоматологический односторонний общего обследования серия Dr.Kim, длина 160 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	160±5	15±1	30
DK221-S/3	- Зонд стоматологический односторонний общего обследования серия Dr.Kim, длина 160 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	160±5	15±1	30
DK221-D	- Зонд стоматологический двухсторонний общего обследования серия Dr.Kim, длина 170 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	170±5	15±1	30
DK222-S	- Зонд стоматологический односторонний мерный пародонтологический серия Dr.Kim, длина 160 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	160±5	15±1	30
DK222-S/1	- Зонд стоматологический односторонний мерный пародонтологический серия Dr.Kim, длина 160 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	160±5	15±1	30
DK222-S/2	- Зонд стоматологический односторонний мерный пародонтологический серия Dr.Kim, длина 160 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	160±5	15±1	30
DK222-S/3	- Зонд стоматологический односторонний мерный пародонтологический серия Dr.Kim, длина 160 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	160±5	15±1	30
DK222-D	- Зонд стоматологический двухсторонний мерный пародонтологический серия Dr.Kim, длина 160 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	160±5	15±1	30
DK221-NH	- Зонд стоматологический общего обследования без ручки серия Dr.Kim, длина 40 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	40±4	15±1	30
DK221-NHM	- Зонд стоматологический мерный пародонтологический без ручки серия Dr.Kim, длина 40 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	40±4	15±1	30
DK221-NHM/1	- Зонд стоматологический мерный пародонтологический без ручки серия Dr.Kim, длина 40 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	40±4	15±1	30
DK232-1	- Пинцет стоматологический прямой серия Dr.Kim, длина 165 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	165±5	10±1	30
DK232-2	- Пинцет стоматологический изогнутый серия Dr.Kim, длина 165 мм, ширина 20 мм - Инструкция по применению	165±5	20±1	30
DK232-2/1	- Пинцет стоматологический изогнутый серия Dr.Kim, длина 165 мм, ширина 20 мм - Инструкция по применению	165±5	20±1	30
DK241	- Пакер стоматологический серия Dr.Kim, длина 165 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	165±5	10±1	30
DK242	- Пакер стоматологический с мерной прорезью серия Dr.Kim, длина 165 мм, ширина 20 мм - Инструкция по применению	165±5	20±2	30

RV-CMS-1	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Royna длина 195 мм, ширина 79 мм - Инструкция по применению	195±5	79±3	30
RV-CMS-2	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Royna длина 195 мм, ширина 71 мм - Инструкция по применению	195±5	71±3	30
RV-CMS-3	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Royna длина 225 мм, ширина 65 мм - Инструкция по применению	225±5	65±3	30
RV-CMS-4	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Royna длина 227 мм, ширина 65 мм - Инструкция по применению	227±5	65±3	30
RV-CMS-7	- Контрастор стоматологический с измерительной линейкой серия Royna длина 108 мм, ширина 35 мм - Инструкция по применению	108±5	35±3	30
RX-G-03H	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Royna, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	125±5	10±1	25
RX-G-03H/1	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Royna, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	125±5	10±1	25
RX-G-03H/2	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Royna, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	125±5	10±1	25
RX-G-03H/3	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Royna, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	125±5	10±1	25
RX-G-03H/4	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Royna, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	125±5	10±1	25
RX-G-03H/5	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Royna, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	125±5	10±1	25
RX-G-03H/6	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Royna, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	125±5	10±1	25
RX-G-03H/7	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Royna, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	125±5	10±1	25
RX-G-03H/8	- Ручка для зеркала стоматологического односторонняя серия Royna, длина 125 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	125±5	10±1	25
R75-159	- Зонд стоматологический односторонний общего обследования серия Royna, длина 160 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	160±5	15±1	30
R75-390	- Зонд стоматологический односторонний мерный пародонтологический, серия Royna длина 160 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	160±5	15±1	30
R75-159-1	- Зонд стоматологический общего обследования без ручки серия Royna, длина 40 мм, ширина 15 мм	40±4	15±1	30

	- Инструкция по применению			
R75-390-1	- Зонд стоматологический мерный парондотологический без ручки серия Royna, длина 40 мм, ширина 15 мм - Инструкция по применению	40±4	15±1	30
R75-129	- Пинцет стоматологический прямой серия Royna, длина 165 мм, ширина 10 мм - Инструкция по применению	165±5	10±1	30
R75-130	- Пинцет стоматологический изогнутый серия Royna, длина 165 мм, ширина 20 мм - Инструкция по применению	165±5	20±1	30
R75-075	- Ретрактор стоматологический ротовой серия Royna, длина 100 мм, ширина 70 мм - Инструкция по применению	100±5	70±3	50
R75-088	- Ретрактор стоматологический ротовой серия Royna, длина 121 мм, ширина 85 мм - Инструкция по применению	121±5	85±3	50
R75-087	- Ретрактор стоматологический ротовой серия Royna, длина 135 мм, ширина 90 мм - Инструкция по применению	135±5	90±3	50
R75-089	- Ретрактор стоматологический ручной односторонний серия Royna, длина 170 мм, ширина 60 мм - Инструкция по применению	170±5	60±3	50
R75-091	- Ретрактор стоматологический ручной односторонний серия Royna, длина 150 мм, ширина 50 мм - Инструкция по применению	150±5	50±3	50
R75-078	- Ретрактор стоматологический ручной односторонний серия Royna, длина 120 мм, ширина 45 мм - Инструкция по применению	120±5	45±3	50
R75-080	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Royna, длина 170 мм, ширина 60 мм - Инструкция по применению	170±5	60±3	50
R75-081	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Royna, длина 150 мм, ширина 50 мм - Инструкция по применению	150±5	50±3	50
R75-207	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Royna, длина 170 мм, ширина 55 мм - Инструкция по применению	170±5	55±3	50
R75-208	- Ретрактор стоматологический ручной двухсторонний серия Royna, длина 130 мм, ширина 35 мм - Инструкция по применению	130±5	35±3	50

Габаритный размеры принадлежностей:

Арт.	Наименование, описание и комплектность изделия	Ширина D, мм	Длина L, мм	Масса, не более, г
DK291-3	- Бокс для стерилизации стоматологического инструмента на 3 инструмента, длина 210 мм, ширина 70 мм - Инструкция по применению	70±7	210±20	80
DK291-5	- Бокс для стерилизации стоматологического инструмента на 5 инструментов, длина 210 мм, ширина 80 мм - Инструкция по применению	80±7	210±20	80
DK291-5/М	- Бокс для стерилизации стоматологического инструмента на 5 инструментов, длина 210 мм, ширина 80 мм - Инструкция по применению	80±7	210±20	80

DK291-7	- Бокс для стерилизации стоматологического инструмента на 7 инструментов, длина 210 мм, ширина 110 мм - Инструкция по применению	110±7	210±20	110
DK291-8	- Бокс для стерилизации стоматологического инструмента на 8 инструментов, длина 210 мм, ширина 120 мм - Инструкция по применению	120±7	210±20	180
DK291-10	- Бокс для стерилизации стоматологического инструмента на 10 инструментов, длина 210 мм, ширина 140 мм - Инструкция по применению	140±7	210±20	130
DK291-10/1	- Бокс для стерилизации стоматологического инструмента на 10 инструментов, длина 210 мм, ширина 140 мм - Инструкция по применению	140±7	210±20	130

Габаритный размеры принадлежностей:

Арт.	Наименование, описание и комплектность изделия	Внешний Диаметр, мм	Масса, не более, г
DK292-S	- Кольцо маркировочное стоматологическое, диаметр 5,2 мм - Инструкция по применению	5,2±0,5	3
DK292-M	- Кольцо маркировочное стоматологическое, диаметр 7,0 мм - Инструкция по применению	7±0,5	3
DK292-L	- Кольцо маркировочное стоматологическое, диаметр 11,0 мм - Инструкция по применению	11±1	3
DK293-S	- Колпачок защитный стоматологический силиконовый для стоматологического зеркала 18 мм и 22 мм, диаметр 30 мм - Инструкция по применению	30±3	5
DK293-L	- Колпачок защитный стоматологический силиконовый для стоматологического зеркала 24 мм, диаметр 32 мм - Инструкция по применению	32±3	5
DK294	- Изделие для очистки стоматологических зеркал - Инструкция по применению	60±5	45


11. МАРКИРОВКА

Символы, используемые на маркировке изделия:


Маркировка в полном объеме наносится на индивидуальную потребительскую упаковку и должна содержать:


- а) наименование и (или) торговую марку изготовителя, его адрес и телефон;
- б) наименование изделия;

в) номер по каталогу (артикул); 


г) код партии; 


д) символ "Дата изготовления", а также года и месяца изготовления; 


е) символ "Использовать до..."; а также года и месяца; 


ж) символ "Не использовать при повреждении упаковки"; 


з) символ «Обратитесь к инструкции по применению»; 

и) символ "Запрещено выбрасывать. Требуется специальная утилизация"; 

к) символ "предел температуры" с указанием диапазона температур; 

л) символ "диапазон влажности" с указанием диапазона влажности; 

м) символ "беречь от влаги"; 

н) символ "Нестерильно"; 

о) длина инструмента, мм;

п) диаметр инструмента, мм;

р) обозначение настоящих технических условий.

Маркировка транспортной (групповой) тары, должна содержать, дополнительно:

а) количество изделий в упаковке;

б) дата упаковки;

в) отметка ОТК

Допускается применение специальных символов маркировки вместо словесного обозначения.

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.

Транспортная маркировка должна быть нанесена на бумажные или картонные ярлыки или непосредственно на тару. Ярлыки прикрепляют к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

На каждую транспортную тару должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги».

12. УПАКОВКА

Инструменты поставляются в транспортной упаковке. Конструкция упаковки обеспечивает сохранность медицинского изделия, а также обеспечивает его защиту от внешних механических повреждений и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Габаритные размеры транспортной упаковки: 220±20 мм x 150±10 мм x 60±5 мм.

Материал транспортной упаковки: картон

13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование инструмента может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.

Условия транспортирования Инструмента должны соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

Условия хранения Инструмента в упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150.

Многократная обработка обладает минимальным действием на внешний вид этих инструментов. Следовательно, срок годности определяется износом, изломом и повреждениями в процессе использования, в т.ч. царапинами при механической очистке (например, жесткими щетками), повреждениями от вращающихся инструментов и/или кальциевыми отложениями, которые ухудшают качество зеркала и других инструментов.

Срок гарантийного хранения – 24 месяца.

14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Инструменты не обслуживаются пользователем.

Любая модификация изделия строго запрещена.

Использование не оригинальных составных или запасных частей строго запрещено.

По вопросам эксплуатации и сервисного обслуживания необходимо обращаться к производителю на территории РФ:

ООО «Доктор Ким», 195277, город Санкт-Петербург, Выборгская наб, д. 29 литера А, помещ. 12н-15н часть офиса № 505

Тел. +7 (966) 877-42-25; эл. почта: dental@dr-kim.pro.

О любых инцидентах и/или допущенных ошибках, связанных с применением медицинского изделия, необходимо уведомлять производителя.

15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИИ

Инструменты не содержат драгоценных металлов.

Инструменты, выведенные из эксплуатации, подлежат утилизации согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям к обращению с медицинскими отходами: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3684-21 Класс Б.

Отходы класса Б подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции)/обезвреживанию. Для сбора отходов класса Б должны использоваться одноразовые не прокальваемые влагостойкие емкости (контейнеры) желтого цвета или имеющие желтую маркировку. Емкость должна иметь плотно прилегающую крышку, исключающую возможность самопроизвольного вскрытия.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное изделие соответствует Директиве 93/42 ЕЭС по медицинскому оборудованию.

Информация о наличии лекарственного средства или материалов человеческого или животного происхождения в медицинском изделии

Инструменты не содержат в качестве составной части веществ, которые в случае их отдельного использования могли бы считаться лекарственными средствами или их компонентами, являющимися производными человеческой крови или плазмы и оказывающими дополнительное воздействие на организм.

Инструменты не содержат в качестве составных частей вещества, которые при отдельном использовании могут рассматриваться как лекарственные.

17. СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Разработчик и производитель:

ООО «Доктор Ким», 195277, город Санкт-Петербург, Выборгская наб, д. 29 литера А, помещ. 12н-15н часть офиса № 505

Производственная площадка:

ООО «Доктор Ким», 195277, город Санкт-Петербург, Выборгская наб, д. 29 литера А, помещ. 12н-15н часть офиса № 505

По вопросам эксплуатации и претензий по качеству изделия и упаковки необходимо обращаться к производителю.