

Закрытое Акционерное Общество «КРОНТ-М»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЗАО «КРОНТ-М»



В.И. Сизиков

2003г.

Штатив металлический телескопический с пластиковым
поддоном передвижной для размещения на держателях
эндоскопов после дезинфекционной обработки
ШтЭ-01-«КРОНТ-М»

П А С П О Р Т

2003

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Штатив металлический телескопический с пластиковым поддоном передвижной для размещения на держателях эндоскопов после дезинфекционной обработки ШтЭ-01-«КРОНТ-М» (далее по тексту «штатив»), предназначен для размещения (подвешивания) эндоскопа после дезинфекционной обработки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Поддон штатива должен быть выполнен из ударопрочного полистирола, разрешенного к применению в изделиях медицинского назначения в соответствии с ТУ 2291-037-00203387-97.

2.2 Габаритные размеры штатива должны быть не более:

- диаметр основания штатива - 480 мм
- высота штатива при максимальном выдвижении - 2000 мм

2.3. Высота телескопического штатива, мм не менее:

- над основной опорой :
 - максимальная 700
 - минимальная 200
- над полом :
 - максимальная 2000
 - минимальная 1500

Перемещение телескопического штатива по высоте должно быть плавное, без заеданий. Фиксация может происходить на любой высоте с помощью стопорного винта без применения инструмента.

2.4 Количество гнезд под эндоскопы в подвеске должно быть - 4.

2.5 Масса штатива должна быть не более 8 кг.

2.6 Диаметр колес лучевой опоры должен выбираться из диапазона - (40 ÷ 75) мм.

2.7 Наружные поверхности штатива устойчивы к дезинфекции способом протирания в соответствии с действующими методическими документами по применению конкретных дезинфицирующих средств, разрешенных в РФ для дезинфекции поверхностей.

2.8 Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки тележки входят:

1. Собственно штатив;
2. Паспорт;

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Изделие представляет собой металлический телескопический штатив, установленный на лучевой колесной опоре. В основании штатива установлен пластиковый поддон для сбора стекающей из обработанного эндоскопа жидкости.

4.2 В верху штатива крепятся гнезда для подвески эндоскопов.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 5.1. Снять с изделия упаковочную коробку.
- 5.2. Освободить поддон и штатив от упаковочной бумаги и установить на колесной лучевой опоре, затянув болт в основании штатива.
- 5.3. Протереть изделие влажной ветошью.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое обслуживание штатива производить без специального инструмента. Не реже 1 раза в месяц проверять затяжку всех крепежных элементов штатива, при необходимости подтянуть. Не реже 1 раза в месяц производить смазку подшипниковых узлов колесных опор штатива. Смазка - литол.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие штатива металлического телескопического с пластиковым поддоном передвижной для размещения на держателях эндоскопов после дезинфекционной обработки ШтЭ-01-«КРОНТ-М» требованиям ТУ 9452-023-11769436-2003.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изготовлено _____

Подпись мастера _____

Штамп предприятия

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

- 9.1. Срок гарантии 12 месяцев с момента покупки, но не более 24 месяцев с момента изготовления штатива при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 9.2. При отправлении в гарантийный ремонт необходимо приложить акт о возникновении неисправности и предполагаемой причине.

Штатив металлический телескопический с пластиковым поддоном
передвижной для размещения на держателях эндоскопов после
дезинфекционной обработки

ШтЭ-01-"КРОНТ-М"

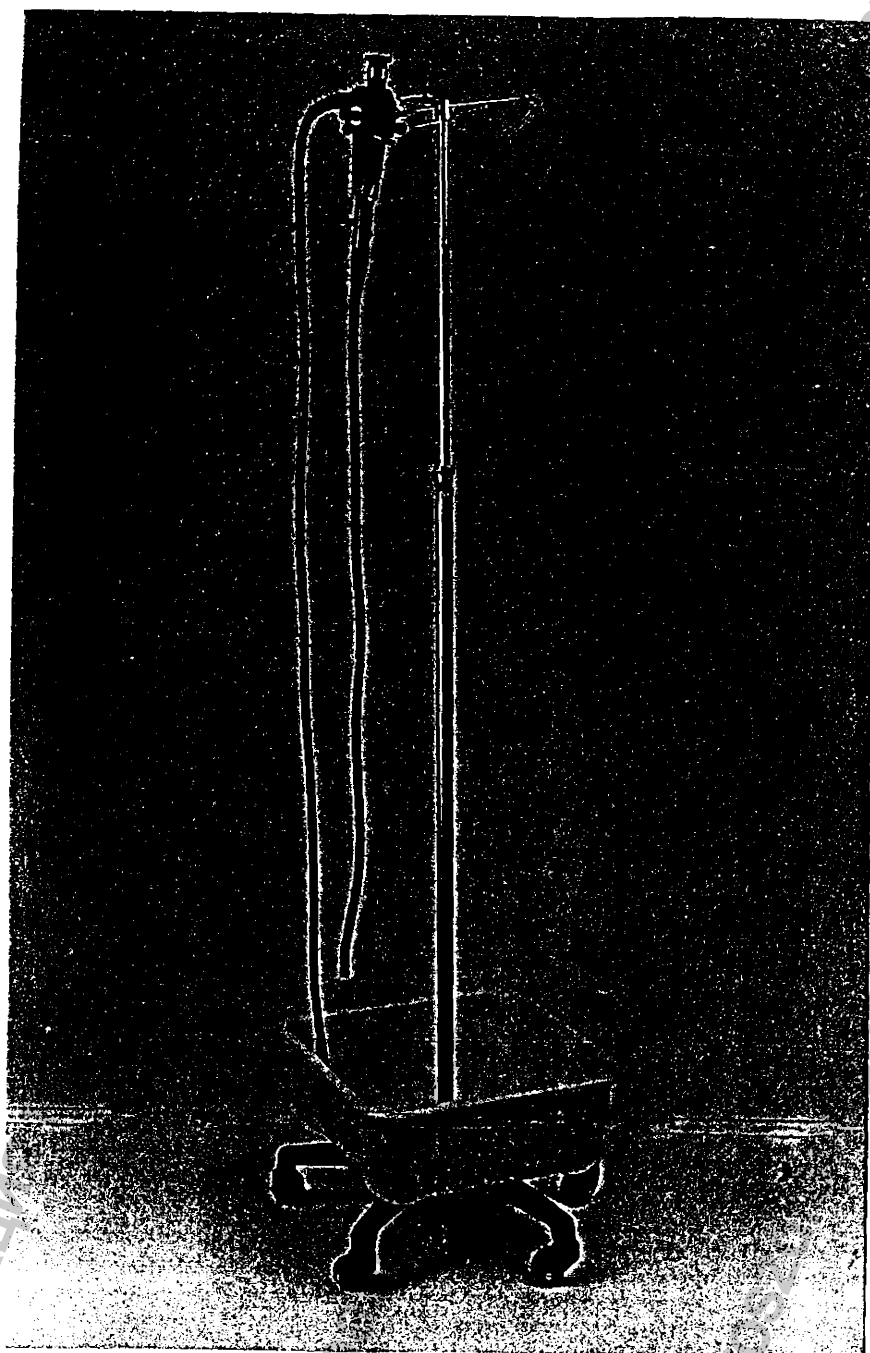


рис. 1