

АО «СКБ СО и Э»	Руководство по эксплуатации СС-04.00.000 РЭ Стол для стоматологов СС-04 в вариантах исполнения по ТУ 9452-003-13726632-2008	Редакция 2	
		Лист 1	Листов 8



**Стол для стоматологов СС-04 в вариантах исполнения
по ТУ 9452-003-13726632-2008**

СС-04

Руководство по эксплуатации
СС-04.00.000 РЭ

АО «СКБ СО и Э»	Руководство по эксплуатации СС-04.00.000 РЭ Стол для стоматологов СС-04 в вариантах исполнения по ТУ 9452-003-13726632-2008	Редакция 2	
		Лист 2	Листов 8

Оглавление

1. Введение	3
2. Наименование медицинского изделия	3
3. Назначение.....	3
4. Комплектность поставки.....	3
5. Основные технические характеристики.....	3
6. Маркировка.....	4
7. Упаковка	5
8. Устройство и сборка	5
9. Меры предосторожности (противопоказания) при применении медицинского изделия	6
10. Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности).....	6
11. Условия хранения	6
12. Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия.....	6
13. Техническое обслуживание	6
14. Порядок осуществления утилизации	6
15. Гарантии изготовителя	6
16. Свидетельство о приемке	6
17. Свидетельство об упаковывании	7
18. Свидетельство о консервации	7
19. Сведения о рекламациях.....	7
20. Сведения о производителе (изготовителе)	7
Приложение 1	8

АО «СКБ СО и Э»	Руководство по эксплуатации СС-04.00.000 РЭ Стол для стоматологов СС-04 в вариантах исполнения по ТУ 9452-003-13726632-2008	Редакция 2	
		Лист 3	Листов 8

1. Введение

Настоящее руководство по эксплуатации является совмещенным документом с техническим описанием и паспортом.
Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с медицинским изделием «Стол для стоматолога СС-04 по ТУ 9452-003-13726632-2008» и устанавливает правила его эксплуатации (использования, технического обслуживания, транспортирования и хранения).

2. Наименование медицинского изделия

Стол для стоматолога СС-04 по ТУ 9452-003-13726632-2008 (далее по тексту - стол).

3. Назначение

Стол предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов на рабочем месте врача-стоматолога.
Область применения: Стоматологические кабинеты поликлиник, больниц и госпиталей.
Потенциальные потребители: Врачи стоматологи.
Показания к применению: Для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов.
Противопоказания: Запрещено использовать не по назначению.

4. Комплектность поставки

Комплект поставки столов указан в таблице 4.1.
Таблица 4.1

Наименование	Обозначение документа	Количество, шт.
		СС-04.00.000
Стол для стоматолога СС-04	СС-04.00.000	1
Полка верхняя	СС-04.00.002	1
Полка нижняя	СС-04.00.003	1
Ящик		2
Ручка		2
Колесо Ø 40		4
Эксплуатационная документация		
Паспорт	СС-04.00.000 ПС	1
Руководство по эксплуатации	СС-04.00.000 РЭ	1

5. Основные технические характеристики

Каркас изделия выполнен из стальной трубы Ø 18. Ящики изготовлены из металла и комплектуются замками.
Столик перемещается на 4 поворотных пластиковых колесных опорах Ø 40 мм с тормозом/без тормоза

Габаритные размеры стола приведены на рисунке 5.1 и в таблице 5.1.
Масса стола: 16 ±1,6 кг.
Все металлические части изделия имеют защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания согласно МУ-287-113. При обработке рекомендуется применять способ двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе одного из следующих дезинфицирующих средств:
- металлические поверхности - раствором перекиси водорода 3,0 % по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства (Лотос, Лотос - автомат, Астра, Айна, Маричка, Прогресс);
- неметаллические поверхности - раствором хлорамина 1,0 %.
Для обеспечения плавного движения и продления срока службы направляющих рекомендуется равномерно распределять нагрузку по ящику.
Допустимая распределенная нагрузка: на полку не более 5 кг, на ящик не более 5 кг.

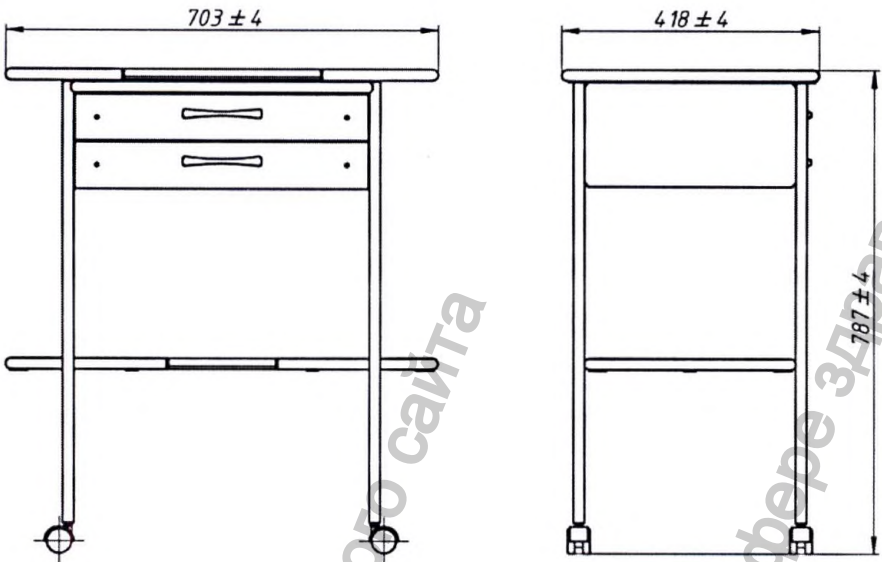


Рисунок 5.1. Стол СС-04

Таблица 5.1

Ящик с фасадом (ШхВхГ), ± 3 мм	476х76х301
Полка верхняя, ± 2 мм	660х375
Полка нижняя, ± 2 мм	660х300

6. Маркировка

На каждом столе прикреплена табличка, на которой указаны:

- наименование производителя;
- адрес производителя;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение типа (вида, модели) изделия;
- обозначение технических условий;
- номер регистрационного удостоверения;
- заводской номер изделия;
- дата выпуска (год и месяц);
- гарантийный срок;
- срок службы, установленный изготовителем;
- надпись: «Сделано в России».

Транспортная маркировка

На каждом ящике из гофрированного картона этикетка, выполненная печатным способом. На этикетке указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя с указанием даты основания;
- наименование производителя;
- адрес, телефон, электронная почта производителя;
- обозначение типа (вида, модели) изделия;
- обозначение настоящих технических условий;
- номер регистрационного удостоверения;
- количество изделий (при групповой упаковке);
- массу грузового места в килограммах;
- объём места в кубических метрах;
- номер упаковщика;
- дата выпуска (год и месяц);
- QR-код, с ссылкой на сайт производителя;
- гарантийный срок;
- надпись: «Сделано в России»

АО «СКБ СО и Э»	Руководство по эксплуатации СС-04.00.000 РЭ Стол для стоматологов СС-04 в вариантах исполнения по ТУ 9452-003-13726632-2008	Редакция 2	
		Лист 5	Листов 8

7. Упаковка

Упаковка - по ГОСТ Р 50444. При поставке стола в составе комплекта оборудования рабочего места стоматолога, требования к упаковке по техническим условиям на соответствующий комплект.

Перед упаковыванием металлические поверхности стола были обезжирены и законсервированы по ГОСТ 9.014 для условий хранения Ж: ВЗ-1; ВУ-1;

Предельный срок защиты без переконсервации: 3 года.

Эксплуатационная документация завернута в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354.

Один или два комплекта столов должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, а затем помещены в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Стол должен быть закреплен внутри ящика

Для транспортирования в контейнерах допускается упаковывать один или два комплекта столов в обрешетку по ГОСТ 12082 или в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

При междугородних перевозках, транспортировании с перегрузкой на другие виды транспорта столы должны быть упакованы в разовую или многооборотную тару, обеспечивающую сохранность её от повреждений и загрязнений, с применением внутренней упаковки из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354 и бумаги упаковочной ГОСТ 515.

Картонный ящик должен быть обвязан шпагатом по ГОСТ 17308 или полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477 так, чтобы она не могла быть вскрыта без нарушения целостности упаковки.

В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист по ГОСТ 20790.

При транспортировке в районы Крайнего Севера водным транспортом столы должны быть упакованы в соответствии с ГОСТ 15846.

В случае применения древесины, при изготовлении упаковки, влажность тары не должна превышать 22 %.

Ящики для предотвращения открывания и выдвигания заклеены средствами, исключающими повреждение столов.

Стол, его составные части и принадлежности к ним, завернуты в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354. Допускается применять вкладыши и обечайки из гофрированного картона по ГОСТ Р 52901.

8. Устройство и сборка

Стол СС-04 состоит из каркаса 1, в котором размещены две полки - верхняя полка 2 и нижняя полка 3, а также два выдвижных ящика 4. Ящики перемещаются на роликовых направляющих. Для выдвигания ящиков на их передних стенках установлены ручки 5. Ящики предохранены от выпадения при их полном выдвигении.

Для перемещения стол снабжен поворотными колесами 6.

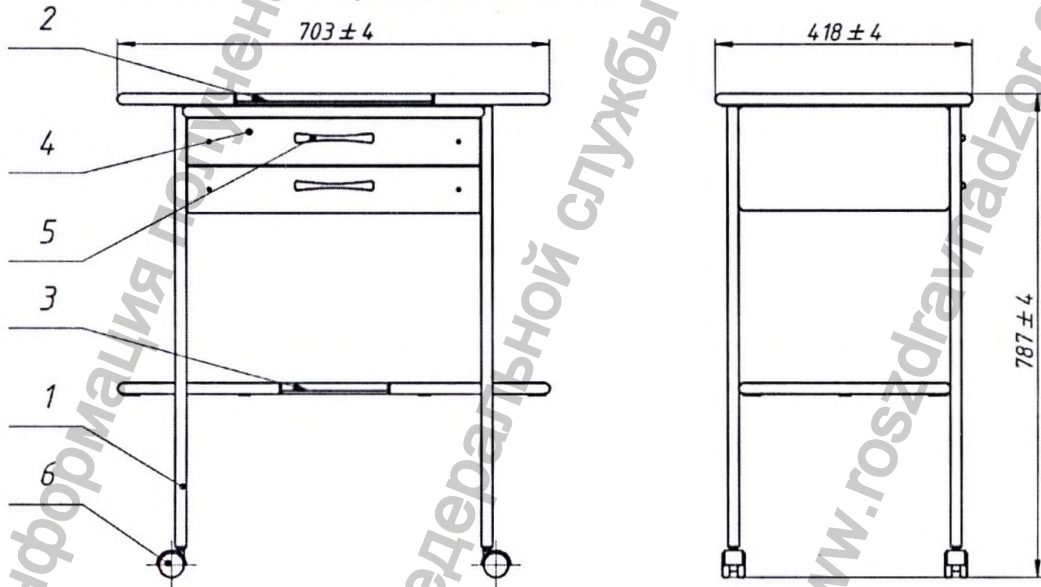


Рисунок 8.1. Стол для стоматолога СС-04

1 - Каркас; 2 - Полка верхняя; 3 – Полка нижняя; 4 - Ящик; 5 - Ручка; 6 – Колесо

Распакуйте стол, проверьте его комплектность, а также сохранность после транспортировки. Поверхности, смазанные консервационной смазкой, протрите хлопчатобумажными салфетками,

АО «СКБ СО и Э»	Руководство по эксплуатации СС-04.00.000 РЭ Стол для стоматологов СС-04 в вариантах исполнения по ТУ 9452-003-13726632-2008	Редакция 2	
		Лист 6	Листов 8

смоченными бензином или растворителем по ГОСТ 3134 или ГОСТ 443, затем протрите сухими салфетками до полного удаления консервационной смазки.

ВНИМАНИЕ!!! При распаковывании соблюдайте осторожность, чтобы не повредить полки, расположенные на верхней поверхности стола.

Для приведения стола в рабочее положение необходимо извлечь из ящика комплект колес и ввернуть их в ножки каркаса 1 (см. рис. 8.1) до упора. Полки 2, 3 уложить в соответствующие ниши каркаса.

9. Меры предосторожности (противопоказания) при применении медицинского изделия

Не использовать не по назначению.

10. Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности)

Средний срок службы до списания столов должен быть 5 лет.

Предельное состояние - состояние, при котором восстановление работоспособности невозможно или экономически нецелесообразно.

11. Условия хранения

Стол транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Вид отправки - контейнерами и мелкая отправка.

Стол в исполнении УХЛ 4.2 в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150.

Ящики со столами должны быть размещены не более, чем в два ряда.

12. Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия

Медицинское изделие соответствует условиям эксплуатации группы УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444.

13. Техническое обслуживание

Изделие имеет простую надежную конструкцию и не требует специального технического обслуживания.

Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности изделия.

14. Порядок осуществления утилизации

Утилизация мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, осуществляется через организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности.

Утилизацию мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, производят в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Стол, после дезинфекции, подлежит утилизации в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

Утилизация изделий, для которых закончился срок хранения, должна проводиться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Утилизацию (уничтожению) столов, не пригодных к эксплуатации, производят специализированные компании, имеющие соответствующие лицензии.

15. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации стола 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

16. Свидетельство о приемке

Стол для стоматолога СС-04 по ТУ 9452-003-13726632-2008

Серийный номер _____

Дата выпуска _____ М.П.
Соответствует техническим условиям ТУ 9452-003-13726632-2008 и признана годной к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку.

17. Свидетельство об упаковывании

Стол для стоматолога СС-04 по ТУ 9452-003-13726632-2008
Серийный номер _____,
Упакована АО «СКБ СО и Э» согласно требованиям, ТУ 9452-003-13726632-2008.
Дата упаковывания _____
Подпись лиц, ответственных за упаковку _____

18. Свидетельство о консервации

Стол для стоматолога СС-04 по ТУ 9452-003-13726632-2008
Серийный номер _____, подвергнута
_____ (наименование предприятия, производившего консервацию)
Дата консервации _____
Срок консервации _____
Консервацию произвел: _____

_____ (должность)	_____ (личная подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Изделие после консервации принял:		
_____ (должность)	_____ (личная подпись)	_____ (расшифровка подписи)

19. Сведения о рекламациях

Рекламации в установленном порядке направлять предприятию-изготовителю АО «СКБ СО и Э» по адресу: г. Волгоград, революционная 57 а оф. 12
Контакты: Тел./Факс: +7(8442)41-99-06, E-mail: info@vzmo.su
Сайт: https://vzmo.su/

20. Сведения о производителе (изготовителе)

Производитель:
АО «СКБ СО и Э», адрес регистрации г. Волгоград, революционная 57 а оф. 12
Адреса мест производства:
1. г. Волгоград, ул. Электrolесовская 70 а
2. г. Волгоград ул. Электrolесовская 70 б
3. г. Волгоград ул. Электrolесовская 70 л
4. г. Волгоград, ул. Электrolесовская 19
Контакты: Тел./Факс: +7(8442)41-99-06, E-mail: info@vzmo.su
Сайт:https://vzmo.su/

АО «СКБ СО и Э»	Руководство по эксплуатации СС-04.00.000 РЭ Стол для стоматологов СС-04 в вариантах исполнения по ТУ 9452-003-13726632-2008	Редакция 2	
		Лист 8	Листов 8

Приложение 1

Гарантийный талон
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

наименование и тип изделия

Дата выпуска №

Приобретено

Заполняется торгующей организацией

Производитель: АО «СКБ СО и Э»

Россия, 400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57А, оф.12

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.roszdravnadzor.gov.ru

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8 листов

Генеральный директор _____/Н.В. Шабанов/



АО «СКБ СО и Э»	Руководство по эксплуатации СС-04-01.00.000 РЭ Стол для стоматологов СС-04 в вариантах исполнения по ТУ 9452-003-13726632-2008	Редакция 1	
		Лист 1	Листов 8

**Стол для стоматологов СС-04 в вариантах исполнения
по ТУ 9452-003-13726632-2008**

СС-04-01

Руководство по эксплуатации
СС-04-01.00.000 РЭ

Оглавление

1.	Введение	3
2.	Наименование медицинского изделия	3
3.	Назначение.....	3
4.	Комплектность поставки	3
5.	Основные технические характеристики	3
6.	Маркировка.....	4
7.	Упаковка	4
8.	Устройство и сборка	5
9.	Меры предосторожности (противопоказания) при применении медицинского изделия	6
10.	Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности)	6
11.	Условия хранения	6
12.	Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия	6
13.	Техническое обслуживание	6
14.	Порядок осуществления утилизации	6
15.	Гарантии изготовителя	6
16.	Свидетельство о приемке	6
17.	Свидетельство об упаковывании	7
18.	Свидетельство о консервации	7
19.	Сведения о рекламациях.....	7
20.	Сведения о производителе (изготовителе)	7
	Приложение 1	8

1. Введение

Настоящее руководство по эксплуатации является совмещенным документом с техническим описанием и паспортом.
Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с медицинским изделием «Стол для стоматолога СС-04-01 по ТУ 9452-003-13726632-2008» и устанавливает правила его эксплуатации (использования, технического обслуживания, транспортирования и хранения).

2. Наименование медицинского изделия

Стол для стоматолога СС-04-01 по ТУ 9452-003-13726632-2008 (далее по тексту - стол).

3. Назначение

Стол предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов на рабочем месте врача-стоматолога.
Область применения: Стоматологические кабинеты поликлиник, больниц и госпиталей.
Потенциальные потребители: Врачи стоматологи.
Показания к применению: Для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов.
Противопоказания: Запрещено использовать не по назначению.

4. Комплектность поставки

Комплект поставки столов указан в таблице 4.1.
Таблица 4.1

Наименование	Обозначение документа	Количество, шт.
		СС-04.00.000-01
Стол для стоматолога СС-04-01	СС-04-01.00.000	1
Полка верхняя	СС-04.00.002	1
Полка нижняя	СС-04.00.003	1
Ящик с замком		2
Ручка		2
Колесо Ø 40		4
Эксплуатационная документация		
Паспорт		1
Руководство по эксплуатации	СС-04-01.00.000 ПС СС-04-01.00.000 РЭ	1

5. Основные технические характеристики

Каркас изделия выполнен из стальной трубы Ø 18. Ящики изготовлены из металла и комплектуются замками.
Столик перемещается на 4 поворотных пластиковых колесных опорах Ø 40 мм с тормозом/без тормоза.

Габаритные размеры стола приведены на рисунке 5.1 и в таблице 5.1
Масса стола: 18±1,8 кг.
Все металлические части изделия имеют защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания согласно МУ-287-113. При обработке рекомендуется применять способ двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе одного из следующих дезинфицирующих средств:
- металлические поверхности - раствором перекиси водорода 3,0 % по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства (Лотос, Лотос - автомат, Астра, Айна, Маричка, Прогресс);
- неметаллические поверхности - раствором хлорамина 1,0 %.
Для обеспечения плавного движения и продления срока службы направляющих рекомендуется равномерно распределять нагрузку по ящику.
Допустимая распределенная нагрузка: на полку не более 5 кг, на ящик не более 5 кг.

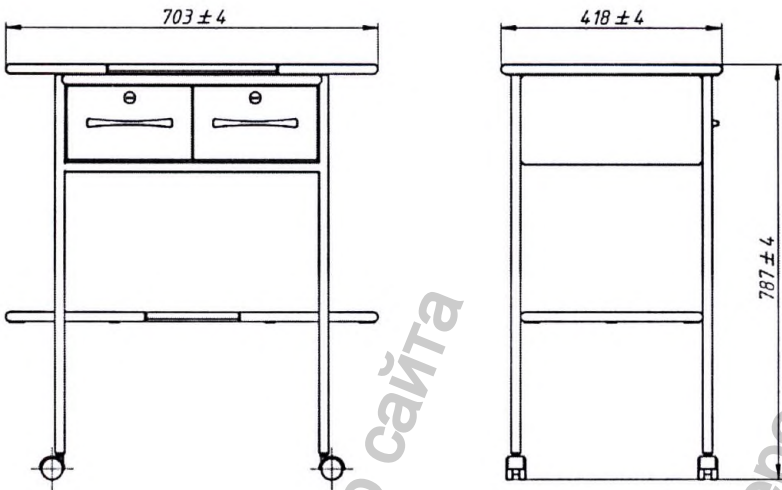


Рисунок 5.1. Стол СС-04-01

Таблица 5.1

Ящик с фасадом (ШхВхГ), ± 3 мм	235x140x301
Полка верхняя, ± 2 мм	660x375
Полка нижняя, ± 2 мм	660x300

6. Маркировка

На каждом столе прикреплена табличка, на которой указаны:

- наименование производителя;
- адрес производителя;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение типа (вида, модели) изделия;
- обозначение технических условий;
- номер регистрационного удостоверения;
- заводской номер изделия;
- дата выпуска (год и месяц);
- гарантийный срок;
- срок службы, установленный изготовителем;
- надпись: «Сделано в России».

Транспортная маркировка

На каждом ящике из гофрированного картона этикетка, выполненная печатным способом. На этикетке указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя с указанием даты основания;
- наименование производителя;
- адрес, телефон, электронная почта производителя;
- обозначение типа (вида, модели) изделия;
- обозначение настоящих технических условий;
- номер регистрационного удостоверения.
- количество изделий (при групповой упаковке);
- массу грузового места в килограммах;
- объём места в кубических метрах;
- номер упаковщика;
- дата выпуска (год и месяц);
- QR-код, с ссылкой на сайт производителя;
- гарантийный срок.
- надпись: «Сделано в России»

7. Упаковка

Упаковка - по ГОСТ Р 50444. При поставке стола в составе комплекта оборудования рабочего места стоматолога, требования к упаковке по техническим условиям на соответствующий комплект.

АО «СКБ СО и Э»	Руководство по эксплуатации СС-04-01.00.000 РЭ Стол для стоматологов СС-04 в вариантах исполнения по ТУ 9452-003-13726632-2008	Редакция 1	
		Лист 5	Листов 8

Перед упаковыванием металлические поверхности стола были обезжирены и законсервированы по ГОСТ 9.014 для условий хранения Ж: ВЗ-1; ВУ-1;

Предельный срок защиты без переконсервации: 3 года.

Эксплуатационная документация завернута в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354.

Один или два комплекта столов должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, а затем помещены в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Стол должен быть закреплен внутри ящика

Для транспортирования в контейнерах допускается упаковывать один или два комплекта столов в обрешетку по ГОСТ 12082 или в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142.

При междугородних перевозках, транспортировании с перегрузкой на другие виды транспорта столы должны быть упакованы в разовую или многооборотную тару, обеспечивающую сохранность её от повреждений и загрязнений, с применением внутренней упаковки из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354 и бумаги упаковочной ГОСТ 515.

Картонный ящик должен быть обвязан шпагатом по ГОСТ 17308 или полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477 так, чтобы она не могла быть вскрыта без нарушения целостности упаковки.

В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист по ГОСТ 20790.

При транспортировке в районы Крайнего Севера водным транспортом столы должны быть упакованы в соответствии с ГОСТ 15846.

В случае применения древесины, при изготовлении упаковки, влажность тары не должна превышать 22 %.

Ящики для предотвращения открывания и выдвижения заклеены средствами, исключающими повреждение столов.

Стол, их составные части и принадлежности к ним, завернуты в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.

Допускается применять вкладыши и обечайки из гофрированного картона по ГОСТ Р 52901.

8. Устройство и сборка

Стол СС-04-01 состоит из каркаса 1, в котором размещены две полки - верхняя полка 2 и нижняя полка 3, а также два выдвижных ящика 4 с замками 7. Ящики перемещаются на направляющих. Для выдвижения ящиков на их передних стенках установлены ручки 5. Ящики предохранены от выпадения при их полном выдвижении, а также снабжены замками для их запираания. Для перемещения стол снабжен поворотными колесами 6.

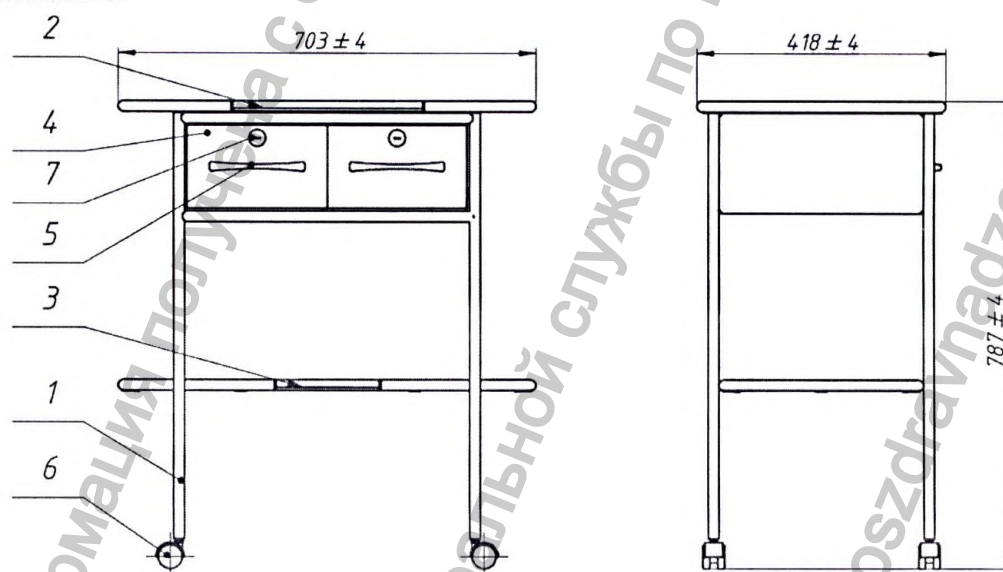


Рисунок 8.1. Стол для стоматолога СС-04-01

1 - Каркас; 2 - Полка верхняя; 3 - Полка нижняя; 4- Ящик; 5 - Ручка; 6 - Колесо; 7 - Замок.

Распакуйте стол, проверьте его комплектность, а также сохранность после транспортировки. Поверхности, смазанные консервационной смазкой, протрите хлопчатобумажными салфетками, смоченными бензином или растворителем по ГОСТ 3134 или ГОСТ 443, затем протрите сухими салфетками до полного удаления консервационной смазки.

ВНИМАНИЕ!!! При распаковывании соблюдайте осторожность, чтобы не повредить полки, расположенные на верхней поверхности стола.

АО «СКБ СО и Э»	Руководство по эксплуатации СС-04-01.00.000 РЭ Стол для стоматологов СС-04 в вариантах исполнения по ТУ 9452-003-13726632-2008	Редакция 1	
		Лист 6	Листов 8

Для приведения стола в рабочее положение необходимо извлечь из ящика комплект колес и вернуть их в ножки каркаса 1 (см. рис. 8.1) до упора. Полки 2, 3 уложить в соответствующие ниши каркаса.

9. Меры предосторожности (противопоказания) при применении медицинского изделия

Не использовать не по назначению.

10. Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности)

Средний срок службы до списания столов 5 лет.

Предельное состояние - состояние, при котором восстановление работоспособности невозможно или экономически нецелесообразно.

11. Условия хранения

Столы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Вид отправки - контейнерами и мелкая отправка.

Столы в исполнении УХЛ 4.2 в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150.

Ящики со столами должны быть размещены не более, чем в два ряда.

12. Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия

Медицинское изделие соответствует условиям эксплуатации группы УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444.

13. Техническое обслуживание

Изделие имеет простую надежную конструкцию и не требует специального технического обслуживания.

Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности изделия.

14. Порядок осуществления утилизации

Утилизация мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, осуществляется через организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности.

Утилизацию мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, производят в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Столы, после дезинфекции, подлежит утилизации в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

Утилизация изделий, для которых закончился срок хранения, должна проводиться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Утилизацию (уничтожению) столов, не пригодных к эксплуатации, производят специализированные компании, имеющие соответствующие лицензии.

15. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует качества изделия требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации стола 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

16. Свидетельство о приемке

Стол для стоматолога СС-04-01 по ТУ 9452-003-13726632-2008: _____,

Серийный номер _____

Дата выпуска _____ М.П.

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-003-13726632-2008 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку.

АО «СКБ СО и Э»	Руководство по эксплуатации СС-04-01.00.000 РЭ Стол для стоматологов СС-04 в вариантах исполнения по ТУ 9452-003-13726632-2008	Редакция 1	
		Лист 7	Листов 8

17. Свидетельство об упаковывании

Стол для стоматолога СС-04-01 по ТУ 9452-003-13726632-2008: _____,
Серийный номер _____,
Упакована АО «СКБ СО и Э» согласно требованиям, ТУ 9452-003-13726632-2008.

Дата упаковывания _____
Подпись лиц, ответственных за упаковку _____

18. Свидетельство о консервации

Стол для стоматолога СС-04-01 по ТУ 9452-003-13726632-2008: _____,
Серийный номер _____, подвергнута
_____ (наименование предприятия, производившего консервацию)

Дата консервации _____
Срок консервации _____

Консервацию произвел:

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Изделие после консервации принял:

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

19. Сведения о рекламациях

Рекламации в установленном порядке направлять предприятию-изготовителю АО «СКБ СО и Э» по адресу: г. Волгоград, революционная 57 а оф. 12
Контакты: Тел./Факс: +7(8442)41-99-06, E-mail: info@vzmo.su
Сайт: https://vzmo.su/

20. Сведения о производителе (изготовителе)

Производитель:
АО «СКБ СО и Э», адрес регистрации г. Волгоград, революционная 57 а оф. 12
Адреса мест производства:
1. г. Волгоград, ул. Электродесовская 70 а
2. г. Волгоград ул. Электродесовская 70 б
3. г. Волгоград ул. Электродесовская 70 л
4. г. Волгоград, ул. Электродесовская 19
Контакты: Тел./Факс: +7(8442)41-99-06, E-mail: info@vzmo.su
Сайт:https://vzmo.su/

АО «СКБ СО и Э»	Руководство по эксплуатации СС-04-01.00.000 РЭ Стол для стоматологов СС-04 в вариантах исполнения по ТУ 9452-003-13726632-2008	Редакция 1	
		Лист 8	Листов 8

Приложение 1

Гарантийный талон
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

наименование и тип изделия

Дата выпуска №

Приобретено

Заполняется торгующей организацией
Производитель: АО «СКБ СО и Э»
Россия, 400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57А, оф.12

Генеральный директор _____ /Н.В. Шабанов/



Информация получена с официального сайта
Федерального...

Пролітано, пронумаравано і с
8 лістоў
 Генеральны дырэктар

www.roszdravnadzor.gov.ru



ИМ 22



Стол для стоматологов СС-04 в вариантах исполнения
по ТУ 9452-003-13726632-2008

СС-04-01

Паспорт
СС-04-01.00.000 ПС

г. Волгоград

1. Назначение изделия

1.1. Стол для стоматолога СС-04-01 предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов на рабочем месте врача-стоматолога.

1.2. Нормальные условия эксплуатации стола: температура от +10°C до +35 °C и относительная влажность до 80% при температуре +25°C.

1.3. Дезинфекцию наружных поверхностей стола производить согласно МУ-287-113.

- металлические поверхности - раствором перекиси водорода 3,0 % по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства (Лотос, Лотос - автомат, Астра, Айна, Маричка, Прогресс);
- неметаллические поверхности - раствором хлорамина 1,0 %.

2. Технические характеристики

2.1. Габаритные размеры:

Длина - 703±4 мм; Ширина - 418±4 мм; Высота - 787±4 мм.

2.2. Масса 18±1,8 кг.

2.3. Равномерно распределенная нагрузка на полку не более 5 кг.

2.4. Равномерно распределенная нагрузка на дно ящика не более 5 кг.

3. Гарантийные обязательства

3.1. Изготовитель гарантирует качества изделия требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации стола 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

АО «СКБ СО и Э», 400002 г. Волгоград, ул. Революционная, 57а

Телефон: (8442) 41-99-06.

E-mail: info@vzmo.su.

4. Утилизация

4.1. Утилизация мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, осуществляется через организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности.

4.2. Утилизацию мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, производят в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Столы, после дезинфекции, подлежат утилизации в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

4.3. Утилизация изделий, для которых закончился срок хранения, должна проводиться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Утилизацию (уничтожению) столов, не пригодных к эксплуатации, производят специализированные компании, имеющие соответствующие лицензии.

5. Свидетельство о приемке

Стол для стоматолога СС-04-01 по ТУ 9452-003-13726632-2008:

_____,
Серийный номер _____

Дата выпуска _____ М.П.

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-003-13726632-2008 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку.

6. Гарантийный талон

Гарантийный талон
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

наименование и тип изделия

Дата выпуска _____ № _____
Приобретено _____

Заполняется торгующей организацией

Производитель: АО «СКБ СО и Э»

Россия, 400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57А, оф.12



АО «СКБ СО и Э»



ИМ 22



Стол для стоматологов СС-04 в вариантах исполнения
по ТУ 9452-003-13726632-2008

СС-04

Паспорт
СС-04.00.000 ПС

г. Волгоград

1. Назначение изделия

1.1. Стол для стоматолога СС-04 предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов на рабочем месте врача-стоматолога.

1.2. Нормальные условия эксплуатации стола: температура от +10°C до +35 °C и относительная влажность до 80% при температуре +25°C.

1.3. Дезинфекцию наружных поверхностей стола производить согласно МУ-287-113.

- металлические поверхности - раствором перекиси водорода 3,0 % по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства (Лотос, Лотос - автомат, Астра, Айна, Маричка, Прогресс);
- неметаллические поверхности - раствором хлорамина 1,0 %.

2. Технические характеристики

2.1. Габаритные размеры:

Длина - 703±4 мм; Ширина - 418±4 мм; Высота - 787±4 мм.

2.2. Масса 16±1,6 кг.

2.3. Равномерно распределенная нагрузка на полку не более 5 кг.

2.4. Равномерно распределенная нагрузка на дно ящика не более 5 кг.

3. Гарантийные обязательства

3.1. Изготовитель гарантирует качества изделия требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации стола 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

АО «СКБ СО и Э», 400002 г. Волгоград, ул. Революционная, 57а

Телефон: (8442) 41-99-06.

E-mail: info@vzmo.su.

4. Утилизация

4.1. Утилизация мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, осуществляется через организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности.

4.2. Утилизацию мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, производят в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Столы, после дезинфекции, подлежат утилизации в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

4.3. Утилизация изделий, для которых закончился срок хранения, должна проводиться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Утилизацию (уничтожению) столов, не пригодных к эксплуатации, производят специализированные компании, имеющие соответствующие лицензии.

5. Свидетельство о приемке

Стол для стоматолога СС-04 по ТУ 9452-003-13726632-2008:

Серийный номер _____

Дата выпуска _____ М.П.

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-003-13726632-2008 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку.

6. Гарантийный талон

Гарантийный талон
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

наименование и тип изделия

Дата выпуска _____ № _____

Приобретено _____

Заполняется торгующей организацией

Производитель: АО «СКБ СО и Э»

Россия, 400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57А, оф.12

