


РУКОВОДСТВО ПО НАСАДКАМ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАСАДКИ
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СКАЛЕРОВ



Компания NSK предлагает широкий выбор насадок к ультразвуковым скалерам VARIOS для различного клинического применения.

Для удаления зубных отложенийСтраницы 4-9

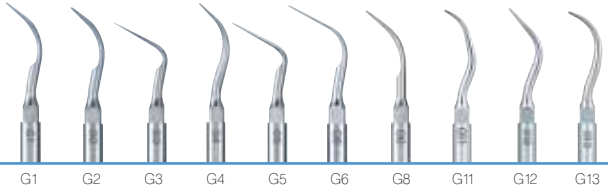

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G8 G11 G12 G13

РеставрационныеСтраницы 28-30




G61D G62D

Для ухода за имплантамиСтраница 17



V10+V-P10

ПародонтологическиеСтраницы 10-18

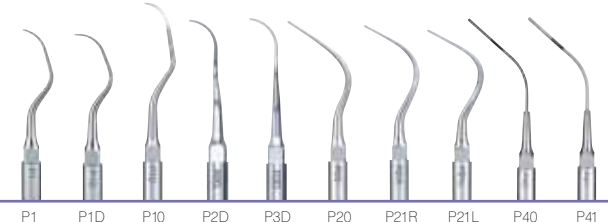

P1 P1D P10 P2D P3D P20 P21R P21L P40 P41



P25R P25L

МОДЕЛЬ	NSK		Satelec®	EMS®
	Varios2	Varios	P-Max XS P5 XS	Piezon Master 600 (miniMaster)
ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ				
G21	Ⓒ 4	Ⓒ 2	20	—
G22	Ⓒ 4	Ⓒ 2	20	—
G25	Ⓒ 10	Ⓒ 4	20	—
G26	Ⓒ 10	Ⓒ Max	20	—
G28	Ⓒ 10	Ⓒ 2	20	—
V-TIP (ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ)				
V-S50	Ⓔ 5	Ⓔ 3	10	—
V-S50D	Ⓔ 5	Ⓔ 3	10	—
V-S51	Ⓔ 3	Ⓔ 1	10	—
V-S51D	Ⓔ 3	Ⓔ 1	10	—
V-S52	Ⓔ 5	Ⓔ 2	10	—
V-S52D	Ⓔ 5	Ⓔ 2	10	—
V-S53	Ⓔ 5	Ⓔ 2	10	—
V-S53D	Ⓔ 5	Ⓔ 2	10	—
V-TIP (РЕСТАВРАЦИОННЫЕ)				
V-G70	Ⓒ 6	Ⓒ 3	15	—
V-G71	Ⓒ 6	Ⓒ 3	15	—
V-G72	Ⓒ 6	Ⓒ 3	15	—
V-G75	Ⓒ 6	Ⓒ 1	15	—
V-G76	Ⓒ 6	Ⓒ 3	15	—
V-G77	Ⓒ 6	Ⓒ 3	15	—

МОДЕЛЬ	NSK		Satelec®	EMS®
	Varios2	Varios	P-Max XS P5 XS	Piezon Master 600 (miniMaster)
V-G78	Ⓒ 6	Ⓒ 3	15	—
V-G79	Ⓒ 6	Ⓒ 3	15	—
V-S1	Ⓒ 6	Ⓔ 3	15	—
V-S3	Ⓒ 4	Ⓔ 3	15	—
V-S33	Ⓒ 6	Ⓔ 3	15	—

● Соответствующий диапазон мощностей для насадок Varios от NSK при их использовании с ультразвуковыми скалерами Varios и Varios 2 от NSK.



Внимание

- Перед использованием прочтите инструкцию и сверьтесь с данным руководством.
- Для каждой насадки всегда используйте правильный режим и подходящий диапазон мощностей
- Всегда используйте достаточное охлаждение во избежание перегрева во время операции.
- Всегда начинайте работу при низких значениях мощности и затем при необходимости увеличивайте мощность.
- Перед использованием убедитесь, что насадка была надежно закреплена с помощью прилагающегося ключа. Следите за тем, чтобы значения мощности не превышали соответствующего уровня.


* Неправильное использование может привести к поломке насадки, даже если был выбран правильный диапазон мощностей. Перед использованием читайте инструкцию.

Максимальная мощность Ⓒ3

Цифры в данном руководстве показывают правильный диапазон мощностей и максимальный уровень мощности для каждой насадки. Во избежание поломки насадки не превышайте максимальный уровень мощности.


Для протезирования

Страницы 32-35

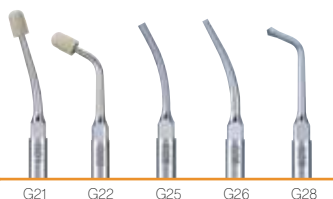

V-держатели (для реставрационных насадок)

Страницы 42-46

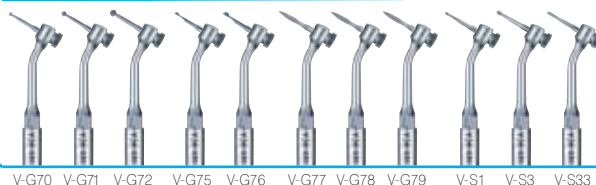


V-держатели (для эндодонтических насадок)

Страницы 36-41




Эндодонтические

Страницы 20-25

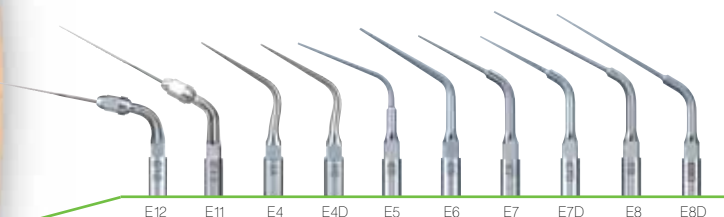

Эндретроградные

Страницы 26-27

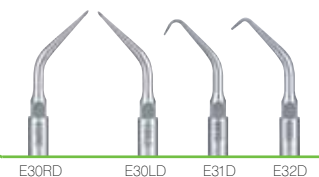


Все насадки NSK можно автоклавировать

Насадки Varios2 / Varios

Насадки NSK могут устанавливаться на наконечники ультразвуковых скалеров Varios и Varios2, а также на наконечники ультразвуковых скалеров Satelec®. Дополнительно NSK производит ряд насадок для установки на наконечники ультразвуковых скалеров EMS®.

Ниже представлено иллюстрированное руководство по всем насадкам Varios, их применению и установке.

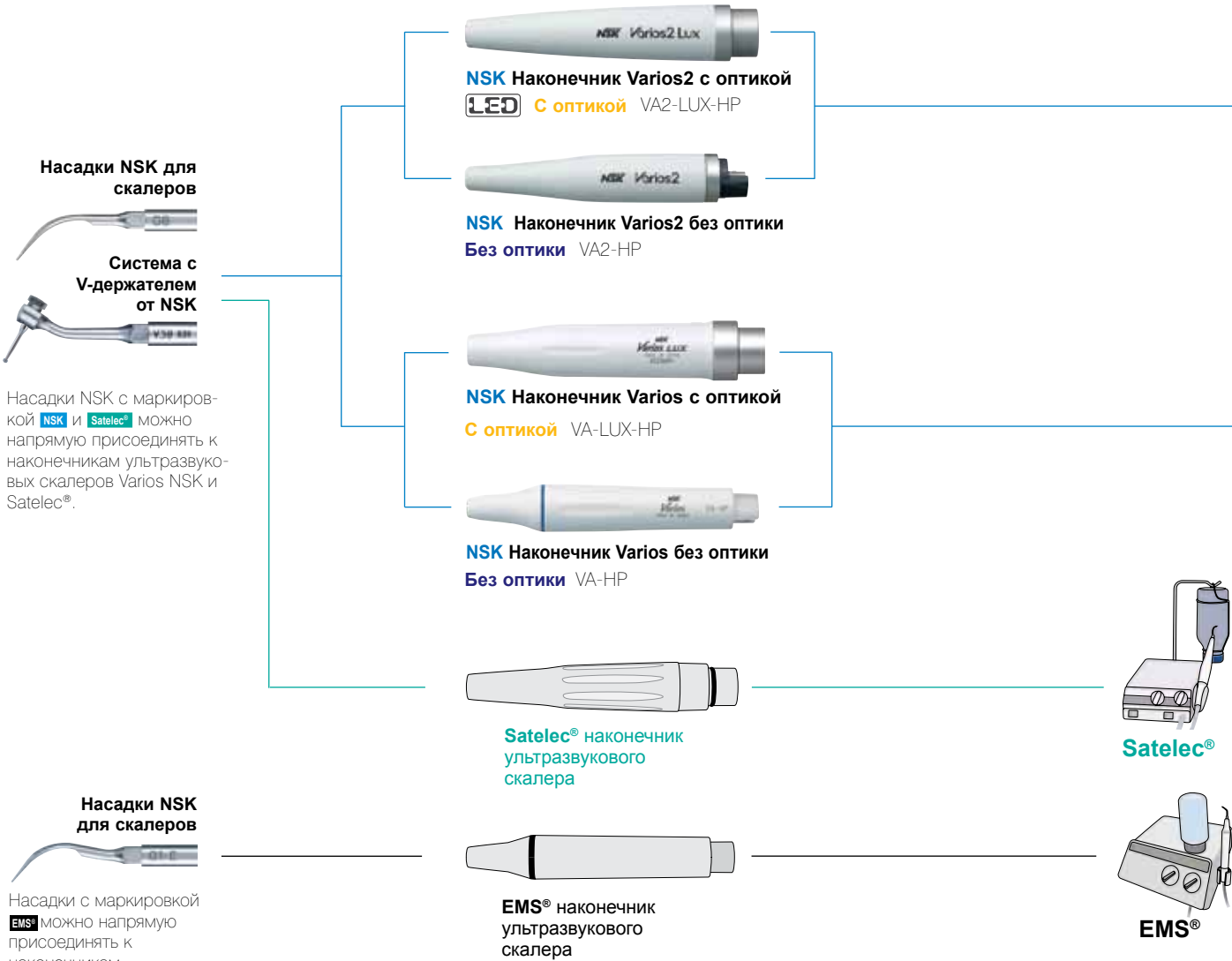

Varios 970 iPiezo engine



Varios 970
Многофункциональный
ультразвуковой скалер с 2-мя
емкостями

Varios

Varios 750

Многофункциональный ультра-
звуковой скалер с
1-й емкостью




Varios 560

Настольный
многофункциональный
ультразвуковой скалер



Varios 350

Компактный
многофункциональный
ультразвуковой скалер

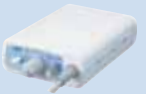

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ


Насадки Varios предназначены для начального этапа периодонтального лечения и в основном используются для удаления наддесневых отложений. Насадки Varios выпускаются в десяти вариантах и применяются для удаления наддесневого и межзубного камня, а также отложений на шейке зуба.




ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ




G1 Для удаления наддесневого и межзубного камня.

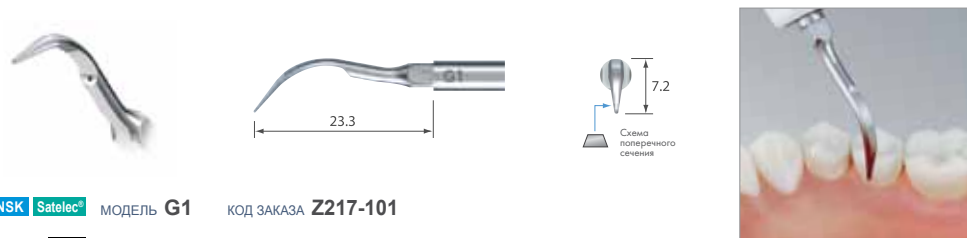


G2 Для удаления массивных отложений и налета в наддесневой зоне.
 *Прижмите верхнюю часть плоской насадки к поверхности зуба и перемещайте ее вдоль коронковой части зуба.

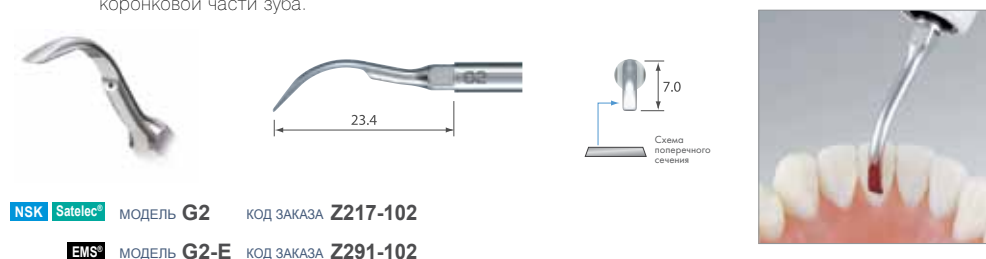


G3 Для удаления массивных отложений и налета в наддесневой зоне и между зубами.
 *Прижмите верхнюю и боковую части насадки к внутренней стороне передних зубов и осторожно перемещайте насадку вверх и вниз. Для других областей используйте закругленный кончик насадки.

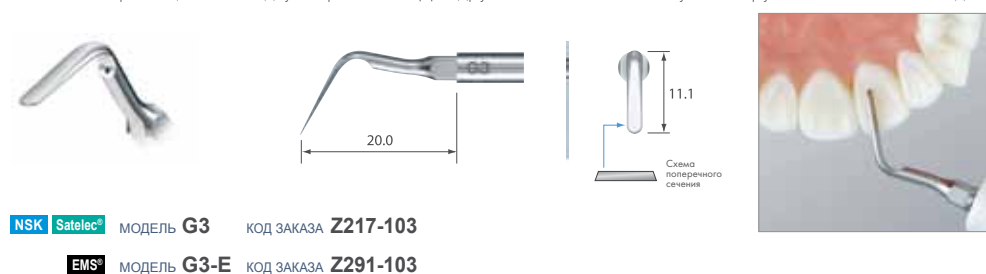


G4 Тонкий кончик насадки прекрасно удаляет наддесневые и межзубные отложения. Благодаря округлой форме насадки поверхность зуба не повреждается.

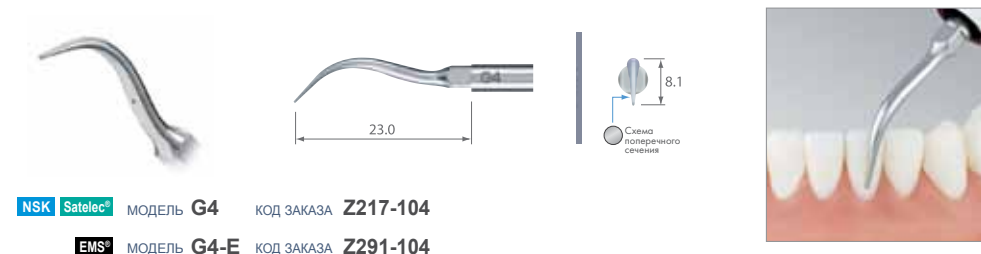

G5 Для удаления зубного камня между коренными зубами.

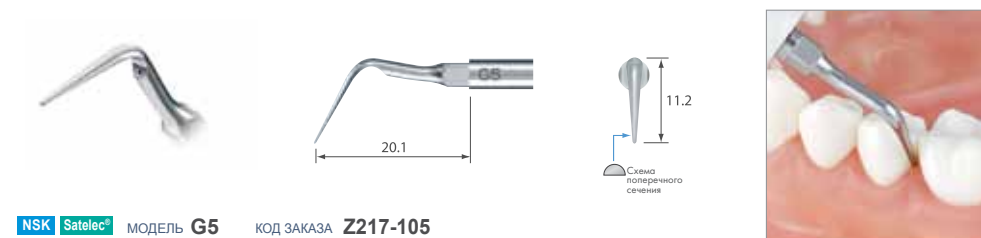

G6 Для удаления наддесневого и поддесневого зубного камня. Простой доступ к межзубному пространству и узким десневым карманам.

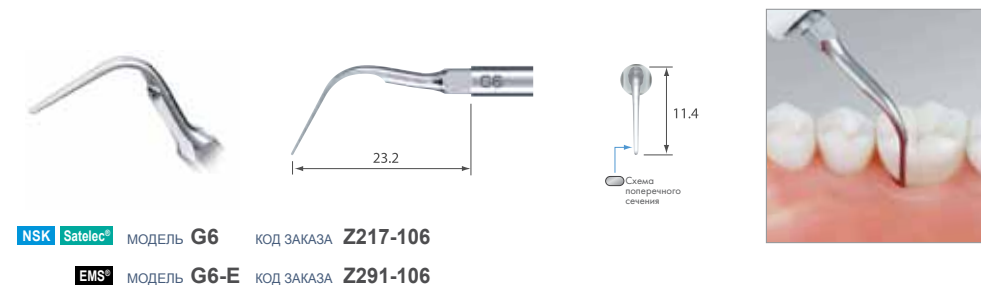

*Схема поперечного сечения – это изображение точки 1 мм от кончика насадки. Размер насадок на схеме в 4 раза превышает их реальный размер.


Satelec® является зарегистрированным товарным знаком компании Asteon SA, Франция. EMS® является зарегистрированным товарным знаком компании Electro Medical Systems SA, Швейцария.

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.


Удаление зубных отложений 7

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ


G8 Для удаления наддесневого и межзубного камня. Данная насадка может применяться во всех областях и очень эффективна для удаления массивных отложений.

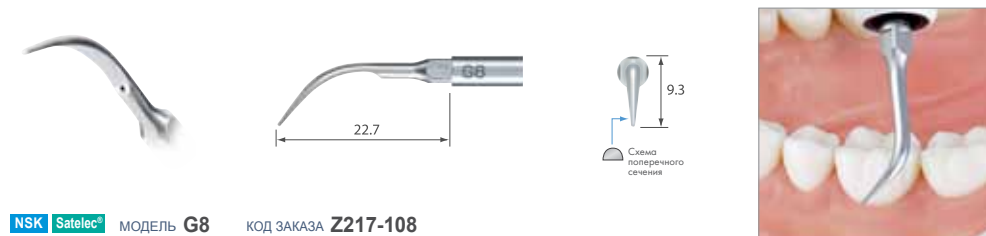

G11 Насадка аналогична кюретам Грейси №1/2 и используется для удаления зубных отложений с передних зубов и моляров.

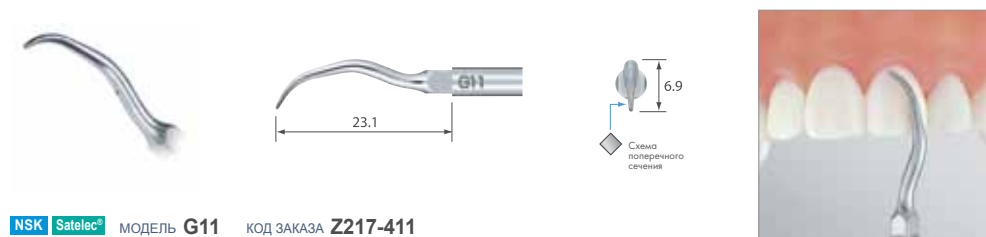


G12 Для удаления наддесневого зубного камня

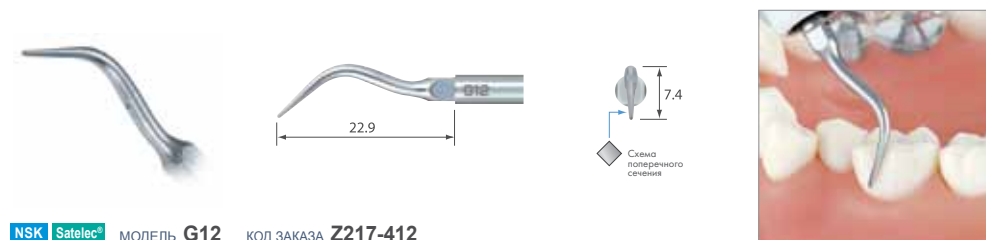

* Схема поперечного сечения – это изображение точки 1 мм от кончика насадки. Размер насадок на схеме в 4 раза превышает их реальный размер.



G13 Серповидная насадка для удаления наддесневого зубного камня. Эффективность обеспечивается за счет ромбовидной формы поперечного сечения.

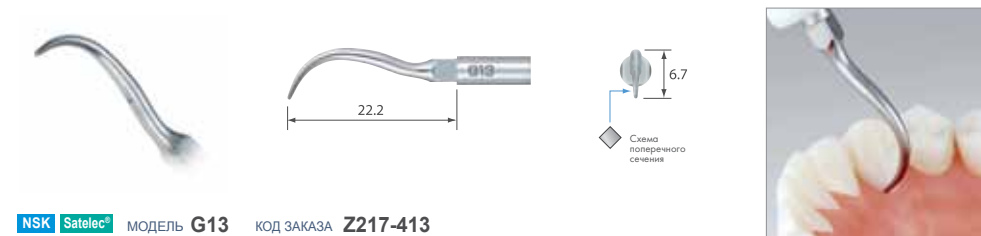

Satelec® является зарегистрированным товарным знаком компании Acteon SA, Франция

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.

ПАРОДОНТО- ЛОГИЧЕСКИЕ


Пародонтологические насадки Varios – это тонкие насадки, специально созданные для обработки корневой зоны и ухода (расщепление биопленки). Они обеспечивают удобный доступ к зоне разделения корней зуба и изогнутой поверхности корня.



ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ


(для обработки корневой зоны)

P1 Аналогична кюретам Грейси №5/6 для ухода и обработки передних зубов и премоляров. Это самые тонкие насадки, позволяющие легко обрабатывать передние зубы, узкие зубодесневые карманы и тесно расположенные зубы.

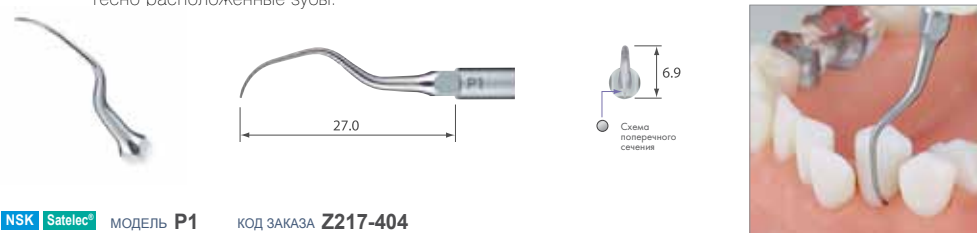

NSK Satelec® модель P1 код заказа Z217-404

P1D P1D – насадка той же формы, что и P1, но имеющая алмазное покрытие. Предназначена для удаления зубных отложений в труднодоступных областях узких корневых каналов и в зонах с тесным расположением зубов.

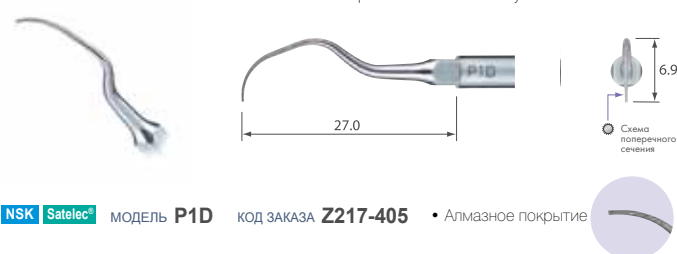

NSK Satelec® модель P1D код заказа Z217-405 • Алмазное покрытие

P10 Насадка с острой кромкой. Предоставляет простой доступ к карманам и поэтому может применяться для лечения всех типов зубов. Наиболее эффективна для удаления зубного камня.



NSK Satelec® модель P10 код заказа Z217-410 • Острая кромка

* Схема поперечного сечения – это изображение точки 1 мм от кончика насадки. Размер насадок на схеме в 4 раза превышает их реальный размер.



P2D Насадка аналогична кюретам Грейси №13/14 и имеет алмазное покрытие. Используется для лечения внешних сторон моляров, а также в зоне разделения корней.



NSK Satelec® модель P2D код заказа Z217-402 • Алмазное покрытие
• С правосторонним изгибом

P3D Насадка аналогична кюретам Грейси №13/14 и имеет алмазное покрытие. Используется для лечения внешних сторон моляров, а также в зоне разделения корней.



NSK Satelec® модель P3D код заказа Z217-403 • Алмазное покрытие
• С левосторонним изгибом

P2D / P3D (Вид сверху)




Satelec® является зарегистрированным товарным знаком компании Acteon SA, Франция.
Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ

(для обработки корневой зоны)

P20 Насадка имеет округлую форму. Используется для обработки поверхности зубов, не вызывая повреждений. Эта тонкая насадка легко проникает в десневые карманы, и поэтому может использоваться для всех типов зубов.

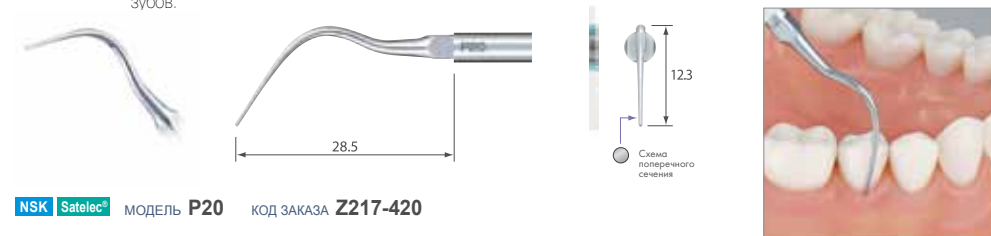

NSK Satelec® модель **P20** код заказа **Z217-420**

EMS® модель **P20-E** код заказа **Z291-420**

P21R Насадка с небольшим изгибом предоставляет простой доступ к смежным поверхностям моляров.



NSK Satelec® модель **P21R** код заказа **Z217-422** • С правосторонним изгибом

EMS® модель **P21R-E** код заказа **Z291-422**

P21L Насадка с небольшим изгибом предоставляет простой доступ к смежным поверхностям моляров.



NSK Satelec® модель **P21L** код заказа **Z217-421** • С левосторонним изгибом

EMS® модель **P21L-E** код заказа **Z291-421**

* Схема поперечного сечения – это изображение точки 1 мм от кончика насадки. Размер насадок на схеме в 4 раза превышает их реальный размер.



P25R Для обработки зоны разделения корней.



NSK Satelec® модель **P25R** код заказа **Z217-424** • С правосторонним изгибом

EMS® модель **P25R-E** код заказа **Z291-424**


P25L Для обработки зоны разделения корней.



NSK Satelec® модель **P25L** код заказа **Z217-425** • С левосторонним изгибом

EMS® модель **P25L-E** код заказа **Z291-425**

P21R / P20 / P21L / P25R / P25L (Вид сверху)

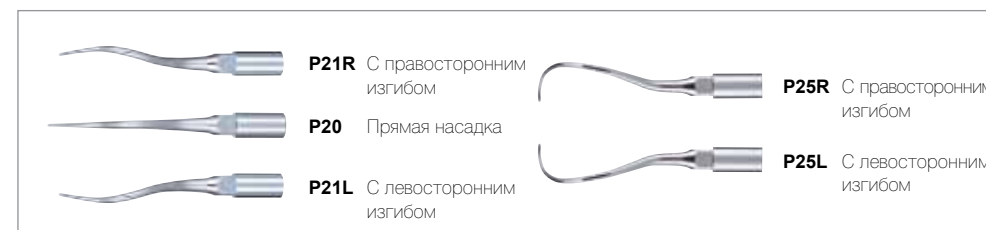

Satelec® является зарегистрированным товарным знаком компании Asteon SA, Франция.


Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ (для промывки и очистки)

Предназначены для эффективной очистки зуба после удаления пораженных тканей или снятия отложений.


*Не применяется для соскабливания.

P40 Безопасна для орошения пародонтальных карманов вне зависимости от их состояния благодаря маркировке 3 мм и 6 мм от кончика насадки.

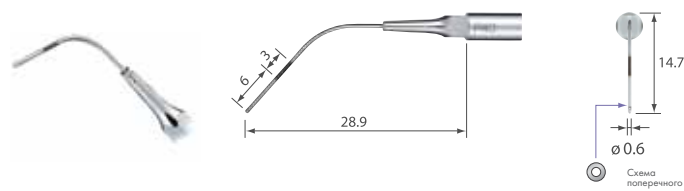

NSK Satelec® модель **P40** код заказа **Z217-550** • Диаметр насадки 0,6 мм

P41

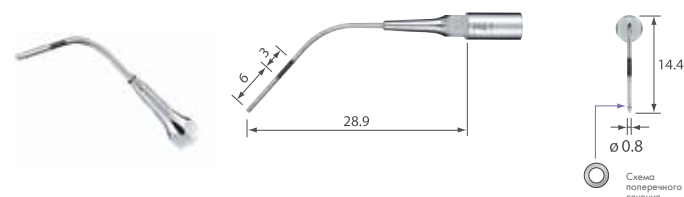

NSK Satelec® модель **P41** код заказа **Z217-555** • Диаметр насадки 0,8 мм

Два отверстия для подачи промывочного раствора



- Промывка из двух отверстий, расположенных на боковой поверхности кончика насадки.
- Эффективная очистка независимо от угла расположения насадки.
- Закругленный кончик для безопасной работы с периодонтом.

* Схема поперечного сечения – это изображение точки 1 мм от кончика насадки. Размер насадок на схеме в 4 раза превышает их реальный размер.

Для ухода за имплантами (V-держатели)



Предназначены для обработки зубных протезов и имплантов. Изготовлены из специального материала, не повреждающего металлические поверхности и импланты.

■ Система с V-держателем ➔ Стр. 36-39

V10



NSK Satelec® модель **V10** код заказа **Z217-041**

- С ключом E типа для замены насадки
- Пластиковая насадка не включена

V-P10



модель **V-P10** код заказа **Y900-184**

- 3 шт. в упаковке
- Автоклавируемые




Satelec® является зарегистрированным товарным знаком компании Asteon SA, Франция.

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ

Набор Perio Kit A

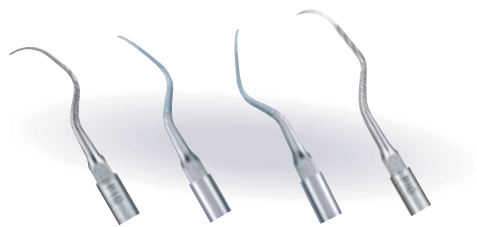

NSK Satelec® модель **Perio Kit A** код заказа **Y900-144**

- P1D, P2D, P3D, P10: по 1 шт. каждого вида
- Держатель для насадок: 1 шт.

Набор Perio Kit B




NSK Satelec® модель **Perio Kit B** код заказа **Y900-145**

- P20, P25R, P25L: по 1 шт. каждого вида
- Держатель для насадок: 1 шт.

Varios Tip Card – карточка контроля степени износа насадки

Насадки для ультразвуковых скалеров стачиваются после многократного использования. Изношенные насадки имеют отличные от новых насадок колебания и работают неэффективно. Для проверки состояния насадки используйте Varios Tip Card.

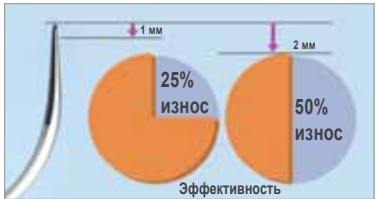

Как использовать Varios Tip Card

1. Разместите основание насадки в отверстии карточки.
2. Проверьте степень износа насадки.
3. Для контроля степени износа обратите внимание на зеленую, желтую и красную метки.

*См. ниже описание значения цвета метки.

Для безопасного и эффективного использования NSK рекомендует менять насадку при достижении желтой маркировки (износ 1 мм).

Зеленая: износа нет – насадка в порядке


Нет необходимости замены насадки

Желтая: износ 1 мм – насадка сточилась

Рекомендуется заменить насадку

Красная: износ 2 мм – насадка полностью изношена

Необходима замена насадки

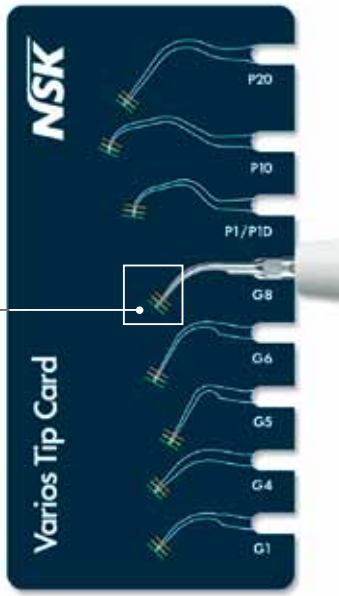

*Карточка контроля степени износа насадок может применяться для контроля следующих насадок: G1, G4, G5, G6, G8, P1/P1D, P10 и P20.

Ключ для замены насадок



Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента

Для насадок G1- G62D, P1- P41, E4, E4D, E30RD, E30LD, E31D, E32D и насадок для V-держателей.

*Насадку необходимо затягивать до щелчка.



Ключ E типа для замены насадок

Для V10 (V-держатель), насадок E5, E6, E7, E7D, E8, E8D, E11, E12 и насадок для V30 (V-держатель).

ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ


Компания NSK производит эндодонтические файлы и насадки, позволяющие быстро и эффективно расширять, промывать и заполнять каналы.



ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ



E4 Применяется для очистки каналов и удаления инородных тел.

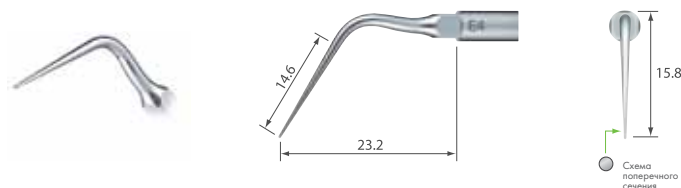

NSK Satelec® модель **E4** код заказа **Z217-428**


E4D Применяется для прочистки и расширения каналов.



NSK Satelec® модель **E4D** код заказа **Z217-528** • Алмазное покрытие

* Для исключения возможности образования уступов в корневых каналах на кончике насадки (1 мм) нет алмазного покрытия.

E7 Для удаления пломбировочного материала и инородных тел.

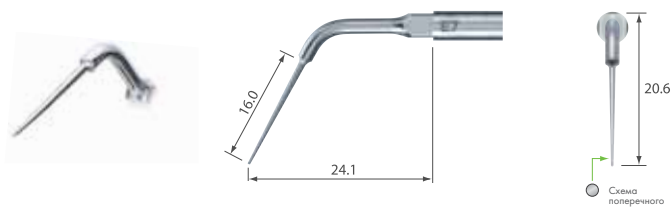

NSK Satelec® модель **E7** код заказа **Z217-307** • Без подачи воды



E7D Для расширения каналов.



NSK Satelec® модель **E7D** код заказа **Z217-317** • Алмазное покрытие



E8 Для удаления пломбировочного материала и инородных тел.



NSK Satelec® модель **E8** код заказа **Z217-308** • Без подачи воды

E8D Для расширения каналов.



NSK Satelec® модель **E8D** код заказа **Z217-318** • Алмазное покрытие

* Для замены насадок E5, E6, E7, E7D, E8, E8D, E11 и E12, пожалуйста, используйте ключ E типа.

* Схема поперечного сечения – это изображение точки 1 мм от кончика насадки. Размер насадок на схеме в 4 раза превышает их реальный размер.

Satelec® является зарегистрированным товарным знаком компании Acteon SA, Франция.

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.

ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ



E5 Для латеральной конденсации.




NSK Satelec® модель **E5** код заказа **Z217-305** • Без подачи воды

E6 Для латеральной конденсации.



NSK Satelec® модель **E6** код заказа **Z217-306** • Без подачи воды


Набор Endo Kit E11 Для передних зубов

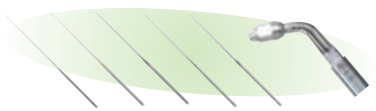

NSK Satelec® модель **Endo Kit E11** код заказа **Y900-146**

- E11: 1 шт. держатель с углом наклона 120° для передних зубов
- Ключ E типа для замены насадок: 1 шт.
- U-файлы 33 мм №15, №20, №25, №30, №35: в упаковке 6 шт. каждого размера


Набор Endo Kit E12 Для жевательных зубов

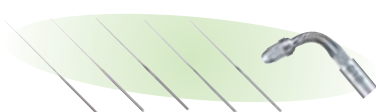

NSK Satelec® модель **Endo Kit E12** код заказа **Y900-147**


- E12: 1 шт. держатель с углом наклона 95° для жевательных зубов
- Ключ E типа для замены насадок: 1 шт.
- U-файлы 33 мм №15, №20, №25, №30, №35: в упаковке 6 шт. каждого размера

E11 Держатель для U-файлов с углом наклона 120°.

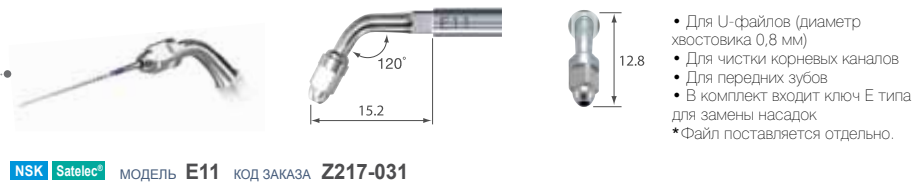

NSK Satelec® модель **E11** код заказа **Z217-031**

E12 Держатель для U-файлов с углом наклона 95°.

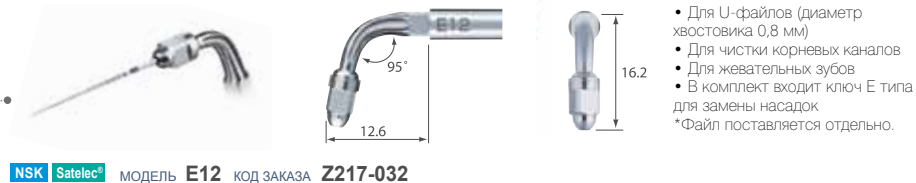

NSK Satelec® модель **E12** код заказа **Z217-032**

U-файлы

Длина: 33 мм
Диаметр хвостовика: 0,8 мм

- ISO15 • Набор из 6 шт.
- ISO20 • Набор из 6 шт.
- ISO25 • Набор из 6 шт.
- ISO30 • Набор из 6 шт.
- ISO35 • Набор из 6 шт.

модель **U-файлы 33 мм / №15** код заказа **Y900-062**

модель **U-файлы 33 мм / №20** код заказа **Y900-063**


модель **U-файлы 33 мм / №25** код заказа **Y900-064**

модель **U-файлы 33 мм / №30** код заказа **Y900-065**

модель **U-файлы 33 мм / №35** код заказа **Y900-066**

Всегда следуйте данной таблице для правильного выбора длины файла во избежание его поломки

	№15	№20	№25	№30	№35
E11	22 мм	24,5 мм	22 мм	22 мм	22 мм
E12	22 мм	24,5 мм	24,5 мм	24,5 мм	22 мм

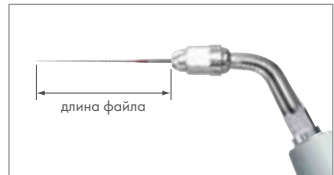

* Для замены насадок E5, E6, E7, E7D, E8, E8D, E11 и E12, пожалуйста, используйте ключ E типа.

* Схема поперечного сечения – это изображение точки 1 мм от кончика насадки. Размер насадок на схеме в 4 раза превышает их реальный размер.


Satelec® является зарегистрированным товарным знаком компании Acteon SA, Франция.

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.

ЭНДОРЕТРОГРАДНЫЕ


Маленькая насадка с алмазным покрытием позволяет эффективно удалять дентин вершины корня зуба. Выпускается два вида угловых насадок (90° и 70°) для передних зубов и два вида закругленных насадок (левосторонняя и правосторонняя) для моляров.

E30RD Алмазное покрытие позволяет проводить эффективную подготовку полости.

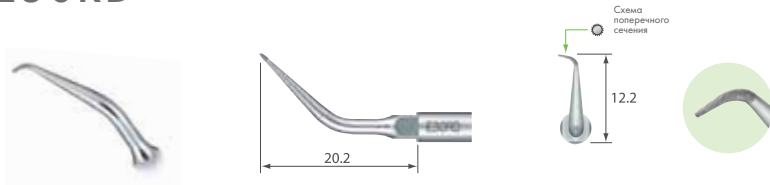

NSK Satelec® модель E30RD код заказа Z217-212 • Алмазное покрытие • Для жевательных зубов (с изгибом вправо)


E30LD Алмазное покрытие позволяет проводить эффективную подготовку полости.

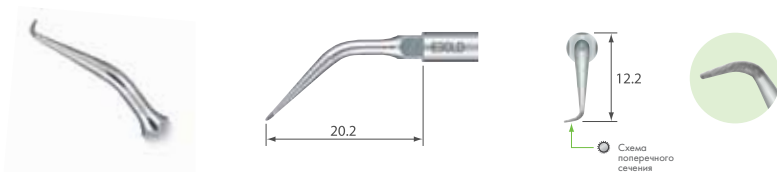

NSK Satelec® модель E30LD код заказа Z217-213 • Алмазное покрытие • Для жевательных зубов (с изгибом влево)




E31D Алмазное покрытие позволяет проводить эффективную подготовку полости.

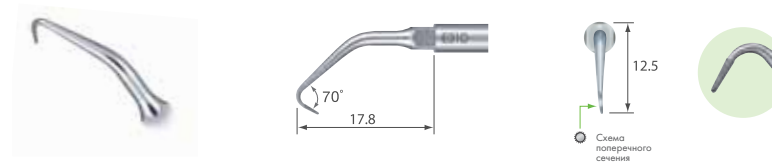


NSK Satelec® модель E31D код заказа Z217-210 • Алмазное покрытие • Для передних и жевательных зубов (70°)

E32D Алмазное покрытие позволяет проводить эффективную подготовку полости.

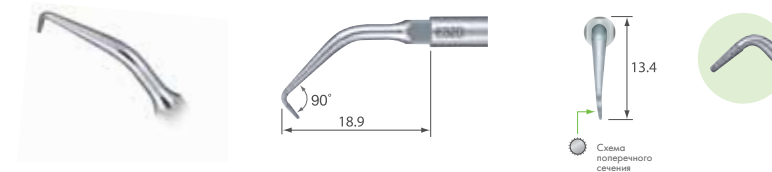

NSK Satelec® модель E32D код заказа Z217-211 • Алмазное покрытие • Для передних зубов (90°)

Набор Retro Kit

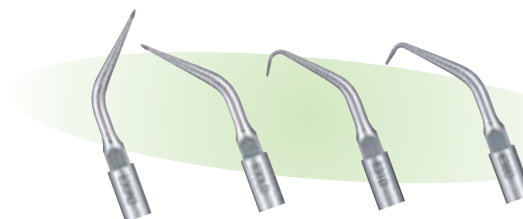

NSK Satelec® модель Набор Retro Kit код заказа Y900-149

- E30RD, E30LD, E31D, E32D: по 1 шт. каждой
- Держатель насадок: 1 шт.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ

Ультразвуковые колебания воздействуют на поверхность зуба. Компактный наконечник идеально подходит для небольшого рта, а также для мест, в которых вращающийся инструмент неудобен для использования. Имеется широкий выбор насадок для удаления кариозной ткани и обработки поверхности зуба.



РЕСТАВРАЦИОННЫЕ



G61D Насадка со сферическим кончиком с алмазным покрытием. Минимальная вероятность повреждения мягких тканей. (G61D / G62D)



NSK Satelec® модель **G61D** код заказа **Z217-601** • Алмазное покрытие

G62D



NSK Satelec® модель **G62D** код заказа **Z217-602** • Алмазное покрытие

ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ


Насадки для удаления протезов, уплотнения амальгамных пломб, а также для снятия зубного камня, пародонтологического и эндодонтического применения.



ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Уплотнение / Разрыхление / Пломбирование

G21 Для уплотнения пломбировочных материалов при установке вкладок пломб на передних зубах.

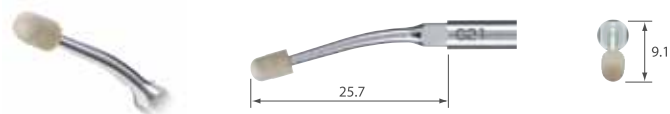

NSK Satelec® модель **G21** код заказа **Z217-010**

- Для передних зубов
- Без подачи воды
- В комплект входят 3 колпачка

G22 Для уплотнения пломбировочных материалов при установке накладок и коронок на жевательные зубы.



NSK Satelec® модель **G22** код заказа **Z217-020**

- Для жевательных зубов
- Без подачи воды
- В комплект входят 3 колпачка



Колпачок




модель **Колпачок** код заказа **Y140-751**

- Для G21/G22
- 10 шт. в упаковке
- Автоклавируемые



G25 Для снятия коронок (диаметр 1,65 мм).

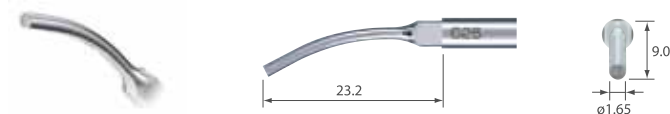


NSK Satelec® модель **G25** код заказа **Z217-205**


- Без подачи воды



G26 Для удаления штифтов (диаметр 1,3 мм).

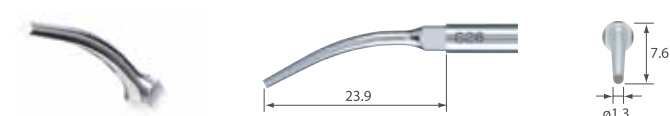

NSK Satelec® модель **G26** код заказа **Z217-206**

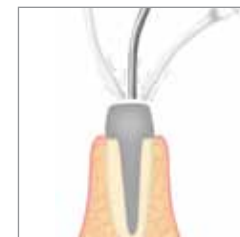

G28 Для уплотнения амальгам.



NSK Satelec® модель **G28** код заказа **Z217-208**

- Без подачи воды



Satelec® является зарегистрированным товарным знаком компании Asteon SA, Франция.

Следуйте руководству по выбору режима мощности на стр. 48-49.

V-TIP SYSTEM

Система с V-держателем от NSK уникальна. Насадка имеет сменную рабочую часть, благодаря чему она может использоваться для различных видов лечения, например, для расширения, создания формы и чистки корневого канала, удаления сломанных файлов и определения корневых каналов. Данная система очень экономична, так как Вы всегда можете заменить изношенную часть.



V-TIP SYSTEM




Система с V-держателем от NSK является инновационной, многофункциональной и экономичной. V-держатель – это отдельный от рабочей части насадки элемент. Рабочая часть насадки может быть легко заменена без особых затрат. Система с V-держателем от компании NSK обеспечивает гибкость и широкий спектр применения, отвечая всем требованиям различных клинических процедур.

3 основные характеристики

Безопасность

- Минимальное повреждение мягких тканей
- Минимальный риск кровотечения
- Препарирование ткани ультразвуковыми системами – минимально инвазивное

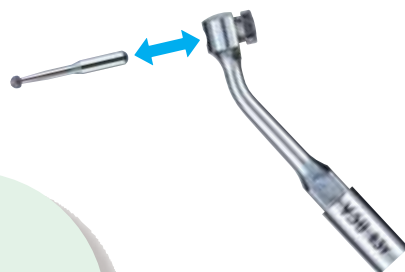

Экономичность

- Одна насадка со сменной рабочей частью
- Недорогая рабочая часть

Удобство использования

- Маленький размер насадки гарантирует прекрасный обзор
- Маленький размер обеспечивает лучший доступ к труднодоступным сторонам моляров и щеки
- Одна насадка используется для проведения всего спектра клинических процедур

Модельный ряд насадок для V-держателя

■ Удаление пришеечного кариеса




■ Удаление кариеса со смежных поверхностей




■ Расширение корневого канала




■ Удаление кариеса

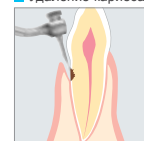

■ Чистка корневого канала

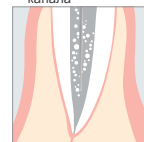

■ Извлечение сломанных инструментов

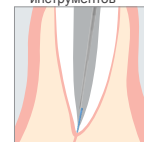

Реставрационные Стр. 42-46

- Для минимального вмешательства
- Окончательная обработка / Шлифовка / Полировка
- Для препарирования дентина



Эндодонтические Стр. 40-41

- Для чистки корневых каналов
- Для расширения корневых каналов




V30

С углом наклона 120°

■ Уход за имплантами



■ Уход за имплантами

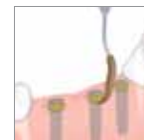

■ Чистка поверхности тела мостовидного протеза



Для ухода за имплантами Стр. 17

- Для ухода за протезами и имплантами




V10

Прямой



Для чистки корневого канала

V-S50

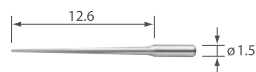

МОДЕЛЬ **V-S50** КОД ЗАКАЗА **Y900-169**

- Для чистки корневого канала 17 мм
- Набор из 3 шт.

V-S51



МОДЕЛЬ **V-S51** КОД ЗАКАЗА **Y900-170**

- Для чистки корневого канала 23 мм
- Набор из 3 шт.

V-S52



МОДЕЛЬ **V-S52** КОД ЗАКАЗА **Y900-171**

- Для чистки корневого канала 26 мм
- Набор из 3 шт.

V-S53



МОДЕЛЬ **V-S53** КОД ЗАКАЗА **Y900-172**

- Для чистки корневого канала 32 мм
- Набор из 3 шт.

V30



NSK Satelec® МОДЕЛЬ **V30** КОД ЗАКАЗА **Z217-030**

- С ключом E типа для замены насадок
- *Насадка приобретается отдельно.

Для расширения корневого канала

V-S50D



МОДЕЛЬ **V-S50D** КОД ЗАКАЗА **Y900-173**

- Алмазное покрытие
- Для расширения корневого канала 17 мм
- Набор из 3 шт.


V-S51D



МОДЕЛЬ **V-S51D** КОД ЗАКАЗА **Y900-174**

- Алмазное покрытие
- Для расширения корневого канала 23 мм
- Набор из 3 шт.


V-S52D

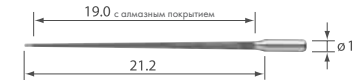

МОДЕЛЬ **V-S52D** КОД ЗАКАЗА **Y900-175**


- Алмазное покрытие
- Для расширения корневого канала 26 мм
- Набор из 3 шт.

V-S53D

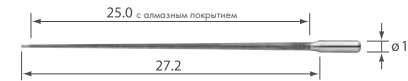


МОДЕЛЬ **V-S53D** КОД ЗАКАЗА **Y900-176**

- Алмазное покрытие
- Для расширения корневого канала 32 мм
- Набор из 3 шт.

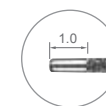

* Для исключения возможности образования уступов в корневых каналах на кончике насадки (1 мм) нет алмазного покрытия.

V30

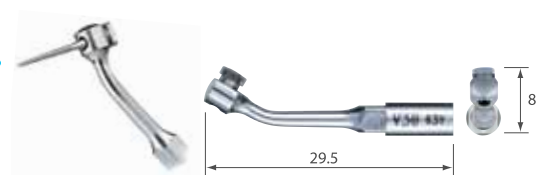

NSK Satelec® МОДЕЛЬ **V30** КОД ЗАКАЗА **Z217-030**

- С ключом E типа для замены насадок
- *Насадка приобретается отдельно.

V-TIP SYSTEM (реставрационные)




Благодаря ультразвуковым колебаниям движения насадки точно удаляют только поврежденную часть дентина и не оказывают воздействия на здоровую часть.

Лечение цервикального кариеса проходит с минимальным кровотечением, восстановительный период сокращается.

Для минимального вмешательства


V-G70

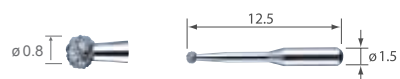

МОДЕЛЬ **V-G70** КОД ЗАКАЗА **Y900-118**

- Алмазное покрытие
- Набор из 3 шт.


V-G71

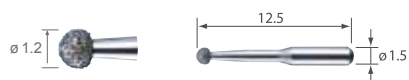

МОДЕЛЬ **V-G71** КОД ЗАКАЗА **Y900-119**

- Алмазное покрытие
- Набор из 3 шт.

V-G72

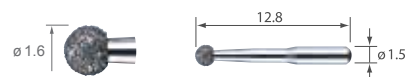

МОДЕЛЬ **V-G72** КОД ЗАКАЗА **Y900-120**

- Алмазное покрытие
- Набор из 3 шт.

V30




NSK Satelec® МОДЕЛЬ **V30** КОД ЗАКАЗА **Z217-030**

- С ключом E типа для замены насадок
- *Насадка приобретается отдельно.



Для минимального вмешательства


V-G75

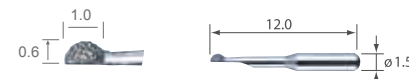

МОДЕЛЬ **V-G75** КОД ЗАКАЗА **Y900-121**

- Алмазное покрытие
- Набор из 3 шт.

V-G76

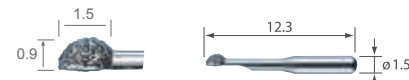

МОДЕЛЬ **V-G76** КОД ЗАКАЗА **Y900-122**

- Алмазное покрытие
- Набор из 3 шт.

V30



NSK Satelec® МОДЕЛЬ **V30** КОД ЗАКАЗА **Z217-030**

- С ключом E типа для замены насадок
- *Насадка приобретается отдельно.



V-TIP SYSTEM (реставрационные)




Система с V-держателем от NSK разработана с целью проведения минимально инвазивных стоматологических процедур. Насадки Varíos с V-держателем являются альтернативой вращающимся режущим инструментам благодаря точной и эффективной обработке поверхности с помощью ультразвуковых колебаний.



Для окончательной обработки / Шлифовки / Полировки

V-G77

Со стандартной алмазной крошкой

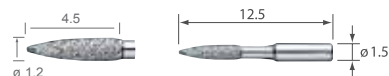

МОДЕЛЬ **V-G77** КОД ЗАКАЗА **Y900-165**

- Алмазное покрытие
- Набор из 3 шт.

V-G78

С мелкой алмазной крошкой



МОДЕЛЬ **V-G78** КОД ЗАКАЗА **Y900-166**

- Алмазное покрытие
- Набор из 3 шт.

V-G79

С очень мелкой алмазной крошкой



МОДЕЛЬ **V-G79** КОД ЗАКАЗА **Y900-167**

- Алмазное покрытие
- Набор из 3 шт.

V30




NSK Satelec® МОДЕЛЬ **V30** КОД ЗАКАЗА **Z217-030**

- С ключом E типа для замены насадок
- *Насадка приобретается отдельно.

Для удаления кариозной ткани


V-S1

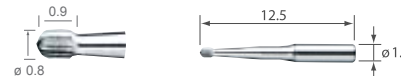

МОДЕЛЬ **V-S1** КОД ЗАКАЗА **Y900-161**

- Насадка из нержавеющей стали
- Набор из 3 шт.


V-S3

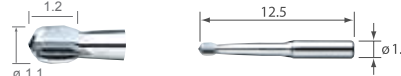

МОДЕЛЬ **V-S3** КОД ЗАКАЗА **Y900-162**

- Насадка из нержавеющей стали
- Набор из 3 шт.

V-S33

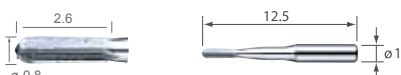

МОДЕЛЬ **V-S33** КОД ЗАКАЗА **Y900-163**

- Насадка из нержавеющей стали
- Набор из 3 шт.

V30



NSK Satelec® МОДЕЛЬ **V30** КОД ЗАКАЗА **Z217-030**

- С ключом E типа для замены насадок
- *Насадка приобретается отдельно.

V-TIP SYSTEM (реставрационные)




Набор Assorted Tip Kit (для минимального вмешательства)



МОДЕЛЬ **Набор Assorted Tip Kit** КОД ЗАКАЗА **Y900-158**

- V-G70, V-G71, V-G72, V-G75, V-G76: по 1 шт. каждого вида


Набор Assorted Tip Kit (для окончательной обработки / шлифовки / полировки)

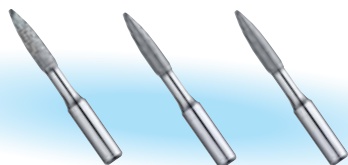

МОДЕЛЬ **Набор Assorted Tip Kit** КОД ЗАКАЗА **Y900-168**

- V-G77, V-G78, V-G79: по 1 шт. каждого вида

Набор Assorted Tip Kit (для удаления кариозной ткани)

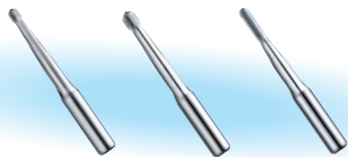

МОДЕЛЬ **Набор Assorted Tip Kit** КОД ЗАКАЗА **Y900-164**

- V-S1, V-S3, V-S33: по 1 шт. каждого вида

Руководство по выбору режима мощности

В соответствии с клинической задачей

Пожалуйста, выбирайте правильное значение мощности для каждой насадки и не превышайте его. Уровень установленной мощности не должен превышать указанные в таблице значения.

МОДЕЛЬ	NSK		Satelec®	EMS®
	Varios2	Vários	P-Max XS P5 XS	Piezon Master 600 (miniMaster)
для удаления зубных отложений				
G1	Ⓔ 7	Ⓔ 3	15	Ⓟ 6
G2	Ⓔ 7	Ⓔ Max	15	Ⓟ 6
G3	Ⓔ 7	Ⓔ 3	15	Ⓟ 3
G4	Ⓔ 5	Ⓔ 3	15	Ⓟ 3
G5	Ⓔ 6	Ⓔ 3	15	—
G6	Ⓔ 5	Ⓔ 1	15	Ⓟ 6
G8	Ⓔ 7	Ⓔ 3	15	—
G11	Ⓔ 6	Ⓔ 3	15	—
G12	Ⓔ 7	Ⓔ 3	15	—
G13	Ⓔ 6	Ⓔ 3	15	—
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ				
P1	Ⓟ 6	Ⓟ 2	5	—
P1D	Ⓟ 10	Ⓟ 2	5	—
P2D	Ⓟ 8	Ⓟ 4	5	—
P3D	Ⓟ 8	Ⓟ 4	5	—
P10	Ⓟ 10	Ⓟ Max	5	—
P20	Ⓟ 8	Ⓟ 4	5	Ⓟ 6
P21R	Ⓟ 8	Ⓟ 4	5	Ⓟ 6
P21L	Ⓟ 8	Ⓟ 4	5	Ⓟ 6
P25R	Ⓟ 10	Ⓟ 4	5	Ⓟ 6
P25L	Ⓟ 10	Ⓟ 4	5	Ⓟ 6

МОДЕЛЬ	NSK		Satelec®	EMS®
	Varios2	Vários	P-Max XS P5 XS	Piezon Master 600 (miniMaster)
P40	Ⓟ 3	Ⓟ 1	5	—
P41	Ⓟ 3	Ⓟ 1	5	—
V-P10	Ⓟ 6	Ⓟ 3	5	—
ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ				
E4	Ⓔ 6	Ⓔ 3	10	—
E4D	Ⓔ 7	Ⓔ 3	10	—
E5	Ⓔ 10	Ⓔ 3	10	—
E6	Ⓔ 10	Ⓔ 4	10	—
E7	Ⓔ 6	Ⓔ Max	10	—
E7D	Ⓔ 6	Ⓔ Max	10	—
E8	Ⓔ 2	Ⓔ 4	10	—
E8D	Ⓔ 2	Ⓔ 4	10	—
E11	Ⓔ 4	Ⓔ 3	10	—
E12	Ⓔ 3	Ⓔ 3	10	—
E30RD	Ⓔ 6	Ⓔ 3	10	—
E30LD	Ⓔ 6	Ⓔ 3	10	—
E31D	Ⓔ 6	Ⓔ 3	10	—
E32D	Ⓔ 6	Ⓔ 3	10	—
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ				
G61D	Ⓔ 2	Ⓔ 2	15	—
G62D	Ⓔ 2	Ⓔ 3	15	—