

«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «НЬЮМЕД»



В. Шитова

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Инструменты стоматологические многоповерхностного воздействия
зажимные: микрометр, кронциркуль, цапки для белья, пинцеты,
зажимы и иглодержатели хирургические.**

2009 год

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору
www.goszdravnadzor.ru

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструменты стоматологические многоповерхностного воздействия зажимные: микрометр, кронциркуль, цапки для белья, пинцеты, зажимы и иглодержатели хирургические

Пожалуйста, подробно прочитайте это руководство по применению перед применением продукта.

1. Описание:

Инструменты стоматологические многоповерхностного воздействия зажимные включают: микрометр, кронциркуль, цапки для белья, пинцеты, зажимы и иглодержатели хирургические.

Все инструменты изготовлены из специальной хирургической нержавеющей стали. Подвергаются многократной дезинфекционной обработке – химической, термической, под давлением.

2. Область применения.

Применяются в хирургической стоматологии. Предназначены для проведения различных манипуляций в полости рта и вне её, а именно:

- Микрометр, кронциркуль служат для проведения всех необходимых измерений при имплантации и планировании ортопедических конструкций.
- Цапки для белья необходимы для фиксации белья при ограждении операционного поля.
- Пинцеты и зажимы необходимы для зажима, фиксации, переноса, переворачивания и прочих манипуляций с тканями организма и предметов не органического происхождения в полости рта и вне её.
- Иглодержатели хирургические применяются для удержания и проведения иглы хирургической через ткани организма.

3. Подготовка к стерилизации и стерилизация.

Перед стерилизацией инструменты, имеющие взаимно трущиеся поверхности должны быть смазаны. Никакие индустриальные масла не должны использоваться. Инструментарий должен быть упакован поодиночке в соответствующую одноразовую упаковку или в наборы на специальных лотках из нержавеющей стали. Более тяжелые инструменты должны располагаться в нижней части (на дне). Инструменты нужно всегда стерилизовать в нерабочем (незафиксированном) положении.

Стерилизация в заблокированном положении может вести к трещинам на инструментах.

При использовании химических дезинфицирующих средств необходимо строго придерживаться инструкции, указанной производителем!

Нужная концентрация раствора должна соответствовать инструкции.

Инструменты должны быть погружены в раствор только после полного растворения концентрата. Температура раствора должна быть не выше 25°C.

Обратите внимание на режим иммерсионного времени. Нельзя оставлять инструменты в растворе на более долгий срок, чем указано в инструкции (**не оставлять инструменты в растворе на ночь!**).

В случае ручной чистки не используйте твердые грубые поверхности или металлические щетки, т.к. может нарушиться поверхность инструмента, что приведет к увеличению риска ржавчины.

При использовании ультразвукового устройства очистки выбирайте соответствующий, неагрессивный режим и обратите внимание на продолжительность очистки.

Осторожно! Химикалии, содержащие кислоты, могут разрушить новые инструменты.

4. Хранение и срок годности.

Инструменты стоматологические зажимные не требуют специальных условий хранения и не имеют срока годности.

Генеральный директор

ООО «Ньюмед»

«14» 06 2009 года




Ильина

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru

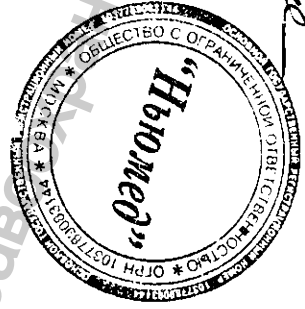

Лен. гур.
Митяев