

Руководство по применению.

Инструменты стоматологические извлекающие: Элеваторы, экскаваторы, люксаторы, скейлеры и кюреты пародонтологические, щипцы для удаления зубов, кусачки костные, ложка кюретажная, долото хирургическое, периотом.

Пожалуйста, подробно прочитайте это руководство по применению перед применением продукта.

1. Описание.

Инструменты стоматологические извлекающие включают: щипцы для удаления, элеваторы, экскаваторы, периотом, долото хирургическое, кусачки костные, ложку кюретажную, скейлеры и кюреты пародонтологические.

Все инструменты изготовлены из специальной хирургической нержавеющей стали. Подвергаются многократной дезинфекционной обработке – химической, термической, под давлением.

2. Область применения.

Применяются в хирургической стоматологии. Предназначены для проведения различных манипуляций в полости рта, а именно:

- Щипцы для удаления, элеваторы, экскаваторы, периотом, долото хирургическое – применяются для удаления зубов, корней, остаточных фрагментов.
- Кусачки костные - применяются для удаления фрагментов кости.
- Ложка кюретажная – применяется для механической обработки костной альвеолы.
- Скейлеры и кюреты пародонтологические применяются для механической обработки корней зубов и пародонтологических карманов.

Инструменты во время операции должны использоваться исключительно по своему прямому назначению.

Смешанное использование инструмента приведет к повреждениям, которые, как правило, не исправимы.

3. Подготовка к стерилизации и стерилизация.

Перед стерилизацией инструменты, имеющие взаимно трущиеся поверхности (щипцы, кусачки и т. п.) должны быть смазаны. Никакие индустриальные масла не должны использоваться. Приборы для стерилизации должны быть упакованы поодиночке в соответствующую одноразовую упаковку или в наборы на специальных лотках из нержавеющей стали.

Более тяжелые инструменты должны располагаться в нижней части (на дне). Инструменты нужно всегда стерилизовать в нерабочем (незафиксированном) положении.

Стерилизация в заблокированном положении может вести к трещинам на инструментах.

При использовании химических дезинфицирующих средств необходимо строго придерживаться инструкции, указанной производителем!

Правильная концентрация раствора должна соответствовать инструкции. Инструменты должны быть погружены в раствор только после полного растворения концентрата. Температура раствора должна быть не выше 25°C.

Обратите внимание на режим иммерсионного времени. Нельзя оставлять инструменты в растворе на более долгий срок, чем указано в инструкции (**не оставлять инструменты в растворе на ночь!**).

В случае ручной чистки не используйте твердые грубые поверхности или металлические щетки, т.к. может нарушиться поверхность инструмента, что приведет к увеличению риска ржавчины.

При использовании ультразвукового устройства очистки выбирайте соответствующий, неагрессивный режим и обратите внимание на продолжительность очистки.

Осторожно! Химикалии, содержащие кислоты, могут разрушить новые инструменты.

4. Хранение и срок годности.

Инструменты стоматологические извлекающие не требуют специальных условий хранения и не имеют срока годности.

Генеральный директор

ООО «Ньюмед»

« 14 » 06 2009 года



И.В. Шитова

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnas.gov.ru