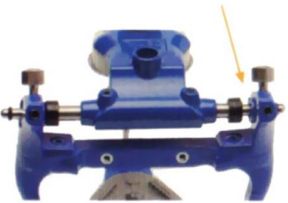
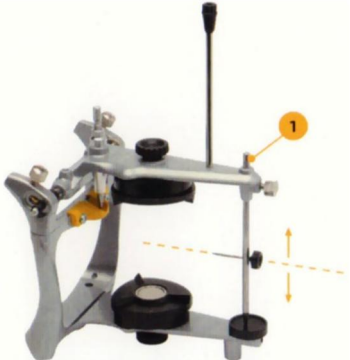
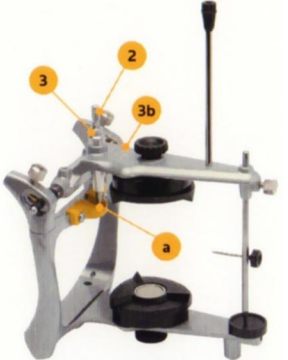





Инструкции по системе анти-шок 5030 – 5032

			
1 - Новый артикулятор ASA Dental оснащен системой анти-шок, предохраняющей шарнирную ось от поломки при падении артикулятора	2 - Шарнирная ось поглощает удар, смещаясь внутрь.	3 - Чтобы вернуть шарнирную ось в исходное положение, достаточно открутить фиксирующий винт специальным ключом (идет в комплекте).	4 - После проверки исходного положения шарнирной оси, снова закрутите винт.

Инструкция по использованию заднего дублирующего резового штифта артикулятора 5032

			
Зафиксируйте резовый штифт на нужной рабочей высоте.	Выворачивайте задний штифт (а) с помощью регулировочного винта (2). Зафиксируйте конечное положение стопорным винтом (3) и фиксирующим винтом (3b).	Снимите резовый штифт и приступайте к таким операциям, как постановка или моделирование фронтальной группы зубов.	Можно работать одновременно с обоими штифтами, используя резовый штифт в качестве дополнительного упора (4 и 5).

Инструкции по воспроизведению движений в вертикальной плоскости 5032

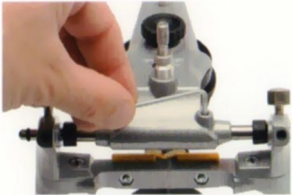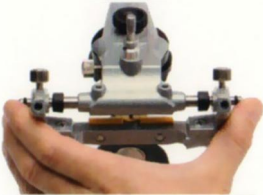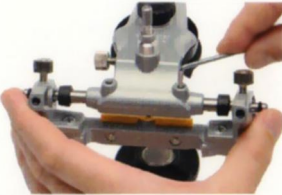			
Ослабьте фиксирующие винты с внутренним шестигранником на шарнирной оси, повернув специальный ключ (идет в комплекте) против часовой стрелки.	Одновременно большим и средним пальцем руки нажмите на противоположные концы шарнирной оси по направлению к центру.	Затяните по часовой стрелке фиксирующие винты с внутренним шестигранником, не отпуская концы шарнирной оси.	Перед началом данной операции, снимите задний дублирующий резцовый штифт.

	
Теперь верхняя часть артикулятора может выполнять движения только в вертикальной плоскости.	Чтобы вернуть артикулятор в исходное положение, ослабьте винт с внутренним шестигранником, чтобы шарнирная ось вернулась в исходное положение. Эта операция выполняется с помощью внутренней пружины; однако обратите внимание: 1 - Черные шайбы шарнирной оси должны быть расположены как можно ближе к внутренней мыщелковой стороне. 2 - Конец заднего резцового штифта перед закреплением шестигранных винтов должен располагаться точно посередине.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	5030	5032
Межмышцелковое расстояние	120 мм	120 мм
Суставной угол	30	30
Угол Беннета	7	7
Угол наклона резцовой тарелки (столика)	10	10
Расстояние между монтажными пластинами	90 – 110 мм	90 – 110 мм
Вес	650 г	700 г
Открытие	180	180

Аса Дентал С.п.А.

Via Valenzana di Sopra, 60 - Bozzano - 55054 Massarosa (Lu) - Италия
Тел. +39 0584 938305 - 93363 - 938306 - факс +39 0584 937167
asadental@asadental.it - www.asadental.it - www.asadental.com