






**Регистрация
Установка в артикулятор**

Руководство по эксплуатации





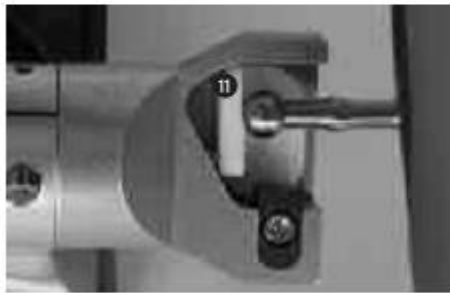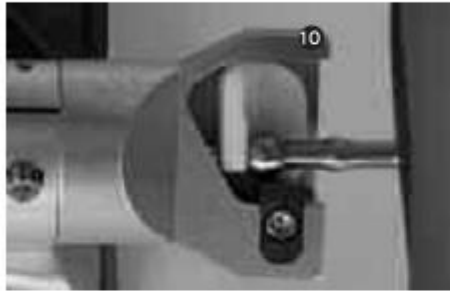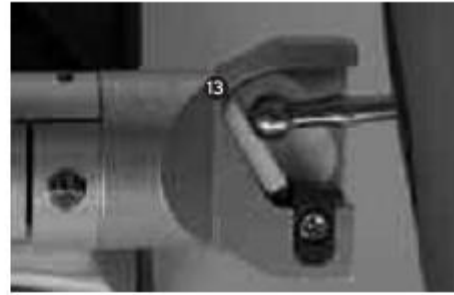

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АРТИКУЛЯТОР ARTEX® CP

ЦЕНТРАТОР ОТКРЫТ

Поднимите поворотный рычаг **(2)** до упора, перемещая центрирующие оси (2 полуоси) и, таким образом, высвобождая центратор.

Центратор открыт **(3)**. Фиксатор мыщелков высвобожден. Верхняя часть может беспрепятственно перемещаться.

ЦЕНТРАТОР ЗАКРЫТ

Переместите поворотный рычаг **(4)** вниз до упора. Две полуоси направляются наружу до мягкой остановки относительно центра мыщелка, фиксируя верхнюю секцию артикулятора Artex в центральном положении. Центратор закрыт. Видимая фиксация по центру мыщелка по полуоси. 2 Опора в наклонном положении.

Центратор закрыт **(5)**. Видимая фиксация по центру мыщелка по полуоси.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА БЕННЕТА

Откройте центратор **(6)**. Ослабьте фиксирующий винт угла Беннета с помощью шестигранного ключа. Отрегулируйте мыщелковое устройство с помощью поворотной кнопки от -5° до $+30^{\circ}$.

Рис.: Угол Беннета = 0° .

Поворачивайте угол Беннета **(7)** до требуемого значения по шкале с помощью поворотной кнопки, затем зафиксируйте, используя шестигранный ключ.

Рис.: Угол Беннета = 30° .

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА МЫЩЕЛКОВОГО ПУТИ

Ослабьте установочный винт наклона (НСІ) мыщелкового пути **(8)** с помощью шестигранного ключа. Установите требуемый угол, повернув мыщелковую камеру, затем зафиксируйте установочный винт НСІ с помощью шестигранного ключа.

Регулировка **(9)** НСІ от -20° до $+60^{\circ}$.

Считайте значение угла наклона на передней кромке задней секции (в соответствии со шкалой).

Рис.: НСІ = $+60^{\circ}$.

ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Мыщелки в центральном положении и в процессе перемещения с различными углами Беннета (вид с внутренней стороны мыщелковой камеры)

Внимание

Перемещения в артикуляторах Argon должны выполняться при непрерывном контакте мыщелков (нижняя часть артикулятора) с мыщелковой камерой (верхняя часть артикулятора). Они могут воспроизводиться только таким образом.

(10) Угол Беннета устанавливается на 0° . Мыщелки в центральном положении = исходное положение для перемещения.

(11) Угол Беннетта устанавливается на 0° . Мыщелок находится в постоянном контакте с мыщелковой камерой по всем трем направлениям. Мыщелок не должен терять контакт с углублением, ни в краниальном, ни в мезиальном направлении.

(12) Угол Беннетта устанавливается на 30° . Мыщелок в центральном положении = исходное положение для перемещения.

(13) Угол Беннетта устанавливается на 30° . Мыщелок находится в постоянном контакте с мыщелковой камерой по всем трем направлениям.

НЕЗАВИСИМЫЙ ШТИФТ/ЦЕНТР ОСИ

Верхнечелюстное черепное/осевое перемещение челюсти может осуществляться непосредственно на артикуляторе путем адаптации лицевой дуги. Независимый штифт (14) (который воспроизводит положение ушного отверстия/отверстия ушных опорных элементов) и ось означают, что точка может использоваться в качестве опорной.

ДИСТРАКЦИЯ

Ослабьте винт с передней стороны. (15) Установите дистракцию на необходимое значение (0-3 мм) и зафиксируйте с помощью винта (16).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Анатомическое переднее ведение

Угол протрузионного пути = 40° ; при боковом перемещении угол варьируется от 30 до 40° в зависимости от предварительно установленного угла Беннета

Общая информация

Артикуляторы являются прецизионными измерительными инструментами. Поэтому обращаться с ними нужно осторожно.

Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими указаниями:

Запрещается помещать артикулятор в устройства для кипячения, нагнетательные баки или ультразвуковые ванны.

В процессе очистки и ухода используйте только чистящие средства, подходящие для легких металлов.

В том, что касается использования моющего средства, пожалуйста, следуйте инструкциям производителя. Запрещается использовать очищающие средства с уровнем pH <5 или >8 , так как это может повредить анодированные поверхности.



Made in the European Union



Производитель
Дистрибьютор

Amann Girrbach AG
Герршафтсвизен 1
6842 Коблах, Австрия
Тел. +43 5523 62333-0
Факс +43 5523 55990

Дистрибьютор

Amann Girrbach GmbH
Дюрренверг 40
75177 Пфорцхайм, Германия
Тел. +49 7231 957-100
Факс +49 7231 957-159

austria@amanngirrbach.com
germany@amanngirrbach.com

www.amanngirrbach.com



AMANNGIRRBACH