

Устранение проблем

Блокировка подачи порошка

- 1 Удалите затвердевший порошок с помощью чистящих игл.

Носик наконечника



Наконечник




Внутренние носики



⚠ Применение чрезмерной силы может повредить чистящую иглу

- 2 Произведите ультразвуковую чистку и автоклавирувание после удаления затвердевшего порошка.

Утечка воды

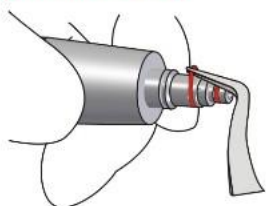

Замените O-образное кольцо на месте соединения наконечника с насадкой, смажьте соединение каплей масла для наконечников и равномерно распределите его.

⚠ Внимание

- Основные способы обслуживания после каждого применения описаны в Кратком руководстве по эксплуатации.
- Храните руководство в доступном месте для обращения к ней в любое время.
- Во избежание засора устройства помещайте его полностью в ультразвуковую ванну раз в неделю.

Наконечник «АЭРФЛО»

Краткое руководство

Наименование детали



⚠ Перед использованием




Перед использованием тщательно просушите соединение, насадку наконечника, кабельный разъем, резервуар для порошка с внутренней части, а также крышку резервуара с внутренней стороны.






Внимание

- Требуется очистка и регулярное обслуживание наконечника «аэрфло» после использования (Пренебрежение очисткой и обслуживанием может привести к засору порошкового отверстия, утечке воды, и т. д.)
- Если очищающий порошок остается в резервуаре, то он может затвердеть и закупорить отверстия.
- Перед использованием тщательно просушите соединение, насадку наконечника, кабельный разъем, резервуар для порошка с внутренней части, и носик. Также включите холостой поток воздуха для просушки внутренних компонентов.
- Раз в неделю производите очистку устройства целиком в ультразвуковой ванне.


1 Удаление чистящего порошка

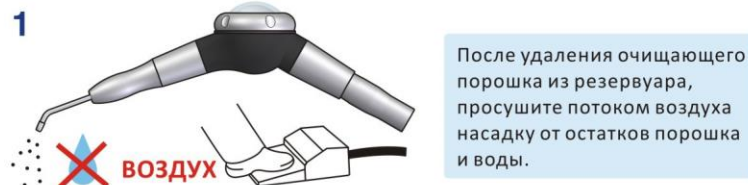

2 Очистка

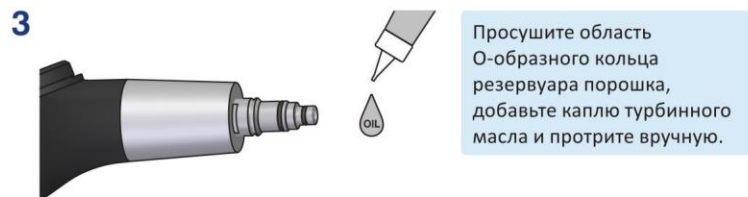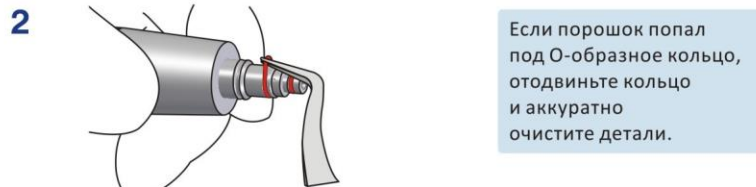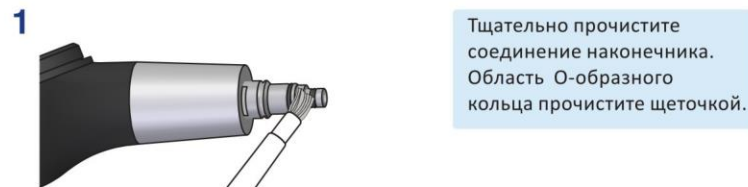

В случае пренебрежения рекомендацией носик наконечника и пескоструйный наконечник не будут исправно работать, соединение начнет протекать.

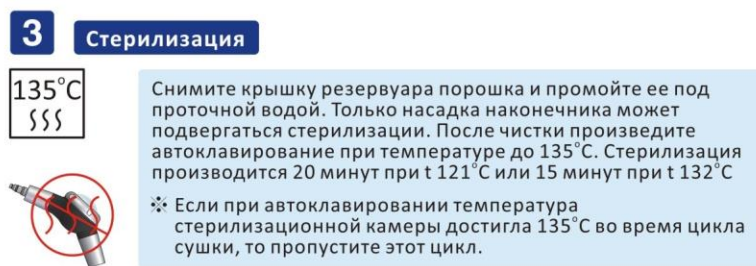

Ультразвуковая чистка

Выполняйте данную процедуру раз в неделю и после устранения проблем.

Удалите чистящий порошок и очистите по необходимости перед ультразвуковой чисткой.



Промойте под проточной водой.



Наполните ультразвуковую мойку горячей водой.



Рекомендованная температура воды для ультразвуковой очистки 50-70°C.