



altena lux®

СТОМАРТ
DENTAL SOLUTIONS

Светильник потолочный MAGIC



Рис. 1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Флуоресцентная лампа FL T26 (G13) - 4 шт.
- Корпус светильника
- Комплект крепежных деталей (рис. 2):
 - 2 колпачка (A1) с системой крепления (A2, A3, A4);
 - 2 узла для потолочного крепления и регулировки по высоте от пола (B1, B2, B3);
 - 2 Y-образных проволоки со сферическими окончаниями для потолочного крепления (C);
 - штепсельный разъем для электрического подключения (D).

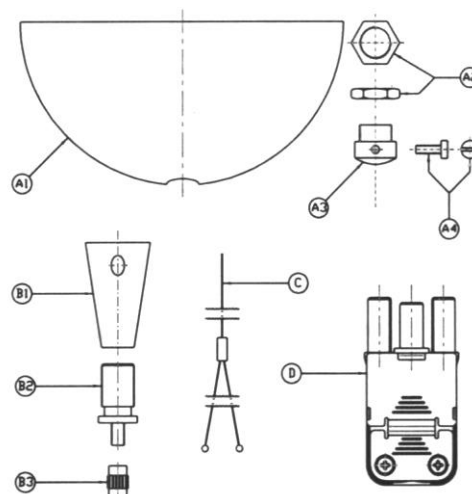


Рис. 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светильник потолочный	MAGIC
Код	341
Напряжение сети	~ 220 – 240 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	232 Вт
Источник света	флуоресцентные лампы FL T26 (G13)
Мощность ламп	4 x 58 Вт
Общий световой поток	19100 люмен
Тепловая температура (CRI)	2 x 6500K (IRC94) 2 x 5400K (IRC86)
Размеры	1550 мм x 600 мм x 215 мм
Вес	11 кг
Устройство	класса 1, тип BF
Степень защиты от влаги	IP20

Изделие соответствует стандартам EN 60598 – I: 05; EN 60598 – 2 – 1:97; EN 60598 – 2 – 22:99 и директивам 72/723 CEE – 93/68 CEE – 89/336



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Светильники ATENA LUX со знаком CE соответствуют стандартам безопасности. Тем не менее, производитель рекомендует следовать приведенным ниже инструкциям. Блок питания на 230 В переменного тока является очень опасным: любое вмешательство с целью установки или технического обслуживания необходимо производить после отсоединения от сети, и только квалифицированным персоналом. Кабель питания должен иметь двойную изоляцию. Необходимо с осторожностью обращаться с флуоресцентными лампами, так как при повреждении они могут нанести серьезные раны. Запрещается вносить изменения в прибор. ATENA LUX снимает с себя всякую ответственность за ущерб, причиненный модифицированными приборами.



Для проведения работ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧЬТЕ ВСЮ СЕТЬ; не используйте обычные выключатели.

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

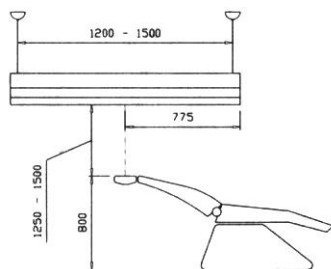


Рис. 3

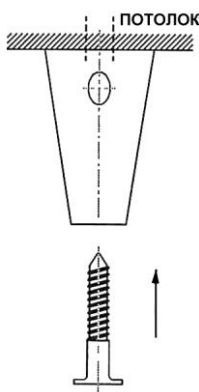


Рис. 4

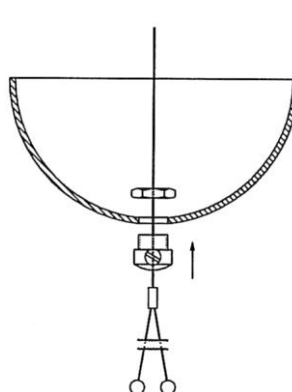


Рис. 5

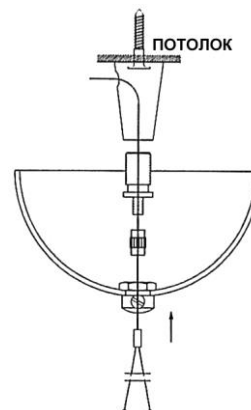


Рис. 6

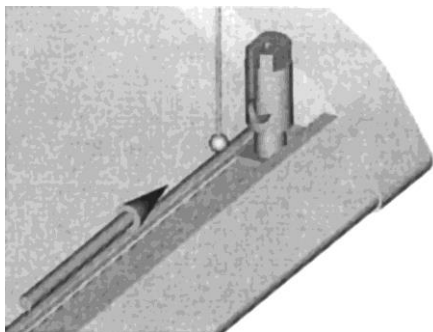


Рис. 7

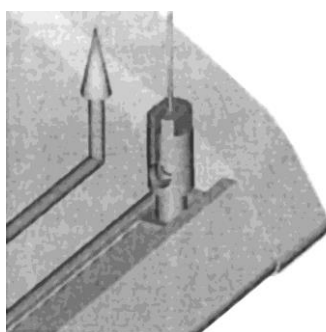


Рис. 8

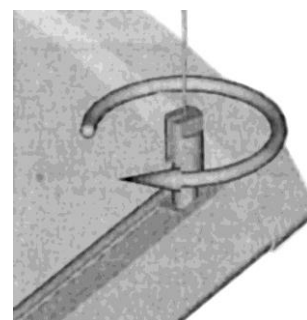


Рис. 9

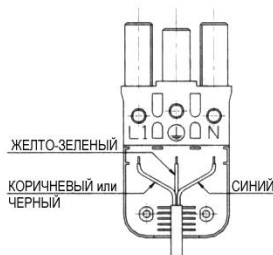


Рис. 10

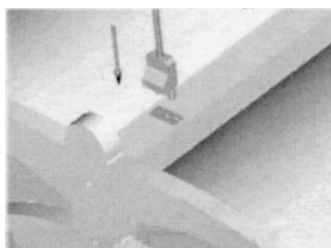


Рис. 11

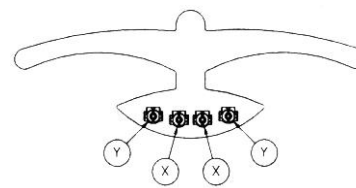


Рис. 12

- Сделайте 2 отверстия в потолке на расстоянии 1200-1500 мм друг от друга. Местоположение светильника рекомендуется выбирать в соответствии с положением стоматологической установки (см. рис. 3).
- Вставьте в отверстия два анкера 5 мм (не входят в комплект).
- Установите детали B1, завернув винты M5 (не входят в комплект) в установленные анкера (рис. 4).
- Протяните Y-образную проволоку (C) через детали A3, A2 и A1 как показано на рис. 5, и надежно закрепите детали между собой. С помощью деталей B3 и B2 установите и зафиксируйте требуемую длину проволоки.
- Протяните Y-образную проволоку через детали B3, B2 и B1 как показано на рис. 6.
- Установите потолочный светильник, для чего введите сферические окончания проволоки в соответствующие гнезда как показано на рис. 7 и 8.
- Поверните гнездо как показано на рис. 9, чтобы заблокировать сферическое окончание проволоки в гнезде.
- Повторите операции, описанные в пунктах е, f и g, для второго крепежного узла.
- Подключите электрические провода к вилке, как показано на рис. 10.
- Вставьте вилку в разъем на корпусе светильника (рис. 11).
- Установите флуоресцентные лампы в корпус лампы (см. рис. 12). В центральные гнезда X установите 2 лампы Ra = IB (6000 K), в боковые гнезда Y установите 2 лампы Ra = IA (5400 K)